

Sealen van caviteiten als voorbehandeling voor indirecte restauraties met CLEARFIL™ PHOTO BOND

Benodigde materialen



Standaard procedure

Prepareren

- 1 Prepareer de caviteit op de gebruikelijke wijze en verwijder al het geïnfecteerde dentine met behulp van CARIES DETECTOR.
- 2 Ets gedurende 15-30 seconden de caviteit met K-etchant GEL.
- 3 Spoel gedurende 20 seconden met water en blaas het oppervlak goed droog.

CLEARFIL™ SA PRIMER aanbrengen

- 4 Breng een dunne laag CLEARFIL™ SA PRIMER aan op het behandelde oppervlak en blaas dit met een zachte luchtstroom droog.

Aanbrengen van CLEARFIL™ PHOTO BOND

- 5 Doe 1 druppel Catalyst vloeistof in een mengbakje en voeg hieraan toe 1 druppel Universal vloeistof en meng beide.
- 6 Breng de bonding vloeistof aan en verspreid deze zo egaal mogelijk met een zachte luchtstroom gedurende 2 – 3 seconden en fotopolymiseer de bonding vloeistof vervolgens gedurende 10 seconden.

Afwerken

- 7 Breng een dunne laag CLEARFIL™ PROTECT LINER F aan en belicht deze 20 seconden.
- 8 Verwijder met een in alcohol gedrenkt watje de ongepolymeriseerde laag kunstthars.