

TEETHMATE™ DESENSITIZER

Bitte lesen Sie sich vor der Anwendung dieser Produkte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

- 1. Behandlung von freiliegendem Dentin aufgrund von Zahnbürstenabrasion, Rückgang der Gingiva, Parodontalerkrankungen und/oder Säureerosion**
- 2. Behandlung von Dentin nach mechanischer Zahnreinigung, Zahnsteinentfernung und/oder Wurzelglättung**
- 3. Behandlung der Zahnoberfläche vor und nach dem Bleaching**

Bitte folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt. Vor der Anwendung bitte die Zahnoberfläche reinigen.

Flüssigkeit und Puder für mindestens 15. Sek. mischen, sodass eine cremige Paste entsteht.



Halten Sie die Flasche vertikal und applizieren Sie die nötige Menge. Schütteln Sie das Fläschchen mit dem Pulver vor Entnahme des Pulvers.*

Massieren Sie die angemischte Paste für mindestens 30 Sekunden auf den Zähnen ein.



Falls weiterhin Hypersensibilitäten bestehen, bitte Schritt 2 + 3 wiederholen.

Spülen Sie die überschüssige Paste mit Wasserspray ab oder lassen Sie den Patienten ausspülen.



* Mischverhältnis

Bereich	Flüssigkeit	Puder
1 Zahn	1 Tropfen	1 Messlöffel (kleiner Messlöffel)
1 oder 2 Zähne	2 Tropfen	1 Messlöffel (kleiner Messlöffel)

TEETHMATE™ DESENSITIZER

Bitte lesen Sie sich vor der Anwendung dieser Produkte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

4. Behandlung von präpariertem Dentin bei Füllungen und/oder prothetischen Restaurationen

Bitte folgen Sie der Gebrauchsanweisung Schritt für Schritt. Vor der Anwendung bitte die Zahnoberfläche reinigen.

Flüssigkeit und Puder für mindestens 15. Sek. mischen, sodass eine cremige Paste entsteht.



Massieren Sie die angemischte Paste für mindestens 30 Sekunden auf den Zähnen ein.



Spülen Sie die überschüssige Paste mit Wasserspray ab oder lassen Sie den Patienten ausspülen.



Säubern Sie das präparierte Dentin.



Danach die Füllung oder prothetische Restauration vornehmen.

Falls weiterhin Hypersensibilitäten bestehen, bitte Schritt 2 + 3 wiederholen.

Wenn ein Bonding oder Zement verwendet wird, die ein vorheriges Ätzen verlangen, sollte dies vor der Anwendung von TEETHMATE™ Desensitizer durchgeführt werden.