

Rakendamine ja ohutusabinõud

Poleerijad

TOOTJA	ÜLEVAATUSE OLEK	KEEL
EVE Ernst Vetter GmbH Neureutstr. 6 75210 Kelttern, Saksamaa	03	Eesti keel



EVE POLEERIJATE KASUTAMISE SOOVIKES

Kõik EVE poleerijad on kujundatud ja loodud nende konkreetseks rakendamiseks. Vale kasutamine võib tuua kaasa koekahjustuse, suurenenud kulumise või poleerija hävimise ning olla kasutajale, patsiendile või kolmandatele osapooltele ohtlik.

ÕIGE KASUTAMINE:	- Kasutada tuleb ainult suurepärases tehnilises ja hügieenilises korras olevaid turbiine, nurk- ja sirgotsikuid, mis tähendab, et neid tuleb hästi hooldada ja korralikult puhastada. Kasutatavad turbiinid ja nurkotsikud peavad tagama täpse ja kontsentrilise pöörlemise. - Instrumentid tuleb sisestada otsikusse võimalikult kaugele. Enne instrumendi mis tahes pinnale asetamist peab see saavutama piisava kiiruse. - Võimaluse korral poleerige lohkude vältimiseks veidi ringjate liigutustega. - Kallutamist või jõu kasutamist tuleb vältida, kuna see suurendab purunemise ohtu. - Visake kõik deformeerunud või mitte-kontsentrilised pöörlevad instrumentid kohe ära. - Kinnitamata poleerijad tuleb pärast kinnitamist tsentreerida, et vältida kasutamise ajal vibreerimist. Kasutada tuleb ainult kvaliteetseid mandrele. Madalama kvaliteediga mandrellid võivad minna katki ja põhjustada vigastuse. - Kogu aeg tuleb kanda kaitseprille. Vale kasutamise või materjali tõrke tõttu võib mandrell, kruvi või detail katki minna ja muutuda ohtlikuks lendavaks esemeks. Teise võimalusena võib kasutaja töötada kaitseklaasi taga. - Tolmu sissehingamise vältimiseks tuleb kanda respiraatorit. Lisaks on soovitatav tolmu eemaldamise süsteem. Vale kasutamine toob kaasa kehvad kasutustulemused ja suurenenud riskid. EVE tooteid tohivad kasutada ainult kvalifitseeritud töötajad.
PÖÖRLEMISKIIRUSE JUHENDID:	- Ärge kunagi ületage maksimaalset pöörlemiskiirust. Soovitatav ja maksimaalne pöörlemiskiirus on toodete suhtes erinev. Kontrollige kindlasti soovitatavat ja maksimaalset kiirust meie uusimatest kataloogidest ja pakendilt. - Maksimaalse pöörlemiskiiruse ületamisel kipuvad poleerijad vibreerima. Taoline vibreerimine võib poleerija hävitada, kruvi deformeerida ja/või põhjustada seadme purunemist. Selle tulemusena võivad kasutaja, patsient ja kolmandad osapooled viga saada. - Soovitatava kiirusvahemiku järgimise tulemuseks on parimad võimalikud töötulemused. Maksimaalse lubatud kiiruse mittejärgimine toob kaasa suurema ohutusrisi.
SURVE AVALDAMINE:	- Liigne surve võib poleerija hävitada. - Liigne surve tekitab suuremat kuumust. - Liigne surve võib tuua kaasa poleerija suurema kulumise. Liigset survet tuleb vältida, kuna see põhjustab ülekuumenemist, mis võib hambajuurt kahjustada. Äärmuslikel juhtudel võivad instrumentid katki minna ja põhjustada vigastusi.
VESIJAHUTUS:	Soovimatu hambale kuumuse tekkimise vältimiseks on vajalik piisav vesijahutus (vähemalt 50 ml/min). Ebapiisav vesijahutus võib tuua kaasa hamba ja selle ümber oleva koe pöördumatu kahjustumise.
SÜMBOLID:	Kõik kasutatud sümbolid ja piktogrammid vastavad standardile EN ISO 15223.