

NYA MÖJLIGHETER FÖR LÅNGA ESTETISKA MONOLITISKA RESTAURATIONER

MED KATANA™ Zirconia YML



AV MDT DANIELE RONDONI

Född i Savona 1961, där han bor och har arbetat i sitt eget laboratorium sedan 1982 med sina kollegor. Han tog examen från tandteknikerskolan IPSIA „P.Gaslini“ i Genua 1979. Han fortsatte sin utbildning med deltagande i relevanta workshops vid „Italian dental school“ och utvidgade sin erfarenhet i Schweiz, Tyskland och Japan. Sedan 2011 är han internationell instruktör på Kuraray Noritake Dental.

Vanligtvis, kan den estetiska potentialen hos dentala keramiska material - speciellt translucensen - endast ökas på bekostnad av en minskad böjhållfasthet. Den nya KATANA™ Zirconia YML från Kuraray Noritake Dental Inc. är annorlunda. Med sin höga böjhållfasthet på 1100 MPa i nedre hälften av disken och den höga translucensen i de övre body och incisala områdena, har den en hög estetisk potential och ett obegränsat indikationsområde, vilket visas ett exempel på i följande kliniska fall.



Figur 1

4-leds- och 6-ledsbroar av KATANA™ Zirconia YML efter fräsning och sintring. En naturlig vestibulär ytstruktur spelar en väsentlig roll vid skapandet av estetiska monolitiska restorationer.



Figur 2

De två broarna på modellen efter ultra-mikro skiktning med CERABIEN™ ZR FC Paste Stain (Kuraray Noritake inc.).



Figur 3
Restaurationer med stains och glaze och deras translucenta överföring av ljus.



SLUTLIG SITUATION

Figur 4
Buccal vy av 6-ledsbron cementerad i patientens mun.



Figur 5
Buccal vy av 4-ledsbron cementerad i patientens mun.

Med denna nya typ av Multi-layer zirkonia, är det möjligt att framställa estetiska monolitiska restaurationer lämpliga även för användning i det anteriora området. En hög flexibilitet i designen erbjuds även med styrkegradienten och den höga translucensen ger ett naturligt utseende efter sintring. Ultra-mikro skiktning och glaze på den monolitiska ytan gör det möjligt att uppnå resultat som ger nöjda patienter.

KATANA™ ZIRCONIA YML

BESÖK PRODUKTSIDAN ONLINE FÖR MER DETALJER

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG ATT HITTA ONLINE:

- ✓ Allmän information om KATANA™ Zirconia YML
- ✓ Fullständigt produktsortiment
- ✓ Säkerhetsdatablad



KURARAYNORITAKE.EU/KATANA-ZIRCONIA-YML