

RESTAURATION POSTÉRIEURE EN COMPOSITE

AVEC CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL



CAS RÉALISÉ PAR LE DR ADRIEN LAVENANT

Le Dr Adrien Lavenant a obtenu son diplôme de docteur en chirurgie dentaire en 2010 à l'Université d'Aix-Marseille. Il a poursuivi sa formation dans le domaine de la parodontologie et de la dentisterie restauratrice et esthétique (Université d'Aix-Marseille et Paris). Le Dr Lavenant est membre du personnel enseignant de l'Université d'Aix-Marseille depuis 2011, où il continue d'enseigner dans le cadre du programme postuniversitaire de dentisterie restauratrice et esthétique. Depuis 2010, il est propriétaire d'un cabinet privé spécialisé en dentisterie restauratrice, prothétique et d'implants esthétiques situé à Aix-en-Provence.

Il fait partie du groupe international de bio-émulation depuis 2019, et partage sa philosophie des soins aux patients conformément aux principes de dentisterie biomimétique.

Introduction

Le patient, venu pour un examen de suivi, présentait une récurrence de carie à la première molaire maxillaire droite. Il était nécessaire de procéder à un traitement direct par composite. Nous avons décidé d'utiliser le composite CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal de Kuraray Noritake Dental Inc. en raison de l'efficacité du traitement, des propriétés de manipulation favorables et de la convivialité du produit.

Les illustrations du cas clinique ci-après présentent l'approche pas à pas suivie au cours d'une séance de traitement de 30 minutes.



Fig. 1.

Situation initiale de lésion carieuse occlusale sur la première molaire maxillaire droite.



Fig. 2.
Radiographie préopératoire.



Fig. 3.
Isolation du champ de travail au moyen d'une digue en caoutchouc.



Fig. 4.
Situation après excavation de la carie et préparation du tissu.



Fig. 5.
Cavité prête pour l'application du composite universel : CLEARFIL™ Universal Bond Quick est visible sur la dentine et l'émail, et le fond de la cavité est recouvert d'une fine couche de CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low.



Fig. 6.

Apparence de la dent après reconstitution de la restauration avec plusieurs couches de CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal (teinte U conçue pour la région postérieure).



Fig. 7.

Les colorants appliqués dans les fissures occlusales garantissent une apparence encore plus naturelle.



Fig. 8.

Résultat final après polissage avec CLEARFIL™ Twist DIA et vérification de l'occlusion.



Fig. 9.

Résultat final immédiatement après le retrait de la digue en caoutchouc.



Fig. 10.
Radiographie postopératoire.



SITUATION FINALE

Fig. 11.
Contrôle après 15 jours, tissus dentaires réhydratés.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS, VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE PRODUIT EN LIGNE

INFORMATIONS DISPONIBLES EN LIGNE

- ✓ Informations générales sur nos produits
- ✓ Gamme de produits
- ✓ Fiches de données de sécurité



KURARAYNORITAKE.EU/BE_FR/CLEARFIL-MAJESTY-ES2-UNIVERSAL