

CLEARFIL™ ST OPAQUER

ÚČINNÉ A SNADNÉ MASKOVÁNÍ KOVU
A ODBARVENÍ



BORN IN JAPAN

Kuraray Europe, BU Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Německo
+48 662 281 282, dental-poland@kuraray.com www.kuraraynoritake.eu/pl



KLINICKÝ PŘÍPAD

INTRAORÁLNÍ OPRAVA FAZETOVÁNÍ MŮSTKU NA KOVOVÉM PODKLADU POMOCÍ CLEARFIL™ ST OPAQUER

zubní lékař Tomasz Fałkowski



Poškozené keramické fazetování v rozsáhlém můstku. Výměna celé protetické náhrady se ukázala být nad finanční možnosti pacienta.



Příprava povrchu pískováním oxidem hlinitým o velikosti částic 50 μm a nanesení vázacího systému **CLEARFIL™ Universal Bond Quick**. Obnažený fragment kovového podkladu byl pokryt dvěma samostatně polymerizovanými vrstvami (každá vrstva do 0,5 mm) kompozitu **CLEARFIL™ ST OPAQUER** v odstínu US (A2/A3).



Dvojitá vrstva materiálu **CLEARFIL™ ST OPAQUER** v kombinaci s kompozitem **CLEARFIL MAJESTY™ ES-2** v odstínu A3D umožnily dosažení vysoké neprůhlednosti opravovaného poškození a účinné napodobení efektu staré monolitické keramiky.



Konečný výsledek těsně po vyleštění opraveného místa leštícími gumičkami **TWIST™ DIA for Composite**. Lesk a barva podobné původní fazetové keramice.