

Behandeling van blootliggende tandhalzen met CLEARFIL™ S3 BOND PLUS

Benodigde materialen



Standaard procedure

Prepareren

- 1 Indien de mogelijkheid bestaat dat de bonding over ongeprepareerd glazuur verspreid wordt, ets dan het glazuur gedurende 10 seconden, spoel met water en droog daarna.

Aanbrengen van CLEARFIL™ S3 BOND PLUS

- 2 Breng de BOND aan op de gehele caviteitswand met een wegwerpkwastje. Laat de BOND 10 seconden inwerken.
- 3 Blaas het oppervlak langer dan 5 seconden met een milde luchtstroom droog.
- 4 Polymeriseer de BOND gedurende 10 seconden met een polymerisatielamp.
- 5 Breng een dunne laag CLEARFIL™ PROTECT LINER F aan op de tand en belicht het composiet 20 seconden.
- 6 Verwijder met een in alcohol gedrenkt watje de ongepolymersieerde laag kunsthars.