



Cementeren van PANAVIA™ POST met PANAVIA™ SA CEMENT Automix en stompopbouw met CLEARFIL™ PROTECT BOND en CLEARFIL™ PHOTO CORE

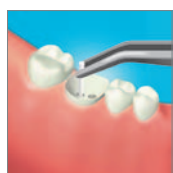


- 1 Prepareer het wortelkanaal en pas de PANAVIA™ POST




- 2 Pas de lengte van de PANAVIA™ POST aan met behulp van een gediamanteerd slijpschijfje.

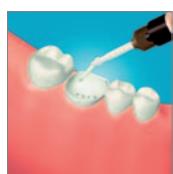


- 3 Druk pasta A en B uit de mengspuit en breng het aan in het wortelkanaal. Let op! Begin de volgende stap binnen 40 seconden na aanbrengen van het cement.

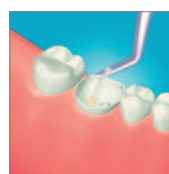

- 4 Plaats de PANAVIA™ POST snel in het wortelkanaal. Beweeg de PANAVIA™ POST licht op en neer om te voorkomen dat luchtbelletjes in het wortelkanaal achterblijven.

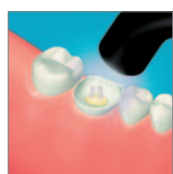

- 5 Belicht de restauratie met een polymerisatielamp gedurende 2 tot 5 seconden of wacht 3 tot 5 minuten bij een chemische uitharding.

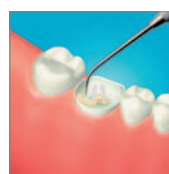


- 6 Verwijder de overmaat aan cement.




- 7 Hard uit langs de marges van de PANAVIA™ POST volgens uithardingstabel 1.




- 8 Breng CLEARFIL™ PROTECT BOND primer aan op het oppervlak van het coronaire deel en de PANAVIA™ POST. En laat het 20 seconden inwerken.

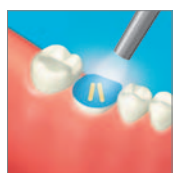


- 9 Blaas het oppervlak droog met een milde olievrije luchtstroom.

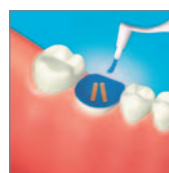


- 10 Breng CLEARFIL™ PROTECT BOND bond aan op het oppervlak van het coronaire deel en de PANAVIA™ POST.

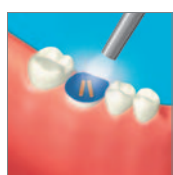

- 11 Verdeel de bonding met een milde olievrije luchtstroom.

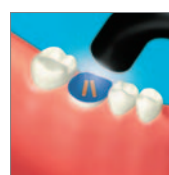

- 12 Hard de bonding 10 seconden uit.

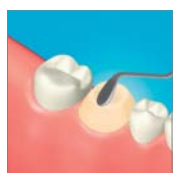

- 13 Bouw de stomp op met CLEARFIL™ PHOTO CORE. Hard de composiet uit volgens uithardingstabel 2.
Tip: Gebruik hierbij bijvoorbeeld CORE BUILD UPS.



- 14 Ga verder met het prepareren van de stomp.

Tabel 1: Uithardingstijden voor tandheelkundige polymerisatielampen in combinatie met PANAVIA™ SA CEMENT Automix

Type lichtuithardingslamp	Lichtuithardingstijd
Conventionele halogeen	20 sec.
Snelle halogeen	10 sec.
LED	20 sec.

Tabel 2: Uithardingstijden voor tandheelkundige polymerisatielampen in combinatie met CLEARFIL™ PHOTO CORE

Type lichtuithardingslamp	Lichtuithardingstijd			
	5 SEC.	10 SEC.	20 SEC.	40 SEC.
Conventionele halogeen			3.5 mm	4.0 mm
Snelle halogeen	4.0 mm	4.5 mm		
LED			4.0 mm	4.5 mm