

Directe composiet restauraties met CLEARFIL™ PHOTO BOND

Benodigde materialen



Standaard procedure

Prepareren

- 1 Ets gedurende 15-30 seconden de caviteit met K-etchant GEL.
- 2 Spoel vervolgens gedurende 20 seconden het etsmiddel uit de caviteit en blaas het oppervlak goed droog.
- CLEARFIL™ SA PRIMER aanbrengen**
- 3 Breng een dunne laag CLEARFIL™ SA PRIMER aan op het behandelde oppervlak en blaas dit met een zachte luchtstroom droog.
- Aanbrengen van CLEARFIL™ PHOTO BOND**
- 4 Doe 1 druppel Catalyst-vloeistof in het mengbakje, voeg

hieraan toe 1 druppel Universal-vloeistof en meng beide.

- 5 Breng de bonding vloeistof aan en verspreid deze zo egaal mogelijk met een zachte luchtstroom gedurende 2 à 3 seconden en fotopolymeriseer de bonding vloeistof gedurende 10 seconden.

Afwerken

- 6 Breng het gewenste composiet aan, bijvoorbeeld CLEARFIL MAJESTY™ Esthetic of CLEARFIL MAJESTY™ Posterior (volg de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende composiet), fotopolymeriseer en werk af.