

FINALIZA LAS RESTAURACIONES MONOLÍTICAS CON FACILIDAD



CERABOND

FC Paste Stain

FINALIZA CON FACILIDAD LAS RESTAURACIONES CON ZERO CUT-BACK

¿Desea añadir un brillo duradero y un aspecto aún más natural a sus restauraciones de zirconia monolítica utilizando la técnica de microestratificación?

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain es todo lo que necesita, en combinación con el óxido de circonio estético, como la línea multicapa KATANATM Zirconia.

Las nuevas emulsiones translúcidas y fluorescentes de gel de vidrio FC Paste Stain permiten crear con facilidad efectos cromáticos y texturas individuales y uniformemente predecibles en restauraciones monolíticas.





FC Paste Stain

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1

RENDIMIENTO CONSTANTE

Excelentes propiedades mecánicas y de manipulación gracias al uso de cerámica feldespática sintética. El espesor, similar al de una pasta, permite crear una textura superficial. Las partículas cerámicas de efecto duradero rodean y protegen los componentes de color del desgaste.

2

ESTÉTICA PURA

Fluorescencia integrada en todos los colores y color flúor adicional para potenciar el efecto. Amplia gama de colores para la creación prácticamente ilimitada de caracterizaciones individuales (manchas blancas y oscuras, líneas de grietas y fisuras).

3

FÁCIL DE USAR

Stain listo para usar: no se requiere mezcla. Temperatura de cocción relativamente baja, 750 °C (1.382 °F). Más resistente a la temperatura que las capas convencionales.

4

ACABADO CONTROLADO



El aspecto visual durante la aplicación es muy similar al resultado esperado después de la cocción.

27 COLORES QUE IMITAN LA NATURALEZA

TRANSLUCENT



ENAMEL

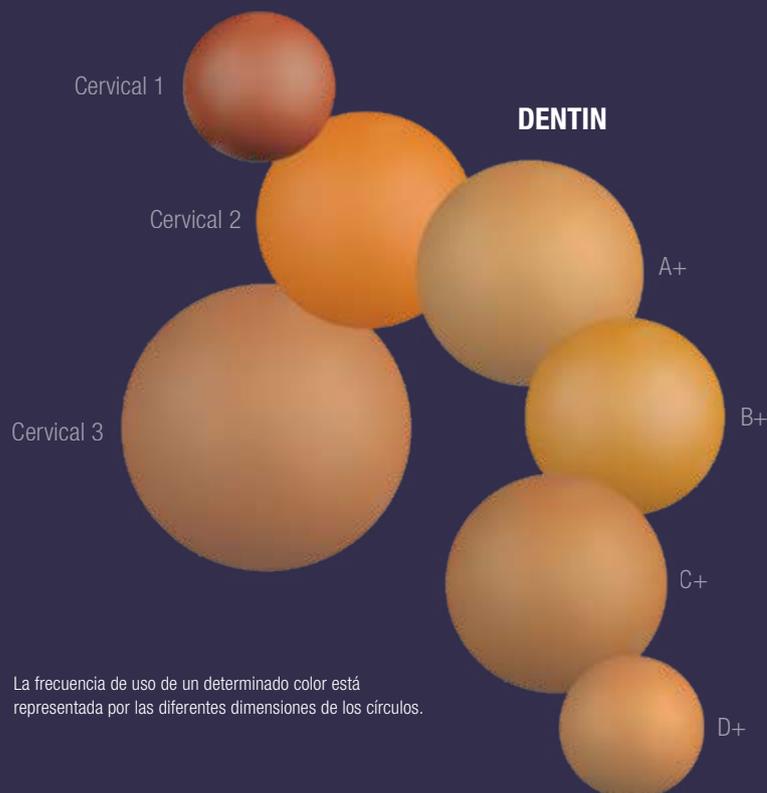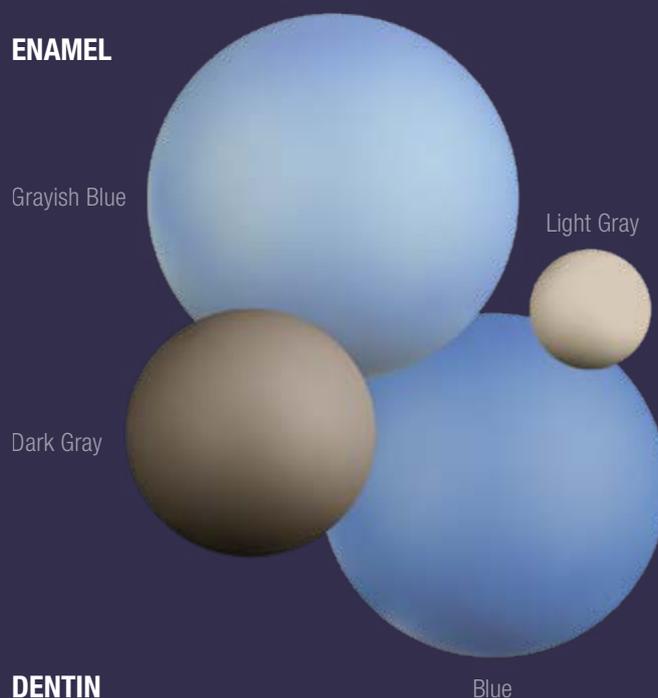


La frecuencia de uso de un determinado color está representada por las diferentes dimensiones de los círculos.

ENHANCEMENT



ADJUSTMENT

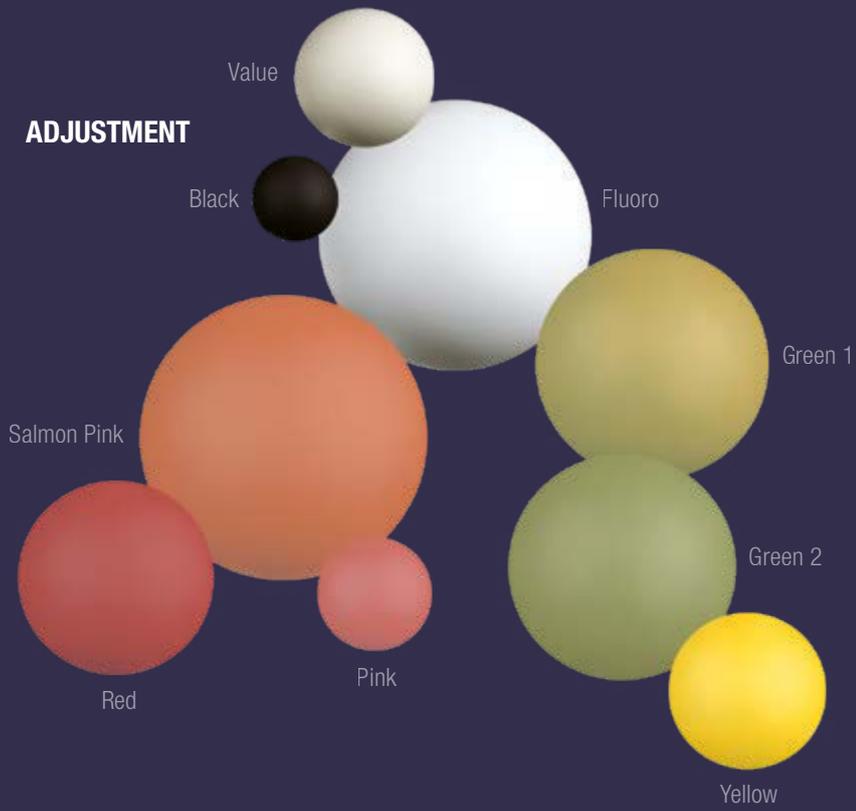

CONSISTENCIA UNIFORME

La serie CERABIEN™ ZR, como todas las demás cerámicas de Kuraray Noritake Dental Inc. se basa en la tecnología de cerámica feldespática sintética desarrollada por NORITAKE CO., LIMITED hace más de 30 años. La estructura del material y la distribución de las partículas se asemejan a las de los dientes naturales. A diferencia de los materiales basados en feldespato natural, la formulación especial de CERABIEN™ ZR garantiza que la textura se mantenga sin cambios. Gracias a esta calidad, los profesionales dentales pueden contar con excelentes propiedades de manipulación y resultados siempre predecibles.

Los productos CERABIEN™ ZR FC Paste Stain están formados por las partículas cerámicas feldespáticas originales de CERABIEN™ ZR y óxidos metálicos combinados en una solución líquida.

La consistencia de los 27 tintes en pasta fluorescente es tixotrópica y flexible, lo que permite aplicarlos en capas muy finas de hasta 0,1 mm de espesor. Debido a que las partículas cerámicas protegen los óxidos metálicos del desgaste, los efectos de coloración resultantes están destinados a perdurar en el tiempo.

El proceso de aplicación es altamente eficiente y controlable, con resultados consistentes.





Foto: ODT Roberto Rossi



MULTI
LAYERED

Uso combinado con KATANA™ Zirconia

Utilice CERABIEN™ ZR FC Paste Stain con KATANA™ Zirconia YML, UTML, STML o HTML PLUS para optimizar la estética de sus restauraciones monolíticas. Los innovadores discos multicapa KATANA™ Zirconia son reconocidos a nivel mundial por sus excepcionales propiedades ópticas y mecánicas. Además, ahora es posible sinterizar los discos de la línea KATANA™ Zirconia en tan solo 54 minutos (restauraciones de hasta 3 elementos).

PARA EMPEZAR

LOS NUEVE COLORES ESENCIALES PARA OBTENER RESULTADOS NATURALES



ODT Roberto Rossi (Savona, Italy)

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain está disponible en 27 colores diferentes que permiten imitar prácticamente todos los efectos presentes en los dientes naturales. Cuando se trabaja por primera vez con el sistema o se intenta simplificar los procedimientos, puede ser útil saber cómo se crean los efectos más comunes, utilizando menos colores. Le hemos pedido al Odont. Roberto Rossi que seleccione sus nueve colores favoritos y describa sus funciones: esto es lo que sugiere para empezar a trabajar con CERABIEN™ ZR FC Paste Stain.



Clear Glaze

- Crea un efecto vítreo 3D durante la microestratificación en zirconia.
- Mezclar con otros colores para reducir los efectos del croma en función de su proporción.
- Se puede aplicar con un micro-pincel como capa final para crear la textura principal y aumentar la translucidez del esmalte.



Grayish Blue

- Mejora la opalescencia del tercio incisal.
- Aumenta el efecto de transparencia grisácea y azulada del esmalte fino.



Blue

- Utilizar como color primario para aumentar la opalescencia entre los mamelones (diseño cut-back) o para resaltar la opalescencia (diseño full-contour).
- Úselo como color complementario en el área incisal para resaltar el tono naranja de una restauración.
- Mezcle con Earth Brown para obtener un gris complejo natural y utilícelo en toda la corona para reducir el valor o en una porción para crear un efecto grisáceo.



Value

- Aumenta el contraste del esmalte en una parte específica.
- Aumenta ópticamente el espesor del esmalte.
- Mezclar con Clear Glaze para modular la intensidad y el valor del esmalte.



Mamelon Orange 1

- Aplicar en el área incisal para reproducir los efectos de los mamelones de color naranja claro.
- Mezclar con uno de los colores Dentin para aumentar el efecto naranja claro de la dentina.



Mamelon Orange 2

- Aplicar en el área incisal para reproducir los efectos intensivos del esmalte naranja encontrados en pacientes ancianos y en la dentina infiltrada.
- Mezclar con uno de los colores Dentin para aumentar el efecto naranja intenso de la dentina.



Green 1

- Crea un efecto complementario en una restauración rojiza (similar a CERABIEN™ ZR Luster - Incisal Aureola).
- Aplicar en el área incisal para reproducir los efectos de los mamelones y los incisales.
- Reduce el predominio del rojo de las restauraciones con tonos de B a D.



Green 2

- Aplicar en el área incisal para reproducir los efectos de los mamelones y los incisales.
- Reduce el predominio del rojo de las restauraciones con tonalidades de A a C.



Yellow

- Aumenta el efecto amarillento de la base de la dentina o de los mamelones.
- Mezclar con Value para simular la opacidad presente en la porción cervical de la dentina.

UN CICLO DE COCCIÓN

CUATRO COLORES PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA

El uso de solo cuatro colores de CERABIEN™ ZR FC Paste Stain - Clear Glaze, A+, Value y Grayish Blue - es una excelente opción para personalizar las restauraciones de zirconia monolítica con la máxima eficiencia.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

En primer lugar, Clear Glaze se aplica sobre toda la superficie de la restauración anterior o posterior. Todos los colores restantes se pincelan idealmente en el material de esmalte. A+ es el material ideal para aumentar el croma en la zona cervical y para trazar u oscurecer las fisuras. Value se aplica en las puntas de las cúspides o en los bordes incisales, mientras que Grayish Blue se coloca debajo, en las vertientes de las cúspides o alrededor de los mamelones. Juntas, estas pastas crean un efecto de opalescencia y translucidez natural.



CERABIEN™ ZR FC Paste Stain


presenta una capa de líquido transparente en la parte superior del material; el objetivo es proteger el producto del polvo y la suciedad, por lo que es importante no eliminarlo.

CONSEJO: ¿Quieres diluir las pastas? Basta con mezclarlas con ES Liquid para obtener la consistencia deseada.

Anterior



Posterior

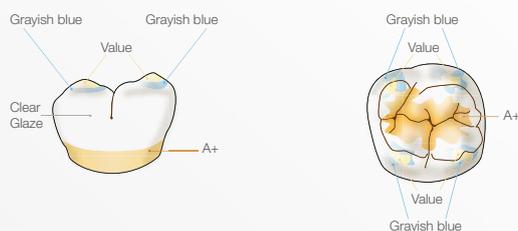

NO HAY LÍMITES PARA SUS DESEOS

Hecho en KATANA™ Zirconia YML A3 con CERABIEN™ ZR FC Paste Stain



Cortesía del ODT Marco Stoppaccioli - L'Aquila, Italia

UNA BASE SÓLIDA

LÍNEA KATANA™ ZIRCONIA MULTICAPA

¿Busca un material de base del mismo fabricante? Todos los materiales de la gama KATANA™ Zirconia Multicapa son complementarios a la línea FC Paste Stain y ofrecen una base fuerte, estética y duradera. Los discos KATANA™ Zirconia están disponibles con gradación cromática y valores constantes de translucidez y resistencia a la flexión a lo largo de todo el disco (KATANA™ Zirconia UTML, STML y HTML PLUS) o con gradación de color y diferentes niveles de translucidez y resistencia a la flexión (KATANA™ Zirconia YML).



UTML

**Ultra Translucent
Multi-Layered**

Translucidez* 51 %
Resistencia* 557 MPa



STML

**Super Translucent
Multi-Layered**

Translucidez* 49 %
Resistencia* 748 MPa



HTML PLUS

**High Translucent
Multi-Layered**

Translucidez* 45 %
Resistencia* 1150 MPa



YML

**Yttria
Multi-Layered**

Translucidez* 45-49 %**
Resistencia* 750-1100 MPa**



*Condiciones de medición: Evaluado por el material base (color blanco).
Según ISO 6872: 2015, Tamaño de la muestra: 3 x 4 x 40 mm, 2) Transmitancia de toda la luz, iluminante: D65, Espesor de la muestra: 1,0 mm
**La translucidez y la fuerza varían según las capas.
Fuente de los datos: Kuraray Noritake Dental Inc. Foto: ODT Roberto Rossi

GAMA DE PRODUCTO

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain 3g

#104-5601EU	BLACK	#104-5731EU	EARTH BROWN
#104-5611EU	LIGHT GRAY	#104-5741EU	REDDISH BROWN
#104-5621EU	DARK GRAY	#104-5751EU	SALMON PINK
#104-5631EU	GRAYISH BLUE	#104-5761EU	PINK
#104-5641EU	BLUE	#104-5771EU	RED
#104-5651EU	GREEN 1	#104-5781EU	A+
#104-5661EU	GREEN 2	#104-5791EU	B+
#104-5671EU	YELLOW	#104-5801EU	C+
#104-5681EU	MAMELON ORANGE 1	#104-5811EU	D+
#104-5691EU	MAMELON ORANGE 2	#104-5821EU	WHITE
#104-5701EU	CERVICAL 1	#104-5831EU	VALUE
#104-5711EU	CERVICAL 2	#104-5841EU	FLUORO
#104-5721EU	CERVICAL 3		

CERABIEN™ ZR FC Paste Stain 5g

#104-5851EU	GLAZE
#104-5861EU	CLEAR GLAZE

#211-2389EU CERABIEN™ ZR FC Paste Stain SCALA COLORI

KIT



CERABIEN™ ZR FC Paste Stain KIT

#104-5590EU
Contiene 27 colores.

CONTENIDO:

5g: Glaze, Clear Glaze.
3g: Light Gray, Dark Gray, Grayish Blue, Blue, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, A+, B+, C+, D+, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Earth Brown, Reddish Brown, Value, Black, Green 1, Green 2, Yellow, Salmon Pink, Pink, Red, Fluoro e White.
+ ES Liquid & Colour Guide



CERABIEN™ ZR FC Paste Stain BASIC KIT

#104-5870EU
Contiene 8 colores.

CONTENIDO:

5g: Clear Glaze.
3g: Dark Gray, Grayish Blue, Cervical 2, Earth Brown, Salmon Pink, A+ e White.
+ ES Liquid & Colour Guide

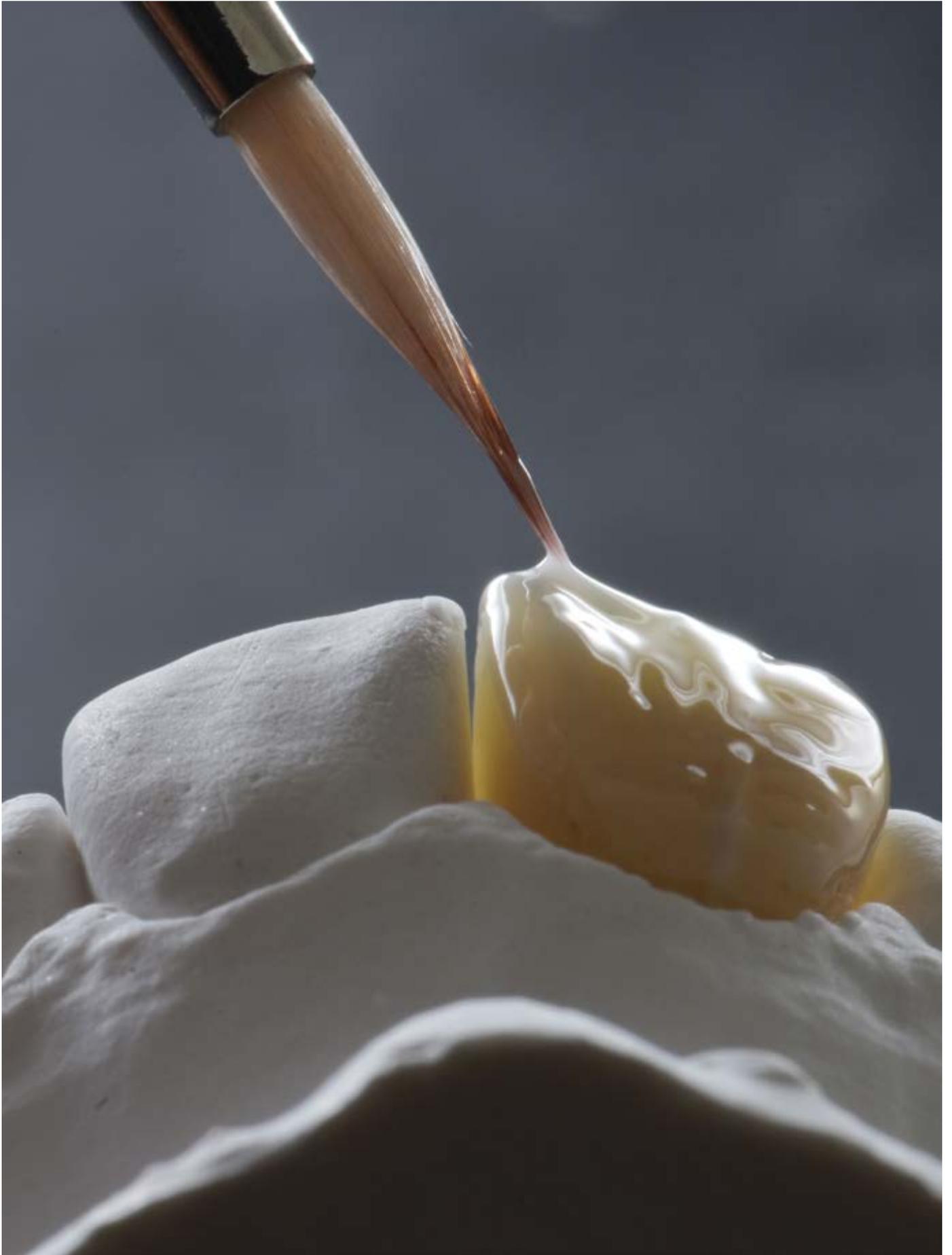


Foto: ODT Roberto Rossi

CONTACTO

Kuraray Europe Spain S.L.

Avda. del Tivoli 17, Local 37 y 38
29631 Arroyo de la Miel (Benalmádena), Málaga

Teléfono: 0039 02 63471228

Correo Electrónico: dental-iberia@kuraray.com

Web: www.kuraraynoritake.eu/es

 **Kuraray Noritake Dental Inc.**
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

DESCUBRA MÁS
ENCUADRE EL CÓDIGO QR



- Antes de utilizar este producto, se recomienda leer atentamente las instrucciones de uso suministradas con el producto.
- Las especificaciones y el aspecto del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El color impreso puede ser ligeramente diferente del real.
- KATANA y CERABIEN son marcas registradas o marcas comerciales de NORITAKE CO., LIMITED.



Importado a Europa por:

Kuraray Europe GmbH Philipp-Reis-Strasse 4
65795 Hattersheim am Main, Germany

