

CLEARFIL™ SE BOND

EXCELLENTE KLINISCHE EFFECTIVITEIT WEER BEWEZEN

CLEARFIL™ SE BOND is de meest onderzochte bonding. Legio van deze onderzoeken, voornamelijk in vitro-onderzoek, tonen de effectiviteit van CLEARFIL™ SE BOND aan op onder andere afschuif- en treksterkte. In vitro-onderzoek helpt om verwachtingen van het gebruik in de praktijk te bepalen maar wat toont dit aan in uw dagelijkse praktijk? Relevant is de **klinische effectiviteit** van CLEARFIL™ SE BOND. Die wordt **weer bewezen in een recentelijk gepubliceerd 13-jaarsonderzoek**. CLEARFIL™ SE BOND is de enige bonding met zulke uitzonderlijke resultaten over zo een lange periode!



13-JAARS KLINISCHE EVALUATIE VAN CLEARFIL™ SE BOND

Dit onderzoek, uitgevoerd door professor M. Peumans en collega's van de KU Leuven-BIOMAT, toont aan dat na 13 jaar de klinische effectiviteit excellent gebleven is in niet carieuze klasse V-laesies.


Het doel van deze gerandomiseerde en gecontroleerde klinische test was de 13-jaars prestaties te evalueren.

CLEARFIL™ SE BOND werd in het onderzoek toegepast in niet carieuze klasse V-laesies met en zonder selectief etsen van de glazuurranden van de caviteiten.

**Het milde 2-stapsadhesief
CLEARFIL™ SE BOND liet
een klinisch goede prestatie
zien in niet carieuze
cervicale laesies na 13 jaar**

Bij 29 patiënten werden in totaal 100 caviteiten gerestaureerd met CLEARFIL™ AP-X. De bondingprocedure werd bij 50 caviteiten voorafgegaan door het selectief etsen van de glazuurranden met fosforzuur. Bij de overige 50 werden de glazuurranden niet geëtsd. Evaluatie na 13 jaar liet zien dat zes restauraties klinisch onacceptabel waren door retentieverlies (2 restauraties) of door een ernstig randdefect (4 restauraties, waarvan 1 met cariës).

Dit leidt tot een klinisch succespercentage van 86% in de groep waarin de glazuurranden niet zijn geëtsd (C-SE_NE) en 93% in de “etsgroep” (C-SE_E).

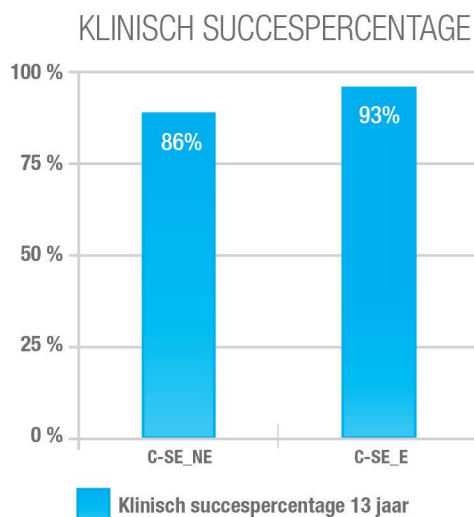

M.Peumans et al. Thirteen-year Clinical evaluation of a two-step self-etch adhesive Ku Leuven BIOMAT, dept. of oral health sciences, KU Leuven, Leuven Belgium (2014)

CONCLUSIE

Na 13 jaar bleef het klinisch effect van CLEARFIL™ SE BOND in niet carieuze Klasse V-laesies excellent, waarbij selectief etsen van de glazuurranden slechts een beperkt positief effect had op de marginale integriteit en afwezigheid van randverkleuring.

CLEARFIL™ SE BOND is wederom de bewezen Gouden Standaard

UW CONTACT

Kuraray Dental Benelux
Postbus 299
1970 AG IJMUIDEN

Telefoon +31 (0) 255 523 701
E-mail info@kuraraydental.nl
Website www.kuraraydental.nl

België:

Telefoon +32 (0) 475 61 60 50 (Vlaanderen)
+32 (0) 475 81 92 58 (Wallonië)

E-mail info@kuraraydental.be
Website www.kuraraydental.be