

kuraray *Noritake*

PANAVIA™ *Veneer* LC

O especialista em facetas dominando
a cimentação altamente estética



Tecnologia de fotopolimerização inovadora
Manipulação otimizada
Alta estética

TAREFA DESAFIADORA, GRANDE SOLUÇÃO

Procedimentos minimamente invasivos com restaurações altamente estéticas são o que os pacientes esperam ao buscarem por tratamentos restauradores. Com os diversos tipos de restaurações disponíveis hoje, é possível atender a essas expectativas — desde que os materiais adequados sejam utilizados. Para a cimentação de facetas, o novo PANAVIA™ Veneer LC é exatamente o que você precisa.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

1 TECNOLOGIA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO INOVADORA

O cimento fotopolimerizável oferece um longo tempo de trabalho, facilitando a cimentação simultânea de várias restaurações. O PANAVIA™ V5 Tooth Primer sela a interface adesiva com cura imediata ao entrar em contato com a pasta ("touch-cure"). O resultado é uma adesão forte e duradoura.

2 MANIPULAÇÃO OTIMIZADA

A viscosidade e a consistência adequadas da pasta permitem uma aplicação mais fácil e o assentamento correto da restauração, enquanto a função de "tack-cure" de um segundo facilita a remoção dos excessos de cimento.

3 ALTA ESTÉTICA

A espessura fina do filme e o fácil polimento permitem criar margens suaves. Quatro tonalidades altamente estáveis e selecionadas oferecem estética duradoura. As pastas de try-in correspondentes facilitam a escolha da cor certa.

INDICAÇÕES

O PANAVIA™ Veneer LC pode ser usado para cimentação permanente das seguintes restaurações cerâmicas e de compósito:

- ✓ Facetas
- ✓ Inlays e onlays com menos de 2 mm de espessura



VERDADEIRAMENTE PANAVIA™

Tudo começou em 1983, quando o PANAVIA™ EX foi lançado como o primeiro cimento resinoso adesivo contendo o monômero MDP original da KURARAY CO., LTD. Rapidamente, a marca PANAVIA se tornou popular entre os dentistas ao redor do mundo por sua excelente adesão. A constante melhora das tecnologias existentes e desenvolvimento de inovações resultam em uma linha de cimentos resinosos fáceis de utilizar e altamente estéticos que oferecem uma resistência de união de altíssimo nível.

TECNOLOGIA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO INOVADORA

O PANAVIA™ Veneer LC é um sistema de cimento resinoso fotopolimerizável que oferece excelente estabilidade sob luz ambiente, resultando em um tempo de trabalho de 200 segundos*. Isso permite a cimentação de várias restaurações ao mesmo tempo, sem a necessidade de correr contra o tempo. A polimerização pode ser iniciada quando você estiver pronto.

*Tempo de trabalho: Sensibilidade à luz ambiente (8000 lux, ISO 4049).



TEMPO DE TRABALHO


200

SEGUNDOS


*Tempo de trabalho: Sensibilidade à luz ambiente (8000 lux, ISO 4049)

↑ O catalizador contribui para a polimerização química

A TECNOLOGIA "TOUCH-CURE" GARANTE UMA ADESÃO FORTE E DURADOURA

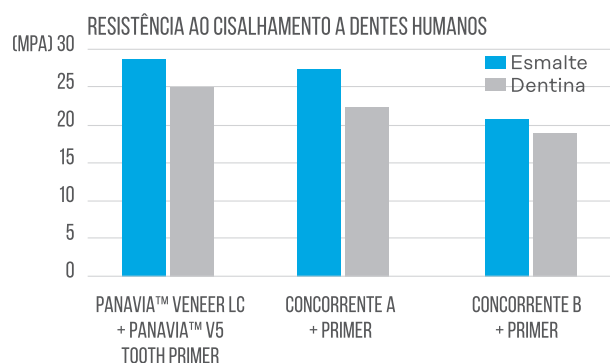

Condições do teste: Polimento #1000, condicionamento do esmalte com ácido fosfórico, chip SUS (diâmetro de 3mm), medido após armazenamento em água a 37°C por 1 dia.
Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.

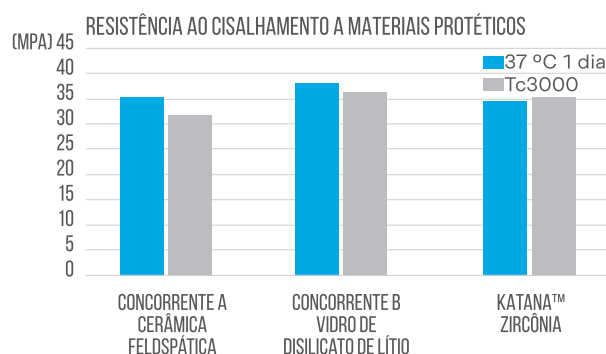

Condições do teste: Polimento #1000, jateamento de areia (KATANA™ Zircônia) ou condicionamento com ácido hidrofluórico (cerâmicas de vidro), chip SUS (diâmetro de 5mm), medido após armazenamento em água a 37°C por 1 dia, ou ciclo térmico de 4-60°C.
Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.

MANIPULAÇÃO OTIMIZADA

É possível reduzir o tempo e o esforço envolvidos na cimentação de facetas com um cimento que apresenta aplicação fácil e homogênea do material, o posicionamento suave da faceta, a remoção de excessos e o polimento rápido. O PANAVIA™ Veneer LC oferece todos os recursos necessários e proporciona alto controle graças à ponta de aplicação especialmente projetada.

CONSISTÊNCIA IDEAL

Permanece no local aplicado, flui bem durante a assentamento – para uma cimentação fácil, sem movimentações ou deslocamentos.

NÃO ADERENTE

Aplicação fácil e segura em toda superfície.

LIMPEZA SUAVE

Remoção dos excessos de cimento em um único passo após o tack-cure de 1s.

ALTA ESTÉTICA

QUATRO CORES COM ESTABILIDADE DE COR E PASTAS DE TRY-IN CORRESPONDENTES

Com cores que atendem às necessidades individuais, resultados realistas são facilmente obtidos. Além disso, a pasta de try-in PANAVIA™ V5 correspondem às cores do PANAVIA™ Veneer LC, permitindo uma simulação do resultado final da cor.

PANAVIA™ Veneer LC Paste



PANAVIA™ V5 Try-in Paste





ESPESSURA MÍNIMA DO FILME

Grças à sua fluidez e fina espessura de filme, o PANAVIA™ Veneer LC forma uma camada de cimento fina e uniformemente distribuída, facilitando o assentamento da peça, sem nenhuma interferência resultando em margens altamente estéticas.

EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO

Mudança no brilho devido ao teste de abrasão com escova de dentes.

Alta durabilidade do brilho (retenção de brilho) graças à alta densidade de partículas finas de carga.

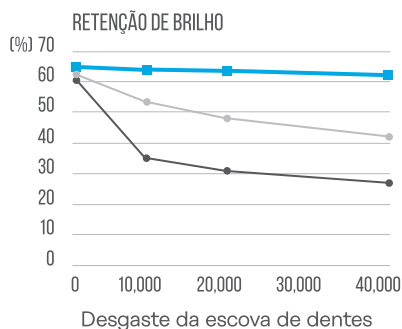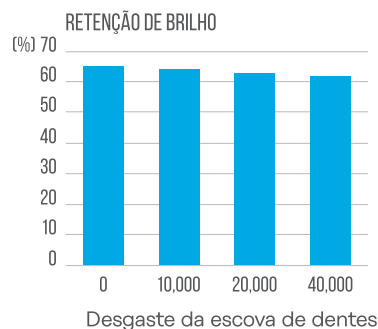

■ PANAVIA™ Veneer LC

- Concorrente A
- Concorrente B

Condições do teste: Amostra com diâmetro de 10 mm e espessura de 2 mm. Após nivelar a superfície com papel abrasivo resistente à água de #1000 a #2500, foi realizado o polimento final com filme abrasivo. Valor inicial (medição do nível de brilho após o polimento*). Desgaste com escova de dentes (medido após 40.000 escovadas com uma carga de 250g, 30 escovadas/minuto, 10% de pasta de dente em peso*). Medido com um medidor de brilho VG 2000 (Nippon Denshoku Kogyo) em um ângulo de 60°.

Observação: Os valores podem variar de acordo com as condições de medição.

Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.

CASO CLÍNICO

Gentilmente cedido pelo Dr. Sato



Estado inicial antes do preparo de seis facetas (dos dentes #13 a #23).



A excelente consistência e viscosidade da pasta do PANAVIA™ Veneer LC permitiram uma aplicação mais fácil, assentamento e remoção dos excessos de cimento.



Fotopolimerização de cada área e margens.



Resultado final após a cimentação de seis facetas de KATANA™ Zirconia STML. Por favor, consulte as Instruções de Uso para obter instruções detalhadas.

INFORMAÇÕES DE PEDIDO

PANAVIA™ Veneer LC Standard Kit

#4500-WD Standard Kit Universal (A2)

#4501-WD Standard Kit Clear

Kit com:

1 PANAVIA Veneer LC Paste: 2.6 g (1.5 ml)

1 PANAVIA V5 Try-in Paste: 2.4 g (1.8 ml)

1 PANAVIA V5 Tooth Primer: 2 ml

1 CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS: 2 ml

K-ETCHANT Syringe: 3 ml

+ Acessórios

PANAVIA™

Veneer LC Paste (2,6 g/1,5 ml)

#4505-WD Paste Universal (A2)

#4506-WD Paste Clear

#4507-WD Paste Brown (A4)

#4508-WD Paste White

Ponta aplicadora

PANAVIA™ Veneer LC (20 unidades)

#4513-WD Ponta aplicadora PANAVIA™ Veneer LC (16G)

PANAVIA™ V5 Try-In Paste (1,8 ml)

#3621-WD Universal (A2)

#3622-WD Clear

#3623-WD Brown (A4)

#3624-WD White

Outros

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (4 ml)

#3635-WD PANAVIA™ V5 Primer para Dentes (4 ml)



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japão

www.kuraraynoritake.com.br

Antes de usar este produto, certifique-se de ler as Instruções de Uso fornecidas com o produto.

• As especificações e a aparência do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

• A cor impressa pode ser ligeiramente diferente da cor real.

“KATANA” é uma marca registrada da NORITAKE CO., LIMITED.

“PANAVIA” e “CLEARFIL” são marcas registradas da KURARAY CO., LTD.