

CLEARFIL™ AP-X

ESTETIC ȘI REZISTENT



CLEARFIL™ AP-X este o rășină compozită universală, radioopacă, fotopolimerizabilă, care asigură o potrivire precisă a culorilor, calități excelente de lustruire și caracteristici fizice remarcabile. Datorită acestor proprietăți, este indicată atât pentru restaurările dinților anteriori, cât și celor posteriori.

ESTETICĂ NATURALĂ

CLEARFIL™ prezintă aproape aceeași transluciditate și fluorescență ca smalțul, ceea ce înseamnă că un dinte restaurat cu CLEARFIL™ AP-X arată ca unul natural. Pentru restaurările coronare, nuanțele mai luminoase sporesc transluciditatea materialului; pe de altă parte, pentru restaurările cervicale, opacitatea este dominantă.

REZISTENT ȘI DURABIL

CLEARFIL™ AP-X are o umplutură densă cu particule fine de sticlă de bariu de 3 μm. Acest conținut ridicat de umplutură este responsabil pentru rezistența neobișnuit de mare la uzură și fractură demonstrată de CLEARFIL™ AP-X. În plus, radioopacitatea excelentă a acestui produs asigură evaluarea radiologică.

DIVERSE COMBINAȚII DE NUANȚE

CLEARFIL™ AP-X este disponibil în 11 nuanțe VITA®, complete de trei nuanțe personalizate – CL, HO și XL – pentru o versatilitate estetică îmbunătățită. CL este conceput pentru restaurări cervicale, HO oferă o mascare eficientă a structurii dentare modificate de culoare, iar XL crește transluciditatea restaurării. Această gamă largă de nuanțe permite satisfacerea unei game largi de cerințe clinice și estetice.


PROPRIETĂȚI MECANICE	CLEARFIL™ AP-X
Rezistența la compresiune (MPa)	412
Rezistența la încovoiere (MPa)*	164
Încărcătura de umplutură (% greutate)	86
Încărcătura de umplutură (% volum)	71
Smalț rezistent la uzură** (mm ³)	0,03
Absorbția de apă* (μg/mm ³)	16,2
Solubilitatea* (μg/mm ³)	0,6

Date Kuraray Noritake Dental Inc.

* (ISO4049)

** După 40.000 de lovituri.

Date specifice de testare disponibile în arhivă.

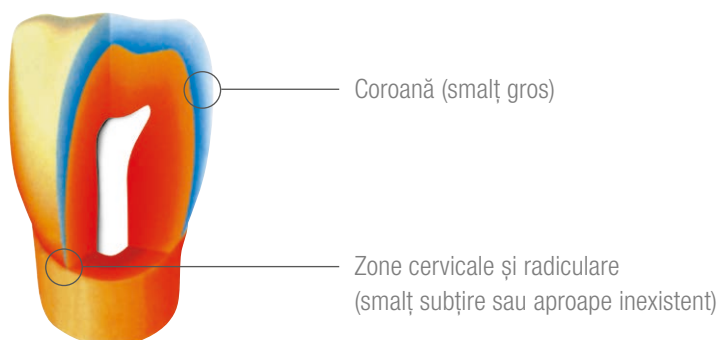

UȘOR DE LUSTRUIT

CLEARFIL™ AP-X este un compozit microhibrid care conține particule fine de sticlă de bariu, oferind o lustruire excelentă. Acesta este un factor important din motive estetice, dar are implicații și legate de aspectele de igienă și profilaxie: retenția plăcii, cariile secundare și iritația gingivală.

CONTRAȚIE REDUSĂ

Particulele fine de 3 μm sunt distribuite într-o densitate mare (86% greutate), reducând astfel contracția la polimerizare a CLEARFIL™ AP-X.


APLICARE UȘOARĂ

Consistența CLEARFIL™ AP-X este potrivită pentru orice indicație. În restaurările anterioare, CLEARFIL™ AP-X oferă un proces ușor de aplicare și modelare cu ajutorul unei matrici. De asemenea, nu se lipește de instrument. În restaurările posterioare, pe de altă parte, CLEARFIL™ AP-X are consistența adecvată pentru a permite o aplicare bună.

GHID DE SELECTARE A NUANȚEI

Zona restaurării	Nuanțe standard			Nuanțe cervicale
	A2	A3	A3.5	A4
1 Restaurarea cavităților de clasa I, II, IV	○	↑	↑	
2 Restaurarea cavităților de clasa III		○		
3 Restaurarea cavităților de clasa V	↓	↓	○	
4 Restaurarea cavităților cervicale (WSD) care implică suprafața rădăcinii				○

○ Indică aplicarea optimă.

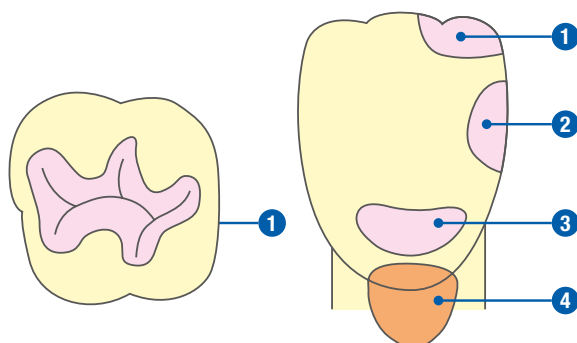



INDICAȚII

- Restaurări clasa I, II, V ale dinților posteriori
- Restaurări clasa III, IV, V ale dinților anteriori
- Cavități cervicale sau defecte care implică suprafețele radiculare

GAMA DE PRODUSE

CLEARFIL™ AP-X SYRINGES (4,6 g/2 ml)

#1721-EU	CLEARFIL™ AP-X	A2
#1722-EU	CLEARFIL™ AP-X	A3
#1723-EU	CLEARFIL™ AP-X	A3.5
#1724-EU	CLEARFIL™ AP-X	A4
#1725-EU	CLEARFIL™ AP-X	B2
#1726-EU	CLEARFIL™ AP-X	B3
#1727-EU	CLEARFIL™ AP-X	B4
#1732-EU	CLEARFIL™ AP-X	C1
#1728-EU	CLEARFIL™ AP-X	C2
#1729-EU	CLEARFIL™ AP-X	C3
#1730-EU	CLEARFIL™ AP-X	C4
#1733-EU	CLEARFIL™ AP-X	CL
#1734-EU	CLEARFIL™ AP-X	HO
#1731-EU	CLEARFIL™ AP-X	XL

CLEARFIL™ AP-X PLTS (0,2 g)

#1721-E2	CLEARFIL™ AP-X	A2	20 tips
#1722-E2	CLEARFIL™ AP-X	A3	20 tips
#1723-E2	CLEARFIL™ AP-X	A3.5	20 tips
#1724-E2	CLEARFIL™ AP-X	A4	10 tips
#1725-E2	CLEARFIL™ AP-X	B2	20 tips
#1726-E2	CLEARFIL™ AP-X	B3	20 tips
#1734-E2	CLEARFIL™ AP-X	HO	10 tips
#1731-E2	CLEARFIL™ AP-X	XL	20 tips

Accesorii

#935-EU	Ghid de nuanțe
---------	----------------



Importator UE

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germania
Telefon +48 662 281 282
www.kuraraynoritake.eu/ro
dental-EasternEurope@kuraray.com

- Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că ați citit instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu produsul.
- Specificațiile și aspectul produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Culoarea imprimată poate fi ușor diferită de culoarea reală.

„CLEARFIL” este o marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.
300 Higashiyama, Miyoshi-cho, Miyoshi, Aichi 470-0293, Japonia



06/24 MKA00641