

## ***CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS***

---

Primer prothétique universel  
pour les amateurs de  
procédures simples



# PRIMER UNIVERSEL PROTHÉTIQUE POUR DES INDICATIONS DE SCELLEMENT ET DE RÉPARATION MULTIPLES

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS intègre à la fois le monomère MDP original de Kuraray Noritake Dental et un monomère silane. Il obtient ainsi une excellente résistance d'adhésion sur tous les types de céramique, à base de verre, zircone et métaux, le tout avec un degré élevé de simplicité dans la procédure.

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS est indiqué pour :



Le traitement de surface de restaurations prothétiques en céramique\*, céramique hybride, résine composite ou métal.



Réparation intrabuccale ou restaurations fracturées en céramique\*, céramique hybride, résine composite ou métal.

\* Céramique à base d'oxyde métallique, de verre.



# TECHNOLOGIES PERMETTANT UNE FORTE ADHÉSION

Comment est-il possible d'établir une forte adhésion avec tous types de matériaux de restauration avec une seule bouteille de primer ? Tout est une question de chimie. Le monomère original MPD adhère fortement aux métaux et au zircon. Et un agent de couplage de silane  $\gamma$  fera de même pour les composites, les céramiques hybrides et les céramiques à base de silice.



## APPLIQUEZ ET SÉCHEZ

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS peut être appliqué à n'importe quelle surface de restauration après le pré-traitement requis. Pré-traitez la surface d'adhésion de la restauration comme indiqué :



- Sablez, rincez et séchez
- Appliquez de l'acide fluorhydrique, rincez et séchez\*
- Appliquez K-ETCHANT Syringe, laissez pauser 5 sec, rincez et séchez

\* Si votre laboratoire a déjà procédé au traitement à l'acide fluorhydrique, nous recommandons de nettoyer et d'activer avec K-ETCHANT Syringe juste avant d'appliquer CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS.

\*\*En cas d'utilisation avec PANAVIA™ V5 ou CLEARFIL™ DC CORE PLUS

## EXEMPLE : EN COMBINAISON AVEC PANAVIA™ V5



Appliquez CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS sur la surface d'adhésion de la restauration prétraitée avec une brosse d'application, puis séchez suffisamment toute la surface au moyen d'un flux d'air modéré, sans huile.



Appliquez le primer à la préparation comme indiqué, avec PANAVIA™ V5 Primer Dent (appliquez, attendez 20 sec. et rincez soigneusement avec un flux d'air modéré).



Scellez l'application prothétique au moyen d'un scellement à la résine (PANAVIA™ V5 Paste) conformément aux Instructions d'Utilisation.

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS s'associe parfaitement à la résine PANAVIA™ V5 pour des procédures de collage fiables.



KATANA™ CLEANER est le premier nettoyant universel intrabuccal et extrabuccal. Il élimine la contamination pour optimiser vos procédures d'adhésion.

## ASSOCIATION DU PRODUIT

**CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS - #3637-EU**  
(4 ml)



**PANAVIA™ V5 PROFESSIONAL KIT - #3600-EU**

PANAVIA™ V5 Primer Dent (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Pâte [une seringue par nuance (2,4 ml / 4,2 g) : Universel (A2), Clair, Brun, Blanc, Opaque], PANAVIA™ V5 Pâte de test [une seringue par nuance (1,8 ml) : Universel (A2), Clair, Brun, Blanc, Opaque ; K-ETCHANT Seringue (3 ml), 30 bâtons mélangeurs, 10 bâtons endo, 50 brosses d'application (fines), 1 récipient de mélange, 20 pointes d'aiguille



**PANAVIA™ V5 STANDARD KIT - Universel (A2) #3601-EU - Clear #3602-EU**

PANAVIA™ V5 Primer Dent (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Pâte [une seringue par nuance (4,6 ml / 8,1 g) : Universel (A2) ou Clair], K-ETCHANT Seringue (3 ml), 15 bâtons mélangeurs, 5 bâtons endo, 50 brosses d'application (fines), 1 récipient de mélange, 20 pointes d'aiguille



**PANAVIA™ V5 INTRODUCTORY KIT - Universel (A2) #3604-EU - Clear #3605-EU**

PANAVIA™ V5 Primer Dent (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Pâte [une seringue par nuance (2,4 ml / 4,2 g) : Universel (A2) ou Clair], 10 bâtons mélangeurs, 50 brosses d'application (fines), 1 récipient de mélange



## VOTRE CONTACT

**Kuraray Europe Benelux B.V.**

Pays-Bas :  
Boîte postales 299, 1970 AG IJmuiden  
Téléphone : +31 (0)255 523 701  
E-mail : [infobenelux@kuraray.com](mailto:infobenelux@kuraray.com)  
Site Web : [www.kuraraynoritake.eu](http://www.kuraraynoritake.eu)

Belgique :  
Téléphone : +32 (0) 483 99 37 70

- Avant d'utiliser ce produit, veuillez à lire les Instructions d'Utilisation fournies.
- Les spécifications et l'aspect du produit sont susceptibles de changer sans préavis.
- La couleur imprimée peut être légèrement différente de la couleur réelle.

« CLEARFIL » et « PANAVIA » sont des marques déposées de KURARAY CO., LTD.



**Kuraray Noritake Dental Inc.**

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japon  
Site Web : [www.kuraraynoritake.com](http://www.kuraraynoritake.com)



07/2020 MKA00623