

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

Universell protetisk primer
för de som älskar enkla procedurer



UNIVERSELL PROTETISK PRIMER FÖR INDIKATIONER MED CEMENTERING OCH REPARATION

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS innehåller både Kuraray Noritake Dentals original-MDP-monomer och en silanmonomer. Detta ger en utmärkt bindningsstyrka till alla typer av keramer, både glaskeramer och oxidkeramer, komposit och metaller, allt med mycket enkla procedurer.

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS är indicerad för:



Ytbehandling av protetiska restaurationer av keramer*, hybridkeramer, komposit eller metall.



Intraoral reparation av frakturerade restaurationer av keramer*, hybridkeramer, komposit eller metall.

* Oxidkeramer, glaskeramer.




TEKNOLOGIER BAKOM STARK BINDNING

Hur är det möjligt att uppnå en stark bindning till alla slags restaurationsmaterial med en enda flaska primer? Allt handlar om kemi. Original-MDP-monomeren binder starkt till metaller och zirkonia. Den speciella silanmonomeren MPS, står för samma bindning till kompositer, hybrid- och kiselbaserade keramer.



BARA APPLICERA OCH TORKA

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS kan appliceras på alla restaurationsytor efter respektive lämplig förbehandling. Förbehandla den aktuella ytan på restorationen enligt följande:

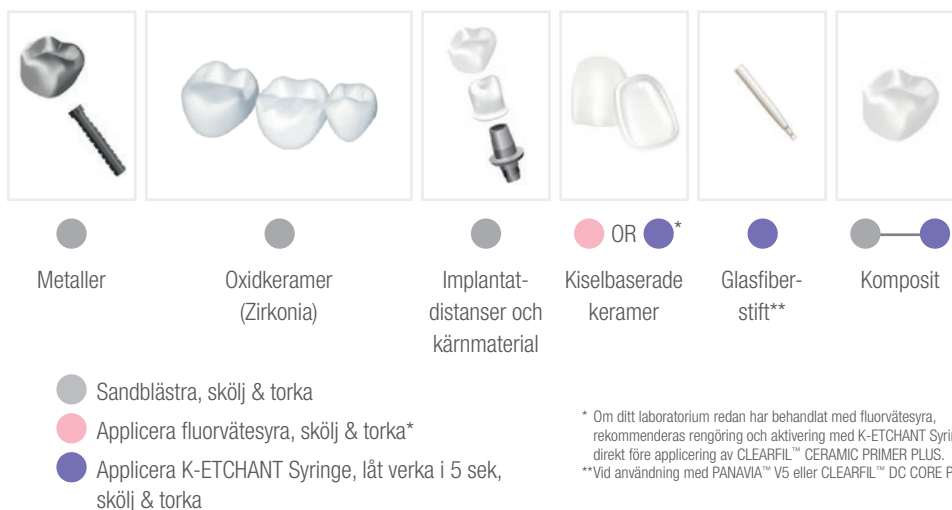

EXEMPEL: I KOMBINATION MED PANAIA™ V5



Applicera CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS på den aktuella förbehandlade ytan på restorationen med en appliceringsborste och torka hela ytan noga med en lätt, oljefri luftström.



Konditionera tandytan på preparationen med PANAIA™ V5 Tooth Primer (applicera, låt verka i 20 sek., & torka noga med en lätt luftström).



Cementera den protetiska restorationen med resincement (PANAIA™ V5 Paste) enligt bruksanvisningen.

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS passar perfekt ihop med det adhesiva resincementet PANAVIA™ V5 för pålitliga cementeringsprocedurer.



KATANA™ CLEANER är det första intraorala och extraorala universella rengöringsmedlet, det avlägsnar kontaminering och optimerar dina adhesiva procedurer.



PRODUKTSORTIMENT

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS - #3637-EU
(4 ml)



PANAVIA™ V5 PROFESSIONAL KIT - #3600-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [en spruta per färg (2,4 ml / 4,2 g): Universal (A2), Clear, Brown, White, Opaque], PANAVIA™ V5 Try-in Paste [en spruta per färg (1,8 ml): Universal (A2), Clear, Brown, White, Opaque; K-ETCHANT Syringe (3 ml), 30 blandningsspetsar, 10 endospetsar, 50 Appliceringsborstar (fina), 1 Blandningsplatta, 20 appliceringsspetsar



PANAVIA™ V5 STANDARD KIT - Universal (A2) #3601-EU - Clear #3602-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [en spruta per färg (4,6 ml / 8,1 g): Universal (A2) eller Clear], K-ETCHANT Syringe (3 ml), 15 blandningsspetsar, 5 endospetsar, 50 Appliceringsborstar (fina), 1 Blandningsplatta, 20 appliceringsspetsar



PANAVIA™ V5 INTRODUCTORY KIT - Universal (A2) #3604-EU - Clear #3605-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [en spruta per färg (2,4 ml / 4,2 g): Universal (A2) eller Clear], 10 blandningsspetsar, 50 Appliceringsborstar (fina), 1 Blandningsplatta



KONTAKTUPPGIFTER

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics

Margadantstraat 20
1976 DN IJmuiden
Nederländerna

Telefon +46 (0) 844 685 329
E-post inforandics@kuraray.com

Webbplats www.kuraraynoritake.eu/se

- Före användning av denna produkt, läs bruksanvisningen som följer med produkten.
- Specifikationerna för och utseendet av denna produkt kan ändras utan föregående meddelande.
- Tryckta färger kan skilja sig något från verklig färg.

"CLEARFIL" och "PANAVIA" är varumärken som tillhör KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Website www.kuraraynoritake.com



07/2020 MKA00623