

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & BOND KIT

Snadné použití

Nanášení bez námahy

Duální tuhnutí



KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO KOŘENOVÉ NÁSTAVBY

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

1

JEDNODUCHÝ POSTUP BEZ STRESU

Zjednodušte si zhotovení každé kořenové nástavby. Snadno použitelný design zefektivňuje váš pracovní postup od začátku až do konce.

2

DUÁLNÍ TUHNUTÍ PRO NAPROSTOU JISTOTU

Dosáhnete úplné polymerace ve všech oblastech – i tam, kam nedosáhne světlo – a získáte tak pevný základ.

3

OPTIMÁLNÍ MANIPULACE A PŘESNÁ KONTROLA NAD NANÁŠENÍM

Vylepšená tixotropie umožňuje plynulý tok pod tlakem a zároveň materiál zůstává přesně tam, kam jej nanese.

4

SLOŽENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ TVAROVOU STABILITU

Zachovává si svůj tvar během nanášení a modelace, což vám umožňuje vždy přesné vytváření kořenové nástavby.

5

OPTIMALIZOVANÁ DOBA ZPRACOVÁNÍ

Přibližně tříminutová doba zpracování vám umožňuje upevnit čep a efektivně zhotovit kořenovou nástavbu za použití jediného míchacího hrotu.



VYROBENO PRO VAŠI JISTOTU

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

RYCHLÝ A JEDNODUCHÝ POSTUP

S CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 je možný zjednodušený postup rychlého nanášení bez čekání nebo nutnosti vtírání. Podporuje krátkou dobu ošetření při zhotovování kořenových nástaveb.

SNADNÉ NANÁŠENÍ


CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 se velmi snadno nanáší. Nová metoda disperze plniva umožňuje zvýšit zatékavost produktu bez snížení jeho obsahu. Lepší zatékavost zajišťuje rovnoměrné rozptřeni a vytvoření tenké, homogenní vazebné vrstvy. To minimalizuje riziko hromadění materiálu, a to i v kořenových kanálcích.

VŠESTRANNOST PRO RŮZNÉ VYUŽITÍ

Toto adhezivum vhodné pro zhotovování kořenových nástaveb, stejně jako pro přímé i nepřímé výplně, poskytuje flexibilitu potřebnou pro širokou škálu klinických scénářů. Je také kompatibilní se samo adhezivními cementy od jiných výrobců, což vám nabízí větší výběr.



Nanést¹

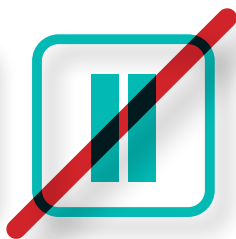

Žádná čekací doba



Osušit



Vytvrdit světlem

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 nabízí vynikající adhezi, díky čemuž je vhodný pro použití s CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Přílně k dentinu v kořenovém kanálku i k čepu. Není potřeba samostatný primer.




¹ Nanést vtíravým pohybem a pokračovat

SÍLA, KTERÁ SPOLUPRACUJE S PŘÍRODOU

CLEARFIL™ DC CORE PLUS je navržen tak, aby harmonicky spolupracoval s přirozeným dentinem. Jeho modul elasticity se velmi blíží modulu dentinu, což umožňuje rovnoměrné rozložení okluzních sil po celém kořenovém kanálku, namísto jejich koncentrace v jednom bodě.


Díky své vysoké mechanické pevnosti zůstává kořenová nástavba stabilní i při zatížení žvýkacím tlakem, což minimalizuje riziko fraktur, jak v kořeni, tak ve výplni. Výsledkem je vynikající základ, který dává zubním lékařům jistotu při každém použití.

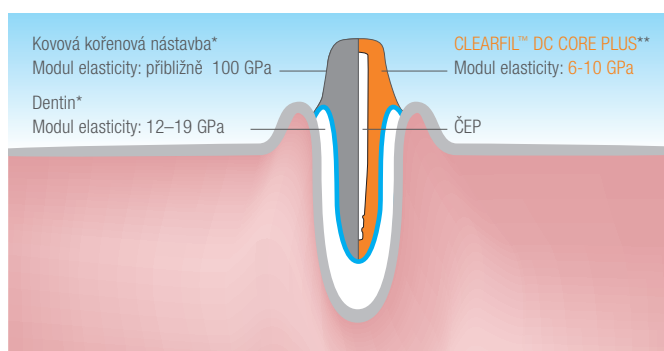

TEKUTOST POD KONTROLOU

Pasta se snadno nanáší a je snadno kontrolovatelná díky jedinečné technologii povrchové úpravy plniva CLEARFIL™ DC CORE PLUS.


Tvarovatelnost pasty

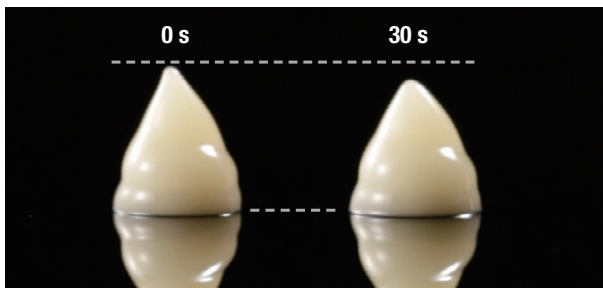


SCHOPNOST DUÁLNIHO TUHNUTÍ U KOŘENOVÝCH NÁSTAVEB

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 je vhodný pro použití v kombinaci s CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Speciální akcelérátor samovolného tuhnutí obsažený v CLEARFIL™ DC CORE PLUS poskytuje vynikající výsledky v oblastech, které nelze osvětlit.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 vytváří silnou chemickou vazbu s hydroxyapatitem. Díky originálnímu monomeru MDP, který je známý svou vysokou vazebnou pevností, tak docílíte vynikající trvanlivosti adheze k zubní struktuře.

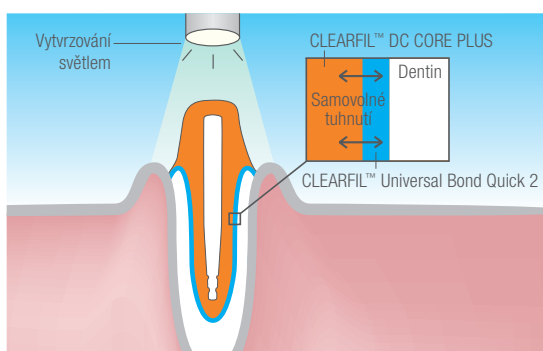


STRUKTURA ADHEZIVNÍHO MONOMERU MDP

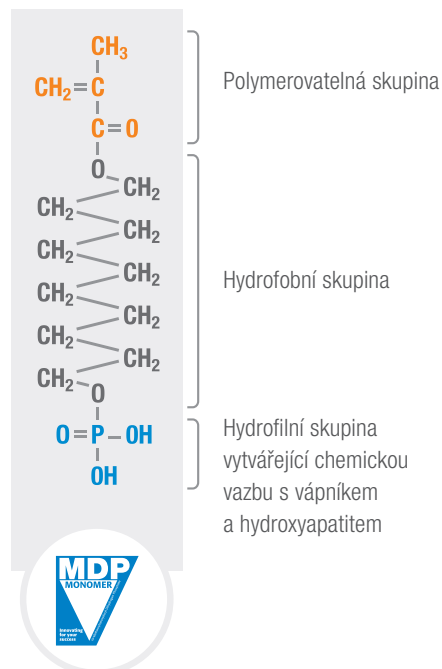

POTVRZENÁ VÝRAZNÁ VAZEBNÁ PEVNOST!

Vazebná pevnost v tahu na boviním dentinu

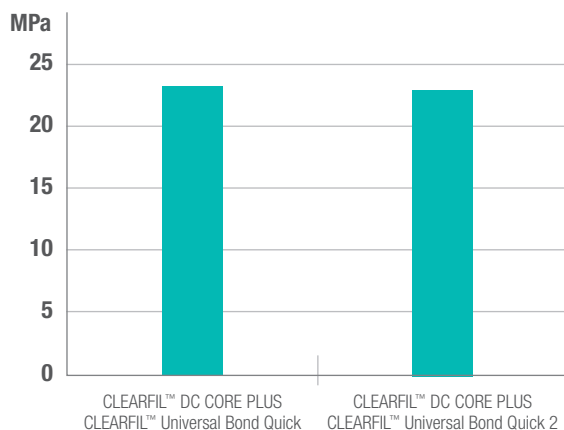

Podmínky testu:

Adhezivní povrch: boviní dentin #600, leštěný povrch.
Pokrytý povrch: průměr 2,38 mm.
Polymerační lampa: PenCure 2000 standardní režim.
Skládováno ve vodě o teplotě 37 °C po dobu 24 hodin.

Zdroj: Kuraray Noritake Dental Inc.

SNADNÉ POUŽITÍ, KLINICKÝ POSTUP BEZ STRESU


Při upevňování čepu a zhotovování kořenové nástavby z CLEARFIL™ DC CORE PLUS postupujte podle návodu k použití výrobce.



Naneste BOND vtíravým pohybem.




Osušujte jemným proudem vzduchu a papírovým čepem, dokud se BOND nepřestane pohybovat.

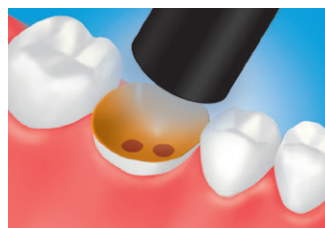


Vytvrdte světlem.



Naneste PASTU.

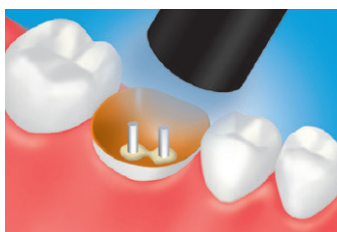

Vložte čep a vytvrdte PASTU světlem.

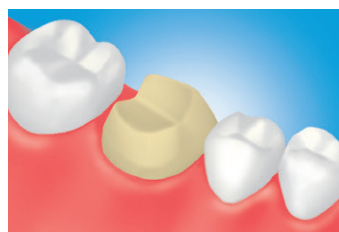

Naneste PASTU kolem čepu.

POZN.: Toto je zkrácená verze. Prosíme, dodržujte návod k použití dodaný spolu s produktem.

ODSTÍNY

Sada CLEARFIL™ DC CORE PLUS & BOND je k dispozici ve dvou odstínech:



Dentin



White (bílá)

SORTIMENT PRODUKTŮ

SADA CLEARFIL™ DC CORE PLUS & BOND Kit

1 stříkačka (9 ml), CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2: 1 lahvička (1 ml)

Příslušenství: 20 míchacích hrotů, 10 vodicích hrotů (L), 10 vodicích hrotů (S), aplikačních štětečků (endo), 1 míchací podložka, 1 světlá nepropustná krytka

#4049-EU DENTIN

#4050-EU WHITE



CLEARFIL™ DC CORE PLUS doplňující balení

1 stříkačka (9 ml), 20 míchacích hrotů, 10 vodicích hrotů (L), 10 vodicích hrotů (S)

#2942-EU DENTIN

#2943-EU WHITE



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 doplňující balení

Lahvička (5 ml)

#4042-EU



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Unit Dose (jednotlivé dávky) standardní balení

Unit Dose (50 ks x 0,1 ml), aplikační štěteček (x 50 ks)

#4046-EU



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 výhodné balení

3 lahvičky x 5 ml

#4044-EU



K-ETCHANT SYRINGE

K-ETCHANT Syringe (2 stříkačky x 3 ml), kanylový hrot (x 40 ks)

#3252-EU

KANYLOVÉ HROTY

Kanylový hrot (x 20 ks)

#3253-EU





Dovozce do EU

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Německo
Telefon +48 662 281 282
www.kuraraynoritake.eu/cz
dental-EasternEurope@kuraray.com

- Před použitím tohoto produktu si přečtěte návod k použití dodaný s produktem.
- Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Vytiskovaná barva se může mírně lišit od skutečné barvy.

"CLEARFIL" je registrovaná nebo ochranná značka společnosti KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonsko



01/2026 MKA00551