

# ***CLEARFIL™ DC CORE PLUS & BOND KIT***

---

Protocol ușor de urmat

Aplicare fără efort

Priză duală



# SOLUȚIA COMPLETĂ PENTRU RECONSTRUCȚII CORONARE

## CLEARFIL™ DC CORE PLUS

1

### PROTOCOL SIMPLU, FĂRĂ STRES

Fiecare reconstrucție coronară este simplă și directă. Designul ușor de utilizat vă eficientizează protocolul de lucru de la început până la final.

2

### ÎNCREDERE ÎN POLIMERIZAREA DUALĂ

Obțineți polimerizare completă în toate zonele – chiar și acolo unde lumina nu ajunge – pentru o bază de durată.

3

### MANIPULARE OPTIMĂ & CONTROL PRECIS

Tixotropia avansată permite o curgere lină sub presiune, menținând materialul exact acolo unde îl poziționați.

4

### FORMULĂ STABILĂ, CARE NU CURGE

Își menține forma în timpul aplicării și modelării, oferindu-vă o modelare precisă a bontului de fiecare dată.

5

### TIMP DE LUCRU OPTIMIZAT

Timpul de lucru de aproximativ trei minute vă permite să finalizați eficient cimentarea pivotului și reconstrucția coronară cu un singur vârf de amestecare.



# CONCEPUT PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

## CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

### PROCEDURĂ RAPIDĂ ȘI DIRECTĂ

Cu CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2, procedura optimizată permite aplicare rapidă, fără timp de așteptare și fără sau nevoie de frecare. Susține un timp de tratament redus în procedurile de reconstrucție coronară (core build-up).

### APLICARE UȘOARĂ


CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 este foarte ușor de aplicat. Noua metodă de dispersie a umpluturii permite îmbunătățirea fluidității produsului fără a reduce conținutul de filler. Fluiditatea crescută asigură o distribuire uniformă, formând un strat adeziv subțire și omogen. Astfel se minimizează riscul de acumulare (pooling), chiar și în canalele radiculare.

### VERSATILITATE PENTRU DIVERSE APLICAȚII

Potrivit pentru proceduri de reconstrucție coronară, precum și pentru restaurări directe și indirecte, acest adeziv oferă flexibilitatea necesară pentru o gamă largă de situații clinice. Este compatibil și cu cimenturi autoadezive de la alți producători, oferindu-vă mai multe opțiuni.



Aplicați<sup>1</sup>

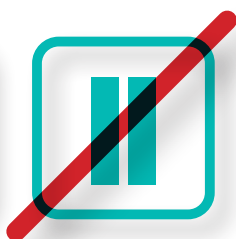

Fără timp de așteptare



Uscare



Fotopolimerizare

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 oferă o adeziune remarcabilă, fiind o alegere potrivită pentru CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Aderă la dentină în canalul radicular și la pivot. Nu este necesar un primer separat.




<sup>1</sup> Aplicați cu o mișcare de pensulare și continuați

## REZISTENȚĂ CARE LUCREAZĂ CU NATURA

CLEARFIL™ DC CORE PLUS este conceput să lucreze în armonie cu dentina naturală. Modulul său de elasticitate este foarte asemănător cu cel al dentinei, permițând forțelor ocluzale să se distribuie uniform în întregul canal radicular, în loc să se concentreze într-un singur punct.


Datorită rezistenței sale mecanice ridicate, structura de bază rămâne stabilă sub stresul masticatoriu, minimizând riscul de fracturi atât la nivelul rădăcinii, cât și la nivelul restaurării. Rezultatul este o bază remarcabilă care oferă medicilor încredere în fiecare restaurare.

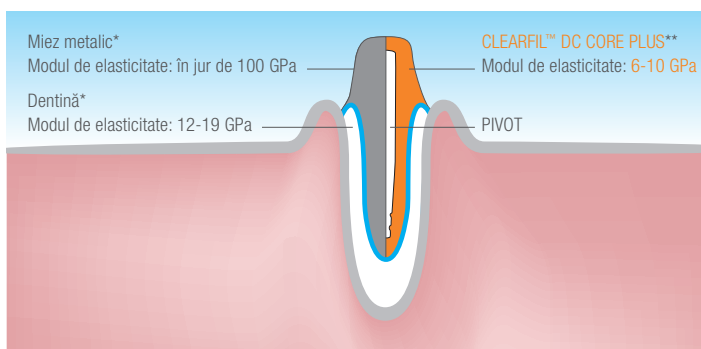

## CURGE CONTROLAT

Pasta se distribuie lent și este ușor de controlat, datorită tehnologiei unice de tratare a suprafeței de umplutură a CLEARFIL™ DC CORE PLUS.


### Capacitatea de modelare a pastei

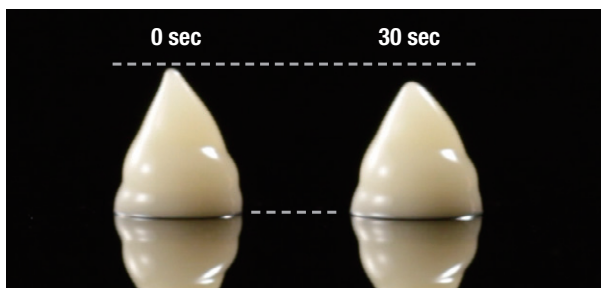


## PROPRIETĂȚI DE POLIMERIZARE-DUALĂ PENTRU RECONSTRUCȚII CORONARE

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 poate fi utilizat în combinație cu CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Acceleratorul specific pentru autopolimerizare, conținut în CLEARFIL™ DC CORE PLUS, oferă rezultate excelente în zonele unde lumina nu poate pătrunde.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 creează o adeziune chimică puternică cu hidroxiapatita. Datorită monomerului Original MDP, cunoscut pentru rezistența mare și durabilitatea excelentă a adeziunii la structura dentară.

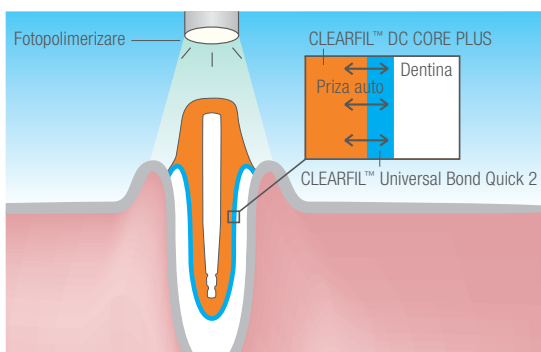


### STRUCTURA MONOMERULUI ADEZIV MDP

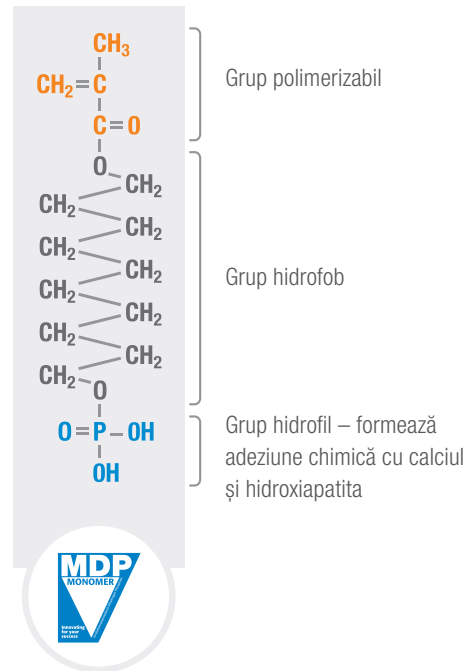

## REZISTENȚA REMARCABILĂ A ADEZIUNII, CONFIRMATĂ!

### Rezistența la forfecare pe dentina bovină

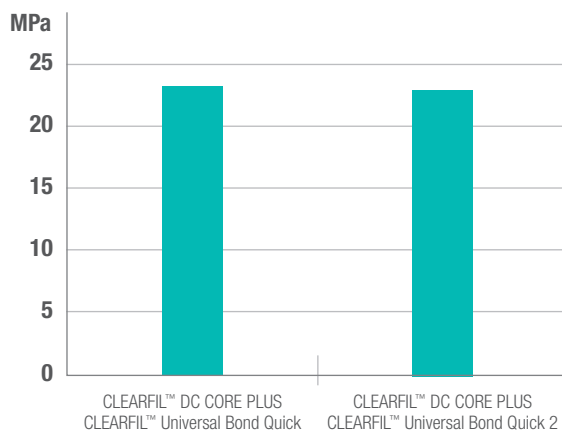

**Condiții de testare:**  
 Suprafață aderentă: dentină bovină #600, suprafață lustruită.  
 Suprafață acoperită: diametru 2,38 mm.  
 Lampă de polimerizare: PenCure 2000, mod standard.  
 Depozitare în apă la 37°C timp de 24 de ore

Sursă: Kuraray Noritake Dental Inc.

## PROTOCOL CLINIC UȘOR DE URMAT, FĂRĂ STRES


Cimentarea pivotului și reconstrucția coronară utilizând CLEARFIL™ DC CORE PLUS, conform instrucțiunilor de utilizare ale producătorului.



Aplicați adezivul (BOND) prin pensulare.




Uscare cu jet ușor de aer și con de hârtie până când adezivul nu mai este mobil.

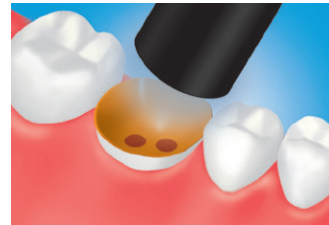


Fotopolimerizați.



Aplicați PASTA prin presarea pistonului.

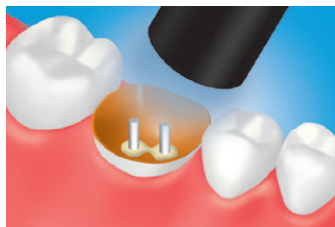

Introduceți pivotul și fotopolimerizați PASTA.

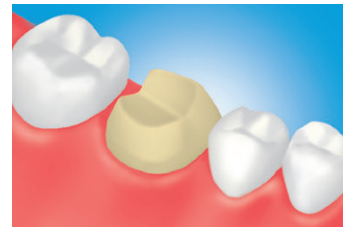

Aplicați PASTA în jurul pivotului.

Notă: Aceasta este o versiune prescurtată. Vă rugăm să urmați Instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu produsul.

## NUANȚE

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & BOND Kit este disponibil în două nuanțe:



Dentină



Alb

## SORTIMENT PRODUSE

### CLEARFIL™ DC CORE PLUS & BOND Kit

1 seringă (9ml), CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2: 1 flacon (1 ml),  
Accesorii: 20 vârfuri de mixare, 10 vârfuri (L), 10 vârfuri (S),  
50 aplicatoare (endo), 1 godeu, 1 ecran protecție lumină

**#4049-EU DENTIN**

**#4050-EU WHITE**



### CLEARFIL™ DC CORE PLUS Refill

1 seringă (9ml), 20 vârfuri de mixare, 10 vârfuri (L), 10 vârfuri (S)

**#2942-EU DENTIN**

**#2943-EU WHITE**



### CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Bottle Refill

(5 ml)

**#4042-EU**



### CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Unit Dose Standard Pack

Doze unice (50 buc x 0.1 ml), aplicatoare (x 50 buc)

**#4046-EU**



### CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 Bottle Value Pack

(3 x 5 ml)

**#4044-EU**



### K-ETCHANT SYRINGE

Seringă K-ETCHANT (2 x 3 ml), vârfuri seringă (x 40 buc)

**#3252-EU**

### NEEDLE TIPS

Vârfuri seringă (x 20 buc)

**#3253-EU**





Importator UE

## **Kuraray Europe GmbH**

Philipp-Reis-Strasse 4,  
65795 Hattersheim am Main, Germany  
Telefon +48 662 281 282  
[www.kuraraynoritake.eu/ro](http://www.kuraraynoritake.eu/ro)  
[dental-EasternEurope@kuraray.com](mailto:dental-EasternEurope@kuraray.com)

- Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că ați citit instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu produsul.
- Specificațiile și aspectul produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Culoarea imprimată poate fi ușor diferită de culoarea reală.

"CLEARFIL" este o marcă comercială înregistrată a KURARAY CO., LTD.



**Kuraray Noritake Dental Inc.**  
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia



01/2026 MKA00551