

CLEARFIL™ DC CORE PLUS KOMPLEKT

Lihtne protseduur

Lihtne aplitseerida

Kahelikõvastuv



TÄIUSLIK KOMPLEKT USALDUSVÄÄRSEKS KÖNDI ÜLESEHITUSEKS

CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK

APLITSEERIGE JA JÄTKAKE

CLEARFIL™ Universal Bond Quick on universaalne sidusaine, mis toimib hetkega. Kandke vaid pinnale, kuivatage ja kõvastage valgusega. Ongi valmis. Pole vaja sidustamisel penetreerumist oodata, kihtide kaupa peale kanda ega pikalt hõõruda. Selle asemel kasutab see uus sidusaine Kuraray Noritake Dental kiiret sidustamise tehnoloogiat, et saavutada püsivalt tugev sidustus ühe lihtsa protseduuriga. Ühtlased tulemused, optimaalne adhesioon.

Tõeliselt universaalne sidustus

CLEARFIL™ Universal Bond Quicki saab kasutada peaaegu kõigi komposiitmaterjalidega ning ka juhtudel, kui vajatakse kahelikõvastavaid materjale, näiteks tihvti ja kõndi protseduuride korral. Kasutage seda täpselt nii, nagu ise soovite. Isesöövitava tehnikaga, valikulise söövituse tehnikaga või täieliku söövitustehnikaga. Valik on teie. CLEARFIL™ Universal Bond Quick on nii praimer, sidusaine, silaan kui ka metallkomponentide praimer, tagades kiire adhesiooni ja lihtsa eeltöötuse. CLEARFIL™ Universal Bond Quick tagab optimaalsed tulemused ilma ooteajata. Kandke vaid peale ja jätkake tööd.



Pealekandmine¹



Kuivatamine



Valguskõvastamine

Tänu oma suurepärasele adhesiooni omadustele täiendab CLEARFIL™ Universal Bond Quick täiuslikult CLEARFIL™ DC CORE PLUSi. Tänu oma isekõvastumist spetsiifiliselt kiirendavatele omadustele sobib see suurepäraselt kasutamiseks piirkondades, kuhu valgus ei pääse. CUBQ kinnitub juurekanalis dentiinile ja tihvtile. Eraldi praimerit ei ole vaja.

¹ Kandke peale hõõruva liigutusega ja liikuge edasi

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

ERAKORDNE

CLEARFIL™ DC CORE PLUS on kahelikõvastuv (valguskõvastuv ja isekõvastuvate omadustega) kõndi ülesehituse materjal. Selle isekõvastuv omadus on ideaalne lahendus nendele juurekanali piirkondadele, kuhu valgus ei pääse. CLEARFIL™ DC CORE PLUSi spetsiaalne täiteaine tehnoloogia annab materjalile optimaalse tiksotroopsuse. Seetõttu saate kanda pasta hõlpsasti peale. Pasta mittevajuv koostis tagab, et pasta ei hakka laiali valguma. Kõigis etappides – juurekanalisse kandmisel ja kõndi ülesehituseks kasutades – saate lihtsasti kasutada vaid ühte segamisotsakut – tänu kolmeminutilisele tööajale.


EELISED

- ✓ Lihtne protseduur
- ✓ Kahelikõvastuv
- ✓ Kerge peale kanda
- ✓ Mittevalguv konsistents
- ✓ Kolmeminutiline tööaeg



TASAKAALUSTATUD MATERJALI OMADUSED


Oklusaalse koormuse vältimiseks on CLEARFIL™ DC CORE PLUSil dentiinile lähedane elastsustegur. Seega jaotub oklusaalne koormus kogu juurekanali pinnal. Veelgi enam, mälumiskooormusest sõltumatult on tagatud stabiilne restauratsioon – Seda tänu CLEARFIL™ DC CORE PLUSi headele mehaanilistele omadustele. Seeläbi saab tagada juure ja kõndi ülesehituse materjalide murdumise minimaalse riski.

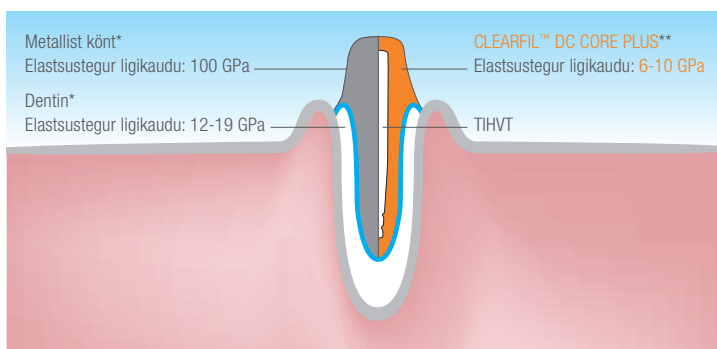

PAINETUGEVUS

CLEARFIL™ DC CORE PLUSil on suurim paindetugevus, võrreldes muude kõndi ülesehituse materjalidega.


Paindetugevus

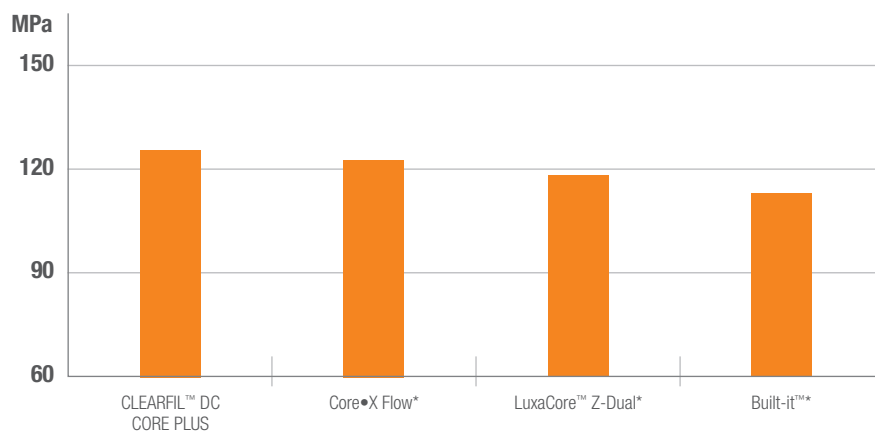


KAHELIKÖVASTUVAD OMADUSED KÖNDI ÜLESEHITUSEKS

CLEARFIL™ Universal Bond Quick on nüüd saadaval kasutamiseks koos CLEARFIL™ DC CORE PLUSiga. CLEARFIL™ DC CORE PLUSi spetsiifiline isekõvastumist kiirendav omadus tagab teile suurepäraseid ja usaldusväärseid tulemusi piirkondades, kuhu valgus ei pääse.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick moodustab tugeva keemilise sideme hüdroksüapatiidiga. Tänu ettevõttes Kuraray välja töötatud MDP-monomeerile on sellel suur sidustustugevus ning kindel adhesioon hambastruktuuriga.

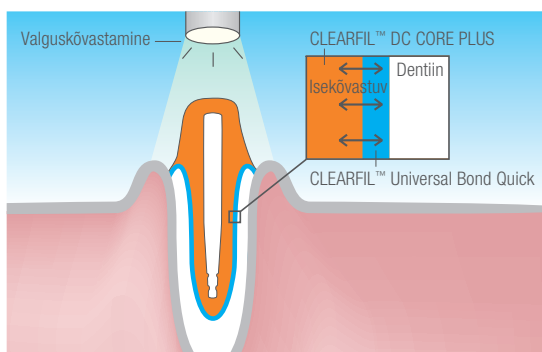


ADHESIIVSE MDP-MONOMEERI STRUKTUUR

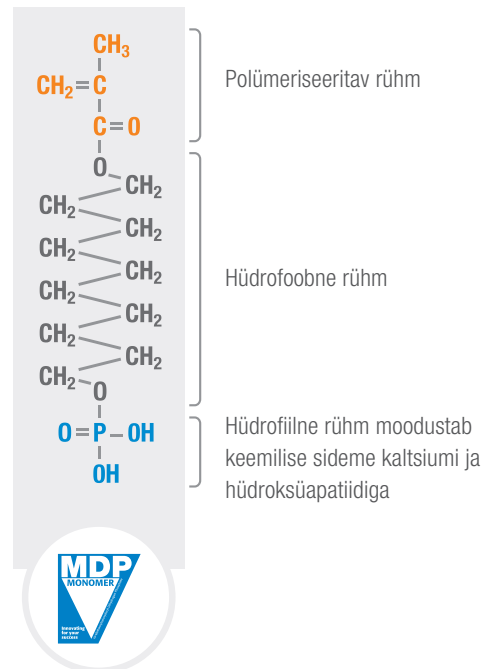

SUUREPÄRANE SIDUSTUSTUGEVUS ON TAGATUD!

Oleme oluliselt parandanud sidustustugevust dentiiniga, võrreldes meie varasema kõndi ülesehituse süsteemiga.

Tõmbetugevus dentiiniga koos kõndi ülesehituse materjaliga

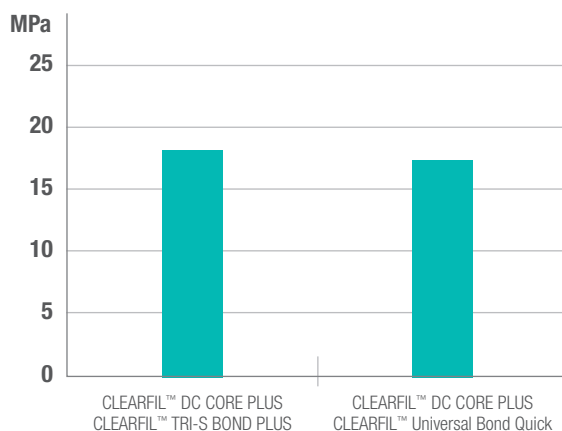


Allikas: Kuraray Noritake Dental Inc.

VOOLAMINE ON KONTROLLITAV

Pasta on lihtsasti väljutatav ning hästi kontrollitav tänu CLEARFIL™ DC CORE PLUSi unikaalsele täiteainete pinnatöötlustehnoloogiale.

Pasta töödeldavus

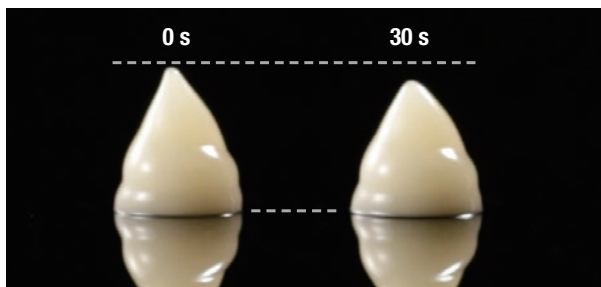

VÄRVITOONID

CLEARFIL™ DC CORE PLUSi KOMPLEKT on saadaval järgmiste värvitoonidega:



Dentiin



Valge


LIHTSASTI KASUTATAV, STRESSIVABA KLIINILINE PROTSEDUUR



Kandke SIDUSAINET peale hõõruva liigutusega.



Kuivatamiseks kasutage kerget õhuvoolu ja pabertihvte, kuni SIDUSAINET enam ei liigu.¹

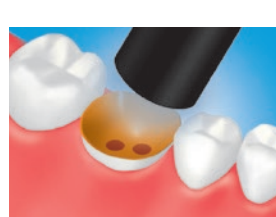

Valguskõvastamine.²



Tsementeerige kõnt ja ehitage see üles, kasutades CLEARFIL™ DC CORE Plusi tootja juhiste kohaselt.

¹ Kasutage vaakumaspiraatorit, et ennetada SIDUSAINET hajumist.

² Valguskõvastamise aega vaadake tabelist 1.

MÄRKUS. See on lühendatud versioon. Järgige kasutusjuhendit

TOOTEVALIK

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & QUICKi komplekt

1 süstal (9 ml), CLEARFIL™ Universal Bond Quick: 1 pudel (1 ml)
Tarvikud: 20 segamisotsakut, 10 juhtotsakut (L), 10 juhtotsakut (S),
50 aplikaatorpintslit (endo), 1 doseerimisalus, 1 valgustõkkeplaat

#3580-EU DENTIN

#3581-EU WHITE



CLEARFIL™ DC CORE PLUSi täitepakend

1 süstal (9 ml), 20 segamisotsakut, 10 juhtotsakut (L), 10 juhtotsakut (S)

#2942-EU DENTIN

#2943-EU WHITE



CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICKi pudeli standardpakend

1 pudel (5 ml), K-ETCHANT süstal (3 ml), aplikaatorpintslid (50 tk),
Kanüülid happele (20 tk), segamisalus, valgustõkkeplaat

#3571-EU



CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICKi pudeli täitepakend

(5 ml)

#3572-EU



CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICKi üksikdooside standardpakend

Üksikdoosid (50 × 0,1 ml), K-ETCHANT süstal (3 ml), aplikaatorpintslid
(50 tk), kanüülid happele (20 tk)

#3577-EU



CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICKi pudeli boonuspakend

(3 x 5 ml)

#3574-EU



K-ETCHANTI SÜSTAL

K-ETCHANTi süstlad (2 × 3 ml), kanüülid(40 tk)

#3252-EU

KANÜÜLID

Kanüülid happele (20 tk)

#3253-EU



KONTAKTANDMED

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics

Margadantstraat 20
1976 DN IJmuiden
Madalmaad

E-Mail infobaltics@kuraray.com

Website www.kuraraynoritake.eu

- Enne selle toote kasutamist lugege kindlasti tootega kaasas olevat kasutusjuhendit.
- Spetsifikatsioone ja toote välimust võidakse ilma etteteatamata muuta.
- Trükitud värv võib tegelikust värvist veidi erineda.

„CLEARFIL“ on ettevõtte Kuraray Co., Ltd kaubamärk.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Jaapan
Veebisait www.kuraraynoritake.com

