

„CLEARFIL™ DC CORE PLUS“ RINKINYS

Lengvai naudojama procedūra

Užtepkite be pastangų

Dvigubo kietėjimo



Kuraray Noritake Dental Inc.

PUIKI KOMANDA PATIKIMAM KULTIES ATSTATYMU

„CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK“

UŽTEPKITE IR TĖSKITE

„CLEARFIL™ Universal Bond Quick“ yra universalus adhezyvas, kuris veikia iškart. Paprasčiausiai užtepkite, džiovinkite ir kietinkite šviesa. Viskas. Nereikia laukti rišiklio prasiskverbimo, naudoti kelių sluoksnių ar ilgai trinti. Vietoje to, šis naujasis rišiklis naudoja „Kuraray Noritake Dental“ „Rapid Bond“ greitojo sujungimo technologiją, kuri leidžia pasiekti ilgalaikį ir patikimą surišimą vos per vieną įprastą procedūrą. Vientisi rezultatai, optimalus surišimas.

Visiškai universalus rišiklis

„CLEARFIL™ Universal Bond Quick“ galima naudoti su beveik visomis kompozitinėmis medžiagomis ir tada, kai reikia dvigubų kietėjimo medžiagų, pvz., kaiščio ir kulties procedūrose. Tiesiog naudokite taip, kaip norite. Su savaiminio, pasirenkamo ir viso ėsdinimo metodu. Spręskite patys. „CLEARFIL™ Universal Bond Quick“ yra praimeris, rišiklis, silanas ir metalo praimeris viename, užtikrinantis greitą surišimą ir paprastą išankstinį apdorojimą. „CLEARFIL™ Universal Bond Quick“ suteikia optimalių rezultatų nelaukiant. Tiesiog užtepkite ir tęskite.



Užtepkite¹



Džiovinkite



Kietinkite šviesa

Dėl savo išskirtinių surišimo savybių „CLEARFIL™ Universal Bond Quick“ yra puikus „CLEARFIL™ DC CORE PLUS“ papildymas. Dėl specifinio savaiminio kietėjimo pagreitinimo jis puikiai tinka tose vietose, kurių negali pasiekti šviesa. „CUBQ“ prisitvirtina prie dantino šaknies kanale ir kaiščio. Nereikia atskiros praimerio..

¹ Užtepkite trinamačiu judesiu ir tęskite.

„CLEARFIL™ DC CORE PLUS“

IŠSKIRTINIS

„CLEARFIL™ DC CORE PLUS“ yra dvigubai kietėjanti (dėl šviesos ir savaiminio kietėjimo savybių) kulties antstato medžiaga. Savaiminio kietėjimo savybės yra puikus sprendimas toms šaknies kanalo vietoms, į kurias šviesa nepatenka. Dėl specialios „CLEARFIL™ DC CORE PLUS“ užpildymo technologijos medžiagai suteikiama optimali tiksotropija. Todėl pastą galite tepti be pastangų. Nenuslydimo formulė garantuoja, kad pasta nenubėgs. Dėl tris minutes trunkančios procedūros, taikydami ant šaknies kanalo ir implanto, visiems veiksams galite naudoti tik vieną maišymo antgalį.

PRIVALUMAI


- ✓ Lengvai naudojama procedūra
- ✓ Dvigubo kietėjimo
- ✓ Užtepkite be pastangų
- ✓ „Nenuslydimo formulė“
- ✓ Tris minutes trunkanti procedūra



kuraraynoritake.eu/lt/clearfil-dc-core-plus

SUBBALANSUOTOS MEDŽIAGŲ SAVYBĖS

Siekiant išvengti didelio okliuzijos streso iki šaknies galiuko, „CLEARFIL™ DC CORE PLUS“ turi tamprumo modulį, artimą dentinui. Dėl to okliuzinis stresas yra išsklaidomas per visą šaknies kanalo paviršių. Taip pat, nepaisant kramtymo streso, stabili restauracija užtikrinama dėl gerų „CLEARFIL™ DC CORE PLUS“ mechaninių savybių. Taip gali būti užtikrinama minimali rizika, jog kanalas ir implanto medžiaga sulūš..

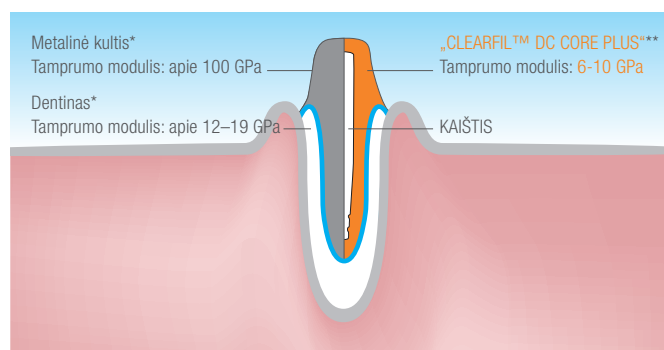


* Šaltinis: S. Takahasi, T. Hirashawa, et. al, J. J. Dent Material Vol. 16(6), 555-562, 1996.
** Šaltinis: „Kuraray Medical Inc.“

LENKIMO STIPRIS

„CLEARFIL™ DC CORE PLUS“ turi didžiausią lenkimo stiprį, lyginant su kitomis kulties antstato medžiagomis.

Lenkimo stipris

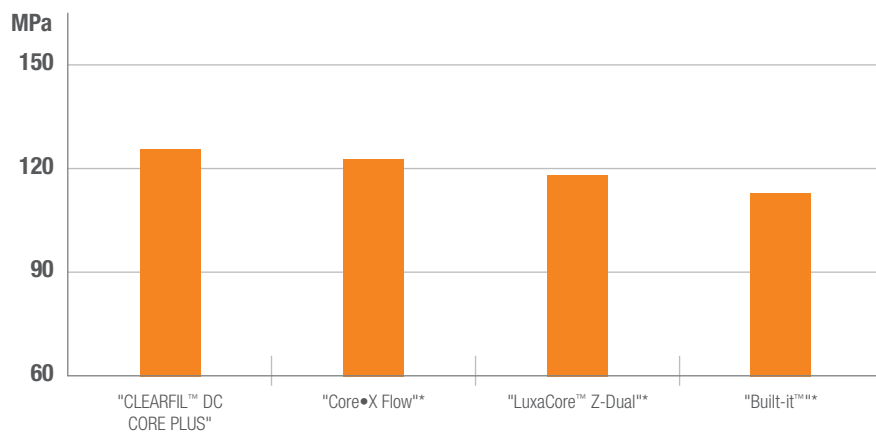


Šaltinis: Dr. C. J. Kleverlann, Akademini odontologijos centras, Amsterdamas, Nyderlandai.
* Ne „Kuraray“ prekių ženklas.


DVIGUBO KULTIES ANTSTATO KIETĖJIMO SAVYBĖS

„CLEARFIL™ Universal Bond Quick“ galima naudoti kartu su „CLEARFIL™ DC CORE PLUS“. Dėl specifinio savaiminio „CLEARFIL™ DC CORE PLUS“ kietėjimo pagreitėjimo užtikrinami puikūs ir patikimi rezultatai tose vietose, kurių negali pasiekti šviesa.

„CLEARFIL™ Universal Bond Quick“ stipriai chemiškai suriša su hidroksiapatitu. Dėl „Kuraray“ išrastų MDP monomerų jis stipriai suriša ir patikimai sulipina su danties struktūra.

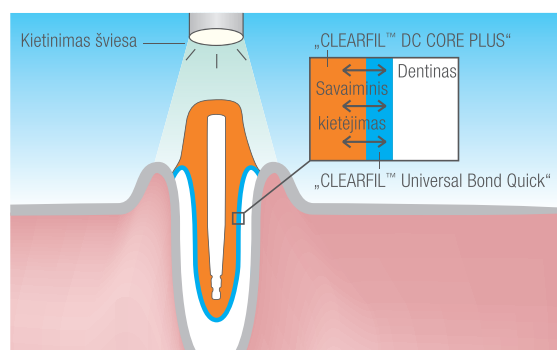


SURIŠIMO MONOMERO MDP STRUKTŪRA

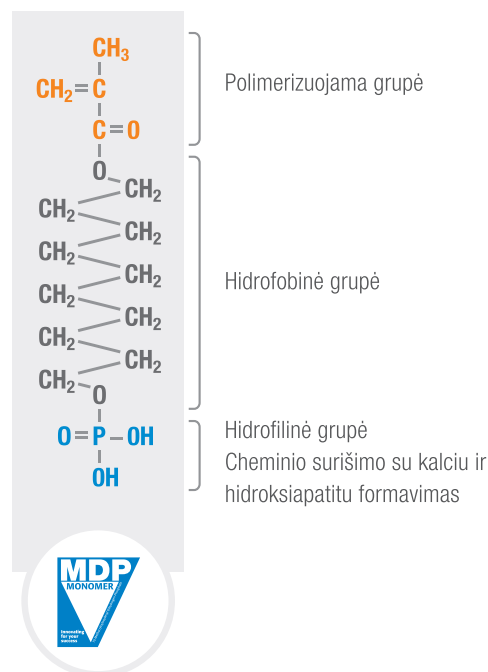

ĮSPŪDINGAS SURIŠIMO STIPRIS PATVIRTINTAS!

Reikšmingai pagerinome surišimo stiprį prie dantino, palydinus su mūsų ankstesne kulties antstato sistema.

Tempimo stiprumas surišant su dentinu su kulties antstato medžiaga

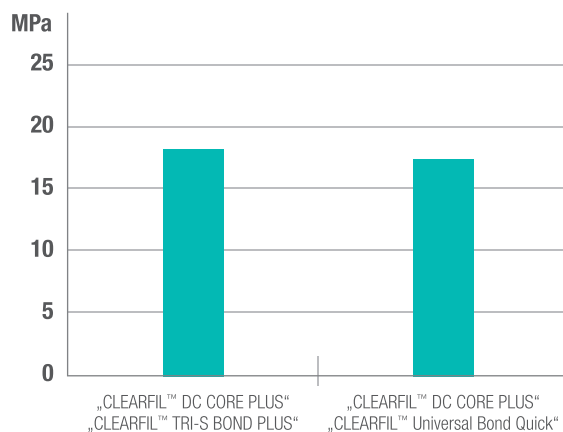


Šaltinis: „Kuraray Noritake Dental Inc.“

KONTROLIUOJAMAS TEPIMAS

Pastą lengva užtepti ir valdyti dėl unikalios „CLEARFIL™ DC CORE PLUS“ užpildymo paviršiaus apdorojimo technologijos.

Pastos formavimas

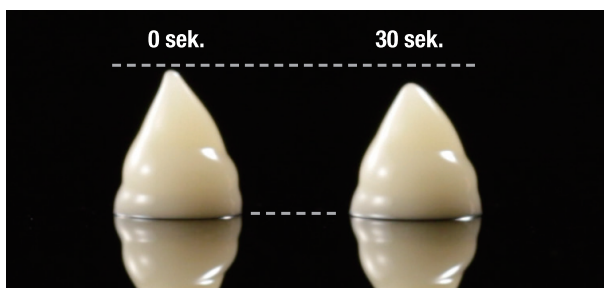

ATSPALVIAI

„CLEARFIL™ DC CORE PLUS“ rinkinį galima įsigyti tokių atspalvių:



Dentinas



Baltas


PAPRASTA NAUDOTI KLINIKINĖJE PROCEDŪROJE BE STRESO





Užtepkite „BOND“ trinamuju judesiu.



Džiovinkite pūsdami švelnų orą ir popieriniu kaiščiu, kol „BOND“ nebejudės¹.

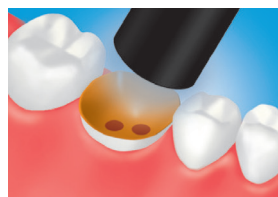

Kietinimas šviesa².

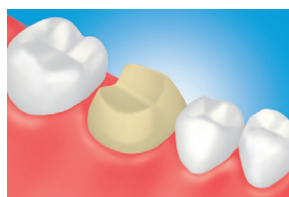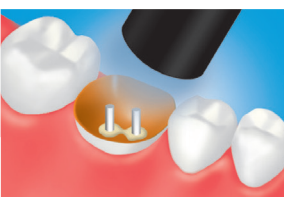

Veiksmai po cementavimo ir kulties antstatymo įstatymas naudojant „CLEARFIL™ DC CORE Plus“ pagal gamintojo instrukcijas.

¹ Kad „BOND“ nesitaškytų, naudokite vakuuminį siurbtuką.

² Dėl kietinimo šviesa laiko žr. 1 lentelę.

PASTABA. Tai sutrumpinta versija. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis

GAMINIŲ ASORTIMENTAS

„CLEARFIL™ DC CORE PLUS & QUICK“ RINKINYS

1 švirkštas (9 ml), „CLEARFIL™ Universal Bond Quick“: 1 buteliukas (1 ml)
Priedai: 20 maišymo antgalių, 10 kreipiamųjų antgalių (L), 10 kreipiamųjų antgalių (S), 50 teptukų (endodontinių), 1 dozavimo indas, 1 šviesą blokuojanti plokštelė

#3580-EU DENTIN

#3581-EU WHITE



„CLEARFIL™ DC CORE PLUS“ PAPILDYMAS

1 švirkštas (9 ml), 20 maišymo antgalių, 10 kreipiamųjų antgalių (L), 10 kreipiamųjų antgalių (S)

#2942-EU DENTIN

#2943-EU WHITE



„CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK“ BUTELIUKO STANDARTINIS RINKINYS

1 bottle (5 ml), K-ETCHANT Syringe (3 ml), Applicator Brush (x 50 pcs), Needle Tip (x 20 pcs), Mixing Dish, Light Blocking Plate

#3571-EU



„CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK“ BUTELIUKO PAPILDYMAS

(5 ml)

#3572-EU



„CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK“ STANDARTINIS DOZAVIMO RINKINYS

Vienetinė dozė (0,1 ml x 50 vnt.), „K-ETCHANT“ švirkštas (3 ml), tepimo šepetėliai (x 50 vnt.), adatų antgaliai (x 20 vnt.)

#3577-EU



„CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK“ BUTELIUKŲ RINKINYS

(3 x 5 ml)

#3574-EU



„K-ETCHANT“ ŠVIRKŠTAS

„K-ETCHANT“ švirkštas (2 x 3 ml), adatų antgaliai (x 40 vnt.)

#3252-EU

ADATŲ ANTGALIAI

Adatų antgaliai (x 20 vnt.)

#3253-EU



KONTAKTAI

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics

Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden
Postbus 299, 1970 AG IJmuiden
Nyderlandai

Nyderlandai: +31 (0)255 523 701
El.paštas: infobaltics@kuraray.com

Svetainė www.kuraraynoritake.eu

- Prieš naudodami šį gaminį, būtinai perskaitykite kartu su gaminiu pateiktas naudojimo instrukcijas.
- Produkto savybės ir išvaizda gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.
- Spalva spaudinyje gali skirtis nuo tikrosios spalvos.

„CLEARFIL“ yra „Kuraray Co., Ltd“ priklausantis prekės ženklas.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonija
Svetainė: www.kuraraynoritake.com



11/19 MKA00551