

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & QUICK KIT

**EL EQUIPO PERFECTO PARA LA CEMENTACIÓN DE PERNOS
Y LA RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES**

PROCEDIMIENTO DE USO SIMPLIFICADO
POLIMERIZACIÓN DUAL
APLICACIÓN RÁPIDA



CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK

RÁPIDO SIN COMPRESIONES - EL PLUS TAMBIÉN EN LA TÉCNICA INDIRECTA


CLEARFIL™ Universal Bond Quick es el nuevo adhesivo universal de acción instantánea que combina la eficacia de la molécula 10-MDP con la tecnología más avanzada de monómeros de amida RAPID BOND TECHNOLOGY.

¡La gestión del campo y la contaminación nunca ha estado tan bajo su control! Basta con aplicar, secar y fotopolimerizar. La innovadora tecnología de adhesión de tiempo cero de RAPID BOND combina el monómero 10-MDP puro con nuevos monómeros hidrófilos a base de amidas que tienen una hidrofilia excepcional antes de la polimerización, pero se vuelven altamente hidrófobos después de la polimerización, para garantizar la estabilidad a la degradación hidrolítica.

La nueva eficacia de CLEARFIL™ Universal Bond Quick es el resultado de la extraordinaria propiedad hidrofílica del monómero que permite la óptima extensión y penetración del adhesivo en las superficies, asegurando un rendimiento adhesivo fiable tanto en dentina excesivamente húmeda como seca. CLEARFIL™ Universal Bond Quick no contiene Bisfenol-A (BPA) y puede utilizarse con todos los tipos de grabado, grabado total, autograbado y grabado selectivo. Está indicado para restauraciones directas e indirectas y se adhiere al esmalte, la dentina, los composites, la zirconia y los metales.



Aplicar friccionando y proceder

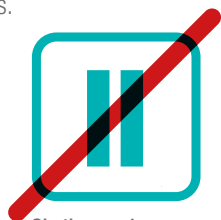

Sin tiempo de espera



Secar



Fotopolimerizar

EL EQUIPO PERFECTO PARA LA CEMENTACIÓN DE PERNOS Y LA RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES

Gracias a sus excelentes propiedades adhesivas, CLEARFIL™ Universal Bond Quick es el producto ideal para CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Gracias a su acelerador de autopolimerización específico, es ideal en aquellas áreas a las que no llega la luz.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick se adhiere a la dentina en el conducto radicular y el perno. No se requiere una imprimación separada y ningún catalizador para la polimerización dual del adhesivo.

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

EXCEPCIONAL

CLEARFIL™ DC CORE PLUS es un composite para la reconstrucción de muñones, dual (fotopolimerizable con propiedades autopolimerizantes), de dos componentes, disponible en jeringa automezcladora, para restauraciones estéticas y fiables. La propiedad de autopolimerización del material es la solución perfecta para áreas en el conducto radicular a las que no llega la luz. En todas las demás áreas, es posible acelerar el tiempo de polimerización mediante fotopolimerización. La tecnología especial de relleno CLEARFIL™ DC CORE PLUS proporciona al material una tixotropía óptima. Esto permite aplicar la pasta sin esfuerzo. La fuerte tixotropía impide que la pasta gotee. Para todos los pasos, aplicación en el conducto radicular y reconstrucción del muñón, es posible utilizar una sola punta de mezcla, gracias al tiempo de procesamiento de 3 minutos.

VENTAJAS


- ✓ Procedimiento de uso fácil y rápido
- ✓ Polimerización dual
- ✓ Aplicación sin esfuerzo
- ✓ Fórmula tixotrópica
- ✓ Tiempo de procesamiento de 3 minutos

CARACTERÍSTICAS EQUILIBRADO DEL MATERIAL

Para evitar el estrés oclusal al final del canal, CLEARFIL™ DC CORE PLUS tiene un módulo elástico similar al de la dentina.

Así, el estrés oclusal se dispersa por toda la superficie del conducto radicular. Además, a pesar del estrés de la masticación, asegura una restauración estable, gracias a sus excelentes propiedades mecánicas.

Como resultado, el riesgo de fractura del conducto radicular y el material de reconstrucción es mínimo.

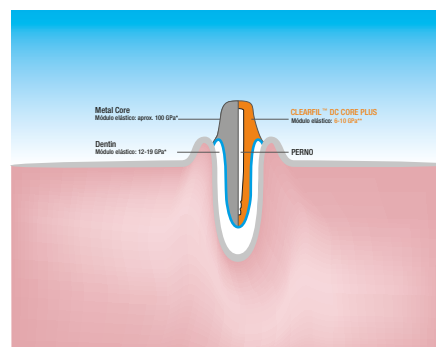


* Fuente: S. Takahashi, T. Hirashawa, et. al, J. J. Dent Material Vol. 16(6), 555-562, 1996.

** Fuente: Kuraray Medical Inc.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

CLEARFIL™ DC CORE PLUS muestra la mayor resistencia a la flexión en comparación con otros materiales para la reconstrucción de muñones.

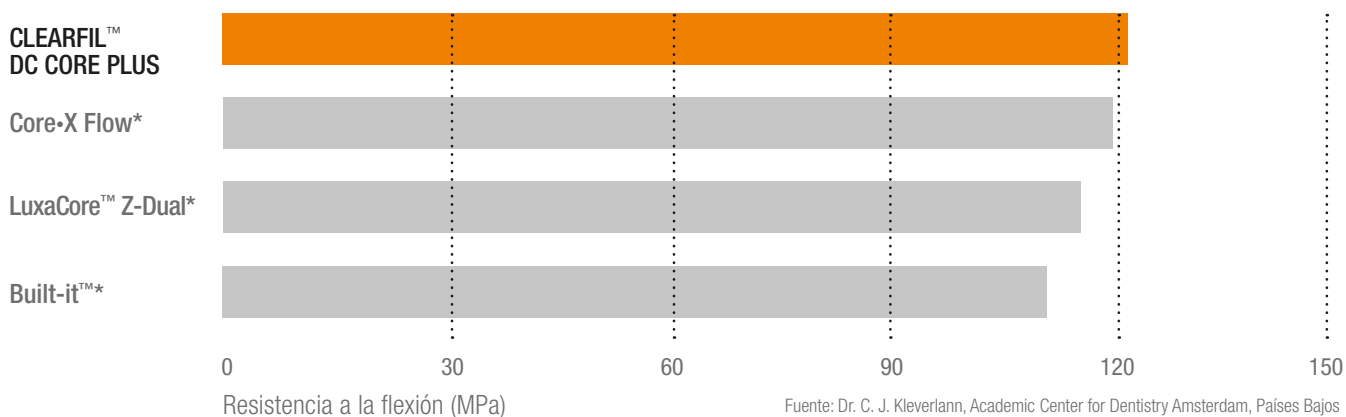



* No es una marca Kuraray

POLIMERIZACIÓN DUAL

CLEARFIL™ Universal Bond Quick ya está disponible para su uso combinado con CLEARFIL™ DC CORE PLUS.


El acelerador de autocurado específico contenido en CLEARFIL™ DC CORE PLUS garantiza resultados óptimos y fiables en las áreas a las que no llega la luz.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick crea una fuerte unión química con la hidroxiapatita. El monómero original 10-MDP, inventado por Kuraray, asegura una elevada fuerza adhesiva y permite una duración adhesiva fiable a la estructura del diente.

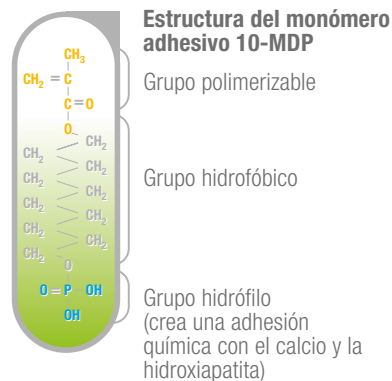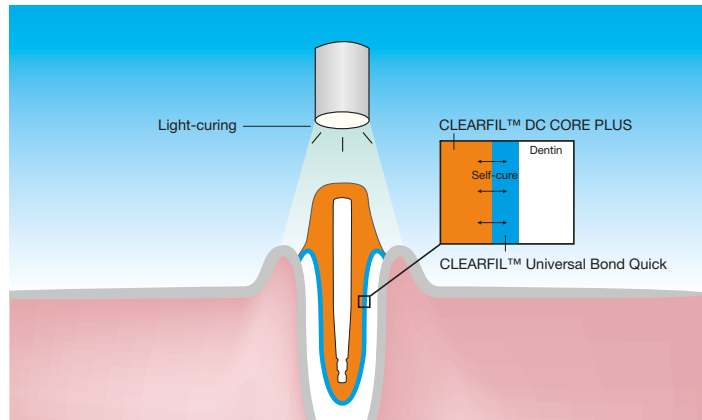

¡EXTRAORDINARIA FUERZA ADHESIVA!

Hemos mejorado la fuerza adhesiva a la dentina en comparación con nuestros sistemas anteriores para la reconstrucción de muñones.

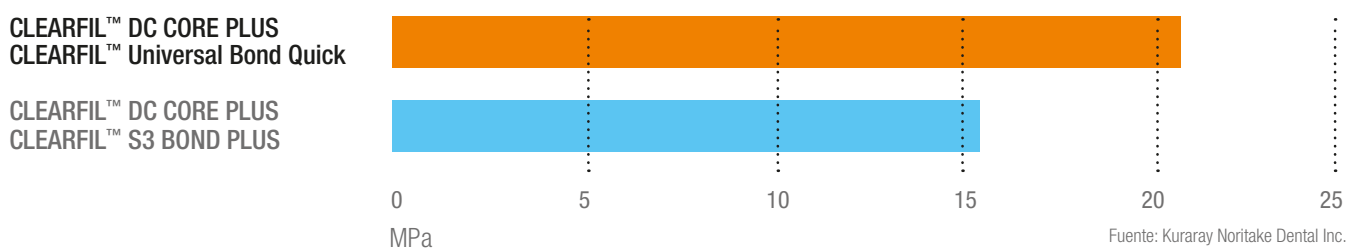

CONTROL DE LA FLUIDEZ

La dispensación de la pasta es simple y fácil de controlar, gracias a la exclusiva tecnología de tratamiento de la superficie de los rellenos de CLEARFIL™ DC CORE PLUS.



ESTABILIDAD DE LA PASTA

COLORES

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & QUICK KIT está disponible en los siguientes colores.



DENTIN



WHITE

FÁCIL DE USAR, PROCEDIMIENTO CLÍNICO SIN ESTRÉS



Aplicar el adhesivo friccionando.
Sin tiempo de espera.



* Usar un aspirador de vacío para evitar que el adhesivo se disperse

Secar con un ligero chorro de aire y una punta de papel hasta que el adhesivo no se mueva*.



** Consulte la tabla para los tiempos de curado

Fotopolimerizar**.



Cementar el perno y reconstruir el muñón con CLEARFIL™ DC CORE PLUS según las instrucciones del fabricante.

Nota: Esta es solo una versión abreviada del procedimiento. se aconseja consultar las instrucciones de uso del producto.

GAMA DE PRODUCTO

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & Quick Kit

#3580-EU DENTIN
#3581-EU WHITE

1 jeringa (17,9 g/9 ml) del color correspondiente,
1 frasco de CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK (1 ml), 20 puntas de mezcla,
10 puntas guía (L), 10 puntas guía (S), 50 pinceles aplicadores endo,
1 plato de mezcla, 1 placa de fotobloqueo



CLEARFIL™ Universal Bond Quick

#3571-EU

Standard Kit: 1 frasco (5 ml),
K-ETCHANT 1 jeringa (3 ml),
50 pinceles aplicadores,
20 puntas de aguja,
1 plato de mezcla,
1 placa de fotobloqueo



CLEARFIL™ DC CORE PLUS

#2942-EU DENTIN
#2943-EU WHITE

Recambio: 1 jeringa (17,9 g / 9 ml) del color correspondiente, 20 puntas mezcladoras, 10 puntas guía (L), 10 puntas guía (S)

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

#3572-EU

Recambio: 1 frasco (5 ml)

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

#3577-EU

Unit Dosis Standard Pack: 50 monodosis (0,1 ml cada uno),
K-ETCHANT 1 jeringa (3 ml),
50 pinceles aplicadores,
20 puntas de aguja

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

#3574-EU

Bottle Value Pack: 3 frascos (5 ml cada uno)

K-ETCHANT Syringe

#3252-EU

2 jeringas K-ETCHANT (3 ml cada una),
40 puntas de aguja

Puntas de aguja

#3253-EU

20 puntas de aguja

CONTACTO

Kuraray Europe Spain S.L.

Avda. del Tivoli 17, Local 37 y 38 29631 Arroyo de la Miel (Benalmádena), Málaga

Teléfono: 0039 02 63471228

Correo Electrónico: dental-iberia@kuraray.com

Web: www.kuraraynoritake.eu/es

- Antes de su uso, asegúrese de haber leído las instrucciones de uso suministradas con el producto.
- Las especificaciones y el aspecto del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El color impreso puede diferir ligeramente del color real.

"PANAVIA" y "CLEARFIL" son marcas comerciales de Kuraray Co., Ltd. "KATANA" es una marca comercial de NORITAKE CO., LIMITED.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan



10/19 MKA00593