

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & QUICK KIT

IL TEAM PERFETTO PER LA CEMENTAZIONE DI PERNI E LA RICOSTRUZIONE DI MONCONI

PROCEDURA D'USO SEMPLIFICATA
POLIMERIZZAZIONE DUALE
APPLICAZIONE VELOCE



CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK

VELOCE SENZA COMPRESSI - IL PLUS ANCHE NELLA TECNICA INDIRETTA

CLEARFIL™ Universal Bond Quick è il nuovo adesivo universale ad azione istantanea che combina l'efficacia dell'affermata molecola 10-MDP alla più avanzata tecnologia dei monomeri ammidici RAPID BOND TECHNOLOGY.

La gestione del campo e delle contaminazioni non è mai stata così sotto il vostro controllo! Basta applicare, asciugare e fotopolimerizzare. L'innovativa tecnologia di adesione a tempo zero RAPID BOND TECHNOLOGY combina il monomero 10-MDP puro con nuovi monomeri idrofili a base di ammidi che dispongono di una straordinaria idrofilia prima della polimerizzazione, ma divengono altamente idrofobi dopo la polimerizzazione, al fine di assicurare la stabilità al degrado idrolitico.

La nuova efficacia di CLEARFIL™ Universal Bond Quick è il risultato della straordinaria proprietà di idrofilia del monomero che permette l'ottimale stesura e penetrazione dell'adesivo nelle superfici, assicurando prestazioni adesive affidabili sia su dentina eccessivamente bagnata che asciutta. CLEARFIL™ Universal Bond Quick non contiene Bisfenolo-A (BPA) e può essere utilizzato con tutti i tipi di mordenzatura, total-etch, self-etch e selective etch. È indicato per restauri diretti e indiretti e aderisce a smalto, dentina, compositi, zirconia e metalli.



Applicare frizionando e procedere



Nessun tempo d'attesa



Asciugare



Fotopolimerizzare

IL TEAM PERFETTO PER LA CEMENTAZIONE DI PERNI E LA RICOSTRUZIONE DI MONCONI

Grazie alle sue straordinarie proprietà adesive, CLEARFIL™ Universal Bond Quick è il prodotto ideale per CLEARFIL™ DC CORE PLUS. Grazie al suo specifico acceleratore di autopolimerizzazione, è ideale in quelle aree che non riescono a essere raggiunte dalla luce.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick aderisce alla dentina nel canale radicolare e nel perno. Non è necessario un primer a parte e alcun catalizzatore per la polimerizzazione duale dell'adesivo.

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

ECCEZIONALE

CLEARFIL™ DC CORE PLUS è un composito per la ricostruzione di monconi, duale (fotopolimerizzabile con proprietà autopolimerizzanti), a due componenti, disponibile in siringa automiscelante, per restauri estetici e affidabili. La proprietà autopolimerizzante del materiale è la soluzione perfetta per le aree nel canale radicolare che non sono accessibili alla luce. In tutte le altre aree, è possibile velocizzare il tempo di polimerizzazione tramite fotopolimerizzazione. La speciale tecnologia dei filler in CLEARFIL™ DC CORE PLUS fornisce al materiale una tissotropia ottimale. Questo permette di applicare la pasta senza sforzo. La spiccata tissotropia evita che la pasta coli. Per tutti i passaggi, applicazione nel canale radicolare e ricostruzione del moncone, è possibile utilizzare un solo puntale di miscelazione, grazie al tempo di lavorazione di 3 minuti.


VANTAGGI

- ✓ Procedura d'uso facile e veloce
- ✓ Polimerizzazione duale
- ✓ Applicazione senza fatica
- ✓ Formula tissotropica
- ✓ Tempo di lavorazione di 3 minuti

CARATTERISTICHE BILANCIATE DEL MATERIALE

Per evitare lo stress occlusale alla fine del canale, CLEARFIL™ DC CORE PLUS ha un modulo elastico simile a quello della dentina. In questo modo, lo stress occlusale viene disperso sull'intera superficie del canale radicolare. Inoltre, nonostante lo stress da masticazione, assicura un restauro stabile, grazie alle sue ottime proprietà meccaniche.

Di conseguenza, il rischio di frattura del canale radicolare e del materiale da ricostruzione è minimo.

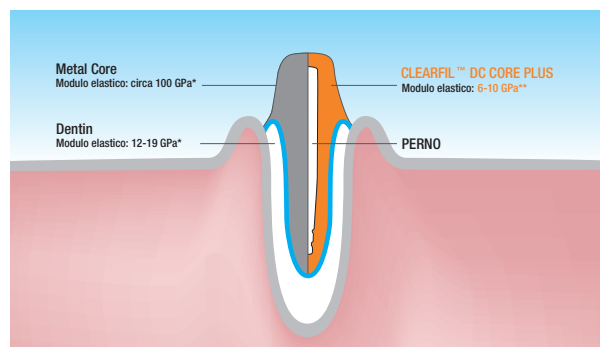


* Fonte: S. Takahasi, T. Hirashawa, et. al, J. J. Dent Material Vol. 16(6), 555-562, 1996.

** Fonte: Kuraray Medical Inc.

RESISTENZA ALLA FLESSIONE

CLEARFIL™ DC CORE PLUS mostra la più alta resistenza alla flessione rispetto agli altri materiali per la ricostruzione di monconi.


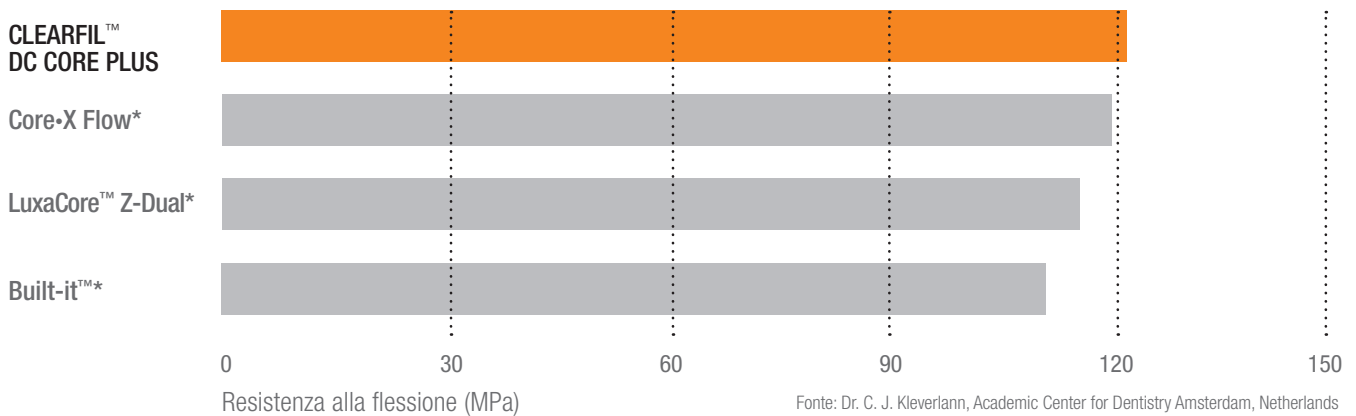


POLIMERIZZAZIONE DUALE

CLEARFIL™ Universal Bond Quick è ora disponibile per l'uso combinato con CLEARFIL™ DC CORE PLUS.


Lo specifico acceleratore per l'autopolimerizzazione contenuto in CLEARFIL™ DC CORE PLUS assicura risultati ottimi e affidabili nelle aree che non possono essere raggiunte dalla luce.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick crea un forte legame chimico con l'idrossiapatite. Il monomero originale 10-MDP inventato da Kuraray, assicura un'elevata forza adesiva e permette una durata adesiva affidabile alla struttura del dente.

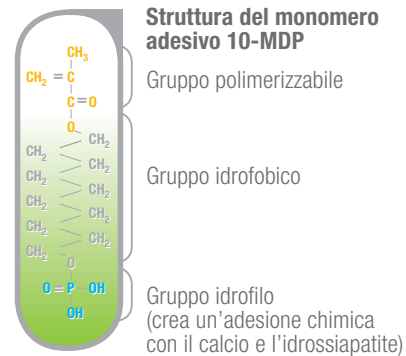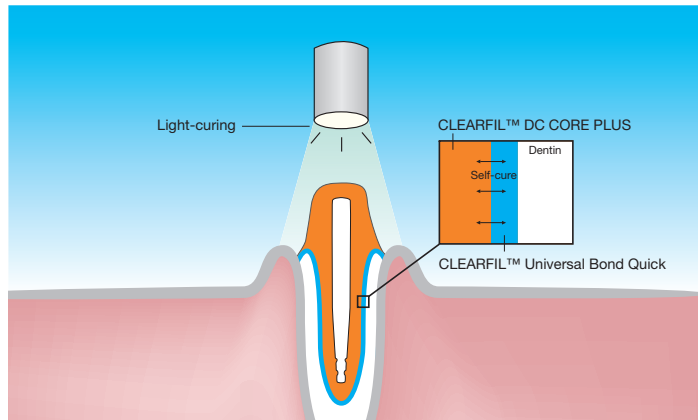

STRAORDINARIA FORZA ADESIVA!

Abbiamo migliorato la forza adesiva alla dentina rispetto ai nostri precedenti sistemi per la ricostruzione di monconi.

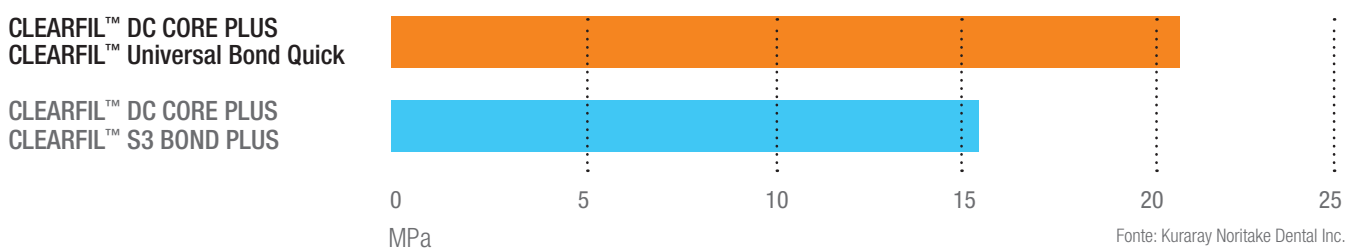

CONTROLLO DELLA FLUIDITÀ

L'erogazione della pasta è semplice e facile da controllare, grazie all'esclusiva tecnologia di trattamento della superficie dei filler di CLEARFIL™ DC CORE PLUS.



STABILITÀ DELLA PASTA

COLORI

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & Quick KIT è disponibile nei seguenti colori.




DENTIN



WHITE

FACILE DA USARE, PROCEDURA CLINICA SENZA STRESS

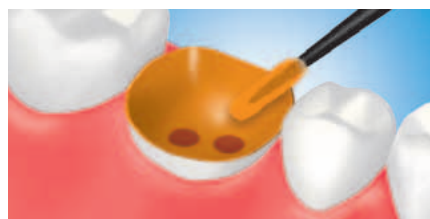

Applicare l'adesivo frizionando.
Nessun tempo d'attesa.




* Usare un aspiratore a vuoto per evitare che l'adesivo si disperda

Asciugare con un leggero flusso d'aria e una punta di carta finché l'adesivo non si muove*.



** Fare riferimento alla tabella per i tempi di polimerizzazione

Fotopolimerizzare**.

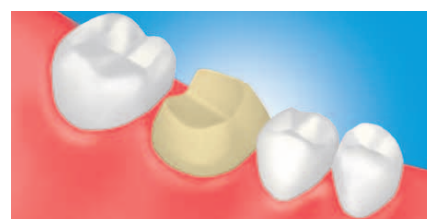

Cementare il perno e ricostruire il moncone con CLEARFIL™ DC CORE PLUS secondo le istruzioni dell'azienda produttrice.

N.B.: Questa è solo una versione abbreviata della procedura. si consiglia di consultare le istruzioni d'uso del prodotto.

GAMMA PRODOTTO

CLEARFIL™ DC CORE PLUS & Quick Kit

#3580-EU DENTIN

#3581-EU WHITE

1 siringa (17,9 g/9 ml) del colore corrispondente,
1 flacone di CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK (1 ml), 20 puntali di miscelazione,
10 punte guida (L), 10 punte guida (S),
50 pennelli applicatori endo,
1 piatto di miscelazione, 1 piastra fotobloccante



CLEARFIL™ Universal Bond Quick

#3571-EU

Standard Kit: 1 flacone (5 ml),
K-ETCHANT 1 siringa (3 ml),
50 pennelli applicatori,
20 puntali ad ago,
1 piatto di miscelazione,
1 piastra fotobloccante



CLEARFIL™ DC CORE PLUS

#2942-EU DENTIN

#2943-EU WHITE

Ricambio: 1 siringa (17,9 g/9 ml) del colore corrispondente,
20 puntali di miscelazione,
10 punte guida (L), 10 punte guida (S)

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

#3577-EU

Unit Dose Standard Pack:
50 monodose (0,1 ml cad.),
K-ETCHANT 1 siringa (3 ml),
50 pennelli applicatori,
20 puntali ad ago

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

#3574-EU

Bottle Value Pack: 3 flaconi (5 ml cad.)

K-ETCHANT Syringe

#3252-EU

2 siringhe K-ETCHANT (3 ml cad.),
40 puntali ad ago

Puntali ad ago

#3253-EU

20 puntali ad ago

CONTATTI

Kuraray Europe Italia S.r.l.
Via G. Boccaccio 21,
20123 Milano

Telefono 02 63471228
E-Mail dental-italia@kuraray.com
Web www.kuraraynoritake.eu/it

facebook.com/KurarayNoritakeInLab
facebook.com/KurarayNoritakeInClinic

- Prima dell'uso, accertarsi di aver letto le Istruzioni d'uso fornite con il prodotto.
- Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a variazione senza preavviso.
- Il colore stampato può differire leggermente dal colore effettivo.

"PANAVIA" e "CLEARFIL" sono marchi Kuraray Co., Ltd.
"KATANA" è un marchio NORITAKE CO., LIMITED.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan



10/19 MKA00593