


KATANA™ Cleaner

Kaikkiin korjaaviin toimenpiteisiin
suun sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön

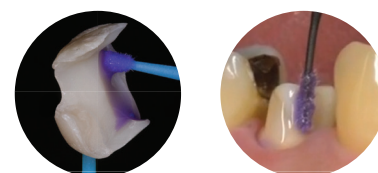


POISTAA KONTAMINAATIOIT OPTIMOIDEN SIDOSTUSTOIMENPITEET

Restauration sovituksen aikana pinnat saattavat kontaminoitua proteiineista heikentäen sidosta. KATANA™ Cleanerin erinomainen puhdistusteho perustuu MDP-suolan pinta-aktiivisiin ominaisuuksiin.

Muihin puhdistusaineisiin verrattuna KATANA™ Cleanerin pH-arvo on 4,5¹, joka mahdollistaa käytön ei vain suun ulkopuolella vaan myös suun sisäpuolella. Se on helppo tapa optimoida sidostus mukaan lukien sementointi.

1. Mittausmenetelmä: JIS Z 8802:2011

Repäisylujuus KATANA™ Zirconia HT:lle

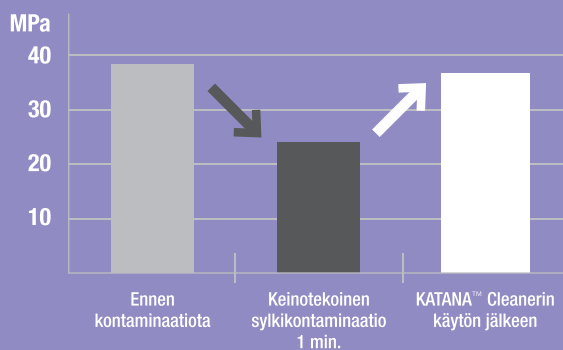

Mittausolosuhteet:
Alustan pinta:
1000 hiontakerran jälkeen, alumiinioksidilla hiekkapuhallus.
Pinta-ala ø 5mm, lämpötila 37°C säilytys vedessä 1 päivän ajan.

Sementti: PANAVIA™ V5

Lähde: Kuraray Noritake Dental Inc.


* Numeeriset arvot voivat vaihdella riippuen mittausolosuhteista.




HELPPO JA NOPEA MENETELMÄ



Hankaa alueelle, huuhtele ja kuivaa. Se on kaikki, mitä tarvitset sidostusmenetelmäsi optimoimiseksi. Toisin kuin muut puhdistimet, jotka vaativat pidemmän hankausajan ja ovat rajoitettuja vain suun ulkopuoliseen käyttöön, **KATANA™ Cleaner vaatii vain 10 sekuntia ja sitä voidaan käyttää suun sisä- ja ulkopuolella.**

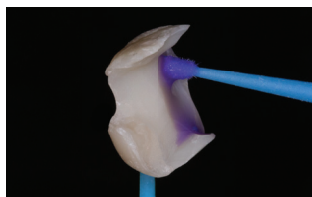

Applikoijaa hankaa KATANA™ Cleaneriä vähintään 10 sekunnin ajan. Sekä restaurointiin että suun sisäiselle sidospinnalle.

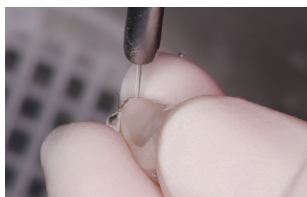


Huuhtelee ja kuivaa.



Sementoi restaurointi valmistajan ohjeiden mukaisesti.


Kuvat ovat Dr. Shoji Katon luovuttamia

MITEN SE TOIMII

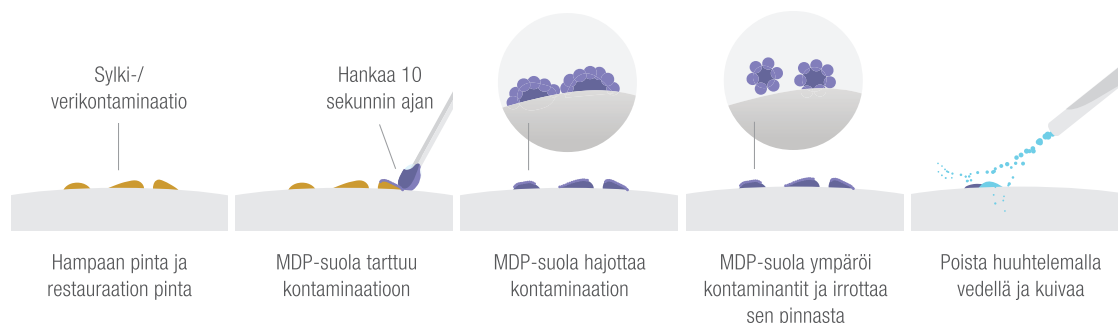

LAAJA INDIKAATIOALUE: SUUN SISÄISESTI JA ULKOISESTI

miedon pH-arvon – 4,5 – ansiosta KATANA™ Cleaner soveltuu paitsi suun ulkoiseen mutta myös suun sisäiseen käyttöön tehden siitä kaiken kattavan yleispuhdistusaineen sekä hammaskudokselle että proteettisille ratkaisuille.

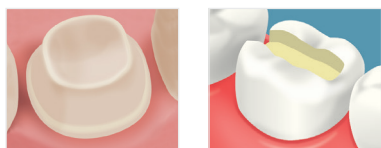

Suun sisäisesti:

Kaviteetit, nastat, juurikanavat




Protetiikka:

Keramia (zirkonio, litiumdisilikaatti, hammasposliini)
Muovipohjaiset materiaalit (CAD-/CAM-kruunut, yhdistelmämuovit)
Metallit (Jalot- ja epäjalotmetallit)
Nastat (lasikuitunastat, metallinastat)

PROTEIININ TAHRATESTI, PUHDISTUSVAIKUTUS ZIRKONIAAN


Kontaminaatio keinotekoisen syljen kanssa

Kontaminaation arviointi perustuu värjäytymisasteeseen tahralla, joka sitoutuu syljen sisältämiin proteiineihin.

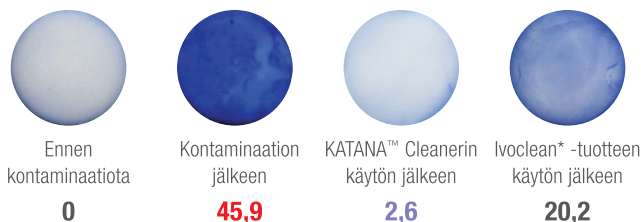

Kontaminaatio veren kanssa (ihmisen plasma)

Kontaminaatioaste on arvioitu tahrautumisen voimakkuudella aineella, joka sitoutuu (albumiini, fibrinogeeni, immunoglobuliini) proteiineihin, jotka ovat läsnä ihmisen plasmassa.

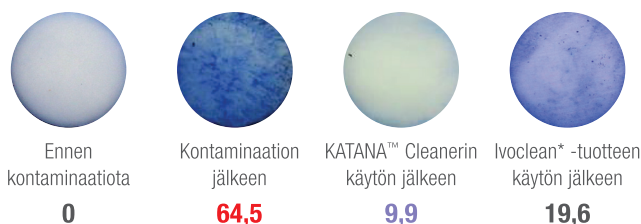


Tietolähde: Kuraray Noritake Dental Inc.


HYVÄ PUHDISTUSTEHO

Restauraatioiden sovitusten aikana pinnat voivat kontaminoitua heikentäen sidoksen vahvuutta. KATANA™ Cleanerin erinomainen puhdistusteho varmistaa optimoidun sidospinnan.

Repäisyjuuus KATANA™ Zirconia HT:lle, kun puhdistettu eri aineilla:

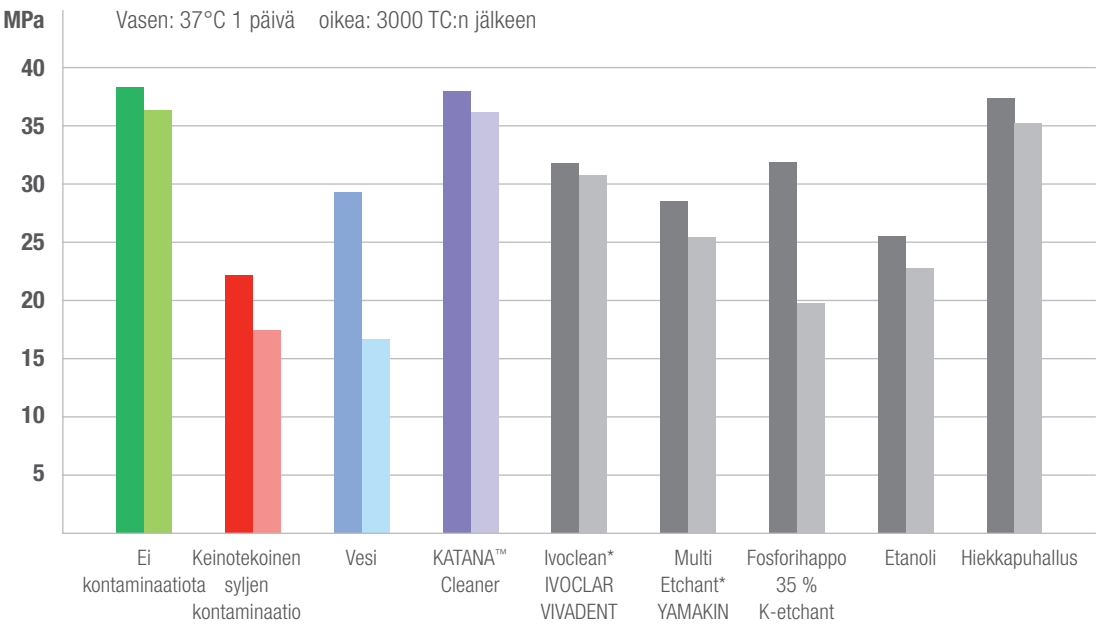

Repäisyjuuus naudan kiillelle ja dentiinille, kun puhdistettu eri aineilla:

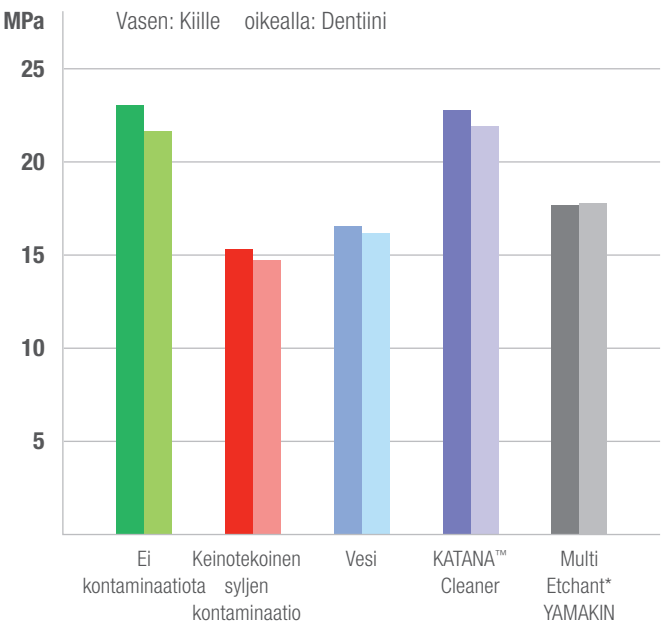

Repäisyjuuus naudan kiillelle ja dentiinille, kun puhdistettu eri aineilla:
Vasen: Kiille oikealla: Dentiini
Sementti: PANAVIA™ V5
Tiedot toimittanut Dr. Shoji Kato, Japanin adhesiivisen hammaslääketieteen yhdistyksen 38. vuosikokous (The 38th Annual Meeting of Japan Society for Adhesive Dentistry)
Eri pintapuhdistusmenetelmien vaikutus sidoslujuteen
* Ei ole Kuraray Noritake Dental Inc.:n tavaramerkki.

PUHDISTUSAINOIDEN VERTAILU*

	KATANA™ CLEANER	IVOCLEAN** (IVOCLEAR VIVADENT)	ZIRCLEAN** (BISCO)
Suun sisäinen käyttö hammasrakteilla	Kyllä	Ei	Ei
Suun sisäinen käyttö implantteilla	Kyllä	Ei	Ei
Suun ulkopuolinen käyttö	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aktiivinen ainesosa	MDP-suola (pinta-aktiivinen aine)	Natriumhydroksidi	Kaliumhydroksidi
pH	4,5	13-13,5	13
Applikoituaika	10 sekuntia	20 sekuntia	20 sekuntia
Käsittely	Ei ravistelua	Ravista ennen käyttöä	Ei ravistelua

* Käyttöohjeiden ja virallisen dokumentoinnin mukaan.
** Ei ole Kuraray Noritake Dental Inc.:n tavaramerkki.

YKSIKÄTISESTI
AVATTAVA
KORKKI



TILAUSTIEDOT


ARTIKKELINUMERO	KUVAUS
#3970-EU	KATANA™ Cleaner (4,0ml)

IHANTEELLISET YHDESSÄ:



PANAVIA™ V5
PANAVIA™ V5 on vahvin koskaan kehittämämme sementti. Viiden sävyvaihtoehdon myötä se on myös kaikkein esteettisin. Tämä mahdollistaa täysin uudenlaisen hammaslääketieteen, jossa voit luottaa sementointiin.

PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL
PANAVIA™ SA Cement Universal sisältää ainutlaatuisia LCSi-monomeeriä, joka kiinnittyy lähes kaikkiin materiaaleihin, lasikeramia mukaan lukien, ilman erillistä praimeria. Alkuperäinen MDP-monomeeri mahdollistaa kemiallisen reaktiivisuuden zirkonian, dentiinin ja kiilteen kanssa.

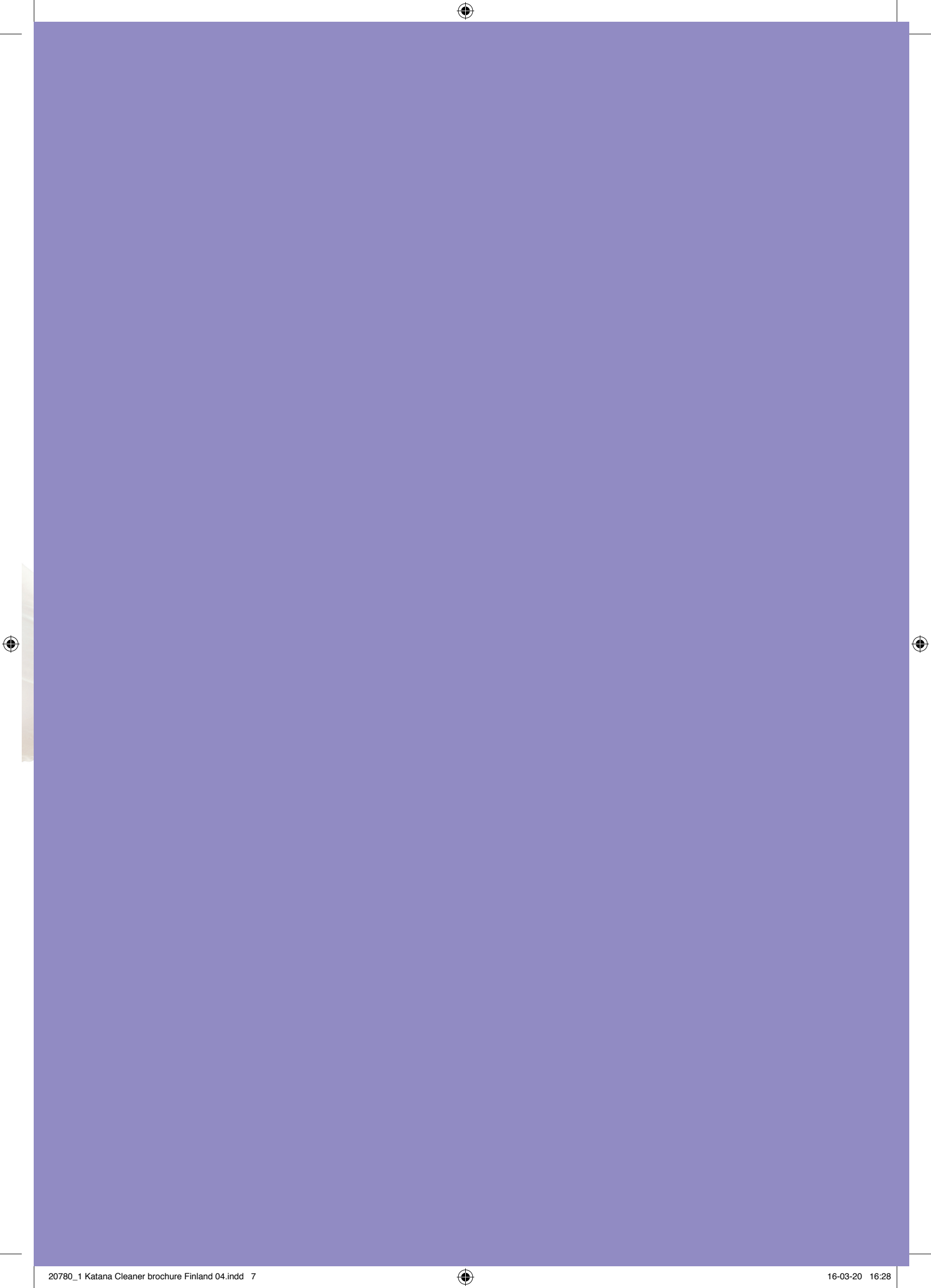

YHTEYSTIEDOT

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics

Margadantstraat 20
1976 DN, IJmuiden
Alankomaat

Puhelin: +35 894 245 3274
S-posti: infonordics@kuraray.com

Verkkosivut: www.kuraraynoritake.eu/fi/katana-cleaner

- Lue ennen tuotteen käyttöä sen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Tuotteiden ominaisuuksia ja ulkonäköä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Painotuotteiden kuvissa väri saattaa näkyä hieman erilaisena kuin luonnossa.

"KATANA" on NORITAKE CO., LIMITED -yhtiön tavaramerkki
"PANAVIA" on KURARAY CO., LTD. -yhtiön tavaramerkki



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japani
Verkkosivusto www.kuraraynoritake.com



03/2020/MKA00610