

SIŁA W RODZINIE

PANAVIA™

NAJLEPSZA ODPOWIEDŹ COKOLWIEK CEMENTUJESZ

PANAVIA™ V5

Siła i estetyka

PANAVIA™ Veneer LC

Ekspert od licówek

PANAVIA™ SA Cement Universal


Wszystkie wskazania, zero przypadków

BORN IN JAPAN

ORYGINALNA PANAVIA™

Wszystko zaczęło się w 1983 roku, kiedy PANAVIA™ EX został wprowadzony na rynek jako pierwszy adhezyjny cement na bazie żywic, zawierający oryginalny monomer 10-MDP firmy Kuraray Noritake Dental Inc. Marka PANAVIA™ szybko stała się popularna wśród lekarzy dentystów na całym świecie ze względu na niezawodną siłę połączenia. W celu stworzenia podstaw do usprawnienia procedur cementowania adhezyjnego i uzyskania wysokiej estetyki, udoskonalono istniejące formuły i opracowano zupełnie nowe technologie. Wszystko to zaowocowało obecną linią łatwych w użyciu i wysoce estetycznych cementów kompozytowych, które zapewniają najwyższe siły wiązania.

HISTORIA PANAVIA™

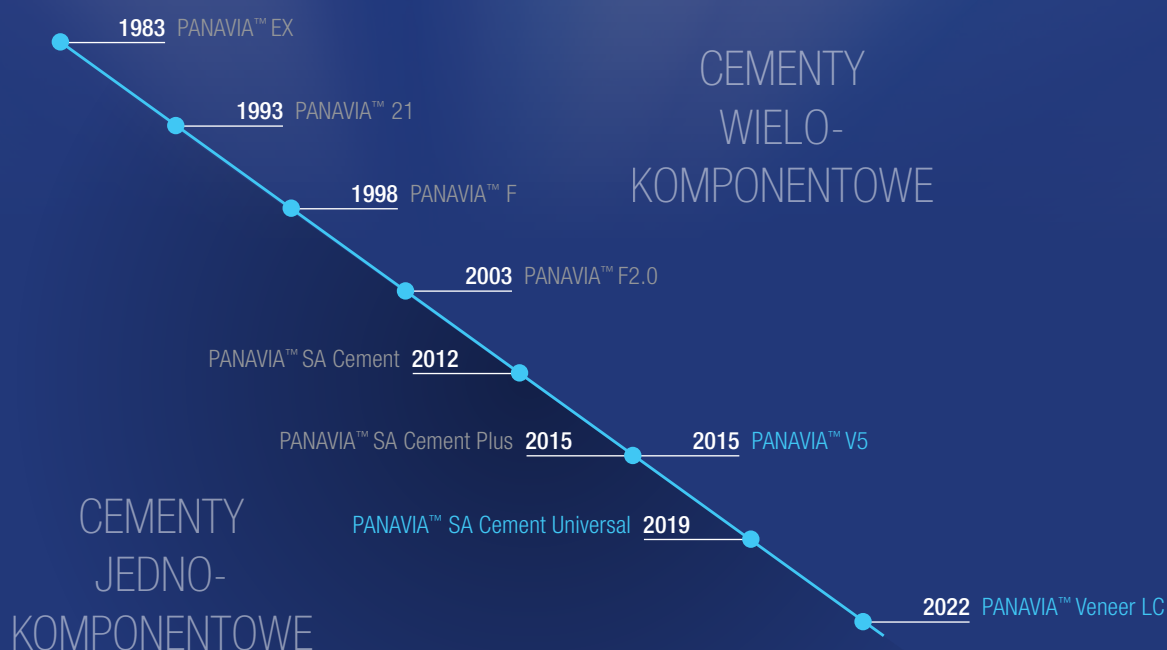

RODZINA PANAVIA™

SIŁA TRZECH

Zmieniające się oraz rosnące wymagania pacjentów, ale także nasze indywidualne przyzwyczajenia i upodobania sprawiają, że prawdopodobnie nigdy nie powstanie jeden cement do wszystkiego. Jesteśmy jednak przekonani, że trzy, opracowane w laboratoriach Kuraray Noritake Dental Inc., systemy cementowania to sposób, by zawsze i skutecznie odpowiadać na wszelkie potrzeby oraz wskazania najlepiej, jak to tylko możliwe.

PANAVIA™ SA Cement Universal

WSZYSTKIE WSKAZANIA,
ZERO PRZYPADKÓW



Dla tych, którzy na pierwszym miejscu stawiają prostotę i pracę w oparciu o maksymalnie uproszczone procedury. PANAVIA™ SA Cement Universal to gwarantuje, a do tego możesz ją stosować bez zastosowania dodatkowych primerów.

● ● ● ● ● Prosta procedura
● ● ● ● ● Estetyka

PANAVIA™ V5

SIŁA I ESTETYKA



Stworzona dla profesjonalistów, ceniących przewidywalne wyniki. To cement będący synonimem najwyższej siły połączenia adhezyjnego i trwałości, jednocześnie gwarantujący wysoce estetyczne rezultaty.

● ● ● ● ● Prosta procedura
● ● ● ● ● Estetyka

PANAVIA™ Veneer LC

EKSPERT OD LICÓWEK



Pozwala osadzić kilka licówek bez obaw o czas wiązania. To specjalistyczny cement, gwarantujący najwyższą estetykę i trwałość na długie lata.

● ● ● ● ● Prosta procedura
● ● ● ● ● Estetyka

Licówki



Wkłady
inlay/onlay



Korony w odcinku
przednim



Korony w odcinku
bocznym



Mosty
3-punktowe



Mosty
wielopunktowe



Korony i mosty
na implantach



PANAVIA™ Veneer LC



PANAVIA™ V5



PANAVIA™ SA Cement Universal



PANAVIA™ SA Cement Universal

BEZ
KONIECZNOŚCI
STOSOWANIA
PRIMERÓW



JEDNA, PROSTA PROCEDURA!

Czy wiesz, że istnieje cement, który pozwoli Ci pracować w oparciu o jedną procedurę bez konieczności stosowania dodatkowych primerów, ale za to z gwarancją doskonałych wyników we wszystkich przypadkach? Jeśli nie, to koniecznie musisz wypróbować PANAVIA™ SA Cement Universal!

Dzięki zastosowaniu dwóch wyjątkowych monomerów ten samotrawiący, podwójnie utwardzalny cement na bazie żywic zapewnia mocną i trwałą adhezję z tkankami zęba oraz wszystkimi substratami protetycznymi bez potrzeby stosowania primerów. To sprawia, że idealnie nadaje się do codziennych zabiegów takich jak cementowanie koron i mostów, zarówno cyrkonowych, z dwukrzemianu litu, z ceramiki hybrydowej, jak i uzupełnień na podbudowie metalowej.

CEMENT NA CO DZIEŃ

KORZYŚCI I WSKAZANIA

KORZYŚCI

- ✓ Wiąże się z cyrkonem i dwukrzemianem litu bez potrzeby stosowania dodatkowych primerów
- ✓ Bardzo łatwe usuwanie nadmiarów materiału
- ✓ Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej*
- ✓ Łatwa aplikacja przy niewielkim nacisku
- ✓ Wersja Automix lub Handmix

*poniżej 25°C pomimo obecności silanu (LCSi)

WSKAZANIA

- ✓ Cementowanie koron, mostów, wkładów typu inlay/onlay
- ✓ Cementowanie uzupełnień protetycznych na łącznikach implantologicznych
- ✓ Cementowanie mostów i szyn adhezyjnych
- ✓ Cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych

DANE TECHNICZNE

Zawartość wypełniacza:	62% wag. (40% obj.)
Wytrzymałość na zginanie ^{1,2} :	91 MPa
Moduł elastyczności ^{1,2} :	4,6 GPa
Wytrzymałość na ściskanie ¹ :	301 MPa
Temperatura przechowywania:	2-25°C / 36-77°F
Sorpcja wody ^{1,2} :	27 µg/mm ³

Grubość warstwy:	około 14 µm
Nieprzepuszczalność promieniowania X ² :	170% Al
Uwalnianie jonów fluoru:	67 µg/cm ²
Czas pracy (23°C):	60 sek.


¹ Podwójne utwardzanie (połączenie chemoutwardzania i utwardzania światłem).

² Zgodnie z ISO 4049:2009. Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.


Na ostateczny wynik mogą mieć wpływ warunki oceny określone w przepisach ISO.

JAK DZIAŁA PANAVIA™ SA Cement Universal?

DUŻA SIŁA WIĄZANIA DO MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH

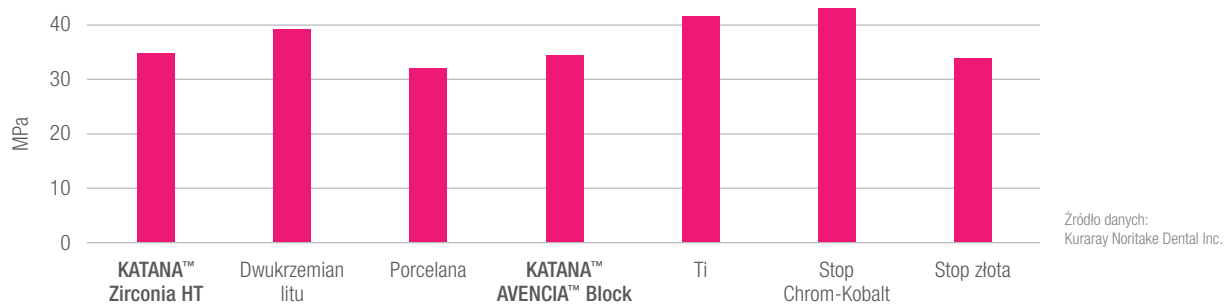

DUŻA SIŁA WIĄZANIA DO STRUKTURY ZĘBA

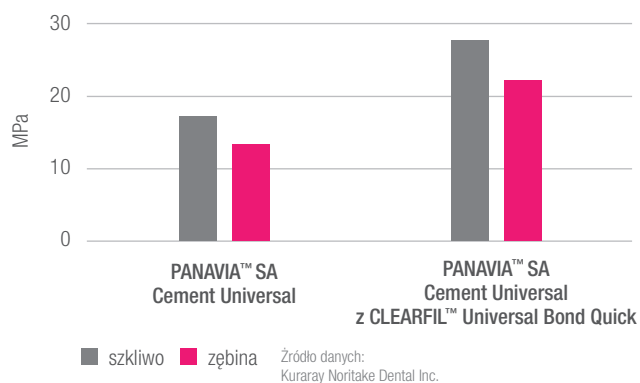


W celu zwiększenia siły wiązania w przypadkach o ograniczonej retencji można zastosować **CLEARFIL™ Universal Bond Quick**. Dzięki temu nie musisz już korzystać z CLEARFIL™ DC Activator.



Łatwe usuwanie nadmiaru
Bez podrażnień przyzębia.
Nakładasz, polimeryzujesz wstępnie od 1 do 2 sekund, usuwasz nadmiar i gotowe!



TRZY ODCIENIE ESTETYKI

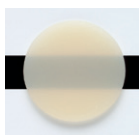

Universal (A2)
(do wszystkich przypadków)



White
(bardziej kryjący i wysyczony pigmentami)



Translucent
(wysoka przezierność)

TECHNOLOGIA

Unikalny monomer silanowy LCSi tworzy silne wiązanie chemiczne z porcelaną, dwukrzemianem litu i materiałami kompozytowymi.

Oryginalny monomer 10-MDP łączy się chemicznie ze szkliwem, zębina, stopami metali i tlenkiem cyrkonu.



Zeskanuj kod QR i zobacz modelowe cementowanie z PANAVIA™ SA Cement Universal



MATERIAŁ

PANAVIA™ SA Cement Universal

PANAVIA™ V5



WYBIERZ NAJWIĘKSZĄ SIŁĘ WIĄZANIA I NAJWYŻSZĄ ESTETYKĘ W KAŻDYM PRZYPADKU

Przewidywalność, siła wiązania i pewność, że efekty zabiegu będą zawsze na najwyższym poziomie – sprawiają, że system do cementowania PANAVIA™ V5 to rozwiązanie stworzone dla profesjonalistów. Podwójnie utwardzany cement, powtarzalność i prostota procedur, a także wysoka estetyka stawiają PANAVIA™ V5 w pozycji niekwestionowanego lidera w przypadku stałego osadzania uzupełnień pośrednich oraz procedur post-and-core.

PRZEWIDYWALNOŚĆ EFEKTÓW — TO SIĘ CENI I DOCENIA!

KORZYŚCI I WSKAZANIA

KORZYŚCI

- ✓ Mocne i trwałe połączenie z zębem i uzupełnieniem protetycznym
- ✓ Doskonała estetyka i wysoka stabilność koloru
- ✓ Łatwa aplikacja, osadzanie i usuwanie nadmiarów
- ✓ Te same komponenty i jednakowa procedura przy każdym wskazaniu
- ✓ Pasty typu try-in zapewniają przewidywalne efekty i fantastyczną estetykę

WSKAZANIA

- ✓ Cementowanie koron, mostów, wkładów typu inlay/onlay
- ✓ Cementowanie licówek
- ✓ Cementowanie mostów i szyn adhezyjnych
- ✓ Cementowanie uzupełnień protetycznych na łącznikach implantologicznych
- ✓ Cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych

DANE TECHNICZNE

Zawartość wypełniacza: 61% wag. (38% obj.)

Wytrzymałość na zginanie^{1,2}: 127 MPa

Moduł elastyczności^{1,2}: 6.3 GPa

Wytrzymałość na ściskanie¹: 310 MPa

Sorpcja wody^{1,2}: 21 µg/mm³

Grubość warstwy^{1,2}: około 12 µm

Nieprzepuszczalność

promieniowania X²: 180% Al

Uwalnianie jonów fluoru¹: 58 µg/cm²

Czas pracy (23°C): 2 min.

¹ Podwójne utwardzanie pasty (połączenie samoutwardzania i utwardzania światłem).


² Zgodnie z normą ISO 4049:2009.

Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc. Na wynik końcowy mogą mieć wpływ drobne warunki oceny. Patrz przepisy ISO.1.

JAK DZIAŁA PANAVIA™ V5?

SIŁA WIĄZANIA DO TKANEK ZĘBA

(wytrzymałość na ścinanie do zęba ludzkiego po 3000 cyklach termicznych)

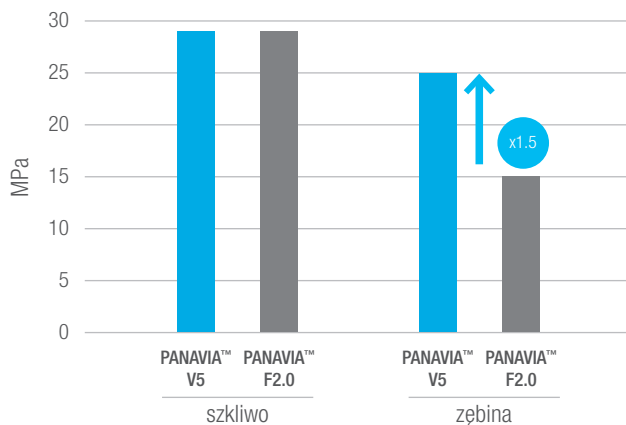


Warunki pomiaru

Próbki stanowiły zęby ludzkie opracowane papierem ściernym o gradacji #1000 (do próby wytrzymałości na ścinanie) oraz zęby bydlęce opracowane papierem ściernym o gradacji #1000 (do próby wytrzymałości na rozciąganie), na powierzchni 3 mm. Po nałożeniu CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus na powierzchnię połączenia, nałożono PANAVIA™ V5 i utrzymywano uzupełnienia pod naciskiem. Ich brzegi utwardzono światłem z dwóch kierunków przy użyciu Pen Cure 2000 przez 10 sekund każdy (dla testu wytrzymałości na ścinanie) lub utwardzono chemicznie (dla testu wytrzymałości na rozciąganie). Po utwardzeniu zanurzono je na jeden dzień w wodzie o temperaturze 37°C, poddawano cyklowi termicznemu (4-60°C, 3000 razy /TC3000/ lub 4000 razy /TC4000/) i oceniano zgodnie ze wzorcem pod względem wytrzymałości na ścinanie lub wytrzymałości na rozciąganie.

SIŁA WIĄZANIA DO MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH

(po wykonaniu 3000 cyklach termicznych)

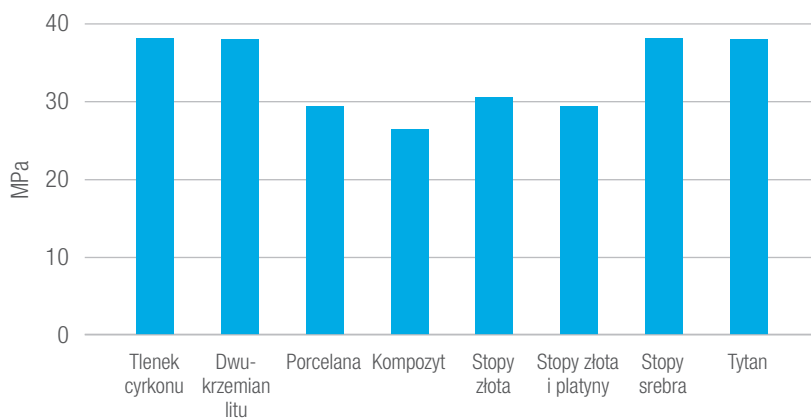

Warunki pomiaru


Piaskowanie (cyrkon, metale inne niż tytan, kompozyt)
Opracowanie przy użyciu papieru ściernego #1000 (porcelana, szkło, tytan)
Powierzchnia połączenia: ϕ 5 mm
Po nałożeniu CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus na powierzchnię połączenia, nałożono PANAVIA™ V5 i utrzymywano uzupełnienia pod naciskiem. Brzegi utwardzono światłem z dwóch kierunków przez 10 sekund, używając Pen Cure 2000. Zespolone próbki zanurzono w wodzie (37°C) na jeden dzień, poddano cyklowi termicznemu (4-60°C, 3000 razy), a następnie oceniono wytrzymałość połączenia.

Przyrząd pomiarowy

Augoraph AG-100kN (Shimadzu) przy prędkości trawersu 1 mm/min.

Pomiar wykonany przez firmę Kuraray Noritake Dental Inc.
Wartości mogą się różnić w zależności od warunków pomiaru.

STABILNOŚĆ KOLORU

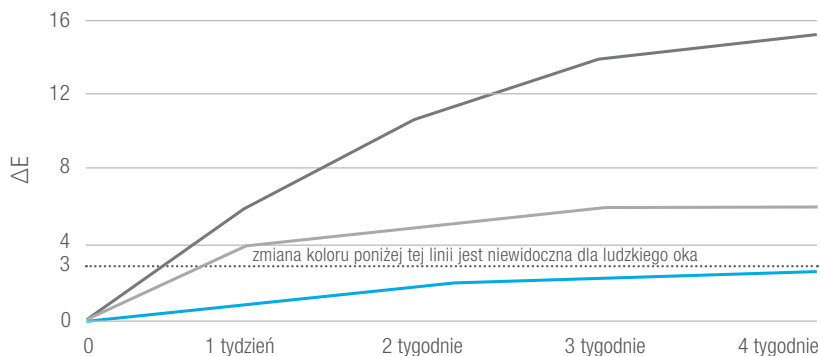

Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc. Próbki były postarzone w wodzie o temperaturze 70 stopni Celsjusza.

* Nie jest znakiem towarowym Kuraray Co., Ltd.



5 WYSOCE ESTETYCZNYCH ODCIENI

Możliwość dopasowania odcieni cementu do indywidualnych wymagań ułatwia uzyskanie oczekiwanych rezultatów za każdym razem. Pasty próbne PANAVIA™ V5 Try-in są dostępne w każdym z pięciu odcieni cementu.



Universal (A2)
(do wszystkich przypadków)



Clear
(bardziej przezierny)



Brown (A4)
(bardziej wysyczony pigmentami)



White
(bardziej kryjący, wysyczony pigmentami)



Opaque
(chemoutwardzalny, kryjący przebarwienia)

TECHNOLOGIA TOUCH-CURE

Blokuje połączenie adhezyjne podczas kontaktu pomiędzy PANAVIA™ V5 Tooth Primer a PANAVIA™ V5 Pastę, tworząc silne połączenie ze szkliwem i zębina. Jednocześnie przyspiesza polimeryzację (samoutwardzanie) cementu dwuskładnikowego, co jest gwarantem wyższej skuteczności. Monomer 10-MDP w PANAVIA™ V5 Tooth Primer i CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus odpowiadają za chemiczne wiązanie z cyrkonem, stopami metali, zębina i szkliwem.



Oryginalny monomer 10-MDP łączy się chemicznie ze szkliwem, zębina, stopami metali i tlenkiem cyrkonu.

Zeskanuj kod QR i zobacz modelowe cementowanie z PANAVIA™ V5



SKŁADNIKI SYSTEMU

PANAVIA™ V5
PANAVIA™ V5 Tooth Primer
CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus
Wytrawiacz K-ETCHANT
PANAVIA™ V5 Try-in Pasty próbne

PANAVIA™ Veneer LC



MASZ CZAS, BY DOPRACOWAĆ DETALE

Podczas wykonywania zabiegów wymagających dużej uwagi, jak cementowanie licówek, każdy lekarz dentysta potrzebuje czasu – szczególnie w przypadku osadzania wielu uzupełnień jednocześnie. Aby uzyskać najlepsze efekty estetyczne, należy działać sprawnie, pewnie i z przekonaniem, że nasz wysiłek przyniesie pożądane efekty!

PANAVIA™ Veneer LC to zestaw światłoutwardzalnych cementów kompozytowych o fantastycznej stabilności w naturalnym oświetleniu, dzięki czemu masz aż 200 sekund* na pracę z materiałem.

Wyróżnikiem PANAVIA™ Veneer LC są także 4 odcienie, wysoce odporne na przebarwienia brzeżne, a tym samym doskonale przekładające się na najwyższą estetykę przez długie lata.

*Czas pracy: wrażliwość na światło (8000 lux, ISO 4049).

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE PRZY KAŻDYM WYZWANIU

KORZYŚCI I WSKAZANIA

KORZYŚCI

- ✓ Optymalny komfort stosowania dzięki odpowiedniej lepkości
- ✓ Łatwe usuwanie nadmiarów po jednosekundowej polimeryzacji wstępnej
- ✓ Niewidoczne granice połączenia cementowego dzięki małej grubości warstwy i sferycznym wypełniaczom submikronowym
- ✓ Doskonała polerowalność i stabilność koloru
- ✓ Silne i trwałe połączenie

WSKAZANIA

- ✓ Cementowanie ceramicznych i kompozytowych licówek oraz wkładów inlay/onlay o grubości mniejszej niż 2 mm

DANE TECHNICZNE

Zawartość wypełniacza: 66% wag. (47% obj.)

Wytrzymałość na zginanie^{1,2}: 111 MPa

Moduł elastyczności^{1,2}: 5.4 GPa

Wytrzymałość na ściskanie¹: 388 MPa

Grubość warstwy: około 8 µm

Nieprzepuszczalność


promieniowania X²: 110% Al

Czas pracy (23°C)³: 200 sek.

¹ Podwójne utwardzanie pasty (połączenie samoutwardzania i utwardzania światłem). ² Zgodnie z normą ISO 4049. ³ Czas pracy: wrażliwość na światło (8000 lux, ISO 4049). Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc. Na wynik końcowy mogą mieć wpływ różnice w warunkach oceny. Patrz przepisy ISO.1.

JAK DZIAŁA PANAVIA™ Veneer LC

SILA WIĄZANIA DO TKANEK ZĘBA

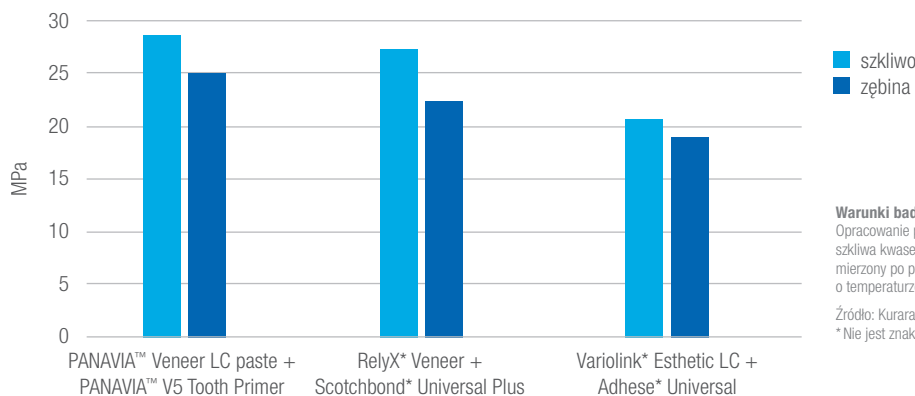


Warunki badania

Opracowanie papierem ściernym #1000, wytrawianie szkliwa kwasem fosforowym, płatek SUS (3mm), mierzony po przechowywaniu w wodzie o temperaturze 37°C przez 1 dzień.

Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.

* Nie jest znakiem towarowym firmy KURARAY CO., LTD.

SILA WIĄZANIA DO MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH

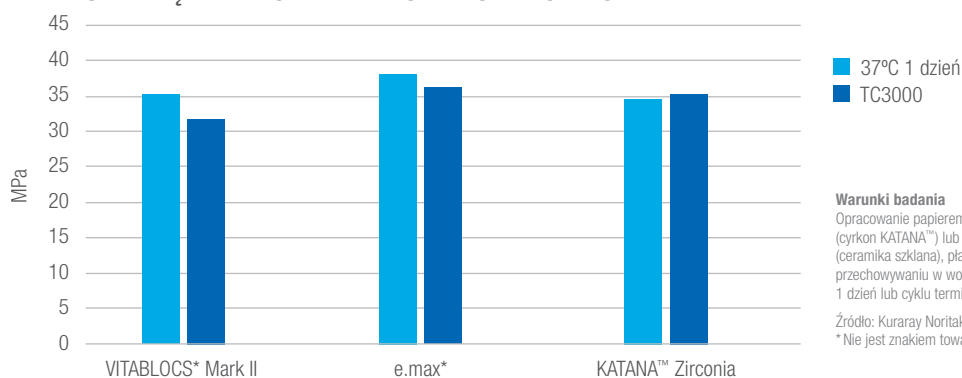


Warunki badania

Opracowanie papierem ściernym #1000, piaskowanie (cyrkon KATANA™) lub trawienie kwasem fluorowodorowym (ceramika szklana), płatek SUS (śr. 5mm), mierzony po przechowywaniu w wodzie w temperaturze 37°C przez 1 dzień lub cyklu termicznym w temperaturze 4-60°C.

Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.

* Nie jest znakiem towarowym firmy KURARAY CO., LTD.

UTRZYMANIE POŁYSKU

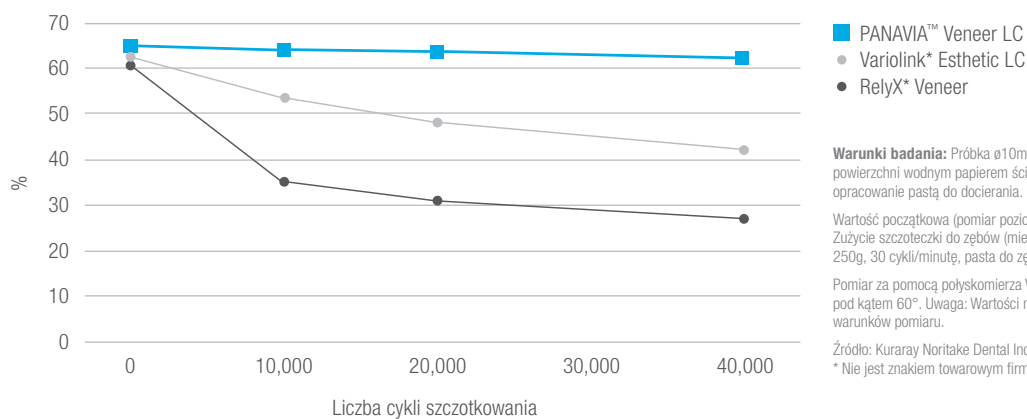

Warunki badania: Próbkę ø10mm, grubość 2mm. Po wygładzeniu powierzchni wodnym papierem ściernym od #1000 do #2500, końcowe opracowanie pastą do docierania.

Wartość początkowa (pomiar poziomu połysku po polerowaniu*). Zużycie szczoteczki do zębów (mierzone po 40.000 cyklach z obciążeniem 250g, 30 cykli/minutę, pasta do zębów 10 wt%).

Pomiar za pomocą połyskomierza VG 2000 (Nippon Denshoku Kogyo) pod kątem 60°. Uwaga: Wartości mogą się różnić w zależności od warunków pomiaru.

Źródło: Kuraray Noritake Dental Inc.

* Nie jest znakiem towarowym firmy KURARAY CO., LTD.



4 WYSOKO ESTETYCZNE ODCIENIE

Dzięki odcieniom dopasowanym do indywidualnych potrzeb zabiegowych, możesz łatwo uzyskać naturalne rezultaty. Pasty próbne PANAVIA™ V5 Try-In pasują do odcieni PANAVIA™ Veneer LC.



Universal (A2)
(do wszystkich przypadków)



Clear
(bardziej przezierny)



Brown (A4)
(bardziej wysyczony pigmentami)



White
(bardziej kryjący, wysyczony pigmentami)

TECHNOLOGIA TOUCH-CURE

Blokuje połączenie adhezyjne podczas kontaktu pomiędzy PANAVIA™ V5 Tooth Primer a PANAVIA™ V5 Paste, tworząc silne połączenie ze szkliwem i zębina. Jednocześnie przyspiesza polimeryzację (samoutwardzanie) cementu dwuskładnikowego, co jest gwarantem wyższej skuteczności. Monomer 10-MDP w PANAVIA™ V5 Tooth Primer i CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus odpowiadają za chemiczne wiązanie z cyrkonem, stopami metali, zębina i szkliwem.



Oryginalny monomer 10-MDP łączy się chemicznie ze szkliwem, zębina, stopami metali i tlenkiem cyrkonu.

Zeskanuj kod QR i zobacz modelowe cementowanie z PANAVIA™ Veneer LC



SKŁADNIKI SYSTEMU

PANAVIA™ Veneer LC
PANAVIA™ V5 Tooth Primer
CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus
Wytrawiacz K-ETCHANT
PANAVIA™ V5 Try-in Pasty próbne

KATANA™ Cleaner



SKUTECZNIE USUWAJ ZANIECZYSZCZENIA, BY OPTYMALIZOWAĆ PROCEDURY ADHEZYJNE

Jakość wiązania (a wraz z nią trwałość uzupełnień pośrednich) nie zależy wyłącznie od wybranego systemu cementowania i jego właściwego zastosowania. Czyste i odpowiednio przygotowane powierzchnie to klucz do uzyskania długiego i silnego połączenia.

KATANA™ Cleaner opracowaliśmy, by w maksymalny sposób zoptymalizować procedury cementowania adhezyjnego. Dzięki powierzchniowo czynnym właściwościom soli 10-MDP KATANA™ Cleaner wykazuje doskonałe parametry czyszczące. Warto dodać, że nadaje się do stosowania wewnątrz i zewnątrzustnego oraz jest doskonałym rozwiązaniem do chemicznego oczyszczania powierzchni adhezyjnych (tkanek zęba i uzupełnień protetycznych), które mogą ulec zanieczyszczeniu śliną lub krwią po przymiarce.

SPRAWDZA SIĘ WE WSZYSTKICH PROCEDURACH ADHEZYJNYCH

KORZYŚCI I WSKAZANIA


KORZYŚCI

- ✓ Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne
- ✓ Wysoka skuteczność czyszczenia
- ✓ Łatwa procedura – wcieranie, spłukanie i osuszenie
- ✓ Szybka aplikacja – 10 sekund wcierania
- ✓ Dobrze udokumentowana skuteczność czyszczenia przez ośrodki uniwersyteckie*

WSKAZANIA

- ✓ Usuwanie zanieczyszczeń z uzupełnień ceramicznych, cyrkonowych, kompozytowych, metalowych oraz wkładów z włókien po przymiarkach wewnętrznych
- ✓ Oczyszczanie powierzchni opracowanego zęba (ubytków, kanałów korzeniowych i zrębów zęba) oraz łączników implantologicznych

SIŁA WIĄZANIA DO MATERIAŁÓW KATANA™ Zirconia HT

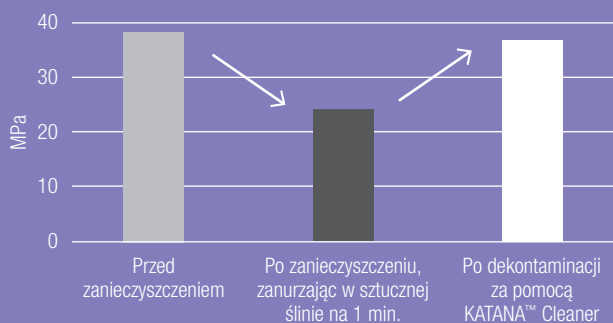

Warunki pomiaru:

Powierzchnia podłoża:

Po opracowaniu papierem ściernym #1000, płaskowanie cząstkami korundu. Powierzchnia pokrycia ϕ 5mm, przechowywanie w wodzie o temp. 37°C przez 1 dzień.

Cement: PANAVIA™ V5

Źródło danych: Kuraray Noritake Dental Inc.

Wartości liczbowe różnią się w zależności od warunków pomiaru.

OBSŁUGA JEDNĄ RĘKĄ



* Fucong T, et al., Effectiveness of different cleaning measures on the bonding of resin cement to saliva-contaminated or blood-contaminated zirconia, J Dent. 2022 Mar 3;120:104084.
Taiseer A., et al., Cleaning Zirconia Surface Prior To Bonding: A Comparative Study of Different Methods and Solutions, J Prosthodont. 2022 Mar;31(3):239-244.
Fucong T., et al., Effects of dentin surface cleaning on bonding of a self-etch adhesive to root canal sealer-contaminated dentine, J Dent. 2021 Sep; 112: 103766.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENÍ

PANAVIA™ V5



PROFESSIONAL KIT - #3600-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [jedna strzykawka / odcień (2,4 ml/4,2 g): Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque], PANAVIA™ V5 Try-in Paste [jedna strzykawka / odcień (1,8 ml): Universal (A2), Clear, Brown (A4), White, Opaque], strzykawka K-ETCHANT (3 ml), 30 końcówek mieszających, 10 końcówek Endo (S)¹, 50 aplikatorów (małe<srebrne>)¹, 1 tacka do mieszania (FPN)¹, 20 końcówek z igłą (E)¹



STANDARD KIT - Universal (A2) #3601-EU - Clear #3602-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 Pasta [jedna strzykawka / odcień (4,6 ml/8,1 g): uniwersalny (A2), przezroczysty], K-ETCHANT strzykawka (3 ml), 15 końcówek mieszających, 5 końcówek Endo (S)¹, 50 aplikatorów (małe<srebrne>)¹, 1 tacka do mieszania (FPN)¹, 20 końcówek z igłą (E)¹



INTRODUCTORY KIT - Universal (A2) #3604-EU - Clear #3605-EU

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 Pasta [jedna strzykawka / odcień (2,4 ml/4,2 g): uniwersalny (A2), przezroczysty], 10 końcówek mieszających, 50 aplikatorów (małe<srebrne>)¹, 1 tacka do mieszania (FPN)¹



ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY

PANAVIA™ V5 Tooth Primer (4 ml) #3635-EU

CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (4 ml) #3637-EU

PANAVIA™ V5 Paste (4,6 ml/8,1 g),

20 końcówek mieszających

Universal (A2)	#3611-EU	Clear	#3612-EU
Brown (A4)	#3613-EU	White	#3614-EU
Opaque	#3615-EU		

PANAVIA™ V5 Try-in Paste (1,8 ml)

Universal (A2)	#3621-EU	Clear	#3622-EU
Brown (A4)	#3623-EU	White	#3624-EU
Opaque	#3625-EU		

K-ETCHANT Syringe (3 ml)

20 końcówek z igłą (E)	#3252-EU
20 końcówek mieszających	#3626-EU
20 końcówek do endo (S)	#3629-EU

PANAVIA™ SA Cement Universal



ZESTAW POJEDYNCZY HANDMIX

- #4202-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Handmix (Universal (A2))
 - #4203-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Handmix (White)
 - #4204-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Handmix (Translucent)
- 1 strzykawka / odcień (9,2 g/5,0 ml)

WIELOPAK HANDMIX

- #4206-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Handmix Double Pack (Universal (A2))
- 2 strzykawki / odcień (9,2 g/5,0 ml), szpatułka do mieszania, tacka



ZESTAW POJEDYNCZY AUTOMIX

- #4212-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (Universal (A2))
 - #4213-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (White)
 - #4214-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix (Translucent)
- 1 strzykawka / odcień (8,2 g/5,0 ml), 20 końcówek mieszających

WIELOPAK AUTOMIX

- #4210-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix Value Pack (Universal (A2))
 - #4211-EU PANAVIA™ SA Cement Universal Automix Value Pack (Translucent)
- 3 strzykawki / odcień (8,2 g/4,6 ml), 40 końcówek mieszających, 10 końcówek Endo (SS)



- #4218-EU
- 20 końcówek mieszających



- #4221-EU
- 20 końcówek Endo

PANAVIA™ Veneer LC



- #4500 Standard Kit Universal (A2)
- #4505 Pasta Universal (A2) (2,6 g/1,5 ml)
- #4513-EU Aplikatory (16 g) 20 szt.

PANAVIA™ Veneer LC KITS

- #4500 Standard Kit Universal (A2)
- #4501 Standard Kit Clear

PANAVIA™ Veneer LC Paste (2,6 g/1,5 ml)

- #4505 Pasta Universal (A2)
- #4506 Pasta Clear
- #4507 Pasta Brown (A4)
- #4508 Pasta White

- #4513-EU PANAVIA™ Veneer LC Aplikatory (16 g) 20 szt.

KATANA™ Cleaner

- #3970-EU KATANA™ Cleaner (4,0 ml)





KONTAKT

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Niemcy
Tel. +48 662 281 282
www.kuraraynoritake.eu/pl
dental-poland@kuraray.com

- Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do opakowania.
- Specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Kolor wydruku może nieznacznie różnić się od rzeczywistego.

KATANA jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy NORITAKE CO., LIMITED. PANAVIA i CLEARFIL są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy KURARAY CO., LTD.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia

