


Universal Excellence

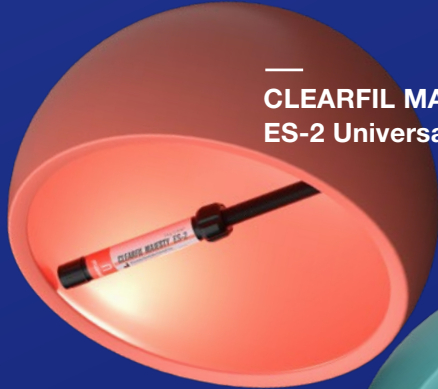

—
**CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 Universal**



—
**KATANA™
Cleaner**



—
**CLEARFIL™
Universal Bond Quick 2**



—
**CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal**



—
**PANAVIA™
SA Cement
Universal**

Viedi procesi ar racionalizētiem risinājumiem

Mazāk komponentu un vienkāršas, racionalizētas procedūras

Kuraray Noritake Dental Inc. lieliski izprot mūsdienīgas zobārstniecības prakses vajadzības. Sarežģītu procedūru, intensīvu darba grafiku un pacientu vajadzību apmierināšanas līdzsvarošana nav viegli izpildāms uzdevums. Tādēļ mēs jau gadu desmitiem neatlaidīgi cenšamies racionalizēt, uzlabot un pilnveidot ikvienu jūsu darba procesa posmu. Mūsu vīzija ir skaidra: pasaule, kurā materiāli un instrumenti jūsu rokās darbojas nevainojami, kurā sarežģītība ir samazināta līdz minimumam un kurā jums tiek dots pietiekami daudz laika, lai koncentrētos uz vissvarīgāko: katra pacienta individuālajām vēlmēm un vajadzībām. Tā ir zobārstniecības nākotne un kopīgiem spēkiem mēs varam to īstenot.




UE
Universal
Excellence

Mazāka sarežģītība

Kādēļ izvēlēties universālus produktus?

Mēs apzināmies, ka efektivitātes un kvalitātes līdzsvara nodrošināšanai ir milzīga nozīme. Tādēļ mēs esam apņēmušies izstrādāt risinājumus, kuros nemanāmi apvienoti abi šie nozīmīgie faktori. Mūsu savstarpēji saskaņotie produkti, kas izstrādāti, pielietojot modernākās tehnoloģijas, piedāvā intuitīvu lietošanu un nodrošina nemainīgi uzticamus rezultātus. Mērķis? Ļaut jums koncentrēties uz lietām, kas ir patiesi būtiskas.

Šis ir Universal Excellence princips!

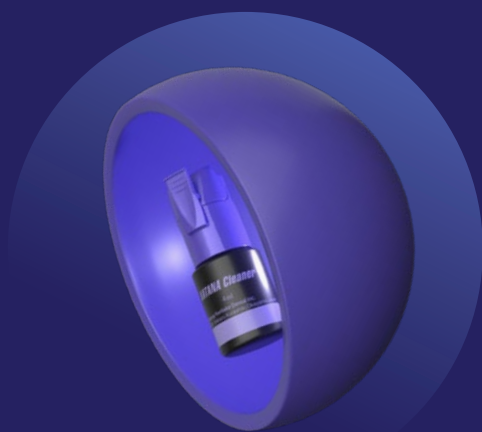


KATANA™
Cleaner

Efektīva
attīrīšana



CLEARFIL™
Universal Bond Quick 2


Vienkāršota sasaistes
nodrošināšana

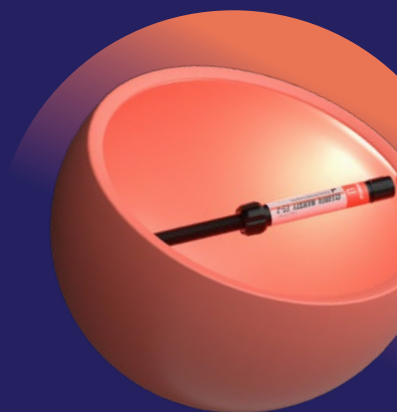

CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 Universal


Dabiskas
viena toņa
restaurācijas

Lielāka pārliiecība

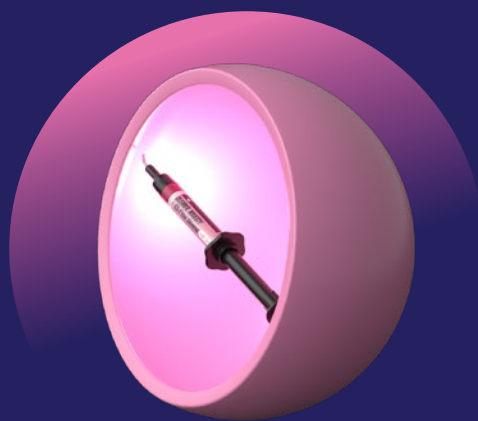

CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal

**Intuitīva toņa
pielāgošana**

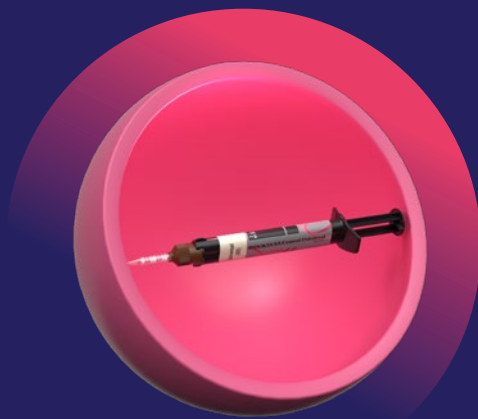

PANAVIA™ SA Cement
Universal

**Racionalizēta
cementēšana**

Kādēļ izvēlēties universālus procedūru risinājumus?

Ikviens mūsu universālais produkts ir rūpīgi izstrādāts tā, lai tas nemanāmi iekļautos jūsu ikdienas darbplūsmā. Taču šo materiālu savstarpējā sinerģija ir tas faktors, kas patiesi sniedz vislielākās priekšrocības. Tādēļ mūsu produktu izstrādes komandas Japānā cieši sadarbojas, nodrošinot ideālu ikviena produkta savstarpējo saderību.



Salāgota tehnoloģija

Mūsu produkti ir radīti viens otram un paredzēti saskaņotam darbam. Jūs varat nedomāt par sarežģītām procedūrām un koncentrēties uz pacientu aprūpi.

Intuitivitāte un elastība

Mūsu Universal Excellence produkti ir vienkārši lietojami un to izmantošanai ir nepieciešamas vien dažas darbības. Turklāt katrs atsevišķais produkts ir saderīgs ar citiem Kuraray Noritake produktiem. Izvēlieties visus nepieciešamos produktus un racionalizējiet savu ikdienas darbu, izmantojot Universal Excellence priekšrocības.

Minimāli invazīvo tehnoloģiju atbalsts

Mēs izstrādājam risinājumus, kas ļauj veikt saudzīgu, uz konkrētiem defektiem vērstu ārstēšanu, vienmēr uzmanības centrā izvirzot pacienta labsajūtu.

Racionalizēts inventārs, mazāks atkritumu daudzums

Pateicoties mazākam komponentu daudzumam, jūsu komanda varēs viegli pārvaldīt inventāru, nodrošinot samazinātu ietekmi uz vidi un ierobežojot atkritumu apjomu

Tiešā zobārstniecība

Mazāks komponentu daudzums, maksimāla efektivitāte

Neatkarīgi no tā, vai veicat priekšējo vai aizmugurējo zobu kavitāšu restaurāciju, mēs varam piedāvāt konkrētajai procedūrai visatbilstošāko produktu kombināciju. Tā tiks pielāgota jūsu vēlmēm, vienlaikus palīdzot jums pieņemt lēmumus. Uzziniet, kā mūsu produkti var racionalizēt jūsu restaurācijas procedūras:

Sagatavošana

Pēc zoba sagatavošanas izmantojiet KATANA™ Cleaner, kas, pateicoties MDP sāls saturam, nodrošina izcilu tīrīšanas efektu.

Sasaiste

Uzklājiet CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2, izmantojot savu iecienītāko kodināšanas tehniku. Viena kāрта – nekādas gaidīšanas – samazina piesārņojuma risku un nodrošina stabilu, vienmērīgu sasaisti bez uzkrāšanās.

Aizpildīšana

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal piedāvā universālu pastveida produktu kavitāšu restaurācijai – viena toņu koncepcija un vienkārša lietošana. Vai arī izvēlieties CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal izcilai toņu saskaņošanai ar tikai divu toņu klāstu. Šī produkta izcilās mehāniskās īpašības ir līdzvērtīgas pastveida kompozītiem.

Gala apstrāde un pulēšana

Pateicoties progresīvajai pildvielas tehnoloģijai, CLEARFIL MAJESTY™ ES sērijas produktu gala apstrāde un pulēšana pēc restaurācijas darbu pabeigšanas ir ātra un vienkārša. TWIST™ DIA for Composite ir ideāls papildinājums intensīva spīduma iegūšanai.

Protezējošā zobārstniecība

Spēcīga sasaiste, ilgs kalpošanas laiks

Zemas vai ierobežotas noturības preparātu netiešo restaurāciju ilgmūžība ir ļoti atkarīga no saistvielas kvalitātes. Adhezīvās cementēšanas procedūras ir labākā izvēle. Pat situācijās, kad adhezīvā cementēšana nav obligāta, tā bieži vien nodrošina zināmas priekšrocības. It īpaši, ja adhezīva uzklāšanas procedūra ir vienkārša un ērta. Mūsu pašadhezīvais kompozīts PANAVIA™ SA Cement Universal sniedz ikdienas cementēšanas procedūrām plašas priekšrocības.

Sagatavošana

Veiciet nepieciešamo sagatavošanu un noņemiet (digitālo) nospiedumu. Izvēlieties netiešajai restaurācijai vēlamo materiālu. Piemēram, KATANA™ Multi-Layered Zirconia, kas ir piemērots monolītai izmantošanai pat estētikas zonās, gan kombinācijā ar mikroslāņošanu, gan bez tās.

Piemērīšana un attīrīšana

Pēc restaurācijas elementa sākotnējās uzstādīšanas uz virsmām ir iespējams piesārņojums. Aktuālā prakse paredz pirmapstrādes uzsākšanu adhezīva cementēšanai šajā posmā. Gadījumā, ja tehniķis jau ir veicis pirmapstrādi pirms piemērīšanas procedūras, KATANA™ Cleaner ir lielisks risinājums piesārņojuma notīrīšanai no protēzēm. Ierīvējiet produktu adhezīva virsmā desmit sekundes, tad noskalojiet un nožāvējiet.

Cementēšana

Pēc attīrīšanas veiciet restaurācijas elementa cementēšanu ar PANAVIA™ SA Cement Universal. Tādējādi tiek nodrošināta spēcīga sasaiste ar cirkonija oksīdu, kā arī stikla keramiku, pateicoties patentētajiem LCSi un MDP monomēriem. Nav nepieciešama atsevišķa praimera lietošana. Izmantojiet CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2, lai nodrošinātu uzlabotu sasaisti ar zoba audiem.



**Pieci produkti:
padziļināts ieskats**






KATANA™ Cleaner

Efektīva attīrīšana

Tīra virsma ir būtisks faktors optimālas sasaistes nodrošināšanai. KATANA™ Cleaner ir īpaši izstrādāts ātrai un efektīvai piesārņotāju novēršanai gan uz zobu virsmām, gan restaurācijas elementiem. Līdzekļa sastāvā esošais virsmaktīvais MDP sāls, kas iegūts no oriģinālā MDP, iedarbojas vien 10 berzēšanas sekunžu laikā, atjaunojot nevainojami tīru, lielisku sasaisti nodrošinošu virsmu. Ātrākais spēcīgais un uzticamais sasaistes nodrošināšanas veids.

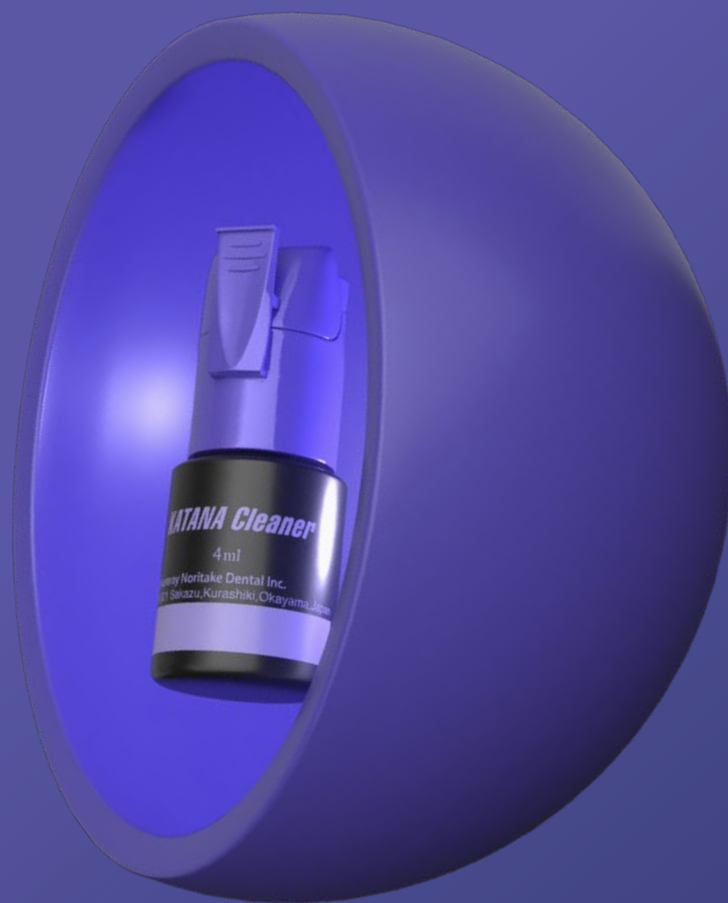

Ātrums un efektivitāte

Izmantojiet KATANA™ Cleaner ik reizi, kad nepieciešams īstenot ātru un vienkāršu tīrīšanas procesu, kas sagatavo virsmu sasaistei vai cementēšanai. Vienkārši uzklājiet, 10 sekundes ieberzējiet, noskalojiet un nožāvējiet – jūsu virsma ir gatava cementēšanai.

Intraorāls un ekstraorāls lietojums

Atšķirībā no citiem attīrītājiem, KATANA™ Cleaner pH vērtība ir 4,5, kas nozīmē, ka šis līdzeklis ir droši lietojams ne tikai ekstraorāli, bet arī intraorāli.

Universāls līdzeklis lietošanai ar dažādiem materiāliem

Neatkarīgi no tā, vai izmantojat to zobu virsmu vai restaurācijas materiālu attīrīšanai, KATANA™ Cleaner nodrošina uzticamas sasaistes atbalstu.

Galvenais komponents efektīvas tīrīšanas nodrošināšanai

KATANA™ Cleaner satur MDP sāli, kas izgatavots uz 10-metakriloiloksidecil-dihidrogēna fosfāta bāzes. Uzklāts uz piesārņotas virsmas, tas nodrošina uzticamu un efektīvu tās attīrīšanu. Ar ātru un vienkārši izpildāmu procedūru KATANA™ Cleaner atjauno optimālus saķeres apstākļus uz zoba un restaurācijas elementa.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

Universāla saistviela

Izstrādāts, lai uzlabotu jūsu darbplūsmu, CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 nodrošina stabilu veikspēju dažādās klīniskajās situācijās. Šis mūsdienīgais universālais vienpakāpes adhezīvs ir Universal Excellence portfeļa kodols. Tas ir ārkārtīgi ātri un viegli lietojams. Ieberzējiet, nožāvējiet un sacietiniet, izmantojot gaismu. Piemērots gan tiešās, gan netiešās adhēzijas procedūrām. Kombinējams ar gaismas un divkārtšās cietināšanas kompozīta bāzes materiāliem.



Ātra procedūra

Nav nepieciešams gaidīšanas laiks
– lietošana ir ātra un ļauj racionalizēt procedūru.

Nemainīgi spēcīga un izturīga sasaiste

Pateicoties izmantotajai Advanced Monomer Technology monomēru tehnoloģijai, adhezīvs nodrošina uzlabotu sasaisti ar emalju, dentīnu un kompozītu, nodrošinot restaurētās zonas ilgumžību.

Uzlabota plūstamība

Uzlabota plūstamība, kas ļauj izveidot plānu, vienmērīgu saistvielas slāni. Tādējādi tiek novērsts materiāla uzkrāšanās risks un nodrošināta precīzas sagataves morfoloģijas uzturēšana.

Ātruma, uzticamības un daudzpusības noslēpums – Advanced Monomer Technology

Oriģinālais MDP monomērs: nodrošina spēcīgu un izturīgu sasaisti ar hidroksiapatītu un plašu citu restaurācijas materiālu klāstu.


Amīda monomērs: nodrošina ātru iekļaušanos zoba struktūrā un polimerizācijas rezultātā veido stabilu, hidrofobu, kā arī savstarpēji saistītu tīklu.

Uretāna-tetra-metakrilāts (UTMA): monomērs, kas veido ārkārtīgi plānu, izturīgu un stabilu saistvielas slāni, nodrošinot uzlabotu paša saistvielas slāņa izturību. Tā rezultātā tiek panākta uzlabota noturība pret spēkiem, kas izraisa saraušanos.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

**Uzlabots
viena toņa
restaurācijas
process**

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal tika izstrādāts, lai novērstu nepieciešamību pēc sarežģītas toņa piemeklēšanas procedūras un uzlabotu klīnisko efektivitāti, nemazinot estētiskos rezultātus. Produktu klāstā iekļauti tikai trīs toņi. Uzlabotā gaismas izkliedes tehnoloģija ļauj kompozītam dabiski integrēties apkārtējā zoba struktūrā, samazinot nepieciešamību veikt sarežģītu toņa izvēles procesu un palielinot pārliecību par lielisku procesa rezultātu.

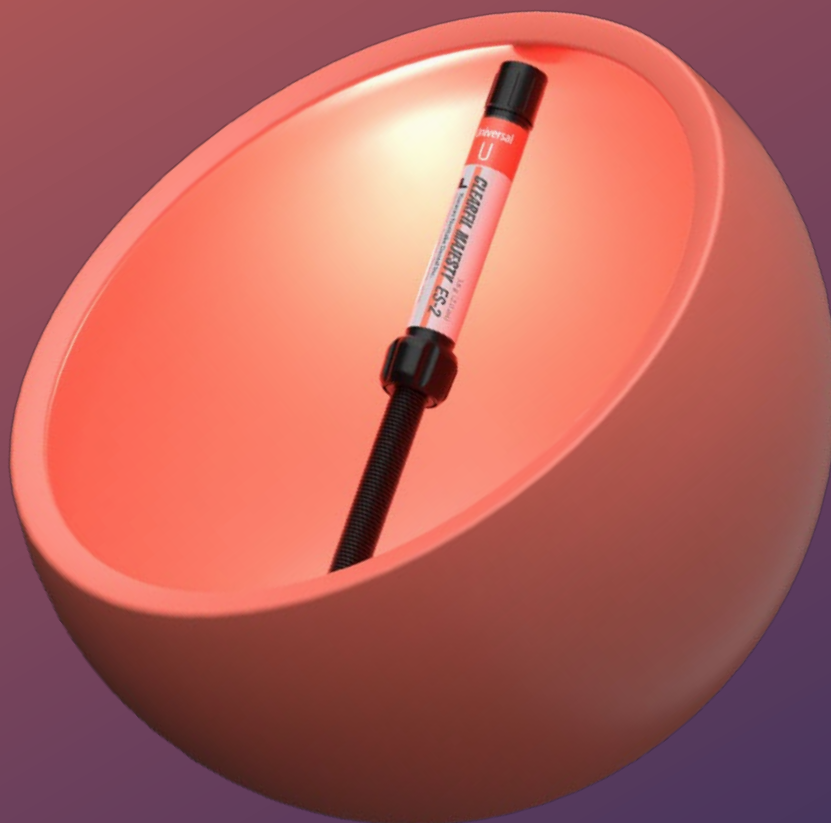

Vienkāršota darbplūsma

Pateicoties samazinātam toņu skaitam, varēsiet veikt estētiski skaistas restaurācijas ar minimālu piepūli.

Ērta un vienkārša lietošana

Viegla modelēšana, zems lipīguma līmenis un ilgs izstrādes laiks – šis kompozīts darbojas nevainojami.

Izturīga veikspēja

Tā kā vairums tiešo kompozīta restaurāciju tiek veiktas aizmugurējiem zobiem, materiāla veikspēja ir ļoti svarīga. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal nodrošina izcilu nodilumizturību, noturību pret saraušanos un dabisku optisko integrāciju. Tas ir viegli pulējams un uztur intensīvu spīdumu, nodrošinot emaljai līdzīgu apdari pat pēc ilgstošas berzes iedarbības.

Lieliskas toņu atbilstības un mehānisko īpašību apvienojums

Patentētā Light Diffusion Technology gaismas izkliedes tehnoloģija ļauj CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal nemanāmi integrēties apkārtējā zoba struktūrā. Optimāls submikronu pildvielu daļiņu, pildvielas satura, kompozīta matricas un patentētas silāna tehnoloģijas līdzsvars nodrošina uzticamu un labi sabalansētu mehānisko un optisko īpašību kombināciju.

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

**Intuitīva toņa
piemeklēšana –
tagad plūstoša**

Šis inovatīvais plūstošais kompozīts, kas pieejams divās plūstamības versijās, pārvērš toņa piemeklēšanu par vienkāršu uzdevumu – nav nepieciešama krāsu skala! Pateicoties tikai divu savstarpēji papildinošu toņu sistēmai, U (Universal) un UD (Universal dark), šis materiāls nemanāmi iekļaujas zoba struktūrā, ļaujot jums veikt nevainojamu restaurāciju ar minimālu piepūli. Produkta plašās izmantošanas iespējas un priekšrocības padara to piemērotu plašam lietojumu klāstam.



Nevainojami rezultāti

Pateicoties jūsu rīcībā esošajiem diviem toņiem un produkta dabiskajām saplūšanas īpašībām, nevainojamu rezultātu sasniegšana ir vien pāris vienkāršu darbību attālumā.

Viegli apstrādājama plūsma

Pielāgojiet plūstamību veicamā darba specifikai – izvēlieties Low vai Super Low plūstamības versiju. Abas produkta versijas nodrošina vieglu dozēšanu un vienkāršu formēšanu, padarot jūsu darbu priekpilnu.

Plašs indikāciju klāsts

Pateicoties produkta mehāniskajām īpašībām, kas viegli pielīdzināmas pastveida kompozītu sniegumam, šis plūstošais kompozīts ir lieliski piemērots izmantošanai pat augstai slodzei pakļautās zonās, piemēram, strādājot ar okluzālajām virsmām.

Lieliski sabalansēta toņu atbilstība un izturība

Gudri izstrādātā emaljai pielīdzinātas caurspīdības, dentīna iedvesmotas krāsu gammas un Light-Diffusion Technology gaismas izkliedes tehnoloģijas kombinācija ļauj nevainojami piemeklēt toni, neskatoties uz racionalizēto toņu klāstu. Īpaši izstrādātā submikronu pildvielu tehnoloģija savukārt nodrošina iespaidīgu izturību un izcilu pulējamību.

PANAVIA™ SA Cement Universal

Racionalizēta cementēšana

Iemiesojot viedu risinājumu būtību, PANAVIA™ SA Cement Universal transformē cementēšanas procesu, novēršot nevajadzīgu darbību veikšanas nepieciešamību. Nav nepieciešams atsevišķs praimeris – vienkārši uzklājat cementu un turpiniet darbu pie restaurācijas procesa. Izstrādāts izcilai saderībai ar dažādiem restaurācijas materiāliem, tostarp stikla keramiku, šis cements sniedz jums lielāku pārliecību par sagaidāmo rezultātu.



Vienā darbībā uzklājams cements

Izstrādāts sasaistei ar cirkoniju, metālu, kompozītu un stikla keramiku, šis materiāls novērš nepieciešamību pēc papildu praimeru izmantošanas, padarot jūsu darbplūsmu vienmērīgāku nekā jebkad agrāk.

Vienkārša lietošana

Šis produkts racionalizē jūsu darba procesu, vienlaikus nodrošinot vienkāršu lietošanu, ērtu dozēšanu un vieglu liekā materiāla noņemšanu bezrūpīgai lietošanas pieredzei.

Izvēles brīvība

Ja vēlaties pastiprināt sasaistes stiprību ar zobu struktūru konkrētos gadījumos, uzklājiet CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 papildu atbalstam.

Panākumu formula – mazāk darbību un augsta veiktspēja

PANAVIA™ SA Cement Universal sastāvā iekļautais unikālais LCSi monomērs veido robustu ķīmisku saikni ar kompozītiem, porcelānu un silīcija dioksīda tipa keramiku, piemēram, litija disilikātu. Tikmēr oriģinālais MDP monomērs nodrošina spēcīgas ķīmiskās saiknes izveidi ar zoba struktūru, cirkoniju un metālu. Šī viedi izstrādātā monomēru kombinācija ļauj šim pašadhezīvajam divkāršās cietināšanas kompozīta cementam veidot jaudīgu un izturīgu sasaisti, bez nepieciešamības izmantot atsevišķu praimeru.



Pasūtīšanas informācija

KATANA™ Cleaner

#3970-EU 4,0 ml x 1 pudelīte

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

#4042-EU Bottle Refill 5,0 ml x 1 pudelīte
#4044-EU Bottle Value Pack 5,0 ml x 3 pudelītes
#4046-EU Unit Dose Standard Pack 0,1 ml individuālā deva x 50 gab.,
sudraba uzklāšanas otiņa x 50 gab.

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

#4600-EU Low (U) 1 šļirce, 1,5 ml, 15 adatas uzgaļi
#4601-EU Low (UD) 1 šļirce, 1,5 ml, 15 adatas uzgaļi
#4620-EU Super Low (U) 1 šļirce, 1,5 ml, 15 adatas uzgaļi
#4621-EU Super Low (UD) 1 šļirce, 1,5 ml, 15 adatas uzgaļi

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

#3181-EU Universal (U) 1 šļirce, 2,0 ml
#3183-EU Universal Light (UL) 1 šļirce, 2,0 ml
#3184-EU Universal Dark (UD) 1 šļirce, 2,0 ml
#3182-EU Universal White (UW) 1 šļirce, 2,0 ml
#3191-EU Universal (U) 20 PLT, 0,25 g
#3193-EU Universal Light (UL) 20 PLT, 0,25 g
#3194-EU Universal Dark (UD) 20 PLT, 0,25 g
#3192-EU Universal White (UW) 20 PLT, 0,25 g

PANAVIA™ SA Cement Universal

#4202-EU Handmix Universal (A2) 1 šļirce 5,0 ml
#4203-EU Handmix White 1 šļirce 5,0 ml
#4204-EU Handmix Translucent 1 šļirce 5,0 ml
#4212-EU Automix Universal (A2) 1 šļirce, 8,2 g, 20 maisīšanas uzgaļi
#4213-EU Automix White 1 šļirce, 8,2 g, 20 maisīšanas uzgaļi
#4214-EU Automix Translucent 1 šļirce, 8,2 g, 20 maisīšanas uzgaļi



Viedāki
risinājumi
jūsu **darbam**



UE Universal
Excellence

Kontaktinformācija

**Kuraray Europe Benelux,
Nordics, Baltics, UK & Ireland**

Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nīderlande
PO-box 299, 1970 AG IJmuiden, Nīderlande
infobaltics@kuraray.com
www.kuraraynoritake.eu



Importētājs ES

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Vācija
Tālrunis nr.: +49 (0)69 305 35 835
Faksa nr.: +49 (0)69 305 98 35 835
www.kuraraynoritake.eu
centralmarketing@kuraray.com

- Pirms šo produktu lietošanas, lūdzu, izlasiet produkta komplektācijā iekļauto lietošanas instrukciju.
- Produkta specifikācijas un vizuālais izskats var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Drukātā krāsa var nedaudz atšķirties no faktiskās krāsas.

"CLEARFIL", "PANAVIA" un "CLEARFIL MAJESTY" ir KURARAY CO., LTD. preču zīmes.
"KATANA" ir NORITAKE CO., LIMITED preču zīme.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japāna
www.kuraraynoritake.com

CE 0197



01/2025/MKA00730