

Katalog produktů

Optimalizovaná řešení



—
CLEARFIL MAJESTY™
ES-2



—
CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 Universal



—
KATANA™
Cleaner



—
CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow



—
CLEARFIL™
Universal Bond
Quick 2



—
PANA VIA™
SA Cement
Universal



—
CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal



—
PANA VIA™ V5

**Vaše každodenní produkty
pro vyšší efektivitu v jediném kroku**



Universal Excellence

Universal Excellence je řada pěti produktů navržených tak, aby efektivně, jednoduše a spolehlivě uspokojovaly základní klinické potřeby každodenní praxe.




CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

str. 5

Adhezivum typu „vše v jednom“

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2, které představuje špičku v adhezivní technologii, nabízí zubním lékařům jednoduché a rychlé řešení. Toto adhezivum, vyvinuté s cílem zefektivnit pracovní postupy, poskytuje vynikající výkon v mnoha klinických situacích.

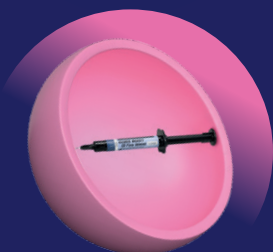


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

str. 7

Přesnost odstínů s univerzálností tekuté konzistence

Jeho mechanická pevnost převyšuje mnoho kompozitů ve formě pasty. Podporuje širokou škálu indikací a umožňuje vám vytvářet krásné přímé výplně s minimálním úsilím.

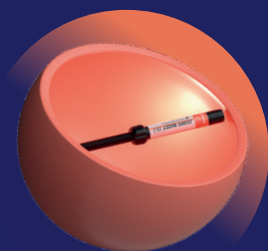


CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

str. 9

Výplně v jediném odstínu na nové úrovni

Díky jeho schopnosti přirozeně splynout s okolní zubní strukturou se na něj můžete spolehnout jak u přímých výplní v distálních, tak ve frontálních úsecích chrupu.

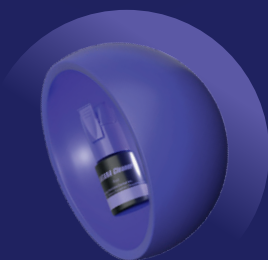


KATANA™ Cleaner

str. 10

Intraorální a extraorální čištění

Navržen pro rychlé a účinné odstranění nečistot z povrchu zubů a náhrad, čímž zajišťuje čistý adhezivní povrch a podporuje silnější a spolehlivější adhezi.

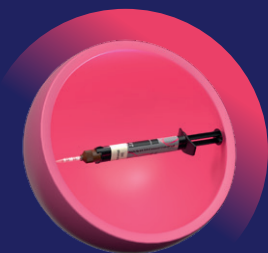

PANAVIA™ SA Cement Universal

str. 11

Zjednodušené upevňování

PANAVIA™ SA Cement Universal zjednodušuje proces upevňování tím, že eliminuje zbytečné kroky. Není zapotřebí žádný samostatný primer – stačí nanést cement a umístit náhradu. Byl vyvinut pro použití s širokou škálou protetických materiálů, včetně sklokeramiky, a umožňuje vám přistupovat ke každé proceduře s jistotou.

SKENUJTE PRO VÍCE INFORMACÍ O NAŠÍ ŘADĚ UNIVERSAL EXCELLENCE



CLEARFIL™ SE BOND



CLEARFIL™ SE Bond je vysoce účinné samoleptací adhezivum vhodné pro širokou škálu indikací. Vyznačuje se mimořádnou dlouhodobou vazebnou pevností, kterou zajišťuje jeho vysoká odolnost vůči hydrolýze.

#1970-EU Kit

Primer (6 ml), Bond (5 ml), příslušenství

#1981-EU Bond Agent

lahvička (5 ml)

#1982-EU Primer

lahvička (6 ml)

CLEARFIL™ SE BOND 2



CLEARFIL™ SE Bond 2 je navržen tak, aby poskytoval dlouhodobou účinnost. Nabízí stejné klinické výhody jako CLEARFIL™ SE Bond, avšak s vyšší vazebnou pevností na dentinu a širším spektrem indikací.

Při použití s aktivátorem CLEARFIL™ DC se stává materiálem s duálním vytvrzováním.

#3270-EU Kit

Bond (5 ml), Primer (6 ml), příslušenství

#3281-EU Bond

Lahvička (5 ml)

#3286-EU Unidoses Standard Kit

50 jednorázových dávek (0,1 ml) Bondu a Primeru, příslušenství

#3272-EU Value Pack

3 Bond (5 ml), 3 Primer (6 ml)

#3282-EU Primer

Lahvička (6 ml)

#3250-EU CLEARFIL DC Activator

Lahvička (4ml)

CLEARFIL™ SE Protect

První a dosud jediné antibakteriální samoleptací adhezivum na světě

- Primer obsahuje 5 % antibakteriálního monomeru MDPB, který nabízí široké a účinné antibakteriální spektrum
- Osvědčený dvoufázový samoleptací adhezivní systém
- Pomáhá předcházet pooperační citlivosti
- Snadné a rychlé použití

#2870-EU Kit

Primer (6 ml), adhezivum (5 ml), aplikátory, štětečky a příslušenství

#2872-EU Value Pack

3 primery (6 ml) a 3 adheziva (5 ml)

#2881-EU Bond

Lahvička (5 ml)

#2882-EU Primer

Lahvička (6 ml)



Novinka!

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 je univerzální adhezivum s okamžitým účinkem, které zubním lékařům umožňuje provádět jednoduchý postup v jediném kroku.

Všestranné použití

- Kompatibilní se všemi samo-adhezivními cementy dostupnými na trhu
- Vylepšená tekutost zajišťující tenkou a rovnoměrnou vrstvu
- Vhodné pro intraorální opravy
- Lze použít společně s CLEARFIL™ DC Core Plus pro upevňování čepů a korunkové dostavby
- Lze skladovat při pokojové teplotě



NEPŘÍMÁ NÁHRADA



DOSTAVBY

VÝPLNĚ

#4042-EU

Flacon Refill

5,0 ml x 1 lahvička

#4044-EU

Flacons Value Pack

5,0 ml x 3 lahvička

#4046-EU

Unit Dose Standard Pack

0,1 ml x 50 hrotů, aplikační štěteček jemný stříbrný x 50 ks

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 - SEZNAMTE SE S NAŠÍM PROTOKOLEM



K-ETCHANT Syringe

- Leptání skloviny a dentinu
- Čištění dentálních protetických materiálů
- Snadné a přesné nanášení díky hrotu o průměru 0,5 mm
- Ideální konzistence pro selektivní leptání skloviny
- Tixotropní vlastnosti zajišťují plnou kontrolu při nanášení



#3252-EU

K-Etchant 2 stříkačky 3 ml + 40 hrotů

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow je kompozit, který se snadno leští a vyznačuje se vynikající stálostí lesku. Díky své konzistenci se snadno nanáší a zpracovává. Je k dispozici ve třech viskozitách, aby vyhovoval každé klinické situaci.




DOSTUPNÉ ODSÍSTY

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

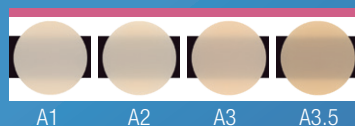

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High



Vyberte si viskozitu, která vyhovuje vašim potřebám

High	Low	Super Low
3 ÚROVNĚ TEKUTOSTI		
Vysoká viskozita ✓ Vynikající smáčivost a přilnavost ✓ Vhodný pro malé kavity ✓ Lze použít jako podložku pod výplň	Střední viskozita ✓ Vhodný pro širokou škálu frontálních i distálních výplní ✓ Ideální pro kavity III. a V. třídy	Nízká viskozita ✓ Ideální pro rekonstrukci hrbolků a hřebenů distálních zubů ✓ Zachovává tvar, který vymodelujete
Obsah plniva (hmotnostní): 71 % Obsah plniva (objemový): 53 %	Obsah plniva (hmotnostní): 75 % Obsah plniva (objemový): 59 %	Obsah plniva (hmotnostní): 78 % Obsah plniva (objemový): 64 %

Jedna minuta po nanesení (vodorovně i svisle)

High

#3321-EU High (A1)
#3322-EU High (A2)
#3323-EU High (A3)
#3324-EU High (A2D)
#3325-EU High (A3D)

Low

#3301-EU Low (A1)
#3302-EU Low (A2)
#3303-EU Low (A3)
#3304-EU Low (A3.5)
#3305-EU Low (A4)
#3306-EU Low (KA6)
#3307-EU Low (B1)
#3308-EU Low (B2)
#3309-EU Low (XW)
#3310-EU Low (A2D)
#3311-EU Low (A3D)
#3312-EU Low (W)

Super Low

#3341-EU Super Low (A1)
#3342-EU Super Low (A2)
#3343-EU Super Low (A3)
#3344-EU Super Low (A3.5)

Obsahuje: 1 stříkačku (2,7 g / 1,5 ml) a 15 hrotů

Novinka!

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal



Dva odstíny pokrývající všechny odstíny vzorníku Vita*

Tento inovativní zatékavý kompozit je k dispozici ve dvou viskozitách, díky čemuž je přizpůsobení odstínu mimořádně snadné. Jeho mechanická pevnost převyšuje mnoho kompozitů ve formě pasty a nabízí širokou škálu klinických použití



Zjednodušený koncept odstínů

→ Méně pracovních kroků a efektivnější správa zásob

Dvě viskozity s ideální manipulací

→ Nelepivý kompozit, snadno se nanáší a tvaruje

Vysoká mechanická pevnost

→ Vhodný i pro oblasti vystavené žvýkacímu tlaku (okluzní povrchy)

Snadné leštění a dlouhodobý lesk

→ Rychlý postup pro optimální estetický výsledek

Promyšlený design stříkačky

→ Snížené riziko vzniku vzduchových bublin, žádné nechtěné stékání, přesné nanášení hrotem stříkačky

Tabulka odstínů

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal umožňuje efektivně překrýt dno kavity pouze několika vrstvami podle následujících pokynů:

Třída kavity	A1 (B1, B2)	A2 (D2, C1)	A3 (C2, D3)	A3.5 (B3, B4)	A4 (C3, C4)
I	U Universal				
II					
III					
IV					
V			UD Universal Dark		

Low

#4600-EU Low (U)
#4601-EU Low (UD)

Super Low

#4620-EU Super Low (U)
#4621-EU Super Low (UD)
#3331-EU 20 hrotů (N)

78% hmotnostních a 64% objemových u Super Low
75% hmotnostních a 59% objemových u Low

Obsahuje: 1 stříkačku (1,5 ml) a 15 hrotů

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal



*Vita není obchodní značka Kuraray Noritake Dental Inc.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

Ideální také pro vrstvení

Klasická řada: pokrývá všechny odstíny Vita* + 2 doplňkové odstíny (White a Extra White)

Klasická řada

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 je inteligentní kompozit s optimální konzistencí, který se dokonale přizpůsobuje zubu.



Klasické stříkačky a kompule (PLT)

Stříkačka obsahuje: 3,6 g / 2,0 ml a PLT: 20 x 0,25 g



A1 A2 A3 A3.5 A4 A6
Stříkačka #3020-EU #3021-EU #3022-EU #3023-EU #3024-EU #3025-EU
Kompule #3110-EU #3111-EU #3112-EU #3113-EU #3114-EU #3115-EU



B1 B2 B3 B4
Stříkačka #3026-EU #3027-EU #3028-EU #3029-EU
Kompule #3116-EU #3117-EU #3118-EU #3119-EU



C1 C2 C3 C4
Stříkačka #3030-EU #3031-EU #3032-EU #3033-EU
Kompule #3120-EU #3121-EU #3122-EU #3123-EU



D2 D3 XW W
Stříkačka #3034-EU #3035-EU #3036-EU #3037-EU
Kompule #3124-EU #3125-EU #3126-EU #3127-EU

Prémiová řada

Prémiová řada zahrnuje 15 klasických odstínů, přičemž využívá pouze 5 sklovinných a dentinových odstínů. Díky intuitivnímu vzorníku odstínů nebyl výběr správného odstínu nikdy snazší.

Prémiové stříkačky a kompule (PLT)

Dentinová stříkačka obsahuje: 3,6 g / 2,0 ml a PLT: 10 x 0,25 g



XWD WD A1D A2D A3D A3.5D A4D
Stříkačka #3062-EU #3063-EU #3057-EU #3058-EU #3059-EU #3060-EU #3061-EU
Kompule #3152-EU #3153-EU #3147-EU #3148-EU #3149-EU #3150-EU #3151-EU

Sklovinná stříkačka obsahuje: 3,6 g / 2,0 ml



XWE WE A1E A2E A3E A3.5E A4E
Stříkačka #3055-EU #3056-EU #3050-EU #3051-EU #3052-EU #3053-EU #3054-EU
Kompule #3145-EU #3146-EU #3140-EU #3141-EU #3142-EU #3143-EU #3144-EU


Transparentní stříkačka obsahuje: 1,8 g / 0,9 ml



Clear Blue Gray Amber
Stříkačka #3064-EU #3066-EU #3067-EU #3065-EU
Kompule #3154-EU #3156-EU #3157-EU #3155-EU

*Vita není značka Kuraray Noritake Dental Inc.

TWIST™ DIA pro kompozity

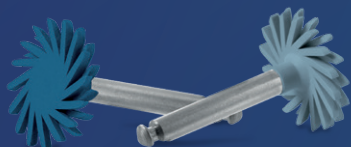

Sada TWIST™ DIA pro kompozity se skládá ze dvou leštítek, která zajišťují výsledek s mimořádně vysokým leskem. Jsou vhodná pro všechny povrchy a lze je používat opakovaně. Díky této nové sadě se vaše různé postupy leštění nyní zjednoduší na jeden jediný. Leštítka lze použít jak na hladké, tak na okluzní povrchy. Sada TWIST™ DIA pro kompozity je sterilizovatelná v autoklávu.

1201-IP Úvodní sada 14 mm

3 leštítka pro předleštění + 3 leštítka pro vysoký lesk

1202-IP Předleštění 14 mm

10 leštítek pro předleštění

1203-IP Vysoký lesk 14 mm

10 leštítek pro vysoký lesk

1211-IP Úvodní sada 10 mm

3 leštítka pro předleštění + 3 leštítka pro vysoký lesk

1212-IP Předleštění 10 mm

10 leštítek pro předleštění

1213-IP Vysoký lesk 10 mm

10 leštítek pro vysoký lesk

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

Intelligentní optická integrace

Není třeba vybírat odstín

Dokonalý vzhled a snadné použití s menším počtem odstínů

Pohodlí, úspora času, předvídatelné výsledky a menší skladové zásoby

Snadné modelování, nelepí se a má dlouhotrvající účinek

Praktická manipulace a snadné tvarování



1

1 odstín pro distální výplně

Jeden univerzální odstín je řešením pro všechny výplně v distálním úseku chrupu, bez ohledu na barvu podkladové a sousední zubní struktury.

2

2 odstíny pro frontální výplně

Ve frontálním úseku chrupu, kde jsou kladeny vyšší estetické nároky, jsou k dispozici dvě varianty.

X

Není třeba používat opaker

Opaker ani blokátor není ve všech běžných případech nutný – ať už jde o výplně v distálním nebo frontálním úseku chrupu.

Třída kavity	A1 (B1, B2)	A2 (D2, C1)	A3 (C2, D3)	A3.5 (B3, B4)	A4 (C3, C4)
I	 Universal				
II					
III	 Universal Light		 Universal Dark		
IV					
V					

Jedna stříkačka 3,6 g

#3181-EU Universal (U)
#3182-EU Universal (UW)
#3183-EU Universal (UL)
#3184-EU Universal (UD)

20 kompulí, každá 0,25 g

#3191-EU Universal (U)
#3192-EU Universal (UW)
#3193-EU Universal (UL)
#3194-EU Universal (UD)

*Pro klinické případy výplně ve frontálním úseku, které vyžadují vysoký jas, nabízíme speciální bílý odstín (UW).

CLEARFIL™ AP-X



Estetický a odolný

CLEARFIL™ AP-X je světlem tuhnoucí, rentgenkontrastní univerzální kompozitní pryskyřice, která se vyznačuje přesným přizpůsobením odstínu, vynikajícími vlastnostmi při leštění a výjimečnými fyzikálními vlastnostmi. Díky těmto vlastnostem je vhodná jak pro výplně ve frontálním, tak v distálním úseku chrupu.

Stříkačka (4,6 g/2 ml)

#1721-EU	A2	#1732-EU	C1
#1722-EU	A3	#1728-EU	C2
#1723-EU	A3.5	#1729-EU	C3
#1724-EU	A4	#1730-EU	C4
#1725-EU	B2	#1733-EU	CL
#1726-EU	B3	#1734-EU	HO
#1727-EU	B4	#1731-EU	XL
#935-EU	Tabulka odstínů		

Kompule (0,2 g)

#1721-E2	A2	20 hrotů
#1722-E2	A3	20 hrotů
#1723-E2	A3.5	20 hrotů
#1724-E2	A4	10 hrotů
#1725-E2	B2	20 hrotů
#1726-E2	B3	20 hrotů
#1734-E2	HO	10 hrotů
#1731-E2	XL	20 hrotů

KATANA™ Cleaner

Čisticí prostředek pro intraorální a extraorální použití


Čisticí prostředek KATANA™ je prvním čisticím prostředkem s pH 4,5, díky čemuž je vhodný jak pro extraorální, tak pro intraorální použití. Vyznačuje se vysokou čisticí schopností díky aktivnímu povrchu soli MDP.

Zabraňte kontaminaci a optimalizujte tak své adhezivní postupy


Během zkoušky v ústech může dojít ke kontaminaci náhrady bílkovinami, které snižují pevnost adheze. Čisticí prostředek KATANA™ Cleaner má vysokou čisticí účinnost díky povrchově aktivním vlastnostem **soli MDP**. Na rozdíl od jiných čisticích prostředků má KATANA™ Cleaner **pH 4,5**, což umožňuje jeho **použití jak v ústní dutině, tak mimo ni**. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak optimalizovat adhezi.

Rychlý a snadný postup použití

10 sekund vtírejte, opláchněte a osušte.
To je vše, co musíte udělat, abyste optimalizovali svůj adhezivní postup.

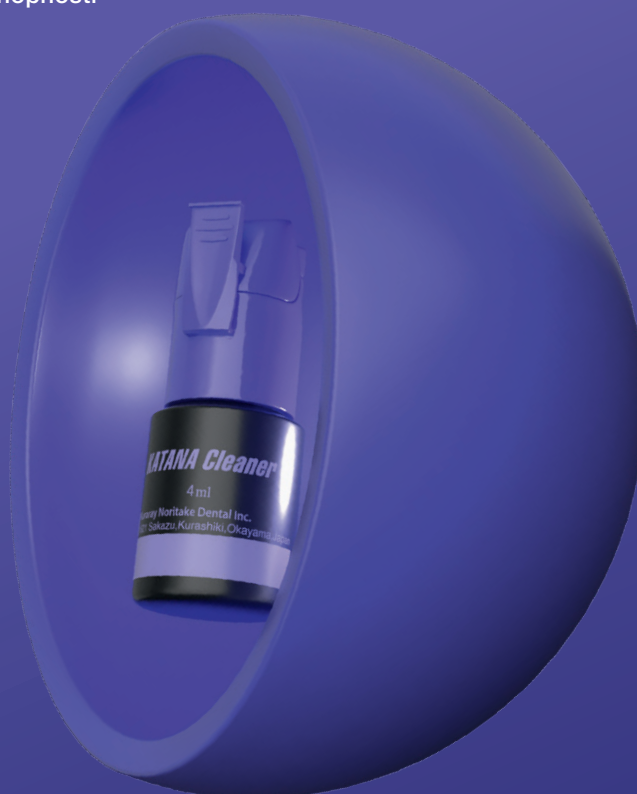

Postup použití

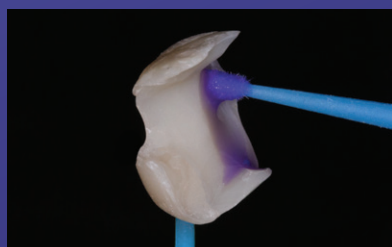

Naneste čisticí prostředek KATANA™ a vtírejte jej po dobu nejméně 10 sekund na intraorální povrch zubní náhrady a na oblast preparace.



Opláchněte a osušte.



Upevněte náhradu podle pokynů výrobce.

#3970-EU KATANA™ Cleaner

1 lahvička, 4 ml

PANAVIA™ SA Cement Universal

Není nutná silanizace

PANAVIA™ SA Cement Universal je samo-adhezivní systém pryskyřičného cementu obsahující jedinečný monomer LCSi, který přilne prakticky ke všem materiálům, včetně sklokeramiky, aniž by bylo nutné použít samostatný primer (silan). Původní monomer MDP, který je rovněž součástí pasty, navazuje chemickou reakci se zirkonem, dentinem a sklovinou. Ideální pro adhezivní fixaci s vysokou retencí.



Druhy materiálů

Zirkon, lithium disilikát, keramika, titan, kov.



#4202-EU Stříkačka Handmix Universal (A2)
#4203-EU Stříkačka Handmix White (bílá)
#4204-EU Stříkačka Handmix Transparentní
9,2 g / 5 ml



#4210-EU Value Pack Automix Universal (A2)
#4211-EU Value Pack Automix Transparentní
3 stříkačky po 8,2 g, příslušenství

#4212-EU Stříkačka Automix Universal (A2)
#4213-EU Stříkačka Automix White (bílá)
#4214-EU Stříkačka Automix Transparentní
8,2 g / 4,6 ml

PANAVIA™ SA Cement Universal - ODKAZ NA POSTUP POUŽITÍ



PANAVIA™ V5

Ucelená řada produktů pro všechny vaše klinické případy



PANAVIA™ V5 je nejpevnější cement, jaký byl kdy vyvinut. Díky nabídce pěti odstínů je zároveň i nejestetičtější. Neexistuje trvalejší postup pro upevnění korunek, můstků s volným mezičlenem, Marylandských můstků, inlejí/onlejí a fazet.

PĚT ESTETICKÝCH ODSTÍNŮ¹

¹ Skutečné odstíny se mohou lišit od odstínů na obrázku.

Dvojí polymerace:
Universal (A2) Clear



Brown (A4)



White



Samovolná
polymerace:
Opaque



#3600-EU Professional Kit

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [jedna stříkačka automix od každého odstínu (2,4 ml / 4,2 g): Universal (A2), Clear (čirý), Brown (hnědý), White (bílý), Opaque (opákní)], PANAVIA™ V5 Try-in Paste [jedna stříkačka od každého odstínu (1,8 ml), K-ETCHANT Syringe (3 ml), příslušenství

#3601-EU Kit Standard Universal (A2)

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [jedna stříkačka automix (4,6 ml / 8,1 g): Universal (A2), K-ETCHANT Syringe (3 ml), příslušenství

#3602-EU Kit Standard Clear

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [jedna stříkačka automix (4,6 ml / 8,1 g): Clear (čirý), K-ETCHANT Syringe (3 ml), příslušenství

#3604-EU Kit Universal (A2)

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste [jedna stříkačka automix (2,4 ml / 4,2 g): A2, příslušenství

#3605-EU Kit Clear

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 Paste jedna stříkačka automix (2,4 ml / 4,2 g): Clear (čirý), příslušenství

PANAVIA™ V5 Paste

One stříkačka (4,6 ml / 8,1 g), 20 míchacích hrotů

#3611-EU Universal (A2) Paste

#3612-EU Clear (čirý) Paste

#3613-EU Brown (A4) Paste

#3614-EU White (bílá) Paste

#3615-EU Opaque (opákní) Paste

#3635-EU Tooth Primer

One lahvička (4 ml)

#3637-EU CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus

One lahvička (4 ml)

#3252-EU K-ETCHANT Syringe

3 ml stříkačka, 20 kanylových hrotů (E)

PANAVIA™ V5 Try-in Paste

1,8 ml stříkačka zkušební pasty

#3621-EU Universal (A2) Try-in Paste

#3622-EU Clear (čirý) Try-in Paste

#3623-EU Brown (A4) Try-in Paste

#3624-EU White (bílá) Try-in Paste

#3625-EU Opaque (opákní) Try-in Paste



PROTETIKA

VŠE, CO POTŘEBUJETE PRO SVÉ PROTETICKÉ PRÁCE



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

PROTETICKÝ PRIMER Zajišťuje dlouhodobou adhezi u zirkonu, hybridních keramik, kompozitních pryskyřic a kovů. Silan a MDP obsažené v přípravku zaručují silnou adhezi u kompozitů, sklokeramiky a hybridních keramik.

PREPAROVANÝ ZUB



VŠE, CO POTŘEBUJETE PRO OŠETŘENÍ POVRCHU PREPARACÍ



PANAVIA™ V5 TOOTH PRIMER

SAMOLEPTACÍ PRIMER Slouží k úpravě povrchu preparovaného zubu. MDP obsažené v primeru je vhodný pro předúpravu zubních pilířů, stejně jako pilířů z kompozitu a z neušlechtilých kovů.

PANAVIA™ V5 Try-in Paste

Použijte před nanesením cementu k ověření správnosti výběru odstínu.



KATANA™ Cleaner

OPTIMALIZUJTE SVÉ ADHEZIVNÍ POSTUPY Roztok pro intraorální a extraorální čištění, který umožňuje:

- čištění sklokeramických, zirkonových, kompozitních a kovových náhrad a vláknových čepů po intraorální zkoušce,
- čištění znečištěného preparovaného zubu.

PANAVIA™ V5 ODKAZ NA POSTUP POUŽITÍ



PANAVIA™ V5

Předošetření



PANAVIA™ V5 Tooth Primer

Naneste PANAVIA™ V5 Tooth Primer, nechte působit 20 sekund a osušte



Struktura zubu (dentin), kompozitní materiály nebo kovy (intraorálně)



Sklovina (můstky nebo fazety na pryskyřičném podkladu) nebo nepreparovaná sklovina



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

Naneste a osušte



Kovy



Zirkon



Pilíře



Sklokeramika



Čepy ze skleněných vláken



Composites



Postup předošetření²

- PANAVIA™ V5 TOOTH PRIMER
- CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS
- KATANA™ Cleaner
- Opískujte, opláchněte a osušte
- Cleaner Naneste kyselinu fluorovodíkovou a osušte¹
- Naneste leptací gel K-ETCHANT Syringe, opláchněte a osušte

KLIKNĚTE ZDE A SEZNAMTE SE S POSTUPEM POUŽITÍ PANAVIA™ V5



¹ Pokud vaše zubní laboratoř již použila kyselinu fluorovodíkovou, použijte k očištění a přípravě povrchu keramiky pouze kyselinu fosforečnou.

² Podrobný postup najdete v návodu k použití.

PANAVIA™ Veneer LC

Specialista na dentální
fazety ve světlem
vytvrzované verzi



Indikace

Upevňování fazet, inlejí a onlejí z keramiky,
kompozitu nebo zirkonu o tloušťce menší než 2 mm.

200 s

Doba zpracování při okolním
osvětlení 8 000 luxů delší než
3 minuty umožňuje provést
ošetření bez stresu.

Estetika

Čtyři vysoce stabilní odstíny
zajišťují dlouhodobý estetický
vzhled a díky odpovídajícím
zkušebním pastám je výběr
vhodného odstínu snazší.

Snadná manipulace

Cement má vynikající manipulační
vlastnosti: nelepí, je tixotropní
a umožňuje snadné odstranění
přebytečného materiálu.

#4500-EU PANAVIA™ Veneer LC Standard Kit Universal(A2)

#4501-EU PANAVIA™ Veneer LC Standard Kit Clear

PANAVIA™ Veneer LC Paste: 2,6 g / 1,5 ml, PANAVIA™ V5 Try-in Paste: 2,4 g / 1,8 ml,
PANAVIA™ V5 Tooth Primer: 2 ml, CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus: 2 ml, K-ETCHANT Syringe: 3 ml,
Příslušenství: 5 aplikačních hrotů, 20 kanylových hrotů, 50 aplikačních štětečků, 1 míchací miska

#4505-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste Universal (A2)

#4506-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste Clear

#4507-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste Brown (A4)

#4508-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste White

Refill 2,6 g / 1,5 ml, 5 aplikačních hrotů

#3621-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste Universal (A2)

#3622-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste Clear

#3623-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste Brown (A4)

#3624-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste White

Refill 2,4 g / 1,8 ml

#4513-EU Applicator tip

20 aplikačních hrotů (16G)

SEZNAMTE SE S PRŮVODCEM POSTUPEM POUŽITÍ



TEETHMATE™ DESENSITIZER

První přípravek proti citlivosti zubů, který nabízí skutečné řešení.

Jedná se o přírodní přípravek, který je šetrný k tkáním. Přípravek TEETHMATE™ Desensitizer účinně zmírňuje citlivost zubů způsobenou obnaženým dentinem. Ošetření trvá jen několik minut a přináší okamžitou a dlouhodobou úlevu. Lze jej také použít pod přímé nebo nepřímé výplně u vitálních zubů nebo těsně před pečetěním dentinu.

#1210-EU Sada

Prášek (6 g), tekutina (4,8 ml), příslušenství

#1215-EU Úvodní sada

Prášek (1,2 g), tekutina (1,0 ml), příslušenství

#1216-EU Prášek

6 g

#1217-EU Tekutina

4,8 ml



Smíchejte prášek
a tekutinu přípravku
TEETHMATE™ Desensitizer



Nechte působit 30 sekund
a poté opláchněte vodou

CARIES DETECTOR

Detektor kazu je vynikající nástroj pro odhalování zubního kazu a hraje klíčovou roli při péči o zuby a jejich zachování. Umožňuje selektivní odstranění zubního kazu při zachování dentinu, který je schopen remineralizace. Chrání také vitalitu zubní dřevě a zachovává zdravou zubní strukturu.

Protokol




1. Izolujte zub s kazem pomocí kofferdamu. Po odstranění kariézní tkáně povrch očistěte a osušte.



2. Naneste kapku přípravku CARIES DETECTOR na mikroštěteček a naneste přípravek do kavity.



3. Nechte působit 10 sekund a poté opláchněte vodou. Zbývající kariézní dentin se zbarví do červena.

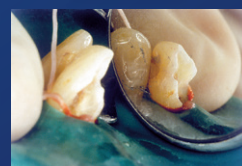

4. Zkontrolujte znovu, zda došlo k úplnému odstranění kariézního dentinu.



#220-EU

Caries Detector

1 lahvička 6 ml

CLEARFIL™ DC CORE Plus

**Upevňování čepů
a rekonstrukce
pahýlů**



CLEARFIL™ DC CORE Plus dvousložkový,
duálně tuhnoucí dostavbový materiál.

VÝHODY

- tixotropní
- modul pružnosti blízky hodnotě dentinu
- duální vytvrzování
- vysoká pevnost v ohybu
- 3minutová doba zpracování
- lze použít bez aktivátoru s přípravkem CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
nebo s jakýmkoli jiným samovolně tuhnoucím adhezivem

Protokol

1 Naneste přípravek CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 vtíráním	2 Osušte vzduchem	3 Žádné čekání	4 Vytvrďte světlem
5 Naneste přípravek CLEARFIL™ DC CORE PLUS do kořenového kanálku	6 Umístěte předem ošetřený čep a vytvrďte světlem	7 Zhotovte dostavbu z CLEARFIL™ DC CORE PLUS	

#2942-EU Dentin Syringe
1 stříkačka (17,9 g / 9 ml), příslušenství

#2943-EU White Syringe
1 stříkačka (17,9 g / 9 ml), příslušenství


KATANA™ ZIRCONIA Block

Bločky KATANA™ Zirconia Multi-Layered se skládají ze čtyř vrstev zirkonu s postupnou gradací odstínů, což vám ve vaší ordinaci umožňuje zhotovovat náhrady s přirozeným přechodem translucence. Tím se eliminuje zdoluhavý a složitý proces probarvování náhrady. Jsou vhodné pro výrobu fazet, inlejí, korunek a až tříčlenných můstků.

MULTI
LAYERED



STML Super Translucent Multi-layer

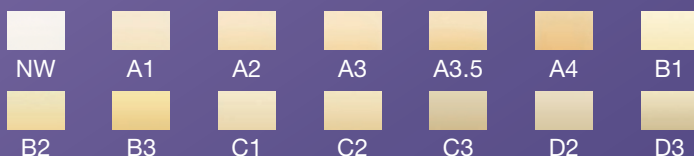

Odolnost
750 Mpa

KATANA™ ZIRCONIA BLOCK - SEZNAMTE SE S NAŠÍM POSTUPEM A REFERENCEMI



CZR FC Paste Stains

Pro všechny náhrady
z vrstvené keramiky nebo
monolitického zirkonu



Vnější barvivo ve formě pasty vhodné pro širokou škálu klinických použití, dostupné v 27 odstínech. S touto pastou připravenou k okamžitému použití můžete snadno a rychle přizpůsobit své vrstvené nebo monolitické zirkonové náhrady a dosáhnout tak optimálních výsledků. Ucelená sada modrých a šedých odstínů (světle šedá, tmavě šedá, šedomodrá a modrá) umožňuje snadné napodobení modrošedých efektů translucence v incizální oblasti. Dva typy glazury (Glaze & Clear Glaze) usnadňují kontrolu translucence v celé koruně. Estetické celozirkonové náhrady lze vyrobit kombinací FC Paste Stain s KATANA™ Zirconia UTML, STML, HTML Plus a YML.

CZR FC PASTE STAINS - SEZNAMTE SE S NAŠÍM POSTUPEM A REFERENCEMI





KATANA™ AVENCIA™ Block 2

KATANA™ AVENCIA™ Block 2 je hybridní keramický bloček druhé generace, který byl vyvinut s ohledem na vaše aktuální potřeby. Ať už chcete v rámci svého ordinačního CAD/CAM pracovního postupu vyrábět inleje, onleje, fazety nebo korunky, obě dostupné varianty vám nabídnou vše, co potřebujete. Bloček KATANA™ AVENCIA™ Block 2 Multi-Layer (ML) je určen pro výrobu korunek s přirozeným vzhledem, zatímco bloček KATANA™ AVENCIA™ Block 2 High-Translucent (HT) je předurčen pro inleje a onleje.




DOSTUPNÉ VELIKOSTI


	a (výška)	b (šířka)	c (délka)
12	10 mm	12 mm	15 mm
14L	14,5 mm	14,5 mm	18 mm

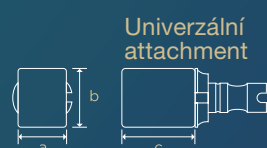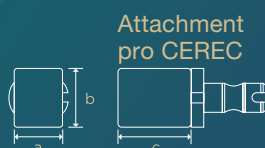

KATANA™ AVENCIA™ BLOCK 2 - SEZNAMTE SE S NAŠÍM POSTUPEM A REFERENCEMI

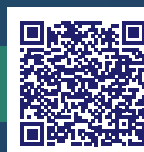

TWIST™ DIA pro zirkon

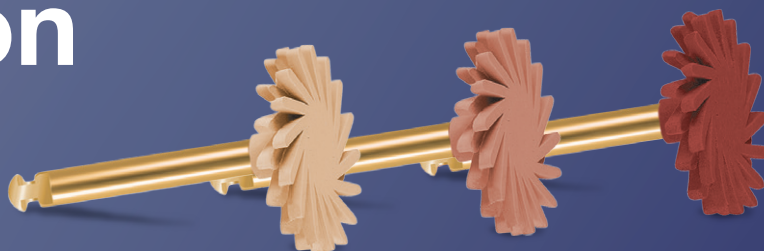

Inovativní tvar nástroje TWIST™ DIA pro zirkon, který se vyznačuje pružnými lešticími lamelami, dodává všem zirkonovým náhradám přirozený lesk. Ať už jsou povrchy rovné, konvexní nebo konkávní, lamely impregnované diamanty je vyleští do vysokého lesku. Nástroj TWIST™ DIA pro zirkon je navíc sterilizovatelný v autoklávu.

1301-IP Úvodní sada 14 mm

1 jemné + 1 střední + 1 hrubé leštítko

1302-IP Coarse grit polisher 14 mm

1 hrubé leštítko

1303-IP Fine grit polisher 14 mm

1 jemné leštítko

1305-IP Medium grit polisher 14 mm

1 střední leštítko

Sledujte nás na našich
webových stránkách nebo sociálních sítích



Dovozce do EU

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,

65795 Hattersheim am Main, Německo

Telefon +48 662 281 282

www.kuraraynoritake.eu/cz

dental-EasternEurope@kuraray.com

- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití, který je součástí balení.
- Technické parametry a vzhled výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Barva na obrázku se může mírně lišit od skutečné barvy.

PANAVIA™, CLEARFIL™ a CLEARFIL MAJESTY™ jsou registrované ochranné známky společnosti KURARAY Co., Ltd. Zdravotnické prostředky třídy IIa. CE 1639. Oznámený subjekt: SGS Belgie a CE 0197. Oznámený subjekt TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystraße 2, 90431 Norimberk, Německo.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonsko



09/2022