

Catalog Produse

Soluții optimizate



—
**CLEARFIL MAJESTY™
ES-2**



—
**CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 Universal**



—
**KATANA™
Cleaner**



—
**CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow**



—
**CLEARFIL™
Universal Bond
Quick 2**



—
**PANAVIA™
SA Cement
Universal**



—
**CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal**



—
PANAVIA™ V5

**Produsele Dumneavoastră zilnice pentru
o eficiență sporită, într-un singur loc**



Universal Excellence

Universal Excellence este o selecție de cinci produse concepute pentru a satisface nevoile clinice esențiale ale practicii zilnice cu eficiență, simplitate și consecvență.




CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

P. 5

Adezivul all-in-one

În avangarda tehnologiei adezive, CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 oferă o soluție simplă și rapidă pentru medici. Dezvoltat pentru a eficientiza procedurile, acest adeziv oferă performanțe remarcabile în multe situații clinice.

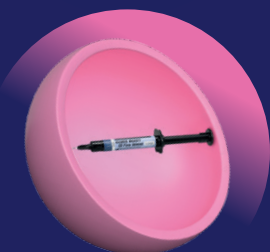


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

P. 7

Precizie a nuanței cu versatilitate fluidă

Rezistența sa mecanică depășește multe compozite pastă. Are o gamă largă de indicații, permițându-vă să creați restaurări directe frumoase cu efort minim.

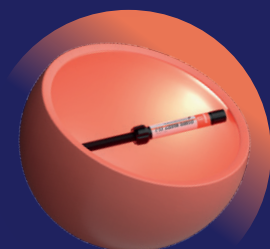


CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

P. 9

Restaurări într-o singură nuanță duse la nivelul următor

Datorită capacității sale de a se integra natural cu structura dintelui înconjurător, îl puteți folosi atât pentru restaurările directe posterioare, cât și pentru cele anterioare.

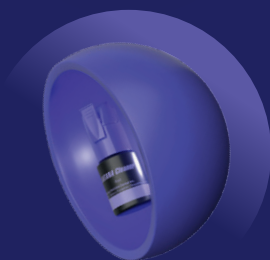


KATANA™ Cleaner

P. 10

Curățare intra- și extra-orală

Conceput pentru a îndepărta rapid și eficient rezidurile de pe suprafețele dentare și restaurări, asigurând o suprafață de cimentare curată și susținând o aderență mai puternică și mai fiabilă.

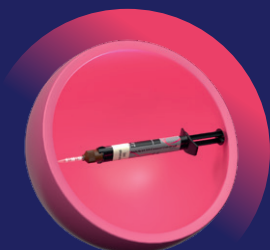

PANAVIA™ SA Cement Universal

P. 11

Cimentare simplificată

PANAVIA™ SA Cement Universal simplifică procesul de cimentare prin eliminarea etapelor inutile. Nu este necesar un primer separat - pur și simplu aplicați cimentul și plasați restaurarea. Dezvoltat pentru a funcționa cu o gamă largă de materiale restauratoare, inclusiv vitroceramici, vă permite să abordați fiecare procedură cu încredere.

SCANĂȚI PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE GAMA NOASTRĂ UNIVERSAL EXCELLENCE



CLEARFIL™ SE BOND



CLEARFIL™ SE Bond este un adeziv autogravant cu o performanță superioară, potrivit pentru o gamă largă de indicații. Este recunoscut pentru rezistența sa excepțională la adeziune pe termen lung, obținută prin rezistența sa puternică la hidroliză.

#1970-EU Kit

Primer (6 ml), Adeziv (5 ml), accesorii

#1981-EU Bond Agent

Flacon (5 ml)

#1982-EU Primer

Flacon (6 ml)

CLEARFIL™ SE BOND 2



CLEARFIL™ SE Bond 2 este conceput pentru a oferi performanțe de lungă durată. Acesta oferă aceleași avantaje clinice ca și CLEARFIL™ SE Bond, cu o rezistență mai mare la adeziunea la dentină și o gamă mai largă de indicații.

Atunci când este utilizat cu activatorul CLEARFIL™ DC, devine dual.

#3270-EU Kit

Adeziv (5 ml), Primer (6 ml), accesorii

#3281-EU Bond

Flacon (5 ml)

#3286-EU Unidoses Standard Kit

50 unidoze (0.1 ml) de Adeziv și Primer, accesorii

#3272-EU Value Pack

3 Bond (5 ml), 3 Primer (6 ml)

#3282-EU Primer

Flacon (6 ml)

#3250-EU CLEARFIL DC Activator

Flacon (4ml)

CLEARFIL™ SE Protect

Primul și încă singurul adeziv autogravant antibacterian din lume

- Primerul conține 5% din monomerul antibacterian MDPB, care oferă un spectru antibacterian larg și eficient
- Sistem adeziv autogravant în doi pași, dovedit clinic
- Ajută la prevenirea sensibilității postoperatorii
- Ușor și rapid de utilizat

#2870-EU Kit complet

Primer (6 ml), adeziv (5 ml), aplicatoare, pensule și accesorii

#2872-EU Value Pack

3 x Primer (6 ml) și 3 x Adeziv (5 ml)

#2881-EU Adeziv

Flacon (5 ml)

#2882-EU Primer

Flacon (6 ml)



Nou !

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 este un adeziv universal cu acțiune imediată, oferind medicilor o procedură simplă, într-un singur pas.

VERSATIL

- Compatibil cu toate cimenturile autoadezive de pe piață
- Fluiditate îmbunătățită: strat subțire și uniform
- Potrivit pentru reparații intraorale
- Poate fi utilizat cu CLEARFIL™ DC Core Plus pentru cimentarea pivoților și reconstrucții (core build-up)
- Poate fi păstrat la temperatura camerei



RESTAURARE INDIRECTĂ



RESTAURARE DIRECTĂ

CORE BUILD-UP



#4042-EU
Flacon Refill
5 ml × 1 Flacon

#4044-EU
Flacons Value Pack
5 ml × 3 Flacoane

#4046-EU
Unit Dose Standard Pack
50 undozes × 0,1 ml, 50 × pensulă aplicatoare fine silver

CLEARFIL™ UNIVERSAL BOND QUICK 2 –DESCOPERIȚI PROTOCOLUL NOSTRU



K-ETCHANT Syringe

- Gravarea smalțului și a dentinei
- Curățarea materialelor pentru restaurări
- Aplicare ușoară și precisă cu vârful de 0,5 mm
- Consistență ideală pentru gravarea selectivă a smalțului
- Proprietățile tixotropice asigură un control deplin în timpul aplicării



#3252-EU
K-Etchant 2 × seringă 3 ml + 40 vâruri

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow este un compozit care oferă o finisare ușoară și o menținere excelentă a luciului. Consistența sa îl face ușor de aplicat și de manipulat. Este disponibil în trei vâscozități pentru a se potrivi fiecărei situații clinice.




NUANȚE DISPONIBILE

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

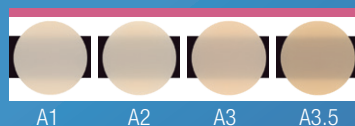

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High



Alegeți vâscozitatea care se potrivește nevoilor Dumneavoastră

High	Low	Super Low
FLUIDITATE		
Vâscozitate scăzută ✓ Adaptabilitate excelentă ✓ Potrivit pentru cavități mici ✓ Poate fi utilizat ca bază în cavități	Vâscozitate medie ✓ Potrivit pentru o gamă largă de restaurări anterioare și posterioare ✓ Ideal pentru cavități de clasa a III-a și a V-a	Vâscozitate crescută ✓ Ideal pentru reconstrucția cuspidilor și a creștelor posterioare ✓ Menține forma pe care o modelați ✓ Cimentare
Încărcătură de umplură în greutate 71% Încărcătură de umplură în volum 53%	Încărcătură de umplere în greutate 75% Încărcătură de umplere în volum 59%	Încărcătură de umplere în greutate 78% Încărcătură de umplere în volum 64%

Un minut după aplicare (orizontal și vertical)

High

#3321-EU High (A1)
#3322-EU High (A2)
#3323-EU High (A3)
#3324-EU High (A2D)
#3325-EU High (A3D)

Low

#3301-EU Low (A1) #3307-EU Low (B1)
#3302-EU Low (A2) #3308-EU Low (B2)
#3303-EU Low (A3) #3309-EU Low (XW)
#3304-EU Low (A3.5) #3310-EU Low (A2D)
#3305-EU Low (A4) #3311-EU Low (A3D)
#3306-EU Low (KA6) #3312-EU Low (W)

Super Low

#3341-EU Super Low (A1)
#3342-EU Super Low (A2)
#3343-EU Super Low (A3)
#3344-EU Super Low (A3.5)

Conține: 1 seringă (2,7 g/1,5 ml) + 15 vârfuri

Nou !

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal



Două nuanțe care acoperă întreaga cheie de culori Vita*

Acest compozit fluid inovator este disponibil în două vâscozități, ceea ce face ca adaptarea la culoare să fie remarcabil de simplă. Rezistența sa mecanică depășește multe compozite pastă, oferind o gamă largă de aplicații clinice.



Concept simplificat de nuanță

→ Mai puține etape de lucru și gestionare eficientă a stocurilor

Două vâscozități cu manevrare ideală

→ Compozit nelipicios, ușor de aplicat și modelat

Rezistență mecanică crescută

→ Potrivit chiar și pentru zonele supuse forțelor (suprafețe ocluzale)

Finisare ușoară și luciu de lungă durată

→ Procedură rapidă pentru un rezultat estetic optim

Design inteligent al seringii

→ Risc redus de bule de aer, fără curgere neintenționată, aplicare precisă cu vârful seringii

Nuanțe disponibile

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal vă permite să acoperiți eficient baza cavitațiilor cu doar câteva straturi, urmând instrucțiunile de mai jos:

Clasa cavității	A1 (B1, B2)	A2 (D2, C1)	A3 (C2, D3)	A3.5 (B3, B4)	A4 (C3, C4)
I	U Universal				UD Universal Dark
II					
III					
IV					
V					

Low

#4600-EU Low (U)
#4601-EU Low (UD)

Super Low

#4620-EU Super Low (U)
#4621-EU Super Low (UD)
#3331-EU 20 vârfuri (N)

78% în greutate și 64% în volum pentru Super Low
75% în greutate și 59% în volum pentru Low

Conține: 1 seringă (1,5 ml) + 15 vârfuri

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal



*Vita nu este o marcă înregistrată a Kuraray Noritake Dental Inc.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

Ideal și pentru stratificare

Gama clasică: acoperă toate nuanțele Vita* + 2 nuanțe suplimentare
(White – Alb și Extra White – Extra Alb)

Gama Classic

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 este un compozit inteligent cu o consistență optimă care se adaptează perfect dintelui.

Seringi și capsule clasice

Conținut seringă: 3,6 g / 2,0 ml și PLT: 20 x 0,25 g



A1 A2 A3 A3.5 A4 A6

Seringă #3020-EU #3021-EU #3022-EU #3023-EU #3024-EU #3025-EU
Capsule #3110-EU #3111-EU #3112-EU #3113-EU #3114-EU #3115-EU



B1 B2 B3 B4

Seringă #3026-EU #3027-EU #3028-EU #3029-EU
Capsule #3116-EU #3117-EU #3118-EU #3119-EU



C1 C2 C3 C4

Seringă #3030-EU #3031-EU #3032-EU #3033-EU
Capsule #3120-EU #3121-EU #3122-EU #3123-EU



D2 D3 XW W

Seringă #3034-EU #3035-EU #3036-EU #3037-EU
Capsule #3124-EU #3125-EU #3126-EU #3127-EU



Gama Premium

Gama Premium acoperă 15 nuanțe clasice folosind doar 5 nuanțe de smalț și dentină. Datorită ghidului de nuanțe intuitiv, alegerea nuanței potrivite nu a fost niciodată mai ușoară.

Seringi și capsule premium

Dentină – Conținut seringă: 3,6 g/2,0 ml și PLT: 10 x 0,25 g



XWD WD A1D A2D A3D A3.5D A4D

Seringă #3062-EU #3063-EU #3057-EU #3058-EU #3059-EU #3060-EU #3061-EU
Capsule #3152-EU #3153-EU #3147-EU #3148-EU #3149-EU #3150-EU #3151-EU

Smalț – Conținut seringă: 3,6 g / 2,0 ml



XWE WE A1E A2E A3E A3.5E A4E

Seringă #3055-EU #3056-EU #3050-EU #3051-EU #3052-EU #3053-EU #3054-EU
Capsule #3145-EU #3146-EU #3140-EU #3141-EU #3142-EU #3143-EU #3144-EU

Transparent – Conținut seringă: 1,8 g / 0,9 ml




Clear Blue Gray Amber

Seringă #3064-EU #3066-EU #3067-EU #3065-EU
Capsule #3154-EU #3156-EU #3157-EU #3155-EU

* Vita nu este o marcă înregistrată a Kuraray Noritake Dental Inc.

TWIST™ DIA pentru compozit

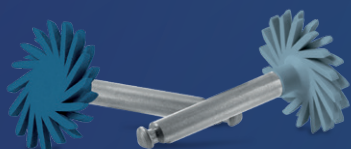

CLEARFIL™ TWIST™ DIA pentru compozit este format din două gume de lustruit care oferă un rezultat ultra-lucios. Acestea sunt potrivite pentru toate suprafețele și sunt reutilizabile. Datorită acestui nou duo, diversele proceduri de lustruire sunt acum simplificate într-una singură. Gumele de lustruit pot fi utilizate atât pe suprafețe netede, cât și pe suprafețe ocluzale. CLEARFIL™ TWIST™ DIA pentru compozit este autoclavabil.

1201-IP Kit introductiv 14mm

3 gume pre-polishing + 3 gume high-shines

1202-IP Pre-polishing 14 mm

10 gume pre-polishing

1203-IP High-shine 14mm

10 gume high-shine

1211-IP Kit introductiv 10mm

3 gume pre-polishing + 3 gume high-shines

1212-IP Pre-polishing 10mm

10 gume pre-polishing

1213-IP High-shine 10mm

10 gume high-shine

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

Integrare optică inteligentă

Nu este necesară selectarea nuanței

Estetică perfectă și ușurință în utilizare cu mai puține nuanțe

Confort, economie de timp, rezultate
previzibile și stoc redus

Ușor de modelat, nelipicios și rezistent

Manipulare practică și modelare fără stres



1

1 nuanță pentru restaurări posterioare

O singură nuanță universală este soluția
pentru toate restaurările posterioare,
indiferent de culoarea structurii dentare
subiacente și adiacente.

2

2 nuanțe pentru restaurări anterioare

În regiunea anterioară, care
necesită o estetică superioară,
sunt disponibile două variante.

X

Nu este nevoie de opac

Nu este necesar un opac
sau un blocant – fie pentru
restaurările posterioare,
fie pentru cele anterioare
– în toate cazurile uzuale.

Clasa cavității	A1 (B1, B2)	A2 (D2, C1)	A3 (C2, D3)	A3.5 (B3, B4)	A4 (C3, C4)
I					
II					
III					
IV					
V					

Seringă 3,6g

#3181-EU Universal (U)
#3182-EU Universal (UW)
#3183-EU Universal (UL)
#3184-EU Universal (UD)

20 capsule × 0,25 g

#3191-EU Universal (U)
#3192-EU Universal (UW)
#3193-EU Universal (UL)
#3194-EU Universal (UD)

* Pentru cazurile clinice din regiunea anterioară care necesită luminozitate crescută, oferim o nuanță dedicată de White - Alb (UW).

CLEARFIL™ AP-X



Estetic și durabil

CLEARFIL™ AP-X este o rășină compozită
universală radioopacă, fotopolimerizabilă,
care oferă o adaptare precisă a culorii,
calități excelente de lustruire și proprietăți
fizice remarcabile. Datorită acestor
caracteristici, este potrivită atât pentru
restaurările anterioare, cât și pentru
cele posterioare.

Seringă (4,6 g/2 ml)

#1721-EU A2 #1732-EU C1
#1722-EU A3 #1728-EU C2
#1723-EU A3.5 #1729-EU C3
#1724-EU A4 #1730-EU C4
#1725-EU B2 #1733-EU CL
#1726-EU B3 #1734-EU HO
#1727-EU B4 #1731-EU XL
#935-EU Cheie de culori

Capsule (0,2 g)

#1721-E2 A2 20 tips
#1722-E2 A3 20 tips
#1723-E2 A3.5 20 tips
#1724-E2 A4 10 tips
#1725-E2 B2 20 tips
#1726-E2 B3 20 tips
#1734-E2 HO 10 tips
#1731-E2 XL 20 tips

KATANA™ Cleaner

Agent de curățare pentru restaurări intraorale și extraorale


KATANA™ Cleaner este primul produs de curățare cu un pH de 4,5, ceea ce îl face potrivit atât pentru utilizare extraorală, cât și intraorală. Are o putere de curățare superioară datorită suprafeței active a sării MDP.

Eliminați contaminarea pentru a optimiza cimentarea


În timpul probei, restaurarea Dumneavoastră poate fi contaminată cu proteine care vor reduce adeziunea. KATANA™ Cleaner are un efect de curățare superior datorită caracteristicii tensioactive a sării **MDP**. Spre deosebire de alte produse de curățare, KATANA™ Cleaner are un **pH de 4,5**, ceea ce permite **utilizarea atât extraorală, cât și intraorală**. Este cea mai ușoară modalitate de a optimiza adeziunea.

Procedură simplă și rapidă

Pensulați timp de 10 secunde, clătiți și uscați. Asta este tot ce trebuie să faceți pentru a optimiza cimentarea.

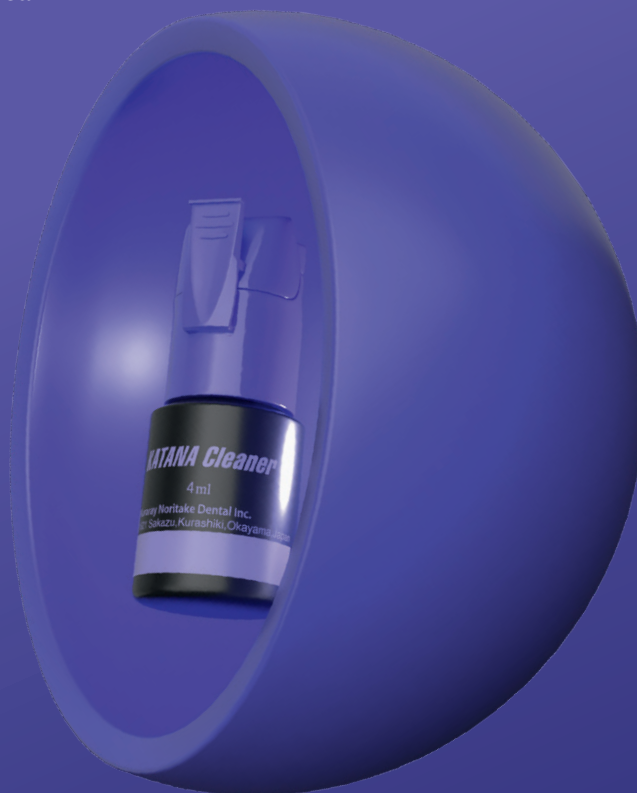

Protocol

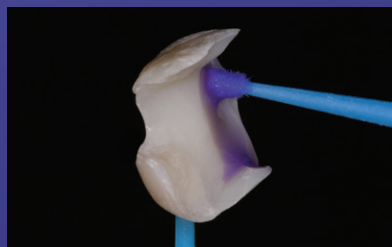

Aplicați și pensulați soluția KATANA™ Cleaner timp de cel puțin 10 secunde pe suprafața intraorală a restaurării și pe dintele preparat.



Clătiți și uscați.



Continuați conform instrucțiunilor producătorului.

#3970-EU KATANA™ Cleaner

1 flacon 4 ml

PANAVIA™ SA Cement Universal

Nu este necesară silanizarea

PANAVIA™ SA Cement Universal este un sistem de cimentare autoadeziv, pe bază de rășină, care conține monomerul unic LCSi, care aderă la aproape toate materialele, inclusiv vitroceramică, fără a fi nevoie de un primer separat (silan). Monomerul MDP original, conținut și în pastă, creează reacție chimică cu zirconiu, dentina și smalțul. Ideal pentru cimentarea retentivă.



Tipuri de materiale

Zirconiu, disilicat de litiu, ceramică, titan, metal.



#4202-EU Seringă mixare manuală Universal (A2)
#4203-EU Seringă mixare manuală White (Alb)
#4204-EU Seringă mixare manuală Transparent
9,2 g / 5 ml



#4210-EU Value Pack Automix Universal (A2)
#4211-EU Value Pack Automix Transparent
3 seringi × 8,2 g, accesorii

#4212-EU Seringă Automix Universal (A2)
#4213-EU Seringă Automix White (Alb)
#4214-EU Seringă Automix Transparent
8,2 g / 4,6 ml

PANAVIA™ SA Cement Universal - SCANAȚI PENTRU PROTOCOL



PANAVIA™ V5

O gamă completă de produse pentru toate cazurile Dumneavoastră clinice



PANAVIA™ V5 este cel mai puternic ciment dezvoltat vreodată. Cu un sortiment de cinci nuanțe, este și cel mai estetic. Nu există o procedură mai durabilă pentru cimentarea coroanelor, punților, punților Maryland, inlay/onlay și fațetelor.

CINCI NUANȚE ESTETICE¹

¹ Nuanțele reale pot diferi de nuanțele printate.

Polimerizare duală:

Universal (A2) Clear



Brown (A4)



White



Autopolimerizare:

Opaque



#3600-EU Professional Kit

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 [o seringă cu automixare per nuanță (2,4 ml / 4,2 g): Universal (A2), Clear (Transparent), Brown (Maro), White (Alb), Opaque (Opac)], PANAVIA™ V5 Try-in [o seringă per nuanță (1,8 ml)], K-ETCHANT Syringe (3 ml), accesorii

#3601-EU Kit Standard Universal (A2)

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 [o seringă cu automixare (4,6 ml / 8,1 g): Universal (A2)], Seringă K-ETCHANT (3 ml), accesorii

#3602-EU Kit Standard Clear

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 [o seringă cu automixare (4,6 ml / 8,1 g): Clear (Transparent)], K-ETCHANT Syringe (3 ml), accesorii

#3604-EU Kit introductiv Universal (A2)

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 [o seringă cu automixare (2,4 ml / 4,2 g): A2], accesorii

#3605-EU Kit introductiv Clear

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), PANAVIA™ V5 [o seringă cu automixare (2,4 ml / 4,2 g): Clear (Transparent)], accesorii

PANAVIA™ V5 Paste

Seringă (4,6 ml / 8,1 g), 20 vârfuri mixare

#3611-EU Universal Paste (A2)

#3612-EU Clear Paste

#3613-EU Brown Paste (A4)

#3614-EU White Paste

#3615-EU Opaque Paste

#3635-EU Tooth Primer

Flacon 4 ml

#3637-EU CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus

Flacon 4 ml

#3252-EU K-ETCHANT Syringe

3 ml seringă, 20 vârfuri (E)

PANAVIA™ V5 Try-in Paste

Seringă 1,8 ml try-in paste

#3621-EU Universal (A2) Try-in Paste

#3622-EU Clear Try-in Paste

#3623-EU Brown (A4) Try-in Paste

#3624-EU White Try-in Paste

#3625-EU Opaque Try-in Paste



LUCRARE PROTETICĂ

TOT CE AVEȚI NEVOIE PENTRU RESTAURĂRILE PROTETICE



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

PRIMER PENTRU PROTETICĂ
Cimentează durabil zirconiu, ceramica hibridă, rășinile compozite și metalele. Silanul și MDP-ul conținute în produs garantează o adeziune puternică la compozite, vitroceramică și ceramică hibridă.

DINTE PREPARAT



TOT CE AVEȚI NEVOIE PENTRU RESTAURĂRILE DUMNEAVOASTRĂ



PANAVIA™ V5 TOOTH PRIMER

PRIMER AUTOGRAVANT
Folosit pentru condiționarea dintelui preparat. MDP-ul din primer este potrivit pentru pretratarea bonturilor dentare, precum și a bonturilor din compozit și metale neprețioase.

PANAVIA™ V5 Try-in Paste

Verificați nuanța cimentului cu ajutorul pastelor Try-in.



KATANA™ Cleaner

OPTIMIZAȚI ADEZIUNEA

Soluția de curățare intra- și extra-orală, permite:

- Curățarea restaurărilor din vitroceramică, zirconiu, compozit și metal, precum și a pivoților din fibră după proba intra-orală
- Curățarea unui dinte preparat, contaminat.

PANAVIA™ V5 - SCANAȚI PENTRU PROTOCOL



PANAVIA™ V5

Pre-tratament



PANAVIA™ V5 Tooth Primer

Aplicați PANAVIA™ V5 Tooth Primer, lăsați să acționeze 20 de secunde și apoi uscați.



Structura dentară (dentină), compozite sau metale (intraoral)



Smalt (punți cimentate sau fațete)
Smalt nepreparat



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

Aplicați și uscați



Metale



Zirconiu



Bonturi



Vitroceramică



Pivoți
din fibră
de sticlă



Compozite

Pre-tratament²



PANAVIA™ V5 TOOTH PRIMER



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS



KATANA™ Cleaner



Sablați, clătiți și uscați



Aplicați acid fluorhidric și uscați¹



Aplicați gel de gravare K-ETCHANT syringe, clătiți și uscați

SCANAȚI AICI PENTRU A AFLA PROTOCOLUL PANAVIA™ V5



¹ Dacă laboratorul cu care lucrați a aplicat deja acid fluorhidric, folosiți doar acid fosforic pentru a curăța și pregăti suprafața ceramică.

² Pentru proceduri detaliate, consultați instrucțiunile de utilizare.

PANAVIA™ Veneer LC

Specialistul fațetelor
dentare – versiune
fotopolimerizabilă



Indicații

Cimentarea fațetelor, inlay și onlay din ceramică, compozit sau zirconiu, cu o grosime mai mică de 2 mm.

200 s*

Un timp de lucru de peste 3 minute permite

o procedură fără stres

*La o lumină ambientală de 8.000 lux.

Estetic

Patru nuanțe extrem de stabile oferă o estetică de lungă durată, iar pastele Try-in (de probă) facilitează alegerea nuanței potrivite.

Manipulare facilă

Acest ciment are proprietăți excelente de manipulare: este nelipicios, tixotrop și permite îndepărtarea eficientă a excesului.

#4500-EU PANAVIA™ Veneer LC Standard Kit Universal (A2)

#4501-EU PANAVIA™ Veneer LC Standard Kit Clear

PANAVIA™ Veneer LC Paste: 2,6 g / 1,5 ml, PANAVIA™ V5 Try-in Paste: 2,4 g / 1,8 ml, PANAVIA™ V5 Tooth Primer: 2 ml, CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus: 2 ml, K-ETCHANT Syringe: 3 ml, Accesorii: 5 vârfuri aplicatoare, 20 vârfuri seringă, 50 pensule aplicatoare, 1 godeu mixare

#4505-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste Universal (A2)

#4506-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste Clear

#4507-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste Brown (A4)

#4508-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste White

Refill 2,6 g/1,5 ml, 5 vârfuri aplicatoare

#3621-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste Universal (A2)

#3622-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste Clear

#3623-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste Brown (A4)

#3624-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste White

Refill 2,4 g/1,8 ml

#4513-EU Applicators tips

20 vârfuri aplicatoare (16G)

DESCOPERIȚI GHIDUL PENTRU CIMENTARE



TEETHMATE™ DESENSITIZER

**Primul desensibilizant
care oferă o soluție reală
pentru dinții sensibili.**

Este un produs natural, inofensiv pentru țesuturi. TEETHMATE™ Desensitizer tratează eficient sensibilitatea dentară cauzată de dentina expusă. Tratamentul durează doar câteva minute și oferă o ameliorare imediată și de lungă durată. Poate fi utilizat și sub restaurări directe sau indirecte pe dinți vitali sau înainte de sigilarea imediată a dentinei.

#1210-EU Kit

Pulbere (6 g), lichid (4,8 ml), accesorii

#1215-EU Intro Kit

Pulbere (1,2 g), lichid (1,0 ml), accesorii

#1216-EU Pulbere

6 g

#1217-EU Lichid

4,8 ml



Amestecați pulberea și lichidul
TEETHMATE™ Desensitizer



Aplicați timp de 30 de
secunde, apoi clătiți cu apă

CARIES DETECTOR

Caries Detector este o modalitate excelentă de a detecta cariile și joacă un rol major în întreținerea și conservarea dinților. Permite îndepărtarea selectivă a țesutului carios, păstrând în același timp dentina capabilă de remineralizare. De asemenea, protejează vitalitatea pulpei și menține structura sănătoasă a dintelui.

Protocol




1. Izolați dintele cariat cu digă. După îndepărtarea țesutului carios, spălați și uscați.



2. Puneți o picătură de CARIES DETECTOR pe un aplicator și aplicați în cavitate.



3. Lăsați să acționeze timp de 10 secunde, apoi clătiți cu apă. Dentina carioasă rămasă va fi pătată în roșu.

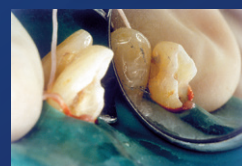

4. Repetați tehnica pentru a asigura îndepărtarea completă a cariilor infectate.



#220-EU

Caries Detector

1 flacon 6 ml

CLEARFIL™ DC CORE Plus

**Cimentarea pivoților
și reconstrucția
bonturilor**



CLEARFIL™ DC CORE Plus este un material de reconstrucție a bonturilor cu două componente și priză duală.

AVANTAJE

- Tixotrop
- Modul de elasticitate apropiat de cel al dentinei
- Polimerizare duală
- Rezistență ridicată la încovoiere
- Timp de lucru de 3 minute
- Poate fi utilizat fără activator cu CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 sau cu orice alt adeziv autopolimerizabil

Protocol:

1 Aplicați CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 și pensulați	2 Fără timp de așteptare	3 Uscăți cu aer	4 Fotopolimerizați
5 Aplicați CLEARFIL™ DC CORE PLUS în canalul radicular	6 Plasați pivotul, fotopolimerizați	7 Reconstruiți cu CLEARFIL™ DC CORE PLUS	

#2942-EU Dentin

1 seringă (17,9 g/9 ml), accesorii

#2943-EU White

1 seringă (17,9 g/9 ml), accesorii


KATANA™ ZIRCONIA Block

Blocurile multistrat KATANA™ din zirconiu sunt alcătuite din patru straturi de zirconiu în nuanțe variabile, permițându-vă să creați restaurări cu un gradient natural de translucidență în cabinetul Dumneavoastră. Acest lucru elimină procesul lung și complex de colorare a restaurării. Sunt potrivite pentru realizarea de fațete, inlay, coroane și punți dentare de până la 3 elemente.

MULTI
LAYERED



STML Super Translucid Multistrat

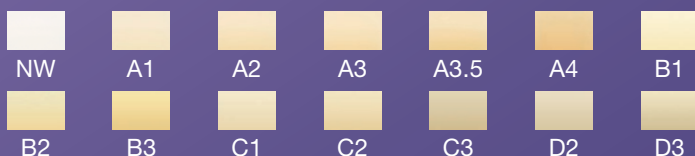

Rezistență
750 Mpa

KATANA™ ZIRCONIA BLOCK - DESCOPERIȚI PROTOCOLUL ȘI REFERINȚELE NOASTRE



CZR FC Paste Stains

Pentru toate restaurările
de zirconiu stratificat
sau monolitic



O pastă de colorare externă potrivită pentru o gamă largă de aplicații clinice, disponibilă în 27 de nuanțe. Cu această pastă gata de utilizare, puteți personaliza ușor și rapid restaurările stratificate sau monolitice din zirconiu, cu rezultate optime. Setul complet de nuanțe de albastru și gri (gri deschis, gri închis, albastru gri și albastru) permite reproducerea ușoară a efectelor de translucidență albastru-gri în regiunea incizală. Două tipuri de glazură (Glaze și Clear Glaze) facilitează controlul translucidenței pe întreaga coroană. Restaurările estetice integral zirconiu pot fi fabricate prin combinarea FC Paste Stain cu KATANA™ Zirconia UTML, STML, HTML Plus și YML.

CZR FC PASTE STAINS - DESCOPERIȚI PROTOCOLUL ȘI REFERINȚELE NOASTRE





KATANA™ AVENCIA™ Block 2

KATANA™ AVENCIA™ Block 2 este un bloc din ceramică hibridă, de generația a doua, conceput special pentru nevoile dumneavoastră actuale. Indiferent dacă doriți să realizați inlay, onlay, fațete sau coroane CAD/CAM în cabinet, cele două opțiuni disponibile vă oferă tot ce aveți nevoie. KATANA™ AVENCIA™ Block 2 Multi-Layer (ML) este conceput pentru realizarea corodelor cu aspect natural, în timp ce KATANA™ AVENCIA™ Block 2 High-Translucent (HT) este destinat pentru inlay și onlay.



DIMENSIUNE BLOCURI


	a (înălțime)	b (lățime)	c (lungime)
12	10 mm	12 mm	15 mm
14L	14,5 mm	14,5 mm	18 mm

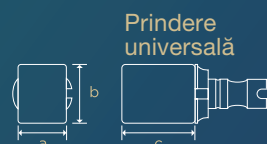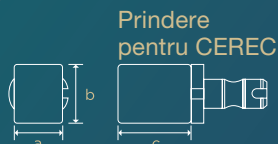

KATANA™ AVENCIA™ BLOCK 2 - DESCOPERIȚI PROTOCOLUL ȘI REFERINȚELE NOASTRE



TWIST™ DIA pentru Zirconiu

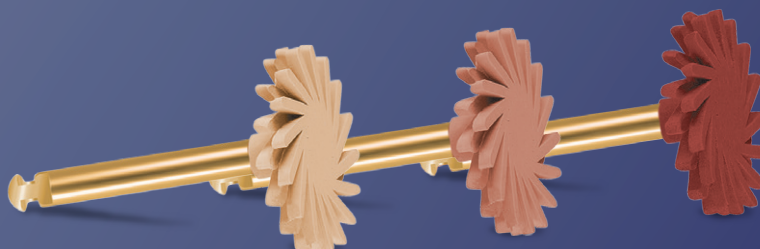

Forma inovatoare a TWIST™ DIA pentru zirconiu, cu lamele flexibile de lustruire, creează un luciu natural tuturor restaurărilor din zirconiu. Indiferent dacă suprafețele sunt plane, convexe sau concave, lamelele impregnate cu diamant vor genera un luciu deosebit. În plus, TWIST™ DIA pentru zirconiu este autoclavabil.

1301-IP Kit introductiv 14mm

1 gumă granulație fină + 1 gumă granulație medie + 1 gumă granulație mare

1302-IP Granulație mare 14mm

1 gumă granulație mare

1303-IP Granulație fină 14mm

1 gumă granulație fină

1305-IP Granulație medie 14mm

1 gumă granulație medie

Urmăriți-ne pe site-ul nostru sau pe rețelele de socializare



Importator UE

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Germania

Telefon +48 662 281 282

www.kuraraynoritake.eu/ro

dental-EasternEurope@kuraray.com

- Înainte de a utiliza acest produs, asigurați-vă că ați citit manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu produsul.
- Specificațiile și aspectul produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Culoarea imprimată poate diferi ușor de culoarea reală.

PANAVIA™, CLEARFIL™ și CLEARFIL MAJESTY™ sunt mărci comerciale înregistrate ale KURARAY Co., Ltd. Dispozitive medicale din clasa IIa. CE 1639. Organism notificat: SGS Belgia și CE 0197. Organism notificat: TÜV Rheinland LGA Product GmbH Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germania.



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia



09/2022