

Zoptymalizowane rozwiązania



—
**CLEARFIL MAJESTY™
ES-2**



—
**CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 Universal**



—
**KATANA™
Cleaner**



—
**CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow**



—
**CLEARFIL™
Universal Bond
Quick 2**



—
**PANAVIA™
SA Cement
Universal**



—
**CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal**



—
PANAVIA™ V5

**Twoje codzienne produkty
dla większej wydajności w jednym kroku**



Universal Excellence

Universal Excellence to starannie dobrana koncepcja pięciu produktów stworzonych po to, aby sprostać kluczowym potrzebom klinicznym w codziennej praktyce – zapewniając wydajność, prostotę i powtarzalne, przewidywalne rezultaty.




CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

str. 5

System wiążący typu „all-in-one”

Będąc na czele innowacji w dziedzinie technologii adhezyjnej, CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 oferuje stomatologom proste i szybkie rozwiązanie. Stworzony z myślą o usprawnieniu procedur zabiegowych, ten system wiążący zapewnia wyjątkową skuteczność w wielu zróżnicowanych sytuacjach klinicznych.

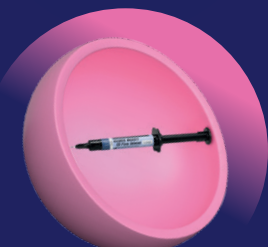


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal

str. 7

Precyzja koloru i płynna wszechstronność

Jego wytrzymałość mechaniczna przewyższa wiele kompozytów o konsystencji pasty. Obsługuje szerokie spektrum wskazań, pozwalając na tworzenie pięknych uzupełnień bezpośrednich przy minimalnym nakładzie pracy.

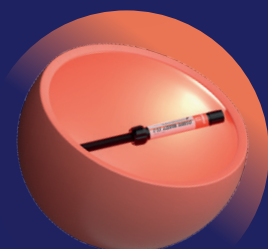


CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

str. 9

Wypełnienia jednodocieniowe na wyższym poziomie

Dzięki zdolności do naturalnego wtapiania się w otaczające struktury zęba, możesz na nim polegać zarówno przy bezpośrednich odbudowach w odcinku bocznym, jak i przednim.

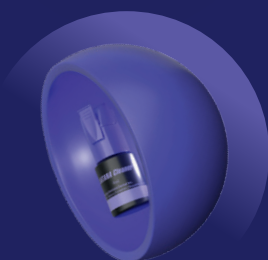


KATANA™ Cleaner

str. 10

Oczyszczanie wewnętrz- i zewnętrzne

Zaprojektowany do szybkiego i skutecznego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni zębów oraz uzupełnień protetycznych. Zapewnia czystą powierzchnię wiązania, co wspiera silniejszą i bardziej niezawodną adhezję.

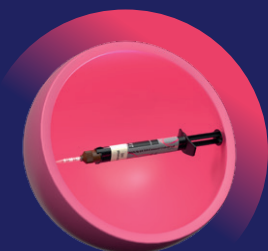

PANAIA™ SA Cement Universal

str. 11

Uprozczone cementowanie

PANAIA™ SA Cement Universal usprawnia proces cementowania adhezyjnego poprzez wyeliminowanie zbędnych etapów pracy. Nie wymaga stosowania osobnego primera – wystarczy nałożyć cement i osadzić uzupełnienie. Opracowany tak, aby doskonale współgrać z szeroką gamą materiałów uzupełniających (w tym z ceramiką szklaną), pozwala z pełnym zaufaniem podchodzić do każdej procedury.

ZESKANUJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KONCEPCJI UNIVERSAL EXCELLENCE



CLEARFIL™ SE BOND



CLEARFIL™ SE Bond to wysoce skuteczny, samowytrawiający system wiążący, przeznaczony do szerokiego spektrum wskazań klinicznych. Słynie z wyjątkowej, długoterminowej siły wiązania, którą osiągnięto dzięki niezwykle wysokiej odporności na hydrolizę.

#1970-EU Zestaw Bond

Primer (6 ml), Bond (5 ml), akcesoria

#1981-EU Bond

Buteleczka (5 ml)

#1982-EU Primer

Buteleczka (6 ml)

CLEARFIL™ SE BOND 2



CLEARFIL™ SE Bond 2 został stworzony z myślą o zapewnieniu długotrwałych rezultatów. Oferuje takie same korzyści kliniczne jak system CLEARFIL™ SE Bond, a ponadto charakteryzuje się większą siłą wiązania z zębina i szerszym zakresem wskazań.

W połączeniu z aktywatorem CLEARFIL™ DC Activator staje się systemem podwójnie utwardzalnym.

#3270-EU Zestaw Bond

Bond (5 ml), Primer (6 ml), akcesoria

#3281-EU Bond

1 buteleczka (5 ml)

#3286-EU Unit Dose zestaw

50 ampułek (0,1 ml) Bond + 50 ampułek (0,1 ml) Primer, 100 aplikatorów

#3272-EU Opakowanie ekonomiczne

3 x Bond (5 ml), 3 x Primer (6 ml)

#3282-EU Primer

1 buteleczka (6 ml)

#3250-EU CLEARFIL DC Activator

1 buteleczka (4ml)

CLEARFIL™ SE Protect

Pierwszy i wciąż jedyny na świecie antybakteryjny, samowytrawiający system wiążący.

- Primer zawiera 5% antybakteryjnego monomeru MDPB, który zapewnia szerokie i skuteczne spektrum działania przeciwbakteryjnego.
- Sprawdzony, dwuetapowy, samowytrawiający system wiążący.
- Pomaga zapobiegać nadwrażliwości pozabiegowej.
- Łatwy i szybki w użyciu.

#2870-EU Zestaw

Bond (5 ml), Primer (6 ml), akcesoria

#2872-EU Zestaw ekonomiczny

3 x Bond (5 ml), 3 x Primer (6 ml)

#2881-EU Bond

1 buteleczka (5 ml)

#2882-EU Primer

1 buteleczka (6 ml)



CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 to uniwersalny system wiążący, który działa błyskawicznie, oferując lekarzom stomatologom prostą, jednoetapową procedurę.

WSZECHESTRONNY

- Kompatybilny ze wszystkimi cementami samoadhezyjnymi dostępnymi na rynku.
- Ulepszona płynność, która pozwala na uzyskanie cienkiej i jednolitej warstwy filmu.
- Idealny do napraw wewnątrzustnych.
- Może być stosowany w połączeniu z CLEARFIL™ DC Core Plus do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych i odbudowy zrębu zęba
- Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej.



ODBUDOWY POŚREDNIE



ODBUDOWA ZRĘBU KORONY

ODBUDOWY BEZPOŚREDNIE

#4042-EU

Opakowanie uzupełniające

1 x buteleczka (5,0 ml)

#4044-EU

Value Pack

3 x buteleczka (5,0 ml)

#4046-EU

Unit Dose Standard Pack

50 x końcówka (0,1 ml), pędzelki do aplikacji „fine silver” 50 szt.

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 - ODKRYJ NASZ PROTOKÓŁ



K-ETCHANT Strzykawka

- Wytrawianie szkliwa i zębiny.
- Oczyszczanie dentystycznych materiałów uzupełniających (uzupełnień protetycznych).
- Łatwa i wysoce precyzyjna aplikacja dzięki końcówce o średnicy 0,5 mm.
- Idealna konsystencja do selektywnego wytrawiania szkliwa.
- Właściwości tiksotropowe zapewniające pełną kontrolę nad aplikacją wytrawiacza.



#3252-EU

2 strzykawki 3 ml + 40 aplikatorów

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow to materiał kompozytowy, który oferuje łatwe polerowanie i doskonałe utrzymanie połysku. Jego konsystencja sprawia, że jest prosty w aplikacji i opracowywaniu. Dostępny w trzech poziomach gęstości, aby idealnie dopasować się do każdej sytuacji klinicznej.




DOSTĘPNE ODCIENIE

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

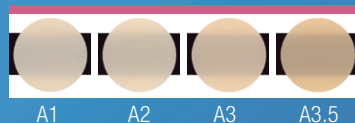

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High



Wybierz stopień płynności dopasowany do Twoich potrzeb

High	Low	Super Low
PŁYNNOŚĆ		
High viscosity ✓ Znakomita zwilżalność i adaptacja do tkanek ✓ Doskonały do małych ubytków ✓ Jako podkład typu liner Zawartość wypełniacza wagowo: 71% Zawartość wypełniacza obj.: 53%	Medium viscosity ✓ Przeznaczony do szerokiego spektrum odbudów w odcinku przednim i bocznym ✓ Idealny do ubytków klasy III i V Zawartość wypełniacza wagowo: 75% Zawartość wypełniacza obj.: 59%	Low viscosity ✓ Idealny do odbudowy guzków i listew brzęznych w zębach bocznych ✓ Utrzymuje nadany mu podczas modelowania kształt Zawartość wypełniacza wagowo: 78% Zawartość wypełniacza obj.: 64%

1 min. po aplikacji (w poziomie i w pionie)

High

#3321-EU High (A1)
#3322-EU High (A2)
#3323-EU High (A3)
#3324-EU High (A2D)
#3325-EU High (A3D)

Low

#3301-EU Low (A1) #3307-EU Low (B1)
#3302-EU Low (A2) #3308-EU Low (B2)
#3303-EU Low (A3) #3309-EU Low (XW)
#3304-EU Low (A3.5) #3310-EU Low (A2D)
#3305-EU Low (A4) #3311-EU Low (A3D)
#3306-EU Low (KA6) #3312-EU Low (W)

Super Low

#3341-EU Super Low (A1)
#3342-EU Super Low (A2)
#3343-EU Super Low (A3)
#3344-EU Super Low (A3.5)

1 strzykawka (2,7 g/1,5 ml) oraz 15 końcówek aplikacyjnych

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal



Dwa odcienie pokrywające cały kolornik Vita*

Ten innowacyjny kompozyt typu flow jest dostępny w dwóch stopniach płynności, dzięki czemu dopasowanie odcienia staje się niezwykle proste. Jego wytrzymałość mechaniczna przewyższa wiele kompozytów o konsystencji pasty, oferując szerokie spektrum zastosowań klinicznych.



Uproszczona koncepcja kolorystyczna	→	Mniej kroków w procedurze i mniej materiałów w asystorze
Dwie wygodne opcje gęstości	→	Dopasowane konsystencje dla różnych wskazań, łatwa aplikacja i modelowanie
Wysoka wytrzymałość mechaniczna	→	Odpowiedni nawet do powierzchni obciążonych okluzyjnie
Łatwa polerowalność i długotrwały połysk	→	Oszczędność czasu i doskonała estetyka
Nowatorska konstrukcja strzykawki	→	Wygodne modelowanie końcówką oraz zapobieganie powstawaniu pęcherzyków powietrza, kapaniu i rozlewaniu materiału

Colour chart

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal pozwala na wydajne pokrycie dna ubytku przy użyciu zaledwie kilku warstw, zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Klasa ubytku	A1 (B1, B2)	A2 (D2, C1)	A3 (C2, D3)	A3.5 (B3, B4)	A4 (C3, C4)
I	U Universal				
II					
III					
IV					UD Universal Dark
V					

Low

#4600-EU Low (U)
#4601-EU Low (UD)

Super Low

#4620-EU Super Low (U)
#4621-EU Super Low (UD)
#3331-EU 20 końcówek aplikacyjnych (N)

78% wagowo i 64% obj. dla wersji Super Low
75% wagowo i 59% obj. dla wersji Low

1 strzykawka (2,7 g/1,5 ml) oraz 15 końcówek aplikacyjnych

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal



*VITA™ nie jest znakiem towarowym firmy Kuraray Noritake Dental Inc.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

Doskonały także do odbudowy warstwowej

Gama Classic: obejmuje wszystkie odcienie z kolornika VITA™ + 2 dodatkowe odcienie (White i Extra White)*

Seria Classic

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 to inteligentny kompozyt o optymalnej konsystencji, który idealnie dopasowuje się do tkanek zęba.

Strzykawki oraz ampułki PLT Classic

Strzykawka zawiera 3,6 g/2,0 ml; PLT zawiera 20 ampułek x 0,25 g



Strzykawki #3020-EU #3021-EU #3022-EU #3023-EU #3024-EU #3025-EU
PLT #3110-EU #3111-EU #3112-EU #3113-EU #3114-EU #3115-EU



Strzykawki #3026-EU #3027-EU #3028-EU #3029-EU
PLT #3116-EU #3117-EU #3118-EU #3119-EU



Strzykawki #3030-EU #3031-EU #3032-EU #3033-EU
PLT #3120-EU #3121-EU #3122-EU #3123-EU



Strzykawki #3034-EU #3035-EU #3036-EU #3037-EU
PLT #3124-EU #3125-EU #3126-EU #3127-EU



Seria Premium

Seria Premium pozwala na pokrycie 15 klasycznych odcieni przy użyciu zaledwie 5 odcieni szkliniowych i zębinowych. Dzięki intuicyjnemu kolornikowi dobór odpowiedniego odcienia jeszcze nigdy nie był tak prosty.

Strzykawki oraz ampułki PLT Premium

Dentin Strzykawka zawiera 3,6 g/2,0 ml; PLT zawiera 20 ampułek x 0,25 g



Strzykawki #3062-EU #3063-EU #3057-EU #3058-EU #3059-EU #3060-EU #3061-EU
PLT #3152-EU #3153-EU #3147-EU #3148-EU #3149-EU #3150-EU #3151-EU

Enamel Strzykawka zawiera 3,6 g/2,0 ml



Strzykawki #3055-EU #3056-EU #3050-EU #3051-EU #3052-EU #3053-EU #3054-EU
PLT #3145-EU #3146-EU #3140-EU #3141-EU #3142-EU #3143-EU #3144-EU


Translucent Strzykawka zawiera 3,6 g/2,0 ml



Strzykawki #3064-EU #3066-EU #3067-EU #3065-EU
PLT #3154-EU #3156-EU #3157-EU #3155-EU

*VITA™ nie jest znakiem towarowym firmy Kuraray Noritake Dental Inc.

TWIST™ DIA for composites

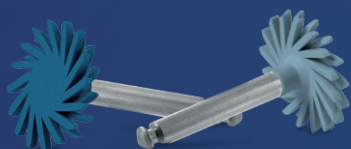

System TWIST™ DIA for Composite składa się z dwóch polerek, które pozwalają uzyskać efekt ultrawysokiego połysku. Nadają się one do wszystkich powierzchni i są przeznaczone do wielokrotnego użytku. Dzięki temu nowemu duetowi różne procedury polerowania zostały teraz uproszczone do jednego systemu. Polerki mogą być stosowane zarówno na powierzchniach gładkich, jak i okluzyjnych. System TWIST™ DIA for Composite nadaje się do sterylizacji w autoklawie.

1201-IP 14 mm Zestaw wprowadzający
6 szt.

1202-IP 14 mm Polerowanie wstępne
uzupełnienie (10 szt.)

1203-IP 14 mm Polerowanie finalne
uzupełnienie (10 szt.)

1211-IP 10 mm Zestaw wprowadzający
6 szt.

1212-IP 10 mm Polerowanie wstępne
uzupełnienie (10 szt.)

1213-IP 10 mm Polerowanie finalne
uzupełnienie (10 szt.)

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

Inteligentna integracja optyczna

Bez konieczności doboru odcienia

Doskonała estetyka i łatwość użycia przy użyciu mniejszej liczby odcieni

Wygoda, oszczędność czasu, przewidywalne rezultaty i zredukowane zapasy magazynowe

Łatwy do modelowania, nieklejący się i zapewniający długotrwałe efekty

Komfortowa praca i bezstresowe kształtowanie materiału



1

1 odcień do odbudowy zębów w odcinku bocznym

Pojedynczy odcień uniwersalny to doskonale rozwiązanie dla wszystkich uzupełnień w odcinku bocznym, niezależnie od koloru podłoża oraz sąsiednich tkanek zęba.

2

2 odcienie do odbudowy zębów w odcinku przednim

W odcinku przednim, który wymaga najwyższej estetyki, dostępne są dwa warianty do wyboru.

X

Bez konieczności stosowania opakera

Użycie opakera lub blokera nie jest konieczne – dotyczy to zarówno odbudowy w odcinku bocznym, jak i przednim – we wszystkich rutynowych przypadkach klinicznych.

Klasa ubytku	A1 (B1, B2)	A2 (D2, C1)	A3 (C2, D3)	A3.5 (B3, B4)	A4 (C3, C4)
I	U Universal				
II					
III	UL Universal Light		UD Universal Dark		
IV					
V					

Strzykawka 3,6 g

#3181-EU Universal (U)
#3182-EU Universal (UW)
#3183-EU Universal (UL)
#3184-EU Universal (UD)

Ampułki PLT 20 x 0,25 g

#3191-EU Universal (U)
#3192-EU Universal (UW)
#3193-EU Universal (UL)
#3194-EU Universal (UD)

*W przypadkach klinicznych w odcinku przednim, wymagających wysokiego stopnia jasności, oferujemy dedykowany odcień biały (UW).

CLEARFIL™ AP-X



Estetyka i trwałość

CLEARFIL™ AP-X to światłoutwardzalny, kontrastujący w promieniach RTG uniwersalny materiał kompozytowy, który zapewnia precyzyjne dopasowanie odcienia, doskonałe właściwości polerskie oraz wyjątkowe parametry fizyczne. Dzięki tym cechom doskonale nadaje się do odbudowy zębów zarówno w odcinku przednim, jak i bocznym.

Strzykawki (4,6 g/2 ml)

#1721-EU A2 #1732-EU C1
#1722-EU A3 #1728-EU C2
#1723-EU A3.5 #1729-EU C3
#1724-EU A4 #1730-EU C4
#1725-EU B2 #1733-EU CL
#1726-EU B3 #1734-EU HO
#1727-EU B4 #1731-EU XL
#935-EU Kolornik

Ampułki (0,2 g)

#1721-E2 A2 20 końcówek
#1722-E2 A3 20 końcówek
#1723-E2 A3.5 20 końcówek
#1724-E2 A4 10 końcówek
#1725-E2 B2 20 końcówek
#1726-E2 B3 20 końcówek
#1734-E2 HO 10 końcówek
#1731-E2 XL 20 końcówek


KATANA™ Cleaner

Preparat czyszczący do uzupełnień protetycznych stosowany wewnątrz- i zewnątrzustnie

KATANA™ Cleaner to pierwszy środek czyszczący o pH wynoszącym 4,5, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania zarówno zewnątrzustnego, jak i wewnątrzustnego. Charakteryzuje się wysoką skutecznością oczyszczania dzięki powierzchniowo czynnemu działaniu soli MDP.

Wyeliminuj zanieczyszczenia, aby zoptymalizować procedury adhezyjne


Podczas przymiarki uzupełnienie protetyczne może zostać zanieczyszczone białkami, co zmniejsza siłę wiązania. KATANA™ Cleaner charakteryzuje się wysoką skutecznością oczyszczania dzięki powierzchniowo czynnemu działaniu soli **MDP**. W przeciwieństwie do innych preparatów czyszczących, KATANA™ Cleaner ma **pH wynoszące 4,5**, co pozwala na jego **stosowanie zarówno zewnątrzustnie, jak i wewnątrzustnie**. To najprostszy sposób na zoptymalizowanie procedury adhezyjnej.

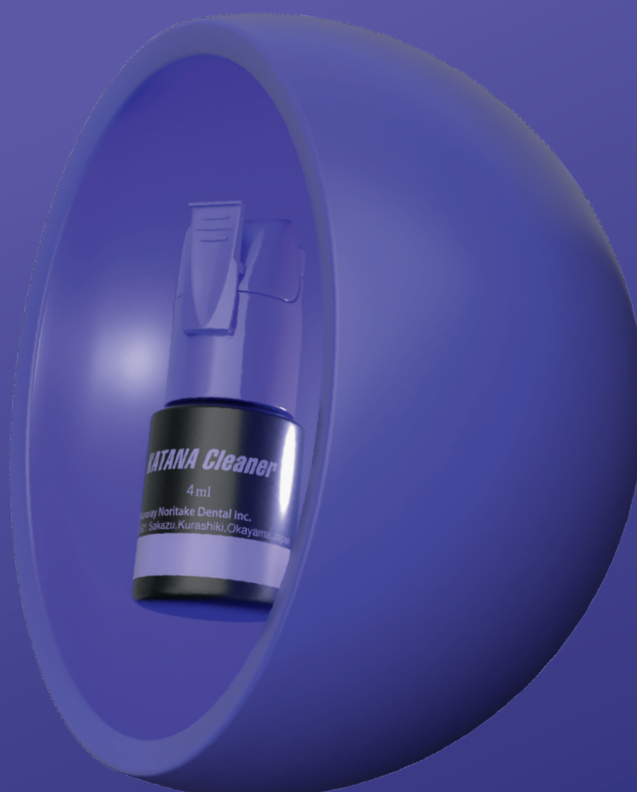

Szybka i łatwa procedura

Wcieraj przez 10 sekund, spłucz i osusz.
To wszystko, co musisz zrobić, aby zoptymalizować procedurę adhezyjną.

Procedura

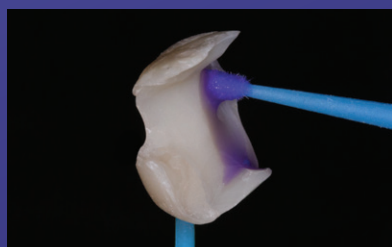

Aplikuj i wcieraj preparat KATANA™ Cleaner przynajmniej przez 10 sek.



Spłucz i osusz.



Wykonaj cementowanie adhezyjne zgodnie z instrukcją producenta.

#3970-EU KATANA™ Cleaner

1 buteleczka, 4 ml

PANAVIA™ SA Cement Universal

Bez konieczności silanizacji

PANAVIA™ SA Cement Universal to samoadhezyjny cement kompozytowy zawierający unikalny monomer LCSi. Zapewnia on silne wiązanie z praktycznie wszystkimi materiałami – w tym z ceramiką szklaną – bez konieczności stosowania osobnego primera. Oryginalny monomer MDP, również zawarty w paście, odpowiada za chemiczną reaktywność z tlenkiem cyrkonu, zębina oraz szkliwem. Produkt idealny do cementowania adhezyjnego uzupełnień retencyjnych.



Duża siła wiązania do materiałów protetycznych

Tlenek cyrkonu, dwukrzemian litu, ceramika, tytan, metal.



#4202-EU Strzykawka Handmix Universal (A2)
#4203-EU Strzykawka Handmix (White)
#4204-EU Strzykawka Handmix (Translucent)
9,2 g/5 ml



#4210-EU Value Pack Automix Universal (A2)
#4211-EU Value Pack Automix Transparent
3 strzykawki / odcień (8,2 g/4,6 ml), 40 końcówek mieszających, 10 końcówek Endo (SS)

#4212-EU Strzykawka Automix Universal (A2)
#4213-EU Strzykawka Automix (White)
#4214-EU Strzykawka Automix (Translucent)
8,2 g/4,6 ml

PANAVIA™ SA Cement Universal - PRZEJDŹ DO PROCEDURY



PANAVIA™ V5

Kompleksowy asortyment produktów do wszystkich przypadków klinicznych



PANAVIA™ V5 to najsilniejszy cement, jaki kiedykolwiek opracowano. Dzięki asortymentowi złożonemu z pięciu odcieni jest on zarazem najbardziej estetyczny. Nie ma bardziej trwałej procedury cementowania koron, mostów wspornikowych, mostów adhezyjnych, wkładów/nakładów oraz licówek.

PIĘĆ ESTETYCZNYCH ODCIENI¹

¹ Rzeczywiste odcienie mogą różnić się od kolorów w druku.

Podwójna polimeryzacja:

Universal (A2) Clear



Brown (A4)



White



Autopolimeryzacja:

Opaque



#3600-EU Professional Kit

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), pasta PANAVIA™ V5 [jedna strzykawka typu Automix na odcień (2,4 ml/4,2 g): Universal (A2), Clear, Brown, White, Opaque], pasta próbna PANAVIA™ V5 Try-in Paste [1 strzykawka na odcień (1,8 ml)], strzykawka K-ETCHANT Syringe (3 ml), akcesoria

#3601-EU Standard Kit Universal (A2)

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), pasta PANAVIA™ V5 [1 strzykawka typu Automix (4,6 ml/8,1 g): Universal (A2)], strzykawka K-ETCHANT Syringe (3 ml), akcesoria

#3602-EU Standard Kit Clear

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), pasta PANAVIA™ V5 [1 strzykawka typu Automix (4,6 ml/8,1 g): Clear], strzykawka K-ETCHANT Syringe (3 ml), akcesoria

#3604-EU Introductory Kit Universal (A2)

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), pasta PANAVIA™ V5 [1 strzykawka typu Automix (2,4 ml/4,2 g): A2], akcesoria

#3605-EU Introductory Kit Clear

Tooth Primer (2 ml), CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus (2 ml), pasta PANAVIA™ V5 [1 strzykawka typu Automix (2,4 ml/4,2 g): Clear], akcesoria

PANAVIA™ V5 Paste

1 strzykawka (4,6 ml/8,1 g), 20 końcówek mieszających

#3611-EU Universal (A2) Paste

#3612-EU Clear Paste

#3613-EU Brown (A4) Paste

#3614-EU White Paste

#3615-EU Opaque Paste

#3635-EU Tooth Primer

1 buteleczka (4 ml)

#3637-EU CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus

1 buteleczka (4 ml)

#3252-EU K-ETCHANT

Strzykawka 3 ml, 20 końcówek igłowych (E)

PANAVIA™ V5 Try-in Paste

Strzykawka z pastą próbną 1,8 ml

#3621-EU Universal (A2) Try-in Paste

#3622-EU Clear Try-in Paste

#3623-EU Brown (A4) Try-in Paste

#3624-EU White Try-in Paste

#3625-EU Opaque Try-in Paste



UZUPEŁNIENIE PROTETYCZNE

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ
DO PRZYGOTOWANIA UZUPEŁNIEŃ
PROTETYCZNYCH



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

PRIMER PROTETYCZNY

Zapewnia trwałe wiązanie
z tlenkiem cyrkonu, ceramiką
hybrydową, żywicami
kompozytowymi oraz metalami.
Zawarte w produkcie silan oraz
monomer MDP gwarantują silną
adhezję do kompozytów, ceramiki
szklanej i ceramiki hybrydowej.

OPRACOWANY ZĄB



WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ
DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI



PANAVIA™ V5 TOOTH PRIMER

PRIMER SAMOWYTRAWIAJĄCY

Przeznaczony do kondycjonowania
opracowanych tkanek zęba.
Zawarty w primerze monomer
MDP doskonale sprawdza się przy
przygotowaniu filarów zębowych,
a także filarów wykonanych
z kompozytu oraz metali
nieszlachetnych.

PANAVIA™ V5 Try-in Paste

Do stosowania przed nałożeniem pasty
cementowej w celu weryfikacji doboru odcienia.



KATANA™ Cleaner

ZOPTYMALIZUJ SWOJE WIĄZANIE
Roztwór do czyszczenia wewnątrzdnego
i zewnątrzdnego, który umożliwia:

- Czyszczenie uzupełnień z ceramiki
szklanej, tlenku cyrkonu, materiałów
kompozytowych i metalu oraz wkładów
z włókien szklanych po wewnątrzdnym
przymiarce.
- Oczyszczenie skażonych tkanek
opracowanego zęba.

PRZEJDŹ DO PROCEDURY POSTĘPOWANIA PANAVIA™ V5



PANAVIA™ V5

Przygotowanie



PANAVIA™ V5 Tooth Primer

Aplikuj
PANAVIA™ V5 Tooth
Primer, pozostaw
na 20 sekund,
a następnie osusz.



Tkanki zęba (zębina), kompozyty
lub metale (wewnątrzustnie)



Szkliwo (mosty adhezyjne lub licówki)
lub nieopracowane szkliwo



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

Aplikuj
i osusz



Stopy
metali



Tlenek cyrkonu



Łączniki
implanto-
logiczne



Ceramika
szklana



Wkłady
z włókna
szklanego



Kompozyty

Prétraitement²



PANAVIA™ V5 TOOTH PRIMER



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS



KATANA™ Cleaner



Wypiaskować, wypłukać i osuszyć



Nałożyć kwas fluorowodorowy i osuszyć¹



Nałożyć żel wytrawiający w strzykawce K-ETCHANT, wypłukać i osuszyć

PRZEJDŹ DO PROCEDURY POSTĘPOWANIA PANAVIA™ V5



¹ Informacja dla lekarza dentysty: jeśli laboratorium zastosowało już kwas fluorowodorowy, do oczyszczenia i przygotowania powierzchni ceramiki należy użyć wyłącznie kwasu fosforowego.

² Szczegółowe procedury postępowania znajdują się w instrukcji użycia.

PANAVIA™ Veneer LC

**Specjalistyczny,
światłoutwardzalny
system do
cementowania
licówek**



Wskazania

Cementowanie licówek, wkładów (inlay) i nakładów (onlay) wykonanych z ceramiki, kompozytu lub tlenku cyrkonu, o grubości poniżej 2 mm.

200 s*

Czas pracy wynoszący ponad 3 minuty pozwala na bezstresowe przeprowadzenie procedury przy natężeniu światła otoczenia wynoszącym 8 000 luksów.

Estetyka

Cztery cechujące się wysoką stabilnością odcienie zapewniają długotrwały efekt estetyczny, a dopasowane pasty próbne (try-in) ułatwiają wybór odpowiedniego koloru.

Łatwa aplikacja

Cement ten charakteryzuje się doskonałymi właściwościami użytkowymi: nie klei się do narzędzi, jest tiksotropowy i umożliwia wydajne usuwanie nadmiarów.

#4500-EU PANAVIA™ Veneer LC Standard Kit Universal (A2)

#4501-EU PANAVIA™ Veneer LC Standard Kit Clear

pasta PANAVIA™ Veneer LC Paste: 2,6 g/1,5 ml, pasta próbna PANAVIA™ V5 Try-in Paste: 2,4 g/1,8 ml, primer PANAVIA™ V5 Tooth Primer: 2 ml, CLEARFIL™ Ceramic Primer Plus: 2 ml, strzykawka K-ETCHANT Syringe: 3 ml, akcesoria: 5 końcówek aplikacyjnych, 20 końcówek igłowych, 50 pędzelków do aplikacji, 1 miseczka do mieszania

#4505-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste Universal (A2)

#4506-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste Clear

#4507-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste Brown (A4)

#4508-EU PANAVIA™ Veneer LC Paste White

Uzupełnienie 2,6 g/1,5 ml, 5 końcówek aplikacyjnych

#3621-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste Universal (A2)

#3622-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste Clear

#3623-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste Brown (A4)

#3624-EU PANAVIA™ V5 Try-in Paste White

Uzupełnienie 2,4 g/1,8 ml

#4513-EU Applicator tip

20 końcówek aplikacyjnych (16G)

ODKRYJ SWÓJ PRZEWODNIK PO CEMENTOWANIU



TEETHMATE™ DESENSITIZER

Pierwszy znoszący nadwrażliwość preparat, który stanowi realne rozwiązanie problemu nadwrażliwości zębów.

To produkt naturalny, nieszkodliwy dla tkanek. TEETHMATE™ DESENSITIZER skutecznie eliminuje nadwrażliwość zębów spowodowaną odsłonięciem zębiny. Zabieg trwa zaledwie kilka minut, zapewniając natychmiastową i długotrwałą ulgę. Preparat może być również stosowany pod uzupełnienia bezpośrednie i pośrednie na zębach żywych oraz przed procedurą natychmiastowego uszczelniania zębiny.

#1210-EU Kit

Proszek (6 g), Płyn (4,8 ml), akcesoria

#1215-EU Introductory Kit

Proszek (1,2 g), Płyn (1 ml), akcesoria

#1216-EU Proszek

6 g

#1217-EU Płyn

4,8 ml



Wymieszaj proszek i płyn preparatu TEETHMATE™ DESENSITIZER



Aplikuj przez 30 sekund, a następnie spłucz wodą

CARIES DETECTOR

Caries Detector to doskonały sposób na wykrywanie próchnicy, odgrywający kluczową rolę w utrzymaniu i zachowaniu zębów. Pozwala na selektywne usuwanie tkanek próchnicowych przy jednoczesnym oszczędzaniu zębiny zdolnej do remineralizacji. Chroni również żywotność miazgi i pozwala zachować zdrową strukturę zęba.

Procedura




1. Odizoluj ząb próchnicowy za pomocą koferdamu. Po usunięciu tkanki próchnicowej umyj ubytek i osusz go.



2. Umieść kroplę preparatu CARIES DETECTOR na mikroaplikatorze i nanieś do ubytku.



3. Pozostaw na 10 sekund, a następnie spłucz wodą. Pozostała zębina próchnicowa zostanie zabarwiona na czerwono.

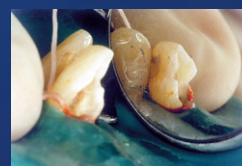

4. Powtórz procedurę wykrywania, aby upewnić się, że zainfekowana próchnica została całkowicie usunięta.



#220-EU

Caries Detector

1 buteleczka 6 ml

CLEARFIL™ DC CORE Plus

**Cementowanie
wkładów koronowo-
korzeniowych
i odbudowa
zrębów zębowych**



CLEARFIL™ DC CORE Plus to dwuskładnikowy, podwójnie utwardzalny materiał do odbudowy zrębu korony zęba.

KORZYŚCI

- Właściwości tiksotropowe
- Moduł elastyczności zbliżony do modułu zębiny
- Podwójnie utwardzalny)
- Wysoka wytrzymałość na zginanie
- 3-minutowy czas pracy
- Możliwość stosowania bez aktywatora z systemem CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 lub z dowolnym innym systemem wiążącym o chemoutwardzalnym mechanizmie polimeryzacji

Procedura

1 Aplikuj CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 ruchem wcierającym	2 Bez konieczności oczekiwania	3 Osusz strumieniem powietrza	4 Utwardź światłem
5 Aplikuj materiał CLEARFIL™ DC CORE PLUS do kanału korzeniowego	6 Umieść przygotowany wcześniej wkład i utwardź światłem	7 Odbuduj zrąb za pomocą CLEARFIL™ DC CORE PLUS	

#2942-EU Dentin Syringe
1 strzykawką (17,9 g/9 ml), akcesoria

#2943-EU White Syringe
1 strzykawką (17,9 g/9 ml), akcesoria


KATANA™ ZIRCONIA Block

Bloczki KATANA™ Zirconia Multi-Layered składają się z czterech warstw tlenku cyrkonu o stopniowanych odcieniach, co pozwala na tworzenie w gabinecie uzupełnień protetycznych o naturalnym gradiencie przezierności. Eliminuje to czasochłonny i skomplikowany proces charakteryzacji uzupełnienia. Materiał nadaje się do wykonywania licówek, wkładów koronowych, koron oraz mostów o rozpiętości do 3 punktów.

MULTI
LAYERED



STML Super przeźierne wielowarstwowe

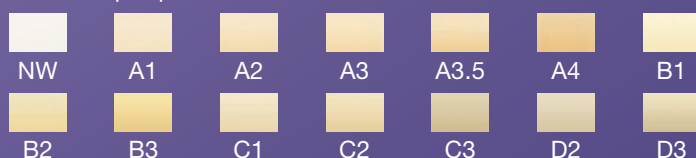

Wytrzymałość
750 Mpa

KATANA™ ZIRCONIA BLOCK - POZNAJ NASZĄ PROCEDURĘ I DOSTĘPNE WARIANTY



CZR FC Paste Stains

Do wszystkich uzupełnień
warstwowych i monolitycznych
z tlenku cyrkonu



Pasta do charakteryzacji zewnętrznej, odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań klinicznych, dostępna w 27 odcieniach. Dzięki tej gotowej do użycia paście można łatwo i szybko spersonalizować warstwowe lub monolityczne uzupełnienia z tlenku cyrkonu, uzyskując optymalne rezultaty. Kompleksowy zestaw niebieskich i szarych niuansów (Light Grey, Dark Grey, Grayish Blue oraz Blue) pozwala na łatwe odtworzenie efektu niebiesko-szarej przezierności w obszarze brzegu siecznego. Dwa rodzaje glazury (Glaze & Clear Glaze) ułatwiają kontrolowanie przezierności na całej powierzchni korony. Estetyczne uzupełnienia pełnocyrkonowe można wykonywać poprzez połączenie FC Paste Stain z materiałami KATANA™ Zirconia UTML, STML, HTML Plus oraz YML.

CZR FC PASTE STAINS - POZNAJ NASZĄ PROCEDURĘ I PRZEWODNIK PO PRODUKTACH



KATANA™ AVENCIA™ Block 2

KATANA™ AVENCIA™ Block 2 to bloczek kompozytowy wzmocniony ceramiką. Nieorganiczne nanocząsteczki ceramiczne są najpierw zagęszczane metodą kompresji mechanicznej, a następnie infiltrowane monomerami. Uzyskany w ten sposób niezwykle mały rozmiar cząsteczek zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną, a także pozwala na łatwe uzyskanie wyjątkowo trwałego połysku powierzchni. Materiał charakteryzuje się również kontrolowaną odpornością na ścieranie przy jednoczesnym zachowaniu właściwości przyjaznych dla zębów przeciwnych.




ROZMIAR BLOCZKA


	a (wys.)	b (szer.)	c (dł.)
12	10 mm	12 mm	15 mm
14L	14,5 mm	14,5 mm	18 mm



KATANA™ AVENCIA™ BLOCK 2 - POZNAJ NASZĄ PROCEDURĘ I DOSTĘPNE WARIANTY

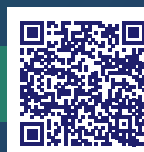

TWIST™ DIA for Zirconia

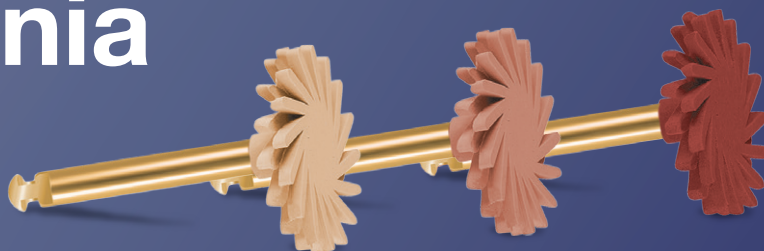

Innowacyjny kształt gumek TWIST™ DIA for Zirconia, wyposażonych w elastyczne lamele polerujące, pozwala uzyskać naturalny połysk na wszystkich uzupełnieniach z tlenku cyrkonu. Niezależnie od tego, czy powierzchnie są płaskie, wypukłe czy wklęsłe, nasyczone diamentowym nasypem lamele polerują je do uzyskania wysokiego połysku. Ponadto system TWIST™ DIA for Zirconia nadaje się do sterylizacji w autoklawie.

1301-IP 14 mm Zestaw wprowadzający

1 poler drobnoziarnisty (fine) + 1 poler średnioziarnisty (medium) + 1 poler gruboziarnisty (coarse)

1302-IP 14 mm Poler gruboziarnisty (Coarse)

1 poler gruboziarnisty

1303-IP 14 mm Poler drobnoziarnisty (Fine)

1 poler drobnoziarnisty

1305-IP 14 mm Poler średnioziarnisty (Medium)

1 poler średnioziarnisty

Obserwuj nas na naszej stronie internetowej
lub w mediach społecznościowych



KONTAKT

Kuraray Europe GmbH

Philipp-Reis-Strasse 4,
65795 Hattersheim am Main, Niemcy
Tel. +48 662 281 282
www.kuraraynoritake.eu/pl
dental-poland@kuraray.com

- Before using this product, be sure to read the instruction manual provided with the product.
- Product specifications and appearance are subject to change without notice.
- The printed colour may differ slightly from the actual colour.

PANAVIA™, CLEARFIL™ and CLEARFIL MAJESTY™ are registered trademarks of KURARAY Co., Ltd. Class IIa medical devices. CE 1639. Notified body: SGS Belgium and CE 0197. Notified body TÜV Rheinland LGA Product GmbH Tillystraße 2, 90431 Nuremberg, Germany.



Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japonia



09/2022