

KLINISKT FALL:

FASADER PÅ CENTRALA INCISIVER
MED PANAVIA™ V5

Fall av Irfan Abas

Tandimplantat & restaurerande tandläkare



Irfan Abas är specialist inom fältet oral implantologi & restaurativ tandvård och en internationell föreläsare på området. Han har hållit mer än 20 presentationer, workshops och live-behandlingskurser över hela världen. TP - en Holländsk dental tidskrift, för vilken han även är redaktör, har publicerat ett flertal artiklar under hans namn. En annan höjdpunkt är en publicering i NTvT, i samarbete med Prof. Gert Meijer (Radboud UMC), under vilkens handledning Abas framgångsrikt slutförde den fyraåriga PostDoc-utbildningen i Rekonstruktiv tandvård 2014. Han är även instruktör och föreläsare för AAIE och ordförande för MINEC Netherlands. Irfan Abas har en egen praktik i Bussum, Nederländerna (tandartsabas.nl).



En frisk 42-årig manlig patient efterfrågade rekonstruktion av sina centrala incisiver, vilka var kraftigt nerslitna.



Före behandling.



Efter framställning av mock-up, preparerades skårar genom densamma.



Utrymmet kontrolleras med ett silikonavtryck.



Slutlig preparation (frontal).



Slutlig preparation (frontal).



Temporära fasader framställda av temporärt resinbaserat material (Protemp).



Punktetsning innan de temporära fasaderna bondades på plats.



En liten mängd flytande komposit applicerad på de etsade ytorna.



Ljushärdning över hela ytan på de temporära fasaderna.



Färdiga temporära fasader.



Fasaderna framställda av tandteknikern.



Inprovning av fasaderna.



Kofferdam placerad för att möjliggöra kontrollerad adhesiv cementering.



Etsning med 35 % fosforsyra K-Etchant Syringe i 10 sekunder.



Behandling med självetsande primer PANAVIA™ V5 Tooth Primer (får verka i 20 sek.).




Etsning av litiumdisilikatfasaderna med fluorvätesyra.



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER Plus MDP-silanprimer applicerad på fasaderna.



Fasaderna fästade på ett placeringsinstrument före permanent cementering.

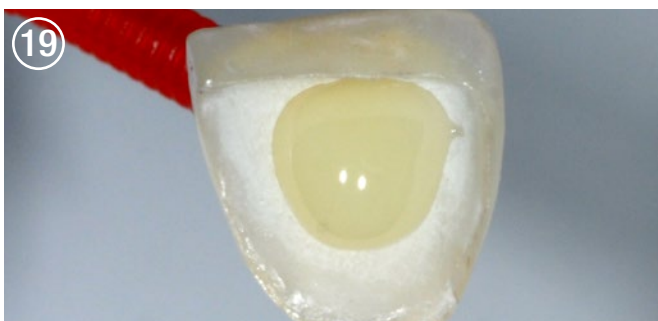

PANAVIA™ V5 Paste applicerad på fasadens inneryta.




PANAVIA™ V5 Paste fördelad på fasaden.

I DENNA FALLSTUDIE, ANVÄNDE IRFAN ABAS
PANAVIA™ V5 OCH CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS



Fasaden placerad och överskott avlägsnat.

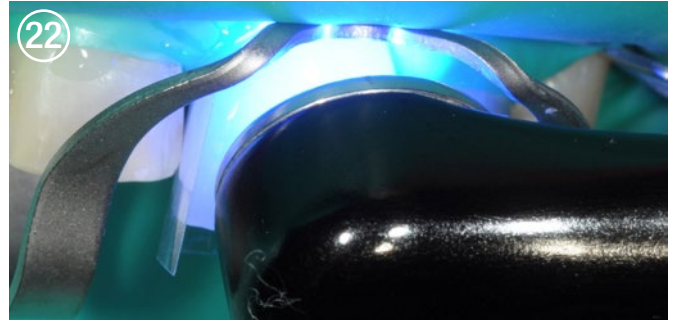

Ljushärdning (minimum 10 sek.).



Omedelbart efter den adhesiva cementeringen med PANA VIA™ V5.



Direkt post-op.



Direkt post-op.



Två månader post-op.



Ett år post-op.



Ett år post-op.