

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL -SÄVYT

KLIININEN TAPAU



TEKIJÄ TOHTORI LUCA DUSI

- Hän valmistui erinomaisin arvosanoin hammaslääketieteen ja protetiikan opinnoista Milanon yliopistosta 2010.
- Vuosina 2011–2012 ja 2012–2013 hän toimi protetiikkateknologian opettajana apulaisprofessorin virassa Milano-Bicoccan yliopistossa.
- SIdp:n (Italian parodontologiyhdistyksen) ja AIC:n (Italialaisen kulttuuriperinnön konservoinnin akatemian) jäsen.

Tämä potilas pyysi pelkästään esteettisistä syistä kartionmuotoisen yläkakkosensa (12) korjaamista. Potilaalle tarjottiin hoitoa, johon sisältyisi oikomishoidon ensimmäinen vaihe, jolla olisi pyritty luomaan yläkakkosen ihanteelliseen muotoon palauttamisen vaatima tila. Koska potilas kieltäytyi tästä oikomishoidosta, hammas päätettiin korjata yhdistelmämuovilla ja sovittaa käytettävissä olevaan tilaan.

Sidosjärjestelmänä käytettiin CLEARFIL™ SE BOND 2 -tuotetta, ja korjaus toteutettiin uudella CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal -yhdistelmämuovilla. Vaikka tämä materiaali on suunniteltu yhden sävyn tekniikkaan, jossa on vain kaksi sävyä etualueelle, päätin yhdistää pastat, jotta saavutettaisiin paras lopputulos. Yläkakkosen kervikaali- ja keskiosan rekonstruoinnissa käytettiin tummaa sävyä (UD). Inkisaaliosa korjattiin vaalealla (UL) sävyllä.



Kuva 1.

Alkutilanne, jossa yläkakkonen on kartionmuotoinen (12).



Kuva 2.

Alkutilanteen kuva, joka on otettu polarisoivalla suodattimella sävyn arviointia varten.



Kuva 3.

Valittiin uusi CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal -yhdistelmämuovi, jossa on vain kaksi sävyä etualueelle. Se mahdollistaa hyvän optisen integraation Kuraray Noritake Dentalin valon diffuusiota edistävän teknologian ansiosta.



Kuva 4.

Sävyntäätys hampaan pinnalle kovettettujen CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 -yhdistelmämuovin Universal UL (Universal Light)- ja UD (Universal Dark) -sävynäytteiden avulla.



Kuva 5.

Eristys kofferdamilla.



Kuva 6.

CLEARFIL™ SE BOND 2 -tuotetta käytettiin vahvan sidoksen muodostamiseen hammasrakenteen ja yhdistelmämuovimateriaalin välille.



LOPPUTILANNE

Kuva 7.

Yhdistelmämuovin väri ja pinnan viimeistely sulautuvat hyvin viereisiin hampaisiin.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal -sävyt

LISÄTIETOJA TUOTEN VERKKOSIVUILTA

MITÄ VERKKOSIVUILTA LÖYTYY

- ✓ yleistä tietoa CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal -sävyistä
- ✓ koko tuotevalikoima
- ✓ käyttöturvallisuustiedotteet



[KURARAYNORITAKE.EU/FI/CLEARFIL-MAJESTY-ES2-UNIVERSAL](https://www.kuraraynoritake.eu/fi/clearfil-majesty-es2-universal)