

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL SHADES

KLINISCHE CASUS



CASUS DOOR DR. LUCA DUSI

- In 2010 cum laude afgestudeerd in Tandheelkunde en Tandheelkundige Prothetiek aan de Universiteit van Milaan.
- In 2011/2012 en 2012/2013 doceerde hij als Adjunct Professor Prothetische Technologie aan de Universiteit van Milaan-Bicocca.
- Aangesloten bij Sldp (Italian Society of Periodontology) en AIC (Italian Academy of Conservation).

Deze patiënte wilde - uitsluitend om esthetische redenen - een reconstructie van haar kegelvormige (12). Aan de patiënte werd een behandeling aangeboden inclusief een eerste fase orthodontische behandeling om de nodige ruimte vrij te maken voor de reconstructie van de laterale snijtand in de ideale maatvoering. De patiënte weigerde echter om de orthodontische behandeling te ondergaan en daarom werd besloten om de tand met composiet te herstellen binnen de reeds beschikbare ruimte.

Als adhesief systeem werd CLEARFIL™ SE BOND 2 gebruikt, en de restauratie werd gerealiseerd met de nieuwe composiet CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal. Hoewel dit materiaal is ontwikkeld voor een single-shadetechniek met slechts twee kleuren die zijn afgestemd op de kleuren van de anterieure tanden, koos ik voor een combinatie van beide pasta's om een optimaal resultaat te bereiken. De kleur UD (Universal Dark) werd gebruikt voor de reconstructie van het cervicale en centrale deel van de laterale snijtand; het incisale deel werd gerestaureerd met UL (Universal Light).



Afb. 1.

Aanvankelijke situatie: de kegelvormige laterale incisief rechtsboven(12).



Afb. 2.

Foto van de aanvankelijke situatie, genomen met een polarisatiefilter voor kleurbeoordeling.



Afb. 3.

De keuze viel op de nieuwe CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal composiet met slechts twee kleuren voor het anterieure gebied. Deze zorgt voor een goede optische integratie dankzij de LichtDiffusieTechnologie van Kuraray Noritake Dental.



Afb. 4.

Kleurbeoordeling met behulp van uitgeharde proefstukjes CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal UL (Universal Light) en UD (Universal Dark) op de tandoppervlakken.



Afb. 5.

Isolatie met cofferdam.



Afb. 6.

Gebruik van CLEARFIL™ SE BOND 2 voor een sterke verbinding tussen de tandstructuur en de composiet.



EINDRESULTAAT

Afb. 7.

Ten aanzien van kleur en oppervlakteafwerking harmonieert de universele composiet mooi met de buurelementen.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

Universal shades

BEZOEK DE PRODUCTPAGINA ONLINE VOOR MEER DETAILS

ONLINE VIND JE DE VOLGENDE INFORMATIE

- ✓ Algemene informatie over CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal shades
- ✓ Het volledige productassortiment
- ✓ Veiligheidsinformatiebladen



KURARAYNORITAKE.EU/UNIVERSAL-COMPOSITE