

UDSKIFTNING AF EN AMALGAM-RESTAURERING PÅ EN PRIMÆR MOLAR I OVERKÆBEN

MED CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL



EKSEMPEL FRA Dr. MICHAŁ POKOJSKI

Michał Pokojński er uddannet ved det medicinske universitet i Łódź i Polen. Han driver sin egen private praksis i Starachowice, regionen Świętokrzyskie. Hans passion er endodonti og æstetisk tandpleje. I sit daglige arbejde er mikroskop og kamera hans vigtigste redskaber til at give sine patienter professionelle og præcise resultater og til at sikre et passende niveau af kommunikation og forståelse. Hans praksis anvendte EBD fra begyndelsen, fordi det efter hans overbevisning er viden, videnskabelige fakta og engagement, der er grundlæggende principper bag både medicin og tandpleje. Hans mål er at behandle patienter på det højeste kvalitetsniveau ved hjælp af de allerbedste tilgængelige materialer, instrumenter og procedurer. Hans eksempler er velkendte verden over takket være moderne kommunikationsmetoder som Facebook og Instagram.

Universelle resinkompositter med et forenklet farvekoncept er populære, da de gør fremgangsmåden ved direkte restaurering mere strømlinet. Desværre kræver mange af de tilgængelige produkter, der hævder at blande sig godt med den omgivende tandstruktur uafhængigt af dens farve, at der bruges en blokker eller en opaquer til at maskere mørke områder. Ifølge Kuraray Noritake Dental Inc. er CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal anderledes. Derfor besluttede jeg at teste dens Universal Shade (U) designet til alle mulige restaureringer i den posteriore region i forbindelse med udskiftning af en amalgamrestaurering.

Den restaurering, der skulle udskiftes på grund af sekundær karies, sad i det maksillære molar område på en mandlig patient. Som det sædvanligvis er tilfældet med amalgamrestaureringer viste den resterende sunde tandstruktur en vis misfarvning. Kaviteten blev forberedt, emaljen ætset og hele bindingsoverfladen behandlet med CLEARFIL™ SE BOND. Derefter blev restaureringen opbygget med CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal i flere lag. For at give tanden et naturligt udseende blev der appliceret nogle brune nuancer til furerne før pudsnings og polering. Restaureringen viser en naturlig integration i den omgivende tandstruktur, og den er i stand til at maskere misfarvningen fra kavitetens bund.



Fig. 1.

Præoperativt billede, der viser de amalgamrestaureringer, der skal udskiftes.



Fig. 2.

Tandens udseende efter fjernelse af amalgam, karies udboring og klargøring af kaviteten.



Fig. 3.

Tanden er blevet opbygget med CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal (U shade).



AFSLUTTENDE RESULTAT

Fig. 4.

Umiddelbart behandlingsresultat.

CLEARFIL™ SE BOND og CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal
BESØG VORES HJEMMESIDE FOR AT FÅ FLERE OPLYSNINGER

DET KAN DU FORVENTE AT FINDE ONLINE

- ✓ Generelle oplysninger om CLEARFIL™ SE BOND og CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal
- ✓ Fuldt produktsortiment
- ✓ Sikkerhedsdatablade



KURARAYNORITAKE.EU