

VIISAUDENHAMPAAN PRIMÄÄRIKARIEKSEN HOITO

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSALILLAL



MICHAŁ POKOJSKI KLIININEN TAPAU

Michał Pokojński valmistui Puolassa Lodzhin lääketieteellisestä yliopistosta. Hän pitää yksityispraktiikkaansa Starachowicessa, Swietokrzyskiessä Volvodeshipissä. Hänen intohimonsa on endodontia ja säilyttävä esteettinen hammashoito. Hänen päivittäisissä tehtävissään mikroskooppi ja kamera ovat hänen tärkeimmät työkalunsa voidakseen tarjota potilailleen ammattimaiset ja tarkat toimenpiteet tarjoten näin hyvän kommunikoinnin ja ymmärryksen. Hänen praktiikkaansa ohjasi alusta alkaen EBD, koska hänen mielestään tieto, tieteelliset faktat ja omistautuminen työlle ovat lääketieteen ja hammaslääketieteen perusta. Hänen tavoitteena on tarjota potilailleen laadukkainta mahdollista hoitoa käyttäen parhaita materiaaleja, instrumentteja ja menetelmiä. Hänen tapauselostuksensa tunnetaan maailmalla kiitos modernien kommunikointivälineiden kuten Facebook ja Instagram.

Paikatessani primäärikariesleesioita taka-alueella yhdistelmämuovilla haluan käyttää materiaaleja, jotka tarjoavat korkealaatuiset hoitotulokset tehokkain menetelmin. Tärkeimmät laadun kriteerit täytteissäni ovat täydellinen saumatiiviys ja pitkäkestoinen toiminnallisuus, jotka antavat pitkän ja terveellisen eliniän sinänsä terveelle hampaalle.

Luotettavuus yhdistettynä helppokäyttöisyyteen on se, mitä odotan valitsemaltani materiaaliyhdistelmältä: CLEARFIL™ SE BOND 2, suosittu itse-etsaava alkuperäistä MDP-monomeeria sisältävä sidosaine, ja CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal. Kuraray Noritake Dentalin mukaan tämä innovatiivinen yhdistelmämuovi sisältää kaikkien soveltuvan sävykonseptin yhdistettynä hyviin mekaniisiin ominaisuuksiin kuten alhainen kutistuminen, kulumiskestävyys ja värin pysyvyys kuten jo muut CLEARFIL MAJESTY™ tuotteet ovat osoittaneet. Yksi sävy on suunnattu taka-alueelle, jolloin sävyn määrittäminen on eliminoitu ja hammaslääkäri voi keskittyä klinisiin työvaiheisiin. Tässä tapauksessa pieni primääridefekt viisaudenhampaassa korjattiin. Lopputulos puhuu puolestaan.



Kuva 1.

Tilanne kaviteetin preparoinnin aikana paljastaa kariesleesion.



Kuva 2.

Preparoitu kaviteetti sidosaineen applikoinnin jälkeen.



LOPPUTILANNE

Kuva 3.

Hoitotulos, jossa yhdistelmämuovi integroituu harmonisesti ympäröivään kudokseen.

CLEARFIL™ SE BOND 2 ja CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal TUTUSTU TARKEMMIN NETISSÄ.

MITÄ NETISTÄ LÖYTYY

- ✓ Yleistietoa CLEARFIL™ SE BOND 2:sta ja CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universalista
- ✓ Täydellinen tuotevalikoima
- ✓ Turvallisuustiedotteet



KURARAYNORITAKE.EU