

KLINIKINIS ATVEJIS: LAMINAČIŲ DĖJIMAS ANT CENTRINIŲ KANDŽIŲ NAUDOJANT „PANAVIA™ V5“



Irfan Abas, Dantų implantologas ir atstatomosios odontologijos specialistas

Irfanas Abas yra implantologijos ir atstatomosios odontologijos specialistas bei tarptautinis pranešėjas šia tema. Jis surengė daugiau nei 20 pristatymų, dirbtuvių ir gyvų chirurgijos kursų visame pasaulyje. Olandų odontologijos žurnale TP, kurį jis redaguoja, paskelbė daugybę straipsnių. Dar vienas paminėtinas pasiekimas: publikacija leidinyje NTvT, bendradarbiaujant su prof. Gertu Meijeriu (Radboudo UMC), kuriam vadovaujant Abasas 2014 metais sėkmingai baigė ketverius metus trukusias podoktorantūros rekonstrukcinės odontologijos studijas. Jis taip pat yra AAIE instruktorius ir dėstytojas bei „MINEC Netherlands“ pirmininkas. Irfanas Abasas turi savo praktiką Busume, Nyderlanduose (tandartsabas.nl).



Sveikas 42-ejų metų pacientas paprašė atkurti centrinius kandžius, kurie buvo labai nusidėvėję.



Paruošiamasis gydymas

PARUOŠIMAS (2-5)



Bandomųjų restauracijų forma buvo perkelta ant nešlifuočių dantų ir ant jų padaryti grioveliai



Kad tilptų dvi ličio disilikato laminatės, reikėjo paruošti 1 mm preparaciją. Pašalinus bandomąsias restauracijas, preparacijos buvo išstbulintos



Dydžio patikrinimas naudojant silikoningą formą



Galutinis paruošimas (iš priekio)



LAIKINOSIOS LAMINATĖS (6-10)

Laikinosios laminatės pagamintos iš laikinos dervos pagrindo medžiagos („Protemp“)



Ėsdinimas prieš uždedant laikinas laminates



Ant išėsdintų paviršių uždėtas nedidelis kiekis takaus kompozito



Laikinųjų laminačių paviršių kietinimas šviesa



Pagamintos laikinosios laminatės



GALUTINIS CEMENTAVIMAS (11-25)

Dantų techniko pagamintos laminatės



Tikrinamas laminačių tinkamumas



Uždėtas koferdamas, leidžiantis kontroliuoti adhezinį cementavimą



Ėsdinimas „K-Etchant Syringe“ 35 % fosforo rūgštimi 10 sekundžių



Apdorojimas savaiminio ėsdinimo praimeriu „PANAVIA™ V5 Tooth Primer“ (uždėtas 20 sekundžių)




Ličio disilikato laminačių ėsdinimas vandenilio fluoridu



Ant laminačių uždedamas „Clearfil Ceramic Primer Plus“ MDP silano praimeris



Prieš galutinį cementavimą laminatės pritvirtinamos prie instrumento

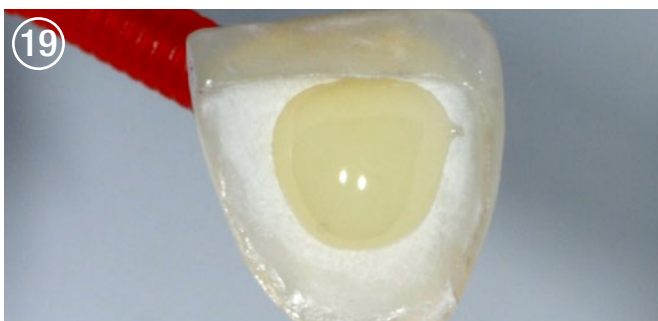

„PANAVIA V5 Paste“ užtepama ant vidinio laminatės paviršiaus




„PANAVIA V5 Paste“ paskirstoma ant laminatės paviršiaus.

ŠIAM KLINIKINIUI ATVEJUI IRFANAS ABASAS NAUDOJO
„PANAVIA™ V5“ IR „CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS“.



Uždėtos laminatės ir pašalintas perteklius

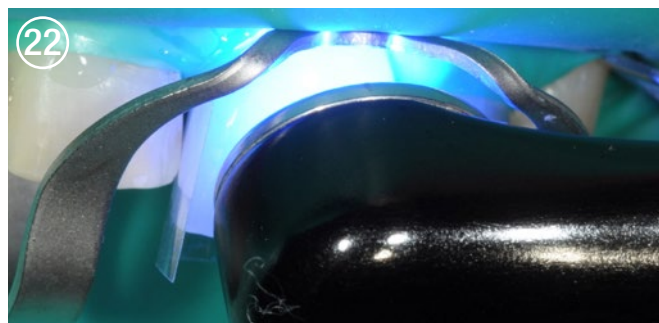

Kietinimas šviesa (mažiausiai 10 sekundžių)



Iškart po adhezinio cementavimo naudojant PANA VIA V5



Iš karto po procedūros



Iš karto po procedūros



Du mėnesiai po procedūros



Metai po procedūros



Metai po procedūros