

DOBRZE MIEĆ POD RĘKĄ

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal



CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal to kompozyt, który dopasuje się do wszystkich odcieni zębów w odcinku bocznym. Przewidywalny, powtarzalny, z gwarancją długiego czasu pracy. Plastikowy, niezwykle wydajny i ekonomiczny. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal nie wymaga opakerów, a przede wszystkim daje poczucie pewności i spokoju – nawet, gdy w poczekalni robi się gorąco!

BORN IN JAPAN

Kuraray Europe, BU Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Niemcy
+48 662 281 282, dental-poland@kuraray.com www.kuraraynoritake.eu/pl



PRZYPADEK KLINICZNY

MINIMALNIE INWAZYJNA KOMPOZYTOWA REHABILITACJA ESTETYCZNA TECHNIKĄ POJEDYNCZEGO KOLORU CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL

lek. dent. Tomasz Fałkowski



SYTUACJA POCZĄTKOWA

Brzeg sieczny zęba 21 odłamany po urazie. Stare, wymagające wymiany wypełnienia w zębach 12 i 22, a także niezbędne częściowe licowanie zęba 12.



PREPARACJA I ODBUDOWA

Odbudowę zębów wykonano kompozytem **CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal** w odcieniu UL, z niewielkim dodatkiem kompozytu w odcieniu A2 (celem ułatwienia adaptacji kompozytu do ścian ubytków). Polerowanie gumkami **TWIST™ DIA for Composite**.



EFEKT KOŃCOWY

Dzięki kompozytowi do techniki pojedynczego odcienia, który wyeliminował konieczność doboru odcieni i warstwowania, czas wizyty skrócił się do 60 minut.