

CLEARFIL™ ST OPAQUER

SKUTECZNE I ŁATWE MASKOWANIE
METALU I PRZEBARWIENÍ



BORN IN JAPAN


Kuraray Europe, BU Medical Products, Philipp-Reis-Str. 4, 65795 Hattersheim am Main, Niemcy
+48 662 281 282, dental-poland@kuraray.com www.kuraraynoritake.eu/pl



PRZYPADEK KLINICZNY

WEWNĄTRZYSTNA NAPRAWA LICOWANIA MOSTU NA PODBUDOWIE METALOWEJ Z WYKORZYSTANIEM CLEARFIL™ ST OPAQUER

lek. dent. Tomasz Fałkowski

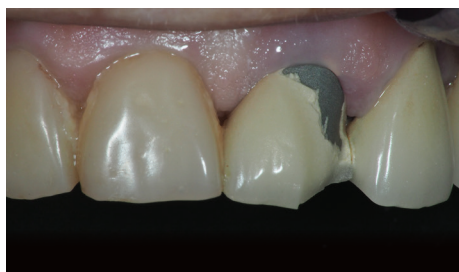

Uszkodzone licowanie ceramiczne w rozległym moście. Wymiana całego uzupełnienia protetycznego okazała się być poza zasięgiem finansowym pacjenta.



Przygotowanie powierzchni poprzez piaskowanie tlenkiem glinu o wielkości cząstek 50 µm oraz aplikację systemu wiążącego **CLEARFIL™ Universal Bond Quick**. Odsłonięty fragment podbudowy metalowej został pokryty dwiema oddzielnie polimeryzowanymi warstwami (każda warstwa do 0,5 mm) kompozytu **CLEARFIL™ ST OPAQUER** w odcieniu US (A2/A3).



Podwójna warstwa materiału **CLEARFIL™ ST OPAQUER** w połączeniu z kompozytem **CLEARFIL MAJESTY™ ES-2** w odcieniu A3D pozwoliła uzyskać wysoką nieprzeziorność naprawianego uszkodzenia oraz skutecznie imitować efekt starej, monolitycznej ceramiki.



Efekt końcowy chwilę po wypolerowaniu naprawianego miejsca gumkami polerskimi **TWIST™ DIA for Composite**. Połysk i kolor zbliżone do pierwotnej ceramiki licującej.