

Indikation 2 Cementering av fasader

PANAVIATM V5


Kiselbaserade keramer (t.ex. porslin)

Rengör och torka tandytan på vanligt vis.

- 1** Vid behov, prova in fasaden med Try-in-pasta, skölj och avlägsna.



- 2** ① Applicera fluorvätesyra eller K-ETCHANT Syringe, skölj och torka.
② Applicera CEREMEC PRIMER PLUS och torka.

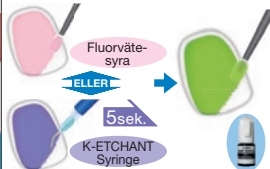

- 3** ① Applicera K-ETCHANT på emaljen, vänta 10 sek, skölj och torka.



- ② Applicera Tooth Primer, vänta 20 sek. och torka noggrant med mild luftström.



- 4** Dosera cement och placera fasaden.



- 5** Avlägsna överskott med någon av metoderna. För opak färg används metod B.

A. Punkthårdning

ELLER

B. Med en liten borste

- ① Ljushärda i 3 till 5 sek.



- ② Avlägsna med en sond.



- ① Avlägsna med en liten borste.



- ② Ljushärda marginalerna. Se tabell 2.



- 6** Behåll isolering i 3 minuter, eller ljushärda* translucenta fasader.



*Se tabell 2. Den opaka färgen är endast självhärdande.