

CLEARFIL™ DC CORE PLUS

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Odbudowa zrębu koronowego i cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych przy użyciu CLEARFIL™ DC CORE PLUS

Należy przestrzegać standardowych zasad postępowania i zabezpieczenia przed dostępem wilgoci podczas przygotowania kanału korzeniowego.

1 Przygotowanie powierzchni wkładu

W przypadku wkładów z włókna szklanego:
1) Nanieść wytrawiacz K-ETCHANT ze strzykawki, spłukać i osuszyć powietrzem.

W przypadku wkładów metalowych:
1) Przeznaczoną do przyklejenia powierzchnię wypiskować cienkim glinem, oczyścić w myłce ultradźwiękowej i osuszyć strumieniem powietrza.

2) Aplikować BOND, a następnie osuszyć delikatnie strumieniem powietrza

Suszyć powietrzem przez 5 sekund

5 sekund

2 Przygotowanie zęba. Wybór techniki trawienia.

System samotrawiący (przejdź do kroku 3).

Selektywne wytrawianie^{*1}

Całkowite wytrawianie^{*1}

10 sekund

^{*1} Porównaj – Odbudowy bezpośrednie

Nanieść BOND i wcierać w powierzchnię.

3

Nie czekać

Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.

4

5 sekund +

Utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej.

5

5 - 10 sekund

Cementować wkład i odbudować zrąb koronowy materiałem CLEARFIL™ DC CORE PLUS zgodnie z instrukcją użycia.

6

**MATERIAŁY DO ODBUDOWY
ZRĘBU KORONOWEGO**