

Direkte Restauration mit lichthärtendem Komposit

Kavität präparieren, reinigen, desinfizieren und trocknen.



Clearfil™ Liner Bond 2V Primer A und B im Verhältnis 1:1 in einer Anmischschale mischen.



Clearfil™ Liner Bond 2V Primergemisch auftragen, 30 Sek. einwirken lassen.



Moderat mit Luft trocknen, nicht absprühen!



Moderat mit Luft verpusten, nicht absprühen!



Mit Licht 20 Sek. aushärten.



Mit lichthärtendem Komposit rekonstruieren.



EMPFEHLUNG

Als Komposit für ästhetische Restaurationen eignet sich Clearfil™ Majesty Esthetic besonders gut!



Behandlung von freiliegenden Zahnhalsen (Desensibilisierung)

Den freiliegenden Zahnhals bzw. die freiliegende Wurzeloberfläche reinigen und trocknen.



Clearfil™ Liner Bond 2V Primer A und B im Verhältnis 1:1 in einer Anmischschale mischen.



Primergemisch auftragen, 30 Sek. einwirken lassen.



Moderat mit Luft trocknen, nicht absprühen!



Bond A auftragen.



Moderat mit Luft trocknen, nicht absprühen!



Mit Licht 20 Sek. aushärten.



Dünnfließendes Komposit z.B. Clearfil™ Majesty Flow auftragen.



Mit Licht 20 Sek. aushärten.



Überschüsse vorsichtig entfernen.



Direkte Restauration mit chemisch härtendem Komposit

Kavität präparieren, reinigen, desinfizieren und trocknen.



Clearfil™ Liner Bond 2V Primer A und B im Verhältnis 1:1 in einer Anmischschale mischen.



Clearfil™ Liner Bond 2V Primer-gemisch auftragen, 30 Sek. einwirken lassen.



Moderat mit Luft trocknen, nicht absprühen!



Clearfil™ Liner Bond 2V Bonding A und B 1:1 für 10 Sek. in einer Anmischschale mischen.



Clearfil™ Liner Bond 2V Bonding-gemisch auftragen.



Moderat mit Luft verpusten, nicht absprühen!



Mit chemisch härtendem Komposit rekonstruieren.



EMPFEHLUNG

Als chemisch härtendes Komposit für wirtschaftliche Restaurationen eignet sich Clearfil™ Fil New Bond besonders gut.



Intraorale Reparatur einer Kunststoff- oder Keramikverblendung

Die Ränder der defekten Verblendung mit einem rotierenden Instrument anschrägen.



Die Ränder der defekten Verblendung sollten mit K-etchant Gel 5 Sek. gereinigt werden.



Die Metallfläche gründlich waschen und anschließend trocknen.



Den Alloy Primer 5 Sek. auf das Metall auftragen.



Das Silan herstellen: Clearfil™ Liner Bond 2V Primer A und B, sowie Porcelain BondActivator im Verhältnis 1:1:1 in einer Anmischschale mischen.



Das Silan auf die Ränder der defekten Verblendung auftragen.



Den Bereich vorsichtig trocknen, nicht absprühen!



Das Clearfil™ Liner Bond 2V Bonding A auf die Ränder der defekten Verblendung auftragen.



Den Bereich vorsichtig trocknen, nicht absprühen!



Schicht 20 Sek. lichthärt.



Als Erstes eine opake Kunststoffschicht als Deckschicht auf das Metall auftragen.



Opaken Kunststoff 10 Sek. lichthärt.



Rekonstruktion des Zahnes mit licht- oder dual-härtendem Komposit.



EMPFEHLUNG

Als Komposit für ästhetische Restaurationen eignet sich Clearfil™ Majesty Esthetic besonders gut!



Ihre Serviceline:
0 7000 - Kuraray
5 8 7 2 7 2 9

ADHÄSIVE

CLEARFIL™ LINER BOND 2V