

# CLEARFIL™ SE BOND

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

## Wewnątrzustna naprawa przy użyciu materiału kompozytowego koron licowanych ceramiką, ceramiką hybrydową lub kompozytem

Obszar odtłamania opracować stożkowym wiertłem diamentowym.




Nanieść K-ETCHANT.



Splukać.



Osuszyć strumieniem powietrza.

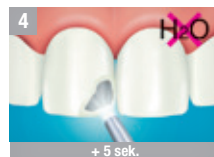

Nanieść ALLOY PRIMER.



Wcierać PRIMER zmieszany z CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR.



Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.



Aplikować BOND.




Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.




Utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej.



Nanieść opaker (CLEARFIL™ ST OPAQUER).

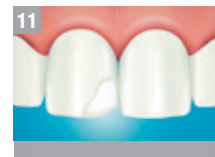

Utwardzać światłem lampy polimeryzacyjnej.

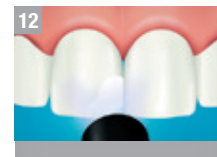

Wykonać odbudowę.



## CLEARFIL™ SE BOND

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

### Wypełnienia bezpośrednie z użyciem kompozytu lub kompomeru

<p>1</p> <p>Wcierać PRIMER.</p>  <p>20 sekund</p>	<p>2</p> <p>Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.</p> 	<p>3</p> <p>Nanieść BOND.</p> 	<p>4</p> <p>Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.</p> 	<p>5</p> <p>Utwardzać światłem lampy polimerizacyjnej.</p>  <p>10 sekund</p>	<p>6</p> <p>Wykonać wypełnienie z kompozytu lub kompomeru.</p> 
--	---	---	--	---	--