

PANAVIA™ F 2.0

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Cementowanie licówek ceramicznych

Powierzchnie klejone licówek wytrawić kwasem fluorowodorowym. Jeżeli zostały już wytrawione w laboratorium, to przejść do kroku 2.



Nanieść wytrawiacz w żelu K-ETCHANT GEL (40% kwas fosforowy) na czystą powierzchnię i pozostawić tam na 5 sekund.



Na przeznaczoną do klejenia powierzchnię nanieść CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS i dokładnie osuszyć delikatnym strumieniem powietrza niezanieczyszczonego olejem.



Nanieść na powierzchnię zęba żel trawiący K-ETCHANT GEL (40% kwas fosforowy) i pozostawić na 10 sekund. Splukać i osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.



Zmieszać ze sobą jednakowe ilości ED PRIMER II A i B. ED PRIMER II inicjuje proces wiązania cementu.



Nanieść na powierzchnię zęba. Począć 30 sekund.



Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.



Dozować jednakowe ilości pasty A i B. Mieszać przez co najmniej 20 sekund.




Aplikować zmieszane pasty bezpośrednio na klejoną powierzchnię.



Usunąć nadmiar materiału.

(Częściowe utwardzenie nadmiaru materiału przez 2-3 sekundy przy pomocy konwencjonalnej lampy halogenowej lub diodowej ułatwia jego usunięcie).

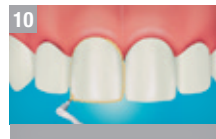

Utwardzać światłem lampy od strony brzegów uzupełnienia.

Naświetlać każdą powierzchnię przez 20 sekund konwencjonalnymi lampami halogenowymi bądź LED lub przez 5 sekund lampami plazmowymi bądź halogenowymi dużej mocy.



Brzegi uzupełnienia pokryć OXYGUARD™ II, aby umożliwić całkowite związanie materiału. Pozostawić na 3 minuty.

