

PANAVIA™ F 2.0

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Cementowanie uzupełnień z silanizowanej ceramiki / kompozytu

1 Wypłaskować powierzchnię.



2 Nanieść wytrawiacz w żelu K-ETCHANT GEL (40% kwas fosforowy) na czystą powierzchnię i pozostawić tam na 5 sekund. Spłukać i osuszyć powietrzem.



5 sekund

3 Na przeznaczoną do cementowania powierzchnię nanieść CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS i osuszyć delikatnym strumieniem niezaolejonego olejem powietrza.



4 Zmieszać ze sobą jednakowe ilości ED PRIMER II A i B. EED PRIMER II inicjuje proces wiązania cementu.



* Pasty należy użyć w ciągu 5 minut od zmieszania

5 Nanieść primer na filar zęba. Poczekaj 30 sekund.



30 sekund

6 Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.



7 Dozować jednakowe ilości pasty A i B. Mieszać pasty A i B przez co najmniej 20 sekund.



Oznaczenie
Linia pomocnicza

8 Mieszać pasty A i B przez minimum 20 sekund.



9 Przenieść zmieszane pasty.



10 Usunąć nadmiar materiału. (Częściowe utwardzenie nadmiaru materiału przez 2-3 sekundy przy pomocy konwencjonalnej lampy halogenowej lub diodowej ułatwia jego usunięcie).



11 Utwardzać światłem lampy od strony brzegów uzupełnienia. Naświetlać każdą powierzchnię przez 20 sekund konwencjonalnymi lampami halogenowymi bądź LED lub przez 5 sekund lampami plazmowymi bądź halogenowymi dużej mocy



20 sekund