

PANAVIA™ F 2.0

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych

Przygotowanie powierzchni wkładu.

1

W przypadku wkładów metalowych:
Wypłaskować tlenkiem glinu, oczyścić przez dwie minuty w myłce ultradźwiękowej, nanieść ALLOY PRIMER i osuszyć.

W przypadku wkładów z włókna szklanego:
Nanieść żel trawiący K-ETCHANT, poczekać 5 sekund, spłukać i osuszyć powietrzem. Nanieść CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS, osuszyć starannie strumieniem powietrza niezanieczyszczonego olejem.




W przypadku użycia CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS prosimy zapoznać się z instrukcją użycia produktu.

Zmieszać ze sobą jednakowe ilości ED PRIMER II A i B.
ED PRIMER II inicjuje proces wiązania cementu.

2



*Pasty muszą zostać użyte w ciągu 5 minut od zmieszania

Nanieść primer na filar zęba.
Poczekać 30 sekund.

3



30 sekund

Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.
Nadmiar primeru usunąć przy pomocy sączka papierowego.

4



Dozować jednakowe ilości pasty A i B.

5



Oznaczenie

Linia pomocnicza

Zmieszać ze sobą pasty A i B i nanieść na powierzchnię wkładu.

6



Cementować wkład, a nadmiar cementu rozprowadzić na koronowych strukturach zęba.

7



Materiał kompozytowy do odbudowy zrębu korony aplikować bezpośrednio na PANAVIA™ F 2.0, następnie utwardzać światłem lampy lub pozostawić do chemicznego związania.

8

