

PANAVIA™ F 2.0

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Osadzanie prac protetycznych takich jak korony z metali szlachetnych i stopów metali szlachetnych z innymi metalami, licowane korony, mosty, wkłady koronowe inale oraz onlay

Wypiaskować,
spłukać i osuszyć.



Nanieść ALLOY PRIMER
na wewnętrzną powierzchnię
odbudowy metalowej.



Zmieszać ze sobą jednakowe
ilości ED PRIMER II A i B.
ED PRIMER II inicjuje proces wiązania cementu.



Nanieść primer na filar zęba.
Poczekać 30 sekund.



Osuszyć delikatnym
strumieniem powietrza.



Dozować jednakowe ilości
pasty A i B.



Mieszać pasty A i B co najmniej
przez 20 sekund.



Przenieść zmieszane pasty.



Usunąć nadmiar materiału.
(Częściowe utwardzenie nadmiaru
materiału przez 2-3 sekundy przy pomocy
konwencjonalnej lampy halogenowej
lub diodowej ułatwia jego usunięcie)



Utwardzać światłem lampy
od strony brzegów uzupełnienia.
Naświetlać każdą powierzchnię
przez 20 sekund konwencjonalnymi
lampami halogenowymi bądź LED
lub przez 5 sekund lampami plazmowymi
bądź halogenowymi dużej mocy.



Brzegi uzupełnienia pokryć
OXYGUARD™ II, aby umożliwić
całkowite związanie materiału.
Pozostawić na 3 minuty.

