

CEMENTO RESINA AUTOADESIVO

PANAVIA™ SA Cement Universal PROCEDURE

- ✓ Cementazione di corone, ponti, inlay e onlay
- ✓ Cementazione di restauri protesici su monconi di impianti e strutture*
- ✓ Cementazione di ponti adesivi e splint
- ✓ Cementazione di perni moncone



INDICAZIONI D'USO

Indicazione 1



Corone

Inlay/Onlay

Ponti

Indicazione 2



Impianti

Indicazione 4



Perni

PREPARAZIONE DEL RESTAURO PROTESICO

Seguire le istruzioni per l'uso del materiale da restauro. In assenza di istruzioni specifiche, consigliamo la seguente procedura:

Ceramica a base di silicio
Disilicato di litio (IPS e. max)¹



Acido fluoridrico

Applicare acido fluoridrico, poi risciacquare con acqua e asciugare.

Ossido-ceramica (ad es., zirconia),
Resina composita



oppure

Metallo


Sabbatura
0,1-0,4 MPa

Sabbiare con polvere di allumina (30~50 µm), poi procedere con la pulizia a ultrasuoni e asciugare.

¹Altri disilicati di litio in commercio possono richiedere la sabbatura. In quel caso, sabbiare con polvere di allumina (0,1-0,2MPa, 30~50µm), poi procedere con la pulizia a ultrasuoni e asciugare.

INDICAZIONE 1: CEMENTAZIONE DI CORONE

Pulire e asciugare la superficie del dente, poi provare a inserire il restauro protesico.

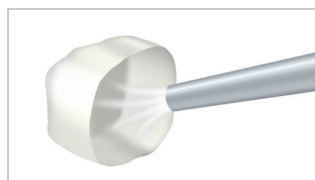

Preparazione della corona.¹

Pulire e asciugare la superficie del dente, poi provare a inserire il restauro protesico, dopo la preparazione della corona.



Solo per Handmix

10 sec.

Non conservare la spatola per miscelazione in frigorifero per evitare la condensa.³


Erogare un quantitativo uguale di Pasta A e B.
Mescolare la Pasta A e B per 10 secondi.²



Automix

Handmix

Applicare il cemento sulla corona.²

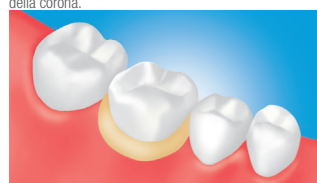

Posizionare la corona.



Fotopolimerizzazione 2-5 sec.
Polimerizzazione chimica 2-4 min.

Fotopolimerizzare da 2 a 5 secondi o lasciar autopolimerizzare da 2 a 4 minuti; poi rimuovere il cemento in eccesso.



5 min.

Mantenere l'isolamento per 5 minuti.⁴

¹ Fare riferimento a "Preparazione del restauro protesico". ² Fare riferimento alla tabella 1 per il tempo di lavoro. ³ La presenza di acqua può accorciare il tempo di lavoro. ⁴ In caso di restauro traslucido, fotopolimerizzare. Fare riferimento alla tabella 2.

INDICAZIONE 4: CEMENTAZIONE DI PERNI

Pulire e asciugare la cavità, poi provare a inserire il perno.



Solo per Handmix

10 sec.

Non conservare la spatola per miscelazione in frigorifero per evitare la condensa.²

Erogare un quantitativo uguale di Pasta A e B. Mescolare la Pasta A e B per 10 secondi.¹



Applicare sull'intera superficie di adesione del perno o sull'intera superficie del dente all'interno della cavità.¹



Posizionare il perno rapidamente nella cavità, farlo vibrare leggermente per evitare l'ingresso di bolle d'aria nei canali radicolari.



10 sec.⁴

Spalmare la pasta in eccesso sulla base della corona e sulla testa del perno. Fotopolimerizzare i margini del perno.³




10 min.

Posizionare i monconi protesici in resina composita.⁵


¹ Fare riferimento alla tabella 1 per il tempo di lavoro. ² La presenza di acqua può accorciare il tempo di lavoro. ³ Fare riferimento alla tabella 2. ⁴ LED blu (800-1400 mW/m²). ⁵ Preparare il moncone 10 minuti dopo aver posizionato il perno.

INDICAZIONE 1: CEMENTAZIONE DI CORONE CON PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL IN ABBINAMENTO A CLEARFIL™ Universal Bond Quick (BOND)

Pulire e asciugare la superficie del dente, poi provare a inserire il restauro protesico.

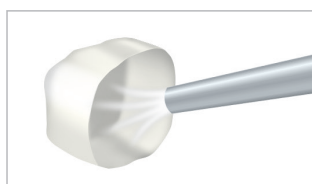

Preparazione della corona¹

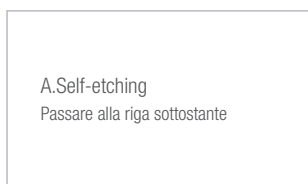

Pretrattamento del dente
Scegliere una procedura di mordenzatura




Selective-etch
Applicare acido fosforico sullo smalto non fresato e/o fresato, poi risciacquare e asciugare.



C. Total-etch
Applicare acido fosforico su tutta la cavità poi risciacquare e asciugare.



Applicare l'adesivo frizionando

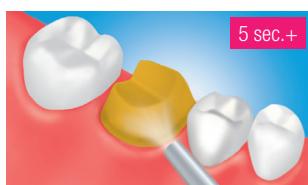

Asciugare con un leggero flusso d'aria fino a quando l'adesivo non si muove²



Erogare un quantitativo uguale di Pasta A e B. Mescolare la Pasta A e B per 10 secondi⁴.



Applicare il cemento sulla corona⁴



Posizionare la corona.



Fotopolimerizzare per 1 - 2 secondi o polimerizzare chimicamente per 2 - 4 minuti, poi rimuovere il cemento in eccesso



Mantenere l'isolamento per 5 minuti⁵

¹ Fare riferimento a "Preparazione del restauro protesico". ² Usare un aspiratore per impedire che l'adesivo si disperda. ³ La presenza di acqua può accorciare il tempo di lavoro. ⁴ Fare riferimento alla tabella 1 per il tempo di lavoro. ⁵ In caso di restauro traslucido, fotopolimerizzare. Fare riferimento alla tabella 2.

TABELLA 1: TEMPO DI LAVORO

Tempo di lavoro dopo la miscelazione (23°C) Automix	1 min.
Tempo di lavoro dopo la miscelazione (23°C) Handmix	2 min.
Tempo di lavoro dopo l'inserimento della pasta nella cavità (37°C/ 99°F) (se utilizzato con CLEARFIL Universal Bond Quick)	40 sec. (30 sec.)

TABELLA 2: TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE IN BASE AL TIPO DI FONTE LUMINOSA

TIPO	FONTE LUMINOSA	INTENSITÀ DELLA LUCE	TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE
LED blu ad alta intensità	LED blu	Più di 1500 mW/cm ²	Doppio per 3 - 5 sec.
LED blu	LED blu	800-1400 mW/cm ²	10 sec.
Alogena	Lampada alogena	Più di 400 mW/cm ²	10 sec.

* Per l'intensità della luce, fare riferimento alle istruzioni d'uso dell'unità di polimerizzazione dentale.

CONTATTI

Kuraray Europe Italia Srl

Web www.kuraraynoritake.eu/it Telefono 02 63471228

facebook.com/KurarayNoritakeInClinic E-Mail dental-italia@kuraray.com

Web www.kuraraynoritake.eu/it



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Giappone
Sito web www.kuraraynoritake.com

