


PANAVIA™ SA Cement Universal

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.


Cementowanie koron przy pomocy PANAVIA™ SA Cement Universal w połączeniu z CLEARFIL™ Universal Bond Quick (BOND)

Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię zęba, potem probnie dopasować uzupełnienie protetyczne.

Przygotowywanie korony.¹

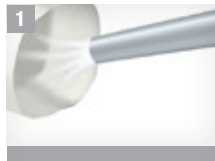

Przygotowanie zęba.
Wybrać procedurę wytrawiania.

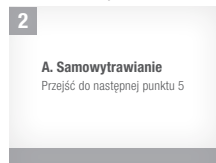

B. Wytrawianie selektywne
Nałożyć kwas fosforowy na nieopracowane i/lub opracowane szkliwo, następnie przepłukać i osuszyć.



C. Całkowite wytrawianie
Nałożyć kwas fosforowy na cały ubytek, następnie przepłukać i osuszyć.




Aplikować bond lekko wcierając.



Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza aż powierzchnia pokryta bondem przestanie wykazywać ruch.²




Odmierzyć taką samą ilość pasty A i B. Mieszać pasty A i B przez 10 sekund.³

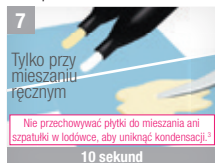

Aplikować cement do korony.




Umieścić koronę.

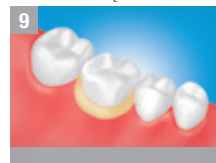

Naświetlanie przez 1 do 2 sekund lub odczekać od 2 do 4 minut, aż nastąpi chemiczna polimeryzacja.



Usunąć nadmiar cementu.

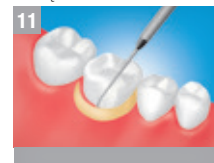

Zapewnić izolację przez 5 minut.⁴



¹ Patrz „Przygotowanie uzupełnienia protetycznego”. ² Użyć ssaka, aby zapobiec nadmiernemu rozpryskiwaniu bondu.

³ Obecność wody może skrócić czas pracy. ⁴ W przypadku uzupełnień przeziernych należy stosować polimeryzację inicjowaną światłem.


PANAVIA™ SA Cement Universal

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.


Cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych

Oczyszczyć i osuszyć ubytek, potem dopasować próbnie wkład koronowo-korzeniowy.

Odmierzyć taką samą ilość pasty A i B. Mieszać pasty A i B przez 10 sekund.

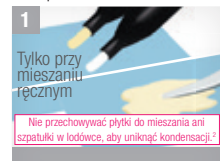

Nałożyć materiał na całą powierzchnię wkładu lub na całą powierzchnię ubytku w zębie.¹

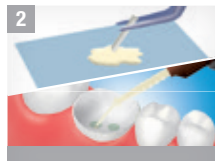


Umieścić szybko wkład w kanale, lekko nim poruszając, aby zapobiec przedostawaniu się pęcherzyków powietrza do kanałów korzeniowych.



Rozprowadzić nadmiar pasty na części koronowej i szczycie wkładu. Utwardzać światłem od strony brzegów wkładu koronowo-korzeniowego.



Aplikować materiał kompozytowy do odbudowy zębiny.²

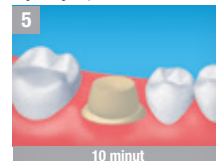

¹ Obecność wody może skrócić czas pracy. ² Przygotować ząb filarowy 10 minut po umieszczeniu w nim wkładu.

PANAVIA™ SA Cement Universal

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.


Przygotowanie uzupełnienia protetycznego. Postępować zgodnie z instrukcjami użycia materiału zastosowanego do odbudowy. W przypadku braku szczegółowych instrukcji zalecamy następującą procedurę:



¹Inne dostępne na rynku produkty z dwukrzemianem litu mogą wymagać piaskowania. W takim przypadku należy je wypiskować tlenkiem glinu (0,1-0,2 MPa, 30~50 µm), a następnie oczyścić w myjce ultradźwiękowej i osuszyć.

Cementowanie koron. Oczyścić i osuszyć powierzchnię zęba, potem przymierzyć próbnie uzupełnienie protetyczne, następnie przygotować koronę do cementowania¹.

Odmierzyć taką samą ilość pasty A i B. Mieszać pasty A i B przez 10 sekund.

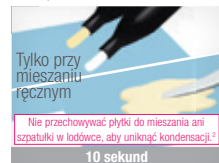

¹ Patrz „Przygotowanie odbudowy protetycznej”. ² Obecność wody może skrócić czas pracy. ³ W przypadku uzupełnień przeziernych należy stosować polimeryzację inicjowaną światłem.