

PANAVIA™ V5

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Cementowanie wkładów

Po opracowaniu ubytku dopasować wkład koronowo-korzeniowy lub koronowy.


Przygotowanie wkładu.

1  Wkłady z włókna szklanego lub ceramiki 1) Nanieść żel trawiący K-ETCHANT ze strzykawki, poczekać 5 sekund, spłukać i osuszyć powietrzem. 2) Nanieść CERAMIC PRIMER PLUS i osuszyć powietrzem. 	Wkłady metalowe 1) Wypłaskować tlenkiem glinu, oczyścić w kąpielii ultradźwiękowej i osuszyć powietrzem. 2) Nanieść CERAMIC PRIMER PLUS i osuszyć powietrzem. 
5 sekund	


Nanieść Tooth Primer, poczekać 20 sekund.




Usunąć nadmiar primeru i osuszyć.

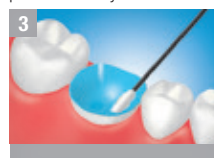

Aplikować cement.

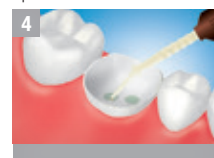

Wprowadzać wkład ruchem lekko rotacyjnym.

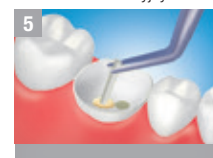

Aplikować cement z nadmiarem na część koronową i utwardzać światłem lampy przez 10 sekund.



Odbudować kompozytem zgrąb korony, poczekać 6 minut i opracować.



PANAVIA™ V5


Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Cementowanie licówek

Powierzchnie zębów oczyścić i osuszyć w tradycyjny sposób.

W razie potrzeby dokonać przymiarki licówki przy użyciu pasty Try-in, następnie zdjąć i oczyścić.

1. Powierzchnię wewnętrzną licówki wytrawić kwasem fluorowodorowym** i spłukać.
2. Nanieść CERAMIC PRIMER PLUS i osuszyć powietrzem.

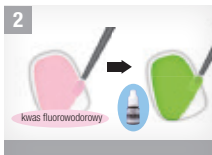


Nanieść na szklivo żel K-ETCHANT ze strzykawki, poczekać 10 sekund, spłukać i osuszyć.



Nanieść Tooth Primer, poczekać 20 sekund i delikatnie osuszyć powietrzem.




Aplikować cement i osadzić licówkę.

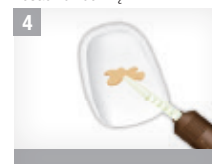

** W przypadkach, w których otrzymujemy z laboratorium licówki wytrawione już kwasem fluorowodorowym, stosować kwas fosforowy do oczyszczenia powierzchni ceramiki.

Po odizolowaniu obszaru zabiegu poczekać 3 minuty na związanie chemiczne cementu*, a w przypadku koron przeziernych utwardzać światłem lampy polimerizacyjnej przez 10 sekund.

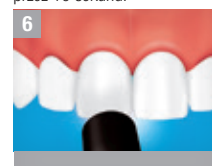

* W przypadku konieczności zastosowania koloru maskującego (opakerowego) poczekać po osadzeniu korony 3 minuty na związanie chemiczne cementu.

Nadmiar cementu usunąć w tradycyjny sposób. W przypadku potrzeby zastosowania koloru opakerowego przejść do etapu b.

Utwardzać światłem lampy polimerizacyjnej przez 3 - 5 sekund.



Usunąć nadmiar cementu.



Stosować tzw. microbrush Nadmiary usuwać małym pędzelkiem.



Utwardzać światłem lampy polimerizacyjnej przez 10 sekund.



PANAVIA™ V5


Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Cementowanie koron (na podbudowie z tlenku cyrkonu lub metalu)

Wypiaskować tlenkiem glinu, następnie oczyścić w myjce ultradźwiękowej i osuszyć.



Nanieść CERAMIC PRIMER PLUS i osuszyć powietrzem.

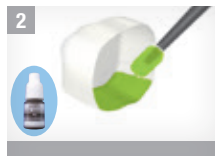


Nanieść Tooth Primer, poczekać 20 sekund i osuszyć powietrzem.



20 sekund

Aplikować cement i osadzić koronę.

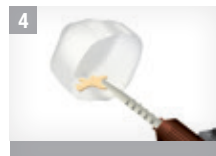


Usunąć nadmiar cementu i przejść do następnego, właściwego etapu. W przypadku konieczności zastosowania koloru opakerowego – przejść do etapu b.

Utwardzać światłem lampy polimerizacyjnej przez 3 - 5 sekund.




3 ~ 5 sekund

Usunąć nadmiar cementu.

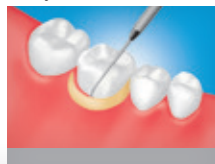

Stosować tzw. microbrush

Nadmiary usunąć małym pędzelkiem.

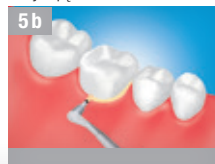


Utwardzać światłem lampy polimerizacyjnej przez 10 sekund.



10 sekund

Po odizolowaniu obszaru zabiegu poczekać 3 minuty na związanie chemiczne cementu*, a w przypadku koron przeziernych utwardzać światłem lampy przez 10 sekund.

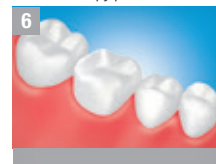

* W przypadku konieczności zastosowania koloru maskującego (opakerowego) czekać po osadzeniu korony przez 3 minuty na związanie chemiczne cementu.