

PANAVIA™ Veneer LC

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Cementowanie licówek* z ceramik szklanych.

* tylko w przypadku licówek o odpowiedniej transparentności i grubości poniżej 2,0 mm

Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię zęba. Do oczyszczenia opracowanego zęba można zastosować KATANA™ Cleaner.

Jeśli zajdzie konieczność, należy skontrolować kolor licówki używając PANAVIA™ V5 Try-in Paste. Usunąć pastę z licówki.

❶ Wytrawić licówkę kwasem fluorowodorowym (HF), spłukać i osuszyć. ❷ Nanieść CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS i osuszyć.


Wytrawić szkliwo kwasem fosforowym (wytrawiacz K-ETCHANT). Pozostawić na 10 sekund, spłukać i osuszyć.

Nanieść PANAVIA™ V5 Tooth Primer, pozostawić na 20 sekund i dokładnie osuszyć łagodnym strumieniem powietrza.


Nanieść i wcierać CLEARFIL™ Universal Bond Quick. Nie czekać. Osuszać, aż bond przestanie się ruszać (więcej niż 5 sekund).
Nie ma potrzeby naświetlania lampą.




Zaaplikować cement i osadzić licówkę na zębie.

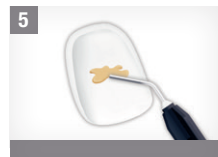


Polimeryzacja wstępna (tack-cure) przez 1 sekundę.

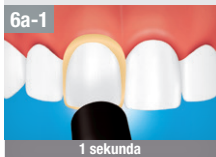

Usunąć nadmiary zgłębnikiem.

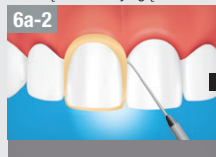

Usunąć nieutwardzone nadmiary cementu pędzelkiem.

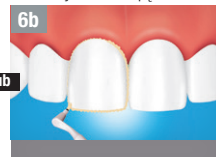

Polimeryzować lampą każdą powierzchnię i brzeg cementowania. Postępować zgodnie z tabelą.

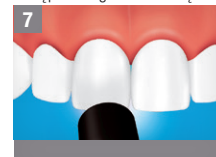


TABELA Rodzaj i odcień odbudowy	Maksymalna grubość uzupełnienia	Rodzaj światła utwardzającego (natężenie światła)		
		Wysoka intensywność NIEBIESKI LED	NIEBIESKI LED	Lampa halogenowa
Licówka		Czas utwardzania		
Ceramika na bazie krzemionki (np. konwencjonalna porcelana skalenkowa, dwukrzemian litu)	Odcienie bleach, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2	2,0 mm	3 razy po 3 sekundy lub 2 razy po 5 sekund	10 sekund
	Inne odcienie			20 sekund
Ceramika hybrydowa, kompozyt	Wszystkie odcienie	1,2 mm		20 sekund
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML				

PANAVIA™ Veneer LC

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

Cementowanie adhezyjne Inlay/Onlay: dla kompozytów z napelniaczem nieorganicznym i ceramiki hybrydowej (np. KATANA™ AVENCIA™ block).

Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię zęba. Do oczyszczenia opracowanego zęba można zastosować KATANA™ Cleaner.

W razie potrzeby przymierzyć Inlay/Onlay za pomocą pasty próbnej PANAVIA V5. Splukać i osuszyć.



- ❶ Wypłaskować tlenkiem glinu. Oczyszczyć w myjce ultradźwiękowej.
- ❷ Nanieść CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS. Osuszyć powietrzem.



PANAVIA V5 Tooth Primer
Nanieść PANAVIA V5 Tooth Primer, pozostawić na 20 sekund. Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza



CLEARFIL Universal Bond Quick.
Selektywne wytrawianie.

Nanieść wytrawiacz K-ETCHANT ze strzykawki na szkliwo. Splukać i osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.



Całkowite wytrawianie.


Nanieść wytrawiacz K-ETCHANT ze strzykawki na szkliwo i zębinę. Splukać i osuszyć delikatnym strumieniem powietrza.



Bond wcierać w powierzchnię okrężnymi ruchami. Osuszyć delikatnym strumieniem powietrza aż powierzchnia pokryta bondem przestanie wykazywać ruch.



Utwardzać światłem lampy polimerizacyjnej. Postępować zgodnie z tabelą 1.

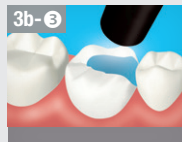

Aplikować cement i osadzić Inlay/Onlay




Wstępna polimeryzacja do usuwania nadmiarów w fazie żelu.

Polimeryzacja 1 sekunda.



Usunąć nadmiar cementu.

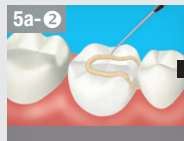

Usuwanie nadmiarów bez wstępnej polimeryzacji.
Usunąć nadmiar małym pędzelkiem.



Polimeryzować lampą każdą powierzchnię i brzeg cementowania. Postępować zgodnie z tabelą 2.

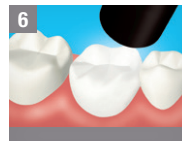


TABELA 1 Rodzaj światła utwardzającego (natężenie światła)	Czas utwardzania
Wysoka intensywność NIEBIESKI LED	5 sekund
NIEBIESKI LED	10 sekund
Lampa halogenowa	10 sekund

TABELA 2 Rodzaj i odcień odbudowy		Maksymalna grubość uzupełnienia	Rodzaj światła utwardzającego (natężenie światła)		
			Wysoka intensywność NIEBIESKI LED	NIEBIESKI LED	Lampa halogenowa
Wkładki, nakładki			Czas utwardzania		
ceramika na bazie krzemionki, ceramika hybrydowa, kompozyt	Wszystkie odcienie	2,0 mm	3 razy po 3 sekundy lub 2 razy po 5 sekund	10 sekund.	20 sekund
KATANA Zirconia STML/UTML, KATANA Zirconia Block STML		1,2 mm			