

TEETHMATE™ DESENSITIZER - Znoszenie nadwrażliwości

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

1. Zabezpieczenie zębiny obnażonej w wyniku intensywnego szczotkowania zębów, recesji dziąsłowych, schorzeń przyzębia i/lub erozji
2. Zabezpieczenie zębiny po mechanicznym czyszczeniu zębów, usuwaniu kamienia i/lub wygładzaniu korzeni
3. Zabezpieczenie powierzchni zębów przed i po zabiegu wybielania

Postępować dokładnie według instrukcji użycia. Przed użyciem powierzchnie zębów należy oczyścić.

Mieszać proszek z płynem przez co najmniej 15 sekund do momentu utworzenia się pasty o kremowej konsystencji.



Wcierać tak zmieszaną pastę w powierzchnie zębów przez minimum 30 sekund.



Splukać nadmiar pasty sprayem wodnym lub poprosić pacjenta o przepłukanie ust.



Trzymając buteleczkę w pozycji pionowej dozować odpowiednią ilość płynu. Buteleczkę z proszkiem wstrząsnąć przed pobraniem proszku.*

W przypadku utrzymywania się objawów nadwrażliwości powtórzyć kroki 2 + 3.

* Proporcje mieszania

Obszar	Płyn	Proszek
1 ząb	1 kropla	1 łyżeczka pomiarowa (mała łyżeczka)
1 lub 2 zęby	2 krople	1 łyżeczka pomiarowa (mała łyżeczka)