

TEETHMATE™ DESENSITIZER - Znoszenie nadwrażliwości

Przed użyciem produktu proszę dokładnie przeczytać instrukcję użycia.

4. Zabezpieczenie opracowanej zębiny przed wykonaniem wypełnień i/lub uzupełnień protetycznych

Postępować dokładnie według instrukcji użycia. Przed użyciem należy oczyścić powierzchnię zębów.

Mieszać proszek z płynem przez co najmniej 15 sekund do momentu utworzenia się pasty o kremowej konsystencji.



Wcierać tak zmieszaną pastę w powierzchnie zębów przez minimum 30 sekund.



Splukać nadmiar pasty sprayem wodnym lub poprosić pacjenta o przepłukanie ust.



Oczyścić obszar opracowanej zębiny.



Następnie
wykonać wypełnienie
lub cementować
uzupełnienie.

W przypadku utrzymywania się objawów nadwrażliwości powtórzyć kroki 2 + 3.

W przypadku stosowania systemu wiążącego lub cementu wymagających uprzedniego wytrawiania należy ten zabieg przeprowadzić przed aplikacją TEETHMATE™ Desensitizer.