

# EINFACHER STUMPFaufBAU JETZT NOCH STRESSFREIER

Für Ihre hohen klinischen Ansprüche und zuverlässigen Restaurationen.

**CLEARFIL™ DC CORE PLUS** ist ein dualhärtendes (Licht- und Selbsthärtung) Zweikomponenten-Stumpfaufbaumaterial in einer Automix-Spritze für ästhetische und zuverlässige Restaurationen. Die selbsthärtende Eigenschaft dieses Stumpfaufbaumaterials bietet die perfekte Lösung für schwer zugängliche Regionen im Wurzelkanal, welche nur bedingt mit Licht gehärtet werden können. Für alle anderen Bereiche können Sie die Aushärtung durch Licht beschleunigen. Bei Stumpfaufbau-Restaurationen ist es wichtig, das Risiko einer Kontamination durch eine kurze und einfache Anwendung zu reduzieren.

**CLEARFIL™ DC CORE PLUS** ist durch seine vereinfachte Anwendung und optimale Viskosität bestens für stressfreie Restaurationen geeignet.

Aber das ist noch nicht alles!

**CLEARFIL™ DC CORE PLUS** kann nun in Kombination mit **CLEARFIL™ Universal Bond Quick** verwendet werden. Dank seiner hervorragenden Hafteigenschaften ist **CLEARFIL™ Universal Bond Quick** die perfekte Ergänzung zu **CLEARFIL™ DC CORE PLUS**, wodurch exzellente klinische Langzeitergebnisse ermöglicht werden.

**CLEARFIL™ Universal Bond Quick** - IN EINEM DURCH! Applizieren. Trocknen. Lichthärten.

Das neue innovative Universal Bonding, ohne Wartezeit und mit dauerhaften Ergebnissen bei allen Restaurationen.

**CLEARFIL™ Universal Bond Quick** liefert Ihnen optimale dauerhafte Ergebnisse ohne Wartezeit, ohne intensives Einreiben, ohne mehrfaches Schichten oder ohne mehrfaches Applizieren. Ein zuverlässiges Bonding für alle direkten Restaurationen, Stumpfaufbauten, indirekte Restaurationen und Reparaturen.



## Stumpfaufbau und Stiftzementierung mit CLEARFIL™ DC CORE PLUS

Folgen Sie den Standardverfahren für Feuchtigkeitskontrolle und Wurzelkanalvorbereitung.




<sup>\*1</sup> Siehe direkte Restauration


BOND applizieren und einmassieren.

Mit sanftem Luftstrom trocknen.

Lichthärten.

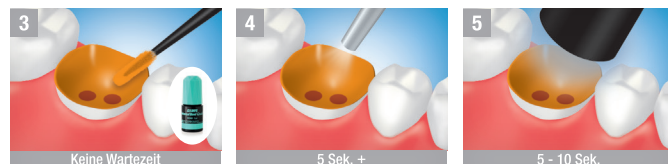

Stift einsetzen und Stumpfaufbau mit CLEARFIL™ DC CORE PLUS gemäß Gebrauchsanweisung.

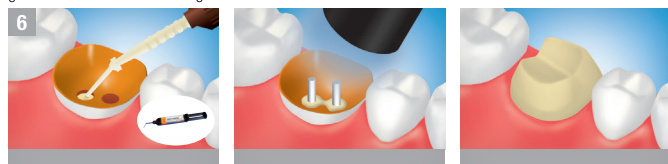

## Sortiment

ARTIKELNUMMER	PRODUKTBESCHREIBUNG	UVP
<b>NEU</b> 	#3580-EU DENTIN #3581-EU WHITE	<b>CLEARFIL™ DC CORE PLUS &amp; Quick Kit</b> 1 Spritze (17,9 g / 9 ml), CLEARFIL™ Universal Bond Quick: 1 Flasche (1 ml) Zubehör: 20 Mixing Tips, 10 Front Tips (L), 10 Front Tips (S), 50 Applikationsspitzen (endo), 1 Mischtablett, 1 Lichtschutzplatte
	#2942-EU DENTIN #2943-EU WHITE	<b>CLEARFIL™ DC CORE PLUS</b> 1 Spritze (17,9 g / 9 ml) in der jeweiligen Farbe, 20 Mixing Tips, 10 Front Tips (L), 10 Front Tips (S)
	#3571-EU	<b>CLEARFIL™ Universal Bond Quick</b> 1 Flasche (5 ml), K-ETCHANT Spritze (3 ml), 50 Einweg-Pinsel, 20 Applikationsspitzen, Mischtablett, Lichtschutzplatte
	#3572-EU	<b>CLEARFIL™ Universal Bond Quick</b> Nachfüllflasche 1 Flasche (5 ml)
	#3577-EU	<b>CLEARFIL™ Universal Bond Quick</b> Unit Dose Standard Pack Inhalt: 50 Unit Dose (0,1 ml / Unit Dose), 1 K-ETCHANT Spritze (3 ml), 20 Einweg- Pinsel, 50 Applikationsspitzen